

## Über Signia

Signia ist eine der weltweit führenden Marken für Hörgeräte. Mit ikonischen Innovationen denken wir Hörgeräte neu. Wie sie aussehen, wirken, klingen. Unser Ziel dabei: Menschen begeistern und bewegen. Wir begreifen eine Hörminderung nicht als Einschränkung. Und Signia Hörgeräte gleichen nicht einfach nur aus. Sie ermöglichen HörgeräteträgerInnen mehr zu leisten als bisher. Nicht einfach besser, sondern brillant zu sein. Und brillant zu hören. Jedes Wort, jeden Takt, jeden Atemzug.

**Signia. Be Brilliant.**

Die Informationen in diesem Dokument enthalten allgemeine Beschreibungen der technischen Möglichkeiten, welche im Einzelfall nicht immer vorliegen müssen, und ohne vorherige Bekanntgabe abgeändert werden können. Die gewünschten Leistungsmerkmale sind daher im Einzelfall bei Vertragsabschluss festzulegen.

Die Bluetooth®-Wortmarke und das Logo sind eingetragene Warenzeichen der Bluetooth® SIG, Inc. Jegliche Nutzung dieser Marke durch die Signia GmbH geschieht unter Lizenz. Andere Handelsmarken und -namen gehören den jeweiligen Inhabern.





Android und Google Play sind eingetragene Warenzeichen der Google Inc. Apple App Store ist ein eingetragenes Warenzeichen von Apple Inc.


### Kontakt:

Signia GmbH  
Henri-Dunant-Straße 100  
91058 Erlangen

10246761 | Gedruckt in Deutschland  
© 04.2024 Signia GmbH

### Sie finden uns unter:

-  [signia.net](https://www.signia.net)
-  [facebook.com/SigniaHearingGermany](https://facebook.com/SigniaHearingGermany)
-  [youtube.com/SigniaHearing](https://youtube.com/SigniaHearing)
-  [instagram.com/SigniaHearing](https://instagram.com/SigniaHearing)

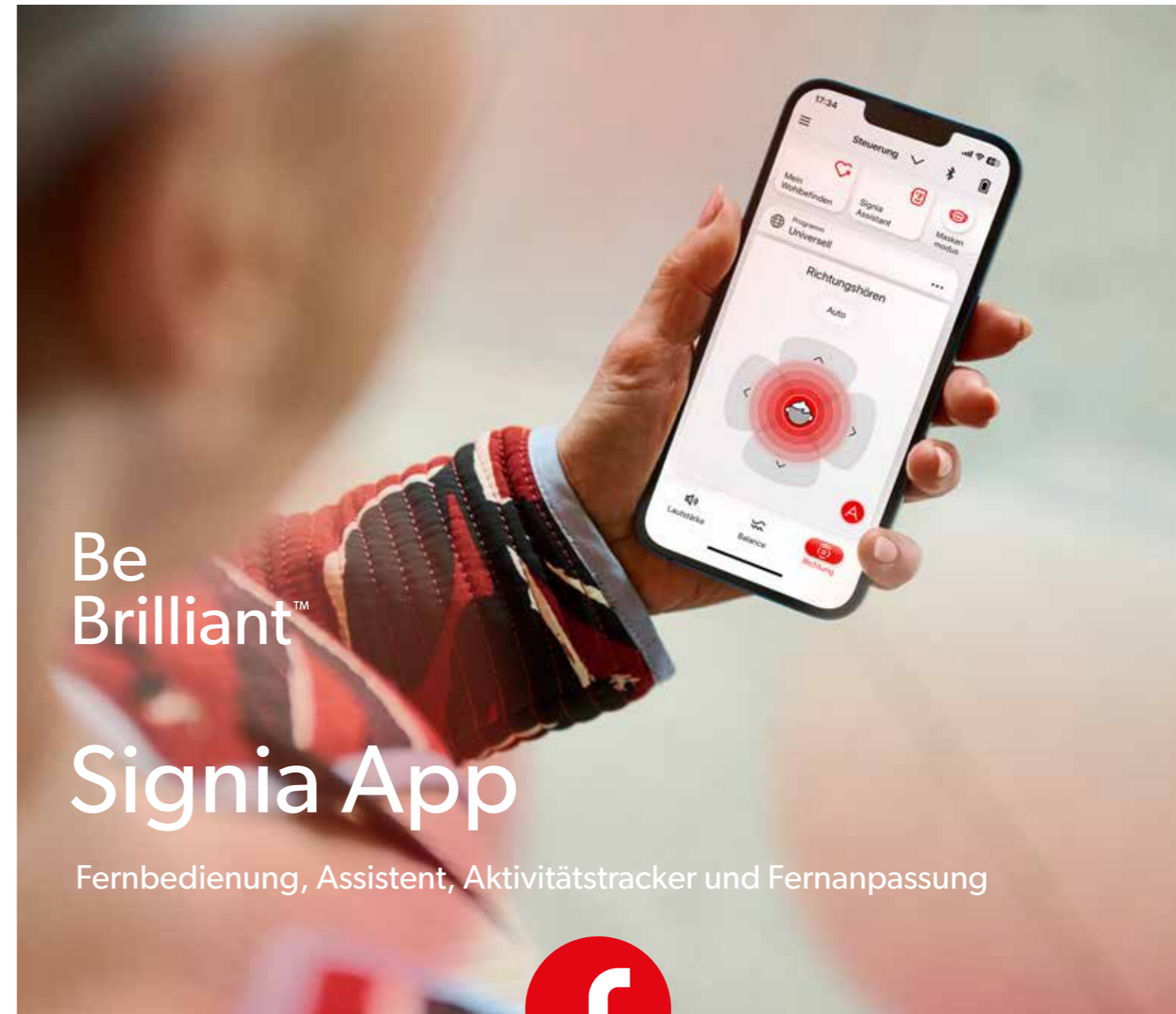

Be  
Brilliant™

# Signia App

Fernbedienung, Assistent, Aktivitätstracker und Fernanpassung



# Die Signia App

Eine App für alles

Fernbedienung, Audio-Streaming, individuelle Klangeinstellungen per Signia Assistant und Anpassung aus der Ferne – mit der Signia App können Sie die Funktionen Ihrer Hörgeräte in vollen Zügen auskosten. Diskret und über eine übersichtliche Bedienoberfläche.

**Die Signia App wurde für die Bedienung aller Signia Hörgeräte entwickelt.** Sie ist leicht zu handhaben und zeigt Ihnen gezielt die Funktionen an, die spezifisch für Ihre Hörgerätemodelle sind.

Sie können die Signia App ganz einfach und **kostenlos** aus dem **Apple App Store** oder **Google Play Store** herunterladen und installieren.

Koppeln Sie Ihr Smartphone mit den Hörgeräten und es kann losgehen. Informationen zur Einrichtung der Signia App finden Sie in unserem Ratgeber Bluetooth und auf unserer Webseite: [signia.net](https://www.signia.net)



# Fernbedienung per App

Alles unter Kontrolle

Steuern Sie die Lautstärke und den Klang Ihre Hörgeräte, bestimmen Sie die Richtung, in die Sie lauschen möchten und ändern Sie die Namen Ihrer Hörprogramme selbständig.

Per Bluetooth-Verbindung nutzen Sie vielfältigste Möglichkeiten. Koppeln Sie Ihre Hörgeräte per Bluetooth® mit dem Smartphone, wenn Ihre Hörgerätemodelle darüber verfügen.

**Das Highlight speziell von Signia:** Auch ohne Bluetooth können Signia Hörgeräte fernbedient werden.

## Ihre Vorteile


- ✓ Leichte Bedienung durch großes, übersichtliches Display
- ✓ Sehr diskrete Hörgerätesteuerung
- ✓ Lautstärke, Klang, Richtungshören  
Streaming-Lautstärke einstellbar
- ✓ Namen für Hörprogramme selbst bestimmen
- ✓ Maskenmodus



Signia App – Funktionen im Überblick




Stellen Sie die Lautstärke Ihrer Hörgeräte selbst ein, indem Sie die Regler nach oben (lauter) oder nach unten (leiser) ziehen.

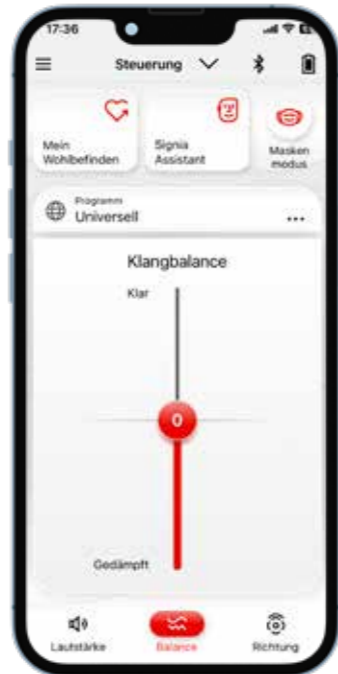


Ändern Sie die Balance zwischen Bässen (gedämpft) und Höhen (klar).




Tippen Sie auf die Richtung, aus der Sie hören möchten. Sie können jederzeit zum Automatik-Modus zurückkehren.

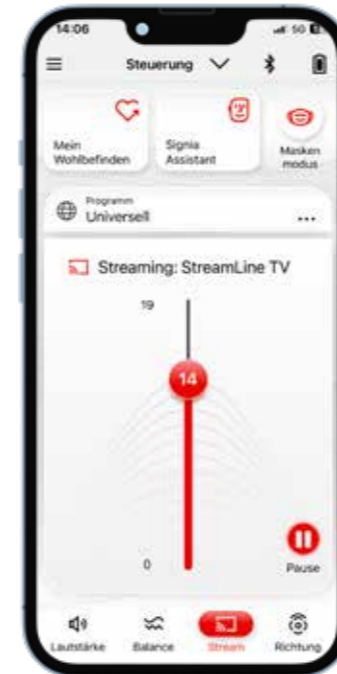

Passen Sie die Streaming-Lautstärke an, z.B. des TV-Tons, während er direkt in Ihre Hörgeräte übertragen wird.

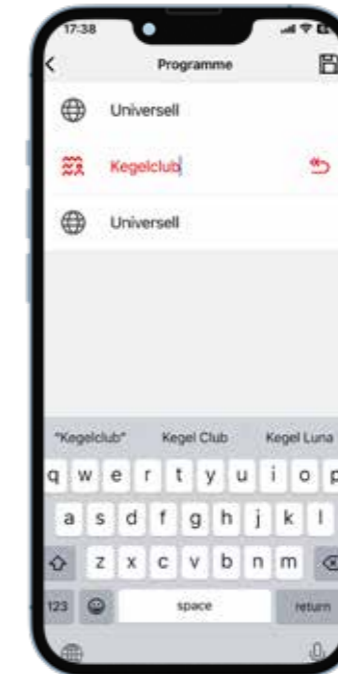

Entscheiden Sie selbst über den Namen Ihrer Hörprogramme. Einfach anklicken und ändern.

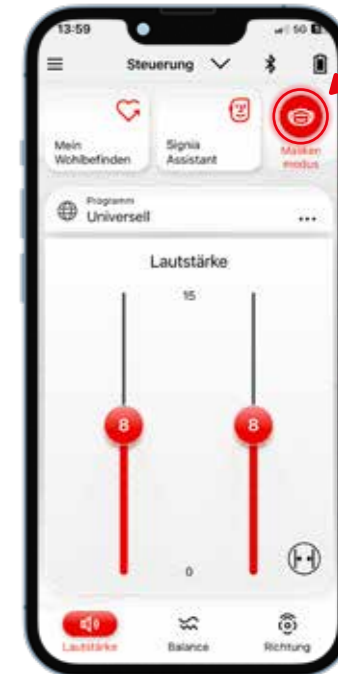

Optimieren Sie die Klangeinstellungen in Gesprächen mit MaskenträgerInnen, indem Sie den Maskenmodus aktivieren.





## Signia Assistant

Der intelligente Helfer

Besondere Unterstützung erfahren Sie durch den digitalen Helfer in der Signia App, den **Signia Assistant**. Zu jeder Uhrzeit an jedem Wochentag steht er für Sie bereit.

Er ist die ideale Ergänzung zur persönlichen Unterstützung durch Ihre/n HörakustikerIn. Mit Hilfe künstlicher Intelligenz liefert der Signia Assistant individuelle Vorschläge zur Klangeinstellung.

Sie können die Klangänderung sofort hören und prüfen, ob sie Ihren Vorstellungen entspricht. Sie benötigen dafür nur eine stabile Internetverbindung für Ihr Smartphone.

### Ihre Vorteile

- ✓ 24 Stunden, sieben Tage die Woche für Sie da
- ✓ Begleitung in jeder Hörsituation
- ✓ Klangverbesserungen sofort hörbar
- ✓ Leicht zu bedienen per Frage-Anwort-Spiel
- ✓ Informationen zur Handhabung der Hörgeräte



Wenn Sie die Signia App öffnen, erscheint das Symbol des Signia Assistant oben auf Ihrem Bildschirm.



Klicken Sie einfach darauf. Der Signia Assistant wird Sie begrüßen und fragen, wie er Ihnen helfen kann.




Beantworten Sie die Fragen des Signia Assistant, damit er das richtige Thema findet.




Auf Grundlage Ihrer Antworten schickt er Ihnen einen Klangvorschlag in die Hörgeräte. Entscheiden Sie sofort, ob sie ihn behalten oder rückgängig machen wollen.



Wenn Sie den Vorschlag behalten, wird er in die Hörgeräte gespeichert. Sie können auch später noch zur Einstellung Ihres/r HörakustikerIn zurück.

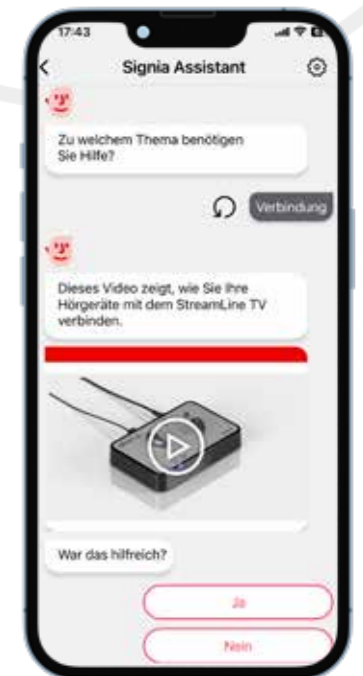

Sie haben Fragen zur Bedienung? Sehen Sie sich das zu ihrem Thema vorgeschlagene Video an.

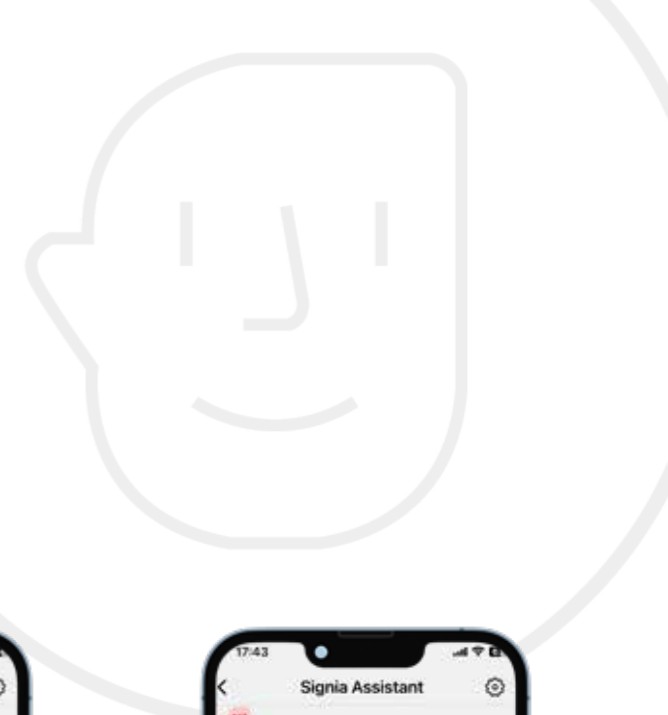



## Mein Wohlbefinden


Der Aktivitätstracker für ein bewusst aktives Leben

Mit dem **Aktivitätstracker Mein Wohlbefinden** erhalten Sie einen klaren Überblick über Ihre Aktivitäten und mehr Transparenz über Ihr Hörverhalten. Die Messergebnisse können Sie motivieren, sich körperlich fit zu halten, Ihr Gehör zu trainieren und dadurch mehr Freude an sozialen Aktivitäten zu haben. Setzen Sie sich individuelle Ziele. Vielleicht möchten Sie Ihre Ziele schon bald höher ansetzen.

Übrigens: Ihr/e HörakustikerIn sieht lediglich die Erfassung Ihrer Tragezeit – alle anderen Daten bleiben nur für Sie sichtbar.

## Ihre Vorteile


- ✓ Interessante Informationen zu Ihren Aktivitäten
- ✓ Dokumentation Ihrer Fortschritte
- ✓ Individuelle Zieleinstellungen, jederzeit anpassbar
- ✓ Daten ausschließlich auf Ihrem Smartphone
- ✓ Informationen zur Handhabung der Hörgeräte

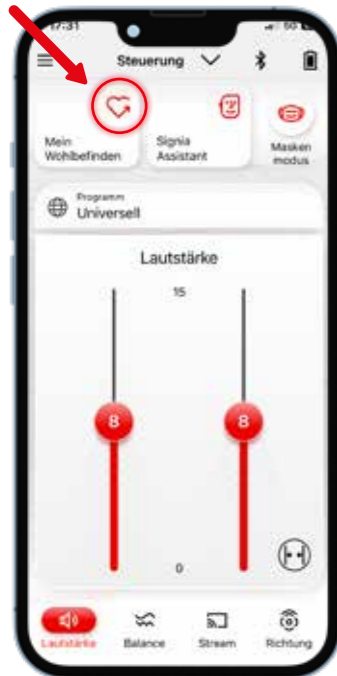


Das Herz-Symbol führt Sie zu den Mein Wohlbefinden Funktionen. Unser Tipp: Signia App zur tagesgenauen Datenaktualisierung bitte 1x täglich öffnen.



Klicken Sie auf eine der vier Funktionen, um zur jeweiligen Zieleinstellung zu gelangen und Ihre Statistik im Detail zu sehen.

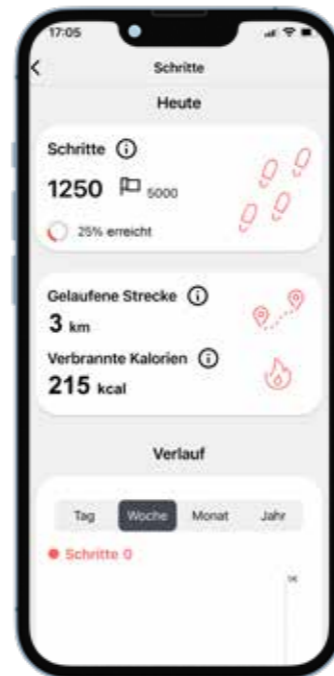


Bewegungssensoren in Ihren Hörgeräten erfassen die Anzahl Ihrer Schritte. Sie werden erstaunt sein, wie interessant der tägliche Schrittvergleich ist.

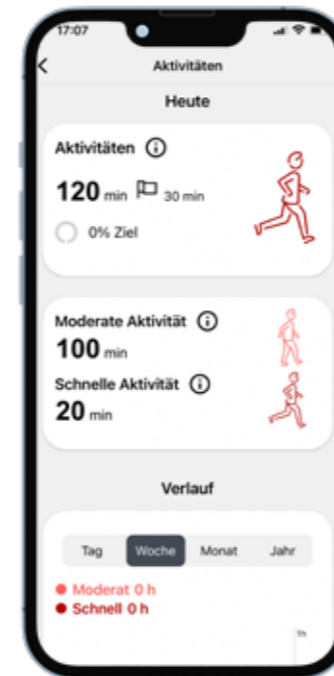

Die meisten Menschen bekommen mehr Lust auf Bewegung, wenn sie sehen, wie viel Aktivität in ihnen steckt.



Ihr Hörfortschritt und damit Ihre Lebensqualität hängen maßgeblich davon ab, wie häufig und lange Sie Ihre Hörgeräte tragen.

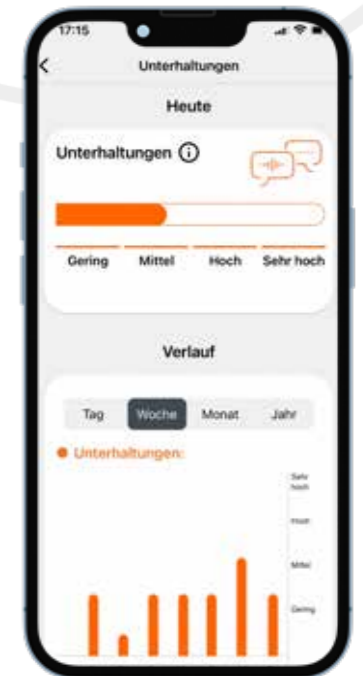

Ihre Hörgeräte zeigen auf, wie viel Sie täglich aktiv kommunizieren. Unterhaltungen trainieren nicht nur das Gehör, sondern fördern ein positives Lebensgefühl.



## TeleCare

Unterstützung aus der Ferne

Viele HörakustikerInnen bieten einen modernen Service an, um Sie auch dann optimal unterstützen zu können, wenn Sie einmal nicht ins Fachgeschäft kommen können: **TeleCare**.

Per TeleCare kann Ihr/e HörakustikerIn mit Ihnen Kontakt aufnehmen, um den Klang Ihrer Hörgeräte online zu korrigieren. Alles, was Sie benötigen, sind Bluetooth-fähige Hörgeräte von Signia, die Signia App, ein mit der App kompatibles Smartphone und eine stabile Internetverbindung.

### Ihre Vorteile

- ✓ Online-Hörgeräteanpassung zuhause
- ✓ Virtuelle Nachsorgetermine
- ✓ Klangverbesserungen sofort hörbar
- ✓ Interaktive Hörübungen zur Verbesserung Ihres Klangerlebnisses
- ✓ Bewertung Ihrer Zufriedenheit durch Feedback via App

