


Be  
Brilliant™



Die Signia App

Auf einen Blick.

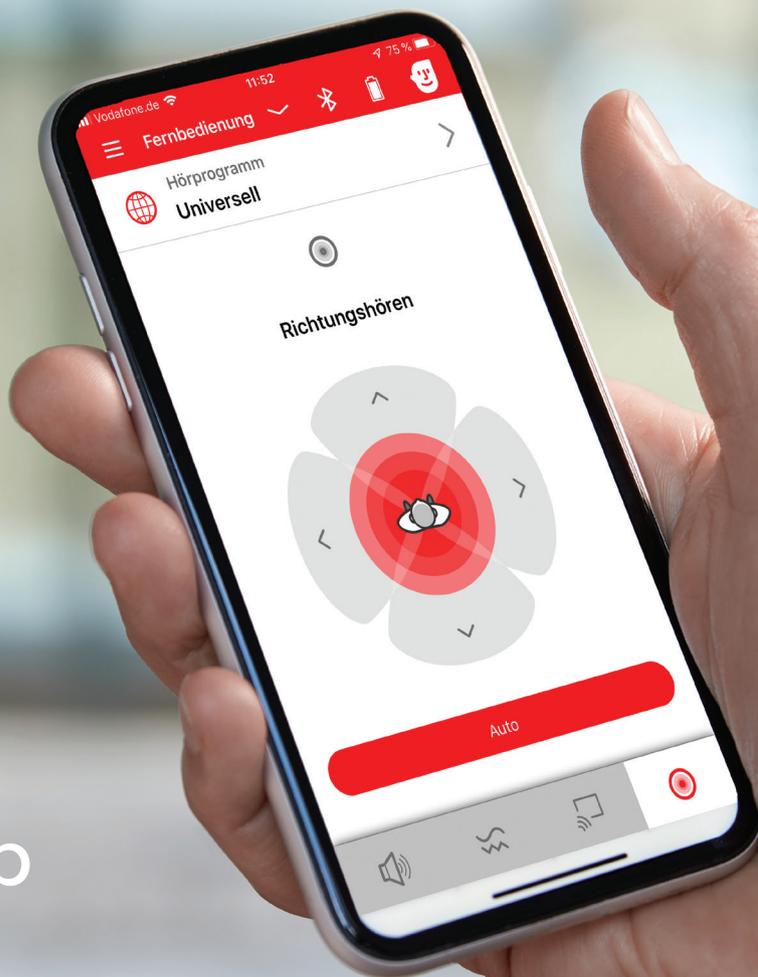

signia




## Die Signia App.

Eine App für alles.

Fernbedienung, Audio-Streaming, individuelle Klangeinstellungen per Signia Assistant und Anpassung aus der Ferne – mit der Signia App können Sie die Funktionen Ihrer Hörgeräte in vollen Zügen auskosten. Diskret und über eine übersichtliche Bedienoberfläche.

Die Signia App wurde für die Bedienung aller Signia Hörgeräte entwickelt. Sie ist leicht zu bedienen und zeigt Ihnen gezielt die Funktionen an, die spezifisch für Ihre Hörgerätemodelle sind. Sie steuert selbstständig die Lautstärke eines gestreamten Telefonats, beispielsweise wenn Sie an einer lauten Baustelle vorbeikommen. Damit Sie kein Gesprächsdetail mehr verpassen.

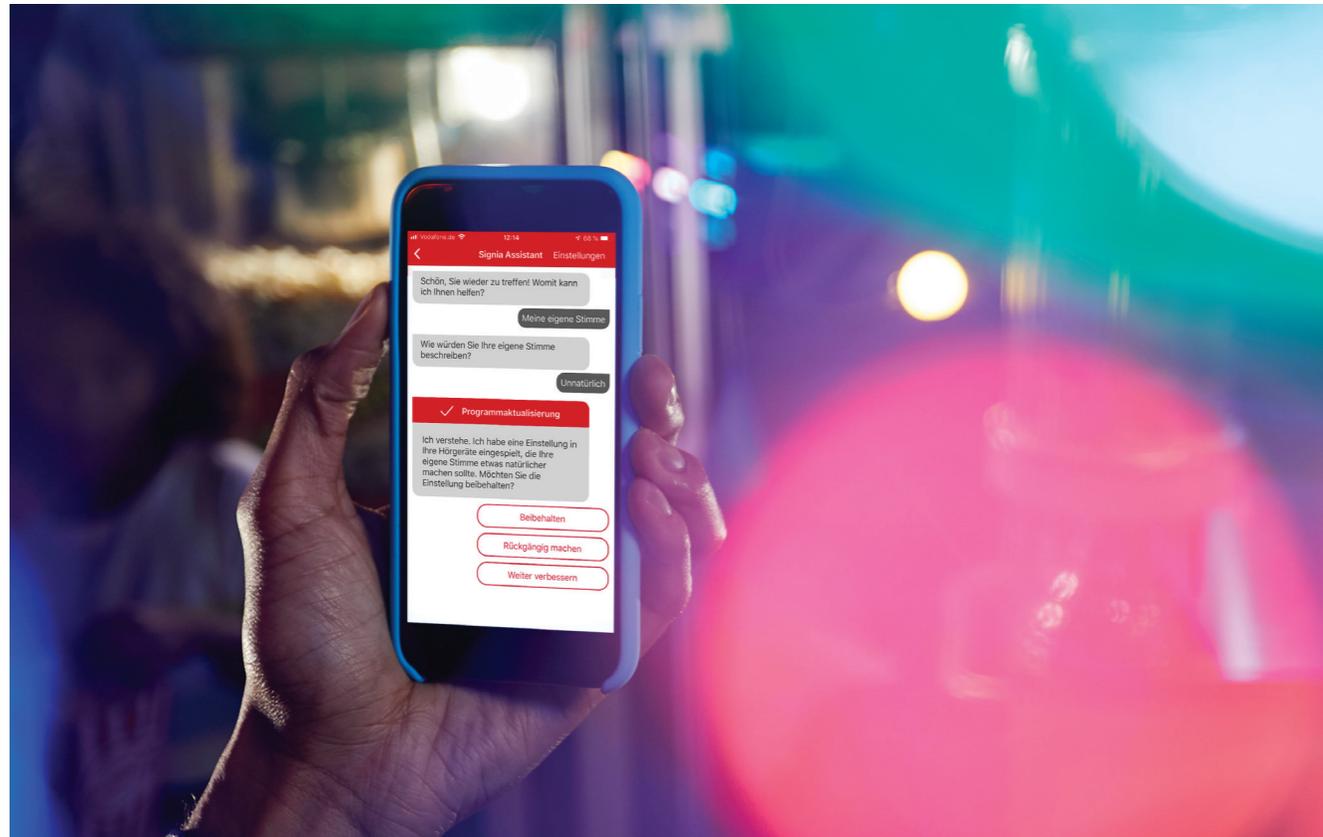


Die App ist kompatibel mit Android und iOS. Der Download im Apple App Store oder Google Play Store ist kostenlos.

# Fernbedienung per App.

Alles unter Kontrolle.


Nutzen Sie die Signia App als Fernbedienung, kontrollieren Sie den Batteriestatus Ihrer Hörgeräte und steuern Sie sie diskret und einfach über das Smartphone.

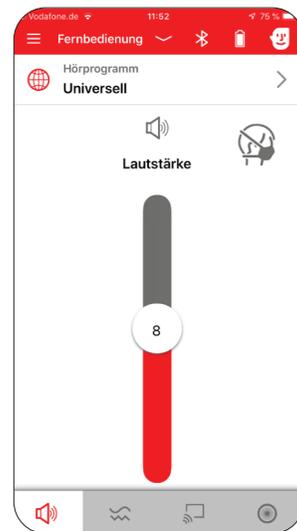


Lautstärke der Hörgeräte einstellen.




Klangbalance anpassen: Wählen Sie bei Hörgeräten der Leistungsklasse 7 und 5 die für Sie richtige Balance zwischen Bässen und Höhen.

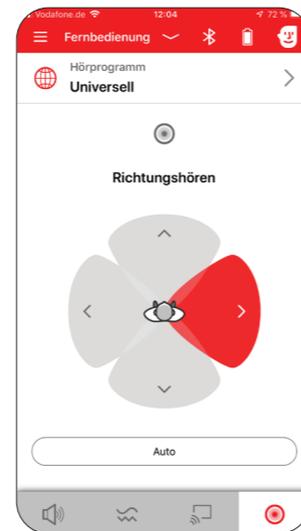


Richtungshören auswählen: Entscheiden Sie selbst, aus welcher Richtung Sie hören möchten.

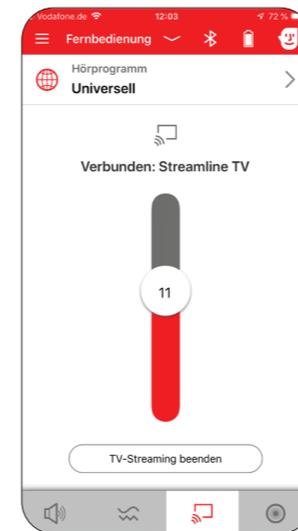

Lautstärke des gestreamten TV-Tons in den Hörgeräten steuern.

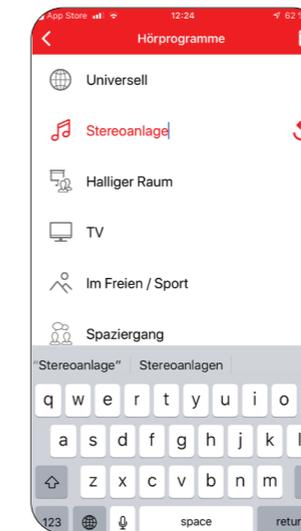

Hörprogramm einstellen und individuell benennen

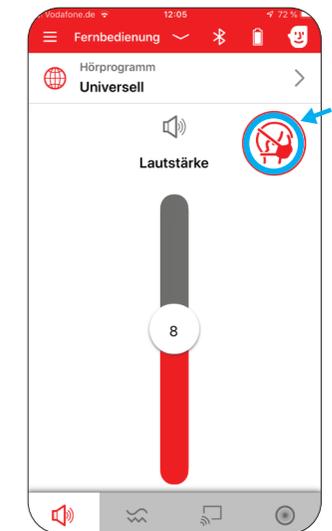

Maskenmodus aktivieren: optimiert die Klangeinstellungen in Gesprächen mit Maskenträgern


# Signia Assistant.

Der intelligente Helfer.


Der neue Signia Assistant ist die ideale Ergänzung zur persönlichen Unterstützung durch Ihren Hörakustiker. Mit Hilfe künstlicher Intelligenz liefert der Signia Assistant individuelle Vorschläge zur Klangeinstellung. Er lernt Ihre Präferenzen, um Ihnen ein optimales, auf Ihre individuellen Bedürfnisse zugeschnittenes Hörerlebnis zu ermöglichen. Und unterstützt Sie in schwierigen Hörsituationen. Zu jeder Zeit, an jedem Ort.

## Ihre Vorteile


- ⊙ 24 Stunden, sieben Tage die Woche für Sie da
- ⊙ Begleitung in jeder Hörsituation
- ⊙ Klangverbesserungen sofort hörbar
- ⊙ Leicht zu bedienen per Frage-Anwort-Spiel
- ⊙ Informationen zur Handhabung der Hörgeräte

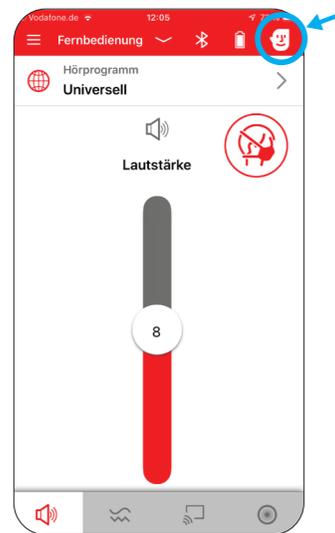


Wenn Sie die Signia App öffnen, erscheint das Symbol des Signia Assistant oben rechts auf Ihrem Bildschirm.

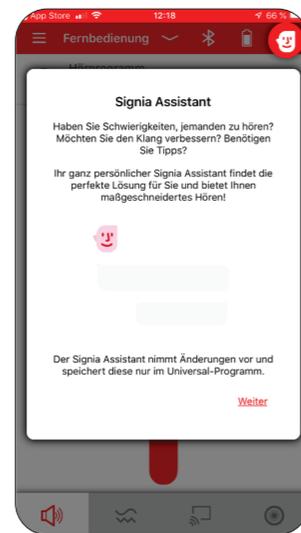

Auf Grundlage Ihrer Antworten schlägt er Ihnen Klangverbesserungen vor.

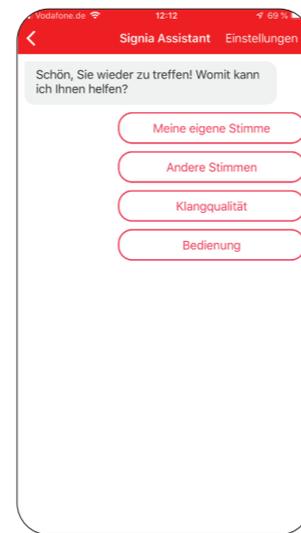

Klicken Sie einfach darauf. Der Signia Assistant wird Sie begrüßen und fragen, wie er Ihnen helfen kann.

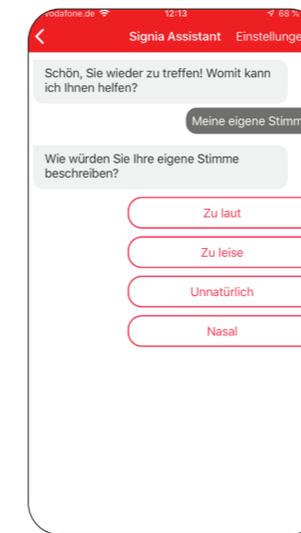

Wählen Sie aus einer Liste, in welchem Bereich Sie gerade Unterstützung brauchen.



Beantworten Sie die Fragen des Signia Assistant, damit er Ihnen helfen kann.

# TeleCare.

Unterstützung aus der Ferne.

Viele Hörakustiker bieten einen modernen Service an, um Sie auch dann optimal unterstützen zu können, wenn Sie einmal nicht ins Fachgeschäft kommen können: TeleCare.

Mit TeleCare können Sie für Nachsorgetermine und Klangkorrekturen auch virtuell mit Ihrem Hörakustiker Kontakt aufnehmen. Alles, was Sie benötigen, sind Bluetooth-fähige Hörgeräte von Signia, die Signia App, ein mit der App kompatibles Smartphone und eine stabile Internetverbindung.

**Dieser Service ist für Sie kostenfrei!**

## Ihre Vorteile

- ⊙ Kontaktaufnahme mit Ihrem Hörakustiker per Live-Chat, Sprach- oder Videoanruf
- ⊙ Virtuelle Nachsorgetermine
- ⊙ Klangverbesserungen sofort hörbar
- ⊙ Interaktive Hörübungen zur Verbesserung Ihres Klangerlebnisses
- ⊙ Bewertung Ihrer Zufriedenheit durch Feedback via App





## Ihr digitaler Helfer für ein optimales Hörerlebnis.



Die Signia App bietet Ihnen alle Annehmlichkeiten und die Diskretion, die Sie sich wünschen. Verpassen Sie nichts – und widmen Sie sich uneingeschränkt den Dingen, die Ihnen Spaß machen.

Sie können die Signia App ganz einfach und kostenlos aus dem Apple App Store oder Google Play Store herunterladen und installieren. Die Signia App ermöglicht eine einfache und intuitive Kopplung mit Ihren Hörgeräten. Folgen Sie einfach den Schritten in der App.

Detaillierte Informationen zur Einrichtung der Signia App finden Sie auf unserer Website [signia.net](https://signia.net)



Laden Sie die Signia App vom App Store und Google Play Store.



## Über Signia

Signia ist eine der weltweit führenden Marken für Hörgeräte. Mit ikonischen Innovationen denken wir Hörgeräte neu. Wie sie aussehen, wirken, klingen. Unser Ziel dabei: Menschen begeistern und bewegen. Wir begreifen eine Hörminderung nicht als Einschränkung. Und Signia Hörgeräte gleichen nicht einfach nur aus. Sie ermöglichen Hörgeräteträgern mehr zu leisten als bisher. Nicht einfach besser, sondern brillant zu sein. Und brillant zu hören. Jedes Wort, jeden Takt, jeden Atemzug.

**Signia. Be Brilliant.**

Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird bei Personenbezeichnungen und personenbezogenen Nomen in dieser Broschüre die männliche Form verwendet. Entsprechende Begriffe gelten im Sinne der Gleichbehandlung grundsätzlich für alle Geschlechter. Die verkürzte Sprachform hat nur redaktionelle Gründe und beinhaltet keine Wertung.

Die Informationen in diesem Dokument enthalten allgemeine Beschreibungen der technischen Möglichkeiten, welche im Einzelfall nicht immer vorliegen müssen, und ohne vorherige Bekanntgabe abgeändert werden können. Die gewünschten Leistungsmerkmale sind daher im Einzelfall bei Vertragsabschluss festzulegen.

Die Bluetooth®-Wortmarke und das Logo sind eingetragene Warenzeichen der Bluetooth® SIG, Inc. Jegliche Nutzung dieser Marke durch die Signia GmbH geschieht unter Lizenz. Andere Handelsmarken und -namen gehören den jeweiligen Inhabern.

Android und Google Play sind eingetragene Warenzeichen der Google Inc. Apple App Store ist ein eingetragenes Warenzeichen von Apple Inc.

### Kontakt:

Signia GmbH  
Henri-Dunant-Straße 100  
91058 Erlangen

08025-99C1 | Gedruckt in Deutschland  
©06.2021 Signia GmbH

### Sie finden uns unter:

 [signia.net](https://www.signia.net)

 [facebook.com/SigniaHearingGermany](https://facebook.com/SigniaHearingGermany)

 [youtube.com/signiahearing](https://youtube.com/signiahearing)

 [instagram.com/signiahearing](https://instagram.com/signiahearing)