

Be
Brilliant™



Hörgeräte und Zubehör

Wegweiser zur idealen Hörlösung



Ihr Leben, Ihre Welt, Ihr Hörerlebnis

Unser Gehör ist essenziell für die Verbindung zur Umwelt, für Beziehungen und sinnliche Erlebnisse.

Gespräche führen, Naturgeräusche oder Musik genießen – all das wirkt selbstverständlich.

Signia Hörgeräte unterstützen Menschen mit Hörminderung dabei, diese Erlebnisse zurückzugewinnen – und wieder mit Freude zu hören, was sie bewegt.





1 Wer ist eigentlich Signia?

Seite 6

2 Ihr persönlicher Hörtest

Seite 8

3 Sinneswahrnehmung Hören

Seite 9

4 Das Besondere am Hörgerätekauf

Seite 10

5 Signia Audiologie

Seite 11

6 Hörgeräte-Bauformen

Seite 12

7 Aufladbare Hörgeräte

Seite 14

8 Bluetooth in Hörgeräten

Seite 16



9 TV Sound

Seite 18

10 Fernbedienung per Smartphone-App

Seite 20

11 Fernbedienung ohne Smartphone

Seite 21

12 Signia Assistant

Seite 22

13 Leitfaden zur optimalen Bauform

Seite 24

14 Leitfaden zur optimalen Leistungsklasse


Seite 27

15 Die Leistungsklassen


Seite 30

Wer ist eigentlich Signia?

Seit Jahrzehnten entwickeln wir mit Leidenschaft und Innovationsgeist moderne Hörgeräte und Zubehör – früher unter dem Namen Siemens, heute als Signia. Unsere ExpertInnen an verschiedenen Standorten weltweit arbeiten dabei eng zusammen, um Menschen mit Hörminderung echte Mehrwerte zu bieten.

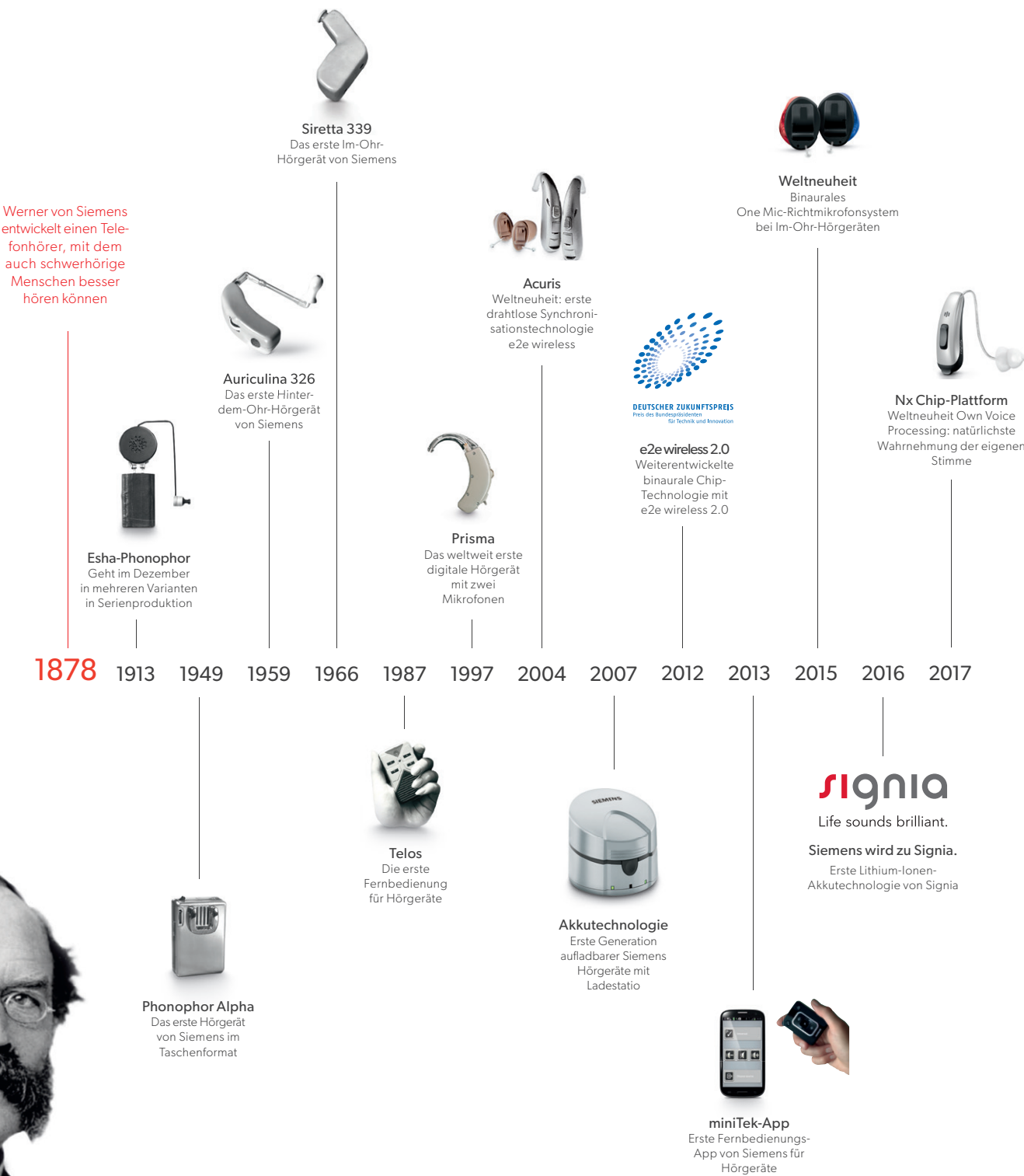

Gemeinsam mit renommierten Universitäten und Forschungseinrichtungen weltweit forschen wir an den Hörlösungen von morgen. Und wir entwickeln das Herzstück unserer Technologie – den Chip – in Erlangen. Für maximale Kontrolle über Qualität, Performance und Innovation.

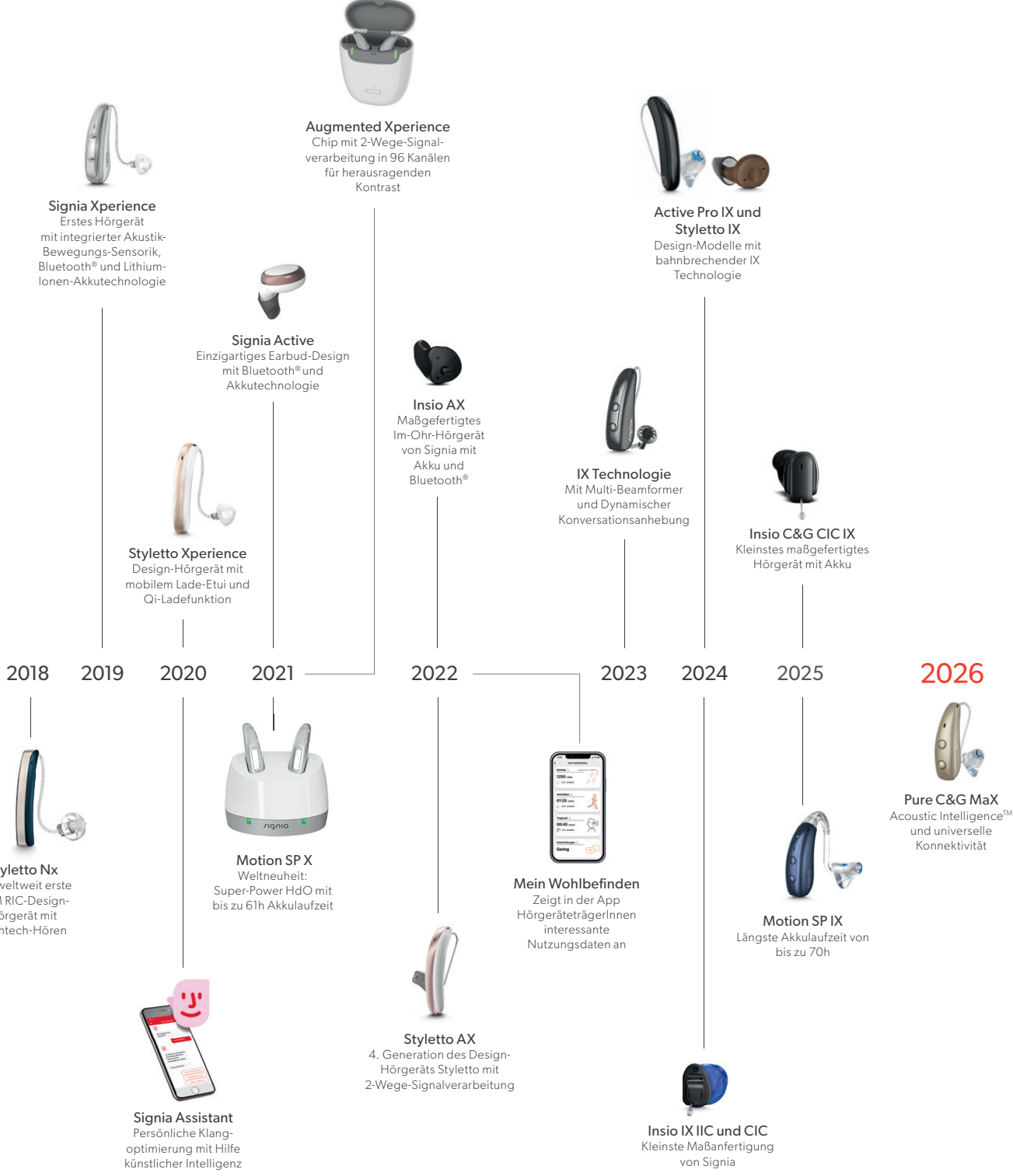


Ihr persönlicher Hörtest

Geräusche, die Sie vermissen

Im Vorfeld jeder Hörgeräteberatung findet ein Hörtest statt – jede Hörkurve ist so individuell wie ein Fingerabdruck. Bitten Sie Ihre/n HörakustikerIn, das Ergebnis (Audiogramm) in die Grafik einzutragen. So sehen Sie, welche Geräusche Sie noch gut hören und welche nicht.

Geräusche über Ihrer Kurve sind schwer oder gar nicht hörbar, darunter gut. Links stehen tiefe, rechts hohe Töne – oft sind hohe Frequenzen stärker beeinträchtigt. Sinkt die Kurve rechts ab, hören Sie zwar viel, verstehen aber Sprache schlechter – besonders bei Störgeräuschen. Denn Sprachverstehen erfordert das Erkennen hoher Töne wie „s“, „sch“ oder „k“.

Hörgeräte gleichen diese Defizite aus und sorgen für besseres Verstehen und mehr Lebensfreude.

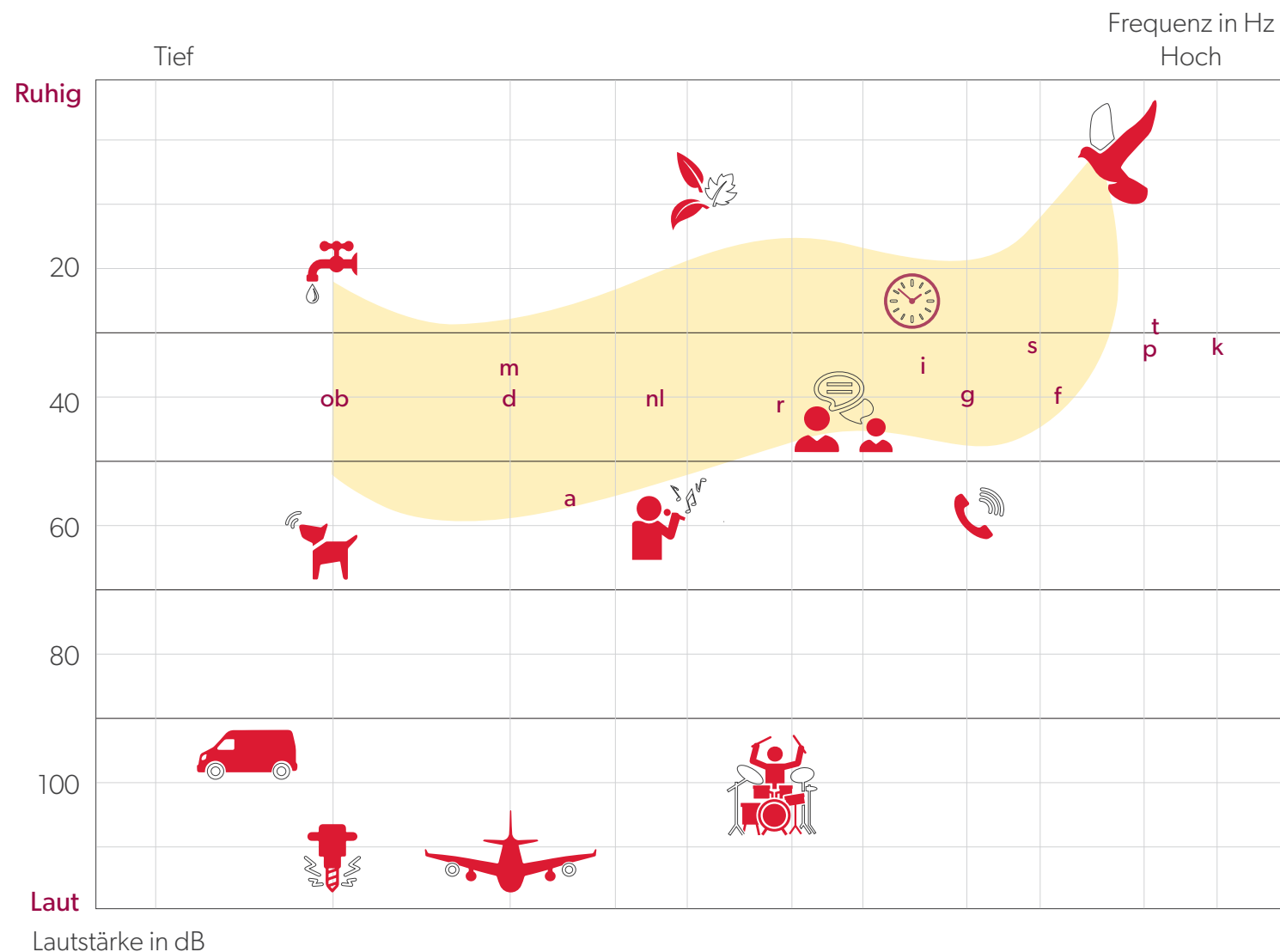

Sinneswahrnehmung Hören

Die Rolle des Gehirns

Hörentwöhnung

Nicht nur das Hörorgan bestimmt das Hörvermögen. Fehlen akustische Reize über längere Zeit, verschlechtert sich auch die Hörverarbeitung im Gehirn. Unbehandelte Altersschwerhörigkeit erhöht sogar die Risiken für Demenz und Depression*, doch wer wieder gut hört, kann dem entgegenwirken – besser früher als später.

Hören im Gleichgewicht

Das Gehirn nutzt die Wahrnehmung von beiden Ohren als räumlichen Gesamteindruck, was mit Hörminderung oft nicht mehr funktioniert. Signia Hörgeräte unterstützen das Hören optimal, indem sie drahtlos miteinander verbunden sind und beide Seiten gemeinsam verarbeiten – wie es die Natur vorsieht.

Binaurale Geräuschunterdrückung

Das Gehirn kann Richtungen erkennen und Sprache aus Störgeräuschen filtern, wenn das Gehör in Ordnung ist. Signia Hörgeräte kompensieren die Einschränkung bei Hörminderung und heben gezielt Gesprächspartner aus Hintergrundgeräuschen hervor, auch bei Bewegung, auch in der Gruppe.



*Baltimore Longitudinal Study of Aging, National Institute of Aging, Baltimore (USA), www.blsa.nih.gov

Das Besondere am Hörgerätekauf

⊙ Individuelle Anpassung

Hören ist mehr als Schallaufnahme – auch Gefühle spielen eine Rolle. Was für die einen angenehm klingt, empfinden andere als störend. Deshalb fragen HörakustikerInnen vor der Anpassung gezielt nach Ihren Hörvorlieben. Denn selbst bei identischem Hörtest unterscheidet sich die optimale Einstellung von Person zu Person.

⊙ Erfahrungen sammeln

Hörgeräte sind keine Standardprodukte. Erst durch das Tragen im Alltag lassen sich Klang, Lautstärke und Hörprogramme passgenau auf Ihre Bedürfnisse abstimmen – auf Basis Ihrer Rückmeldungen.

⊙ Gewöhnung

Wer lange mit der Versorgung wartet, gewöhnt sich ans „Nicht-Hören“. Hörgeräte bringen Umgebungsgeräusche zurück – das kann

anfangs irritieren. Moderne Technik hilft dabei, sich schnell wieder an Sprache und Geräusche zu gewöhnen und Wichtiges herauszufiltern.

⊙ Jahrelange Betreuung

Ihr Gehör verändert sich – und Ihre Hörgeräte wachsen mit. Sie werden regelmäßig angepasst, wenn sich Ihre Ansprüche, Ihr Umfeld oder Ihre Hörfähigkeit ändern. Ihr/e HörakustikerIn begleitet Sie langfristig, auch weit über den Kauf hinaus.

⊙ Die richtige Wahl treffen

Die Bauform ist meist rasch gewählt, die Entscheidung für die passende Leistungsklasse hingegen erfordert Beratung. Höherwertige Geräte bieten mehr Komfort und bessere Unterstützung in komplexen Hörsituationen. Da Ihre Höransprüche mit der Zeit steigen, lohnt sich eine bewusste Wahl.

LEBE LAUT

Signia Audiologie

Spitzentechnologie für persönliches Hören

Was eben noch klar und deutlich klang, kann im nächsten Moment schwer verständlich sein. Genau hier setzen Signia Hörsysteme an: Durch ihre Automatikfunktionen unterstützen sie in jeder Situation.

Dank enormer Rechenleistung und intelligenter Technologie passen die Hörgeräte ihren Klang in Echtzeit automatisch an. Das Ergebnis: ein natürlicher Höreindruck – auch bei Lärm und vielen Stimmen gleichzeitig.

Die e2e wireless-Technologie und binaurale Audiodatenverarbeitung sorgen für exakte Signalverarbeitung. Bis zu 48 Kanäle erlauben eine besonders feine Abstimmung auf Ihre individuelle Hörminderung.

Signia Hörgeräte heben sogar gezielt mehrere GesprächspartnerInnen aus dem Stimmen-gewirr hervor – ideal bei Familientreffen oder Gruppenunterhaltungen.

Highlights

• Acoustic Intelligence™

KI-gestützte Klangoptimierung für wechselnde Hörsituationen in Echtzeit. Mehr Klarheit, Raumtiefe und ein Hörerlebnis, das sich echt anfühlt.

• Einzigartiger Multi-Beamformer

Erkennt mehrere GesprächspartnerInnen gleichzeitig und erleichtert so Gespräche in der Gruppe

• Natürliche eigene Stimme

Angenehmer Klang beim Sprechen durch Own Voice Processing

• Integrierter Bewegungssensor

Optimiert das Hören bei Bewegung, beispielsweise bei einem Spaziergang

• Tinnitus-Therapiefunktionen

Erleichtern den Umgang mit Tinnitus mittels Meeresrauschen oder Tinnitus Notch Therapie

Die Funktionen sind modellabhängig.

Hörgeräte-Bauformen

Wählen Sie, was Ihnen wichtig ist

Die Wahl der passenden Hörgeräte will gut überlegt sein. Denn sie trainieren das Gehör und mit der Zeit hört man mehr Feinheiten. Wichtig ist, dass die Technik auch künftig Ihren Ansprüchen gerecht wird.



Active Mini



Styletto

Earbud-Design

Diese Modelle eröffnen eine neue Kategorie. Earbud-Hörgeräte sind ideal für alle, die eine Im-Ohr-Hörgeräteversorgung mit Bluetooth-Streaming und smartem Design möchten.

Design-Hörgeräte SLIM RIC

Stylish, schlank, stark im Klang: Styletto IX sind die Hörgeräte für alle, die brillantes Hören und elegantes Design in einem wollen. Auch besonders gut für Brillenträger geeignet.



Silk

Insio

Im-Ohr-Hörgeräte

Bei Im-Ohr-Hörgeräten ist die Technik in einer kleinen Schale verbaut, die komplett im Ohr sitzt. Besonders kleine Modelle sind nahezu unsichtbar, bieten jedoch meist kein Bluetooth®. Es gibt sie maßgefertigt oder als sofort tragbare Variante.³



Pure

RIC-Hörgeräte

RIC-Hörgeräte (Receiver in the Canal) gehören zu den kleinsten Bauformen. Der Lautsprecher sitzt im Gehörgang – so bleibt mehr Platz im Gehäuse für Technik, und der Klang erreicht klar das Trommelfell.²



Motion

Hinter-dem-Ohr-Hörgeräte

Hinter-dem-Ohr-Hörgeräte sind robust, leicht zu handhaben und zu pflegen. Alle Bauteile sind im Gehäuse eingebaut. Sie werden meist mit einem maßgefertigten Ohrpassstück getragen.

¹ Für leicht- bis mittelgradige Hörminderungen geeignet.

² Bei RIC, SLIM RIC und Im-Ohr-Hörgeräten gelangt der Schall direkt zum Trommelfell.

³ Form, Größe und Sitz einer Im-Ohr-Maßanfertigung hängen von der individuellen Anatomie des Ohrs ab.

Aufladbare Hörgeräte

Bequem und nachhaltig

Signia Hörgeräte mit Akkutechnologie sparen Batterien und bieten hohen Bedienkomfort: Die Hörgeräte schalten sich im Ladegerät automatisch ab und beim Herausnehmen wieder ein – einfacher geht's nicht. Lange Akkulaufzeiten und höhere Schweißresistenz dank geschlossenem Gehäuse sind weitere Vorteile.

Highlights Akkutechnologie

- **Besonders lange Betriebsdauer**
Laufzeit je nach Modell bis zu 70 Stunden¹
- **Langlebigkeit**
Über mehrere Jahre hinweg einen ganzen Tag lang einsetzbar
- **Schnellladefunktion**
Nach nur 30 Minuten Ladezeit wieder mehrere Stunden lang einsatzfähig



Im-Ohr-Hörgeräte
mit Ladegerät

Aufladen und mehr

Signia Akku-Hörgeräte gibt es in verschiedenen Bauformen – bei manchen Modellen sogar mit einer Auswahl an unterschiedlichen Ladegeräten.



Charger für unterwegs

Mit einem mobilen Charger sind Sie unterwegs unabhängig vom Stromnetz – er bietet mehrere volle Ladungen.



Dry&Clean Charger

Der Dry&Clean Charger ist die 3-in-1-Lösung: Er lädt, trocknet und desinfiziert per UV-C-Licht.



Standard Charger

Der offene Charger ist besonders einfach zu bedienen – kein Deckel, kein Öffnen, Hörgeräte einfach einsetzen.

¹ Laufzeiten sind Werte „bis zu“ mit neuem Akku und ohne Streaming. Die tatsächliche Laufzeit hängt von Nutzungsfaktoren ab wie beispielsweise Verstärkung, Umgebungslautstärke, Streaming und Alter der Akkus.

Bluetooth in Hörgeräten

Was steckt dahinter?

Moderne Hörgeräte können weit mehr, als nur das Hören verbessern. Viele Modelle bieten heute Bluetooth-Konnektivität – eine drahtlose Technologie, die Audio-Streaming und einen KI-gesteuerten Klangassistenten ermöglicht.

Was bedeutet das für Sie konkret?

- Telefonate direkt im Ohr
- Musik oder Podcasts in bester Klangqualität streamen
- Videos und TV-Sendungen genießen
- An Online-Besprechungen teilnehmen
- Per App: digitalen Assistent zur Klangoptimierung nutzen

Welche Hörgeräte bieten Bluetooth?

Smartphones nutzen unterschiedliche Bluetooth-Protokolle – quasi verschiedene „Bluetooth-Sprachen“. Mit unserem Signia Hörsystem-Portfolio decken wir alle gängigen Protokolle ab und sind mit nahezu allen Smartphones kompatibel.

Welches Modell zu Ihnen passt, hängt von Ihren Endgeräten und deren Betriebssystem ab. Für maximale Flexibilität gibt es auch Modelle mit universeller Bluetooth-Konnektivität, die sich mit jedem Bluetooth-fähigen Gerät koppeln lassen.



Unser Tipp: Lassen Sie sich individuell beraten

Jeder Mensch nutzt digitale Geräte auf seine eigene Weise. Erzählen Sie im Fachgeschäft offen, wie Sie Handy, Tablet, Laptop oder TV im Alltag nutzen. Dann können HörakustikerInnen Hörgeräte empfehlen, die zu Ihrem Lebensstil passen.



Active Mini

Insio AX

Styletto

Pure

Motion

TV Sound

Heimkino-Erlebnis mit Bluetooth

Sie möchten sich beim Fernsehen wie im Kino fühlen? Mitten im Geschehen statt bloß dabei? Die Lösung: TV Sound. Das kleine Gerät überträgt den Fernsehton per Bluetooth direkt in Ihre Hörgeräte – klar, störungsfrei und in individuell einstellbarer Lautstärke.

So wird jeder Fernsehabend zum Heimkino-Erlebnis. Einmal angeschlossen, startet die Übertragung automatisch, sobald der Fernseher läuft.

Highlights TV Sound

- Brillante Klangqualität
- Für alle Bluetooth-fähigen Hörgeräte von Signia
- Keine störenden Hintergrundgeräusche
- Lautstärke unabhängig von anderen
- Mit mehreren Personen gleichzeitig nutzbar



Sender TV Sound

Hier finden Sie detaillierte Informationen, wie Sie Ihre Hörgeräte mit TV Sound koppeln.



Unser Tipp: Holen Sie sich im Fachgeschäft die Anleitung, wie TV Sound eingerichtet wird. Oder scannen Sie den QR-Code.

Jeder Mensch nutzt digitale Geräte auf seine eigene Weise. Erzählen Sie im Fachgeschäft offen, wie Sie Handy, Tablet, Laptop oder TV im Alltag nutzen. Dann können HörakustikerInnen Hörgeräte empfehlen, die zu Ihrem Lebensstil passen.

Fernbedienung per Smartphone-App

Für alle Signia Hörgeräte


Mit der Signia App steuern Sie Ihre Hörgeräte ganz intuitiv und bequem per Smartphone. Die Funktionen sind übersichtlich dargestellt – und für Außenstehende bleibt unbemerkt, dass Sie Ihre Hörgeräte einstellen.

Alle Signia Hörgeräte können mit einer der beiden Apps von Signia gesteuert werden. Dafür wird keine Bluetooth-Funktion benötigt. Das gibt es nur bei Signia. Bei Bluetooth-fähigen Modellen haben Sie noch mehr Einstellmöglichkeiten, z.B. die Richtung, aus der Sie hören möchten.

Hier finden Sie Videos
zu den Funktionen
beider Signia Apps.



Signia One App

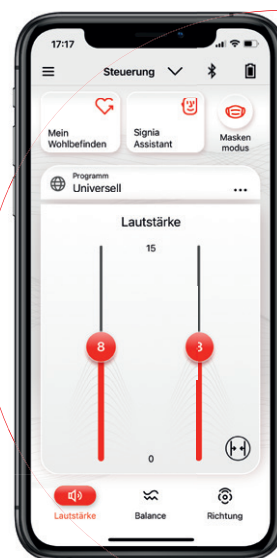

Signia App



Beide Apps sind kompatibel mit Android und iOS. Der Download im Apple App Store oder Google Play Store ist kostenlos.

Highlights Fernbedienung per Signia App

- Lautstärke einstellen (Umgebung, Tinnitus-Noiser, Streaming)
- Klangbalance aussteuern
- Hörprogramme auswählen
- Richtungshören auswählen

Fernbedienung ohne Smartphone

Einfach das Wesentliche

Signia Hörgeräte passen sich automatisch an Ihre Hörumgebung an. Dennoch gibt es vielleicht Situationen, in denen Sie selbst eingreifen möchten – z. B. lauter oder leiser stellen oder ein spezielles Hörprogramm wählen.

Ihr/e HörakustikerIn kann individuelle Programme für Sie anlegen: etwa für Chorproben, besseren TV-Klang oder hallige Räume. Das Umschalten funktioniert so einfach wie beim Fernseher.

Das Beste: Sie brauchen keine Bluetooth-Hörgeräte und kein Smartphone.



Highlights Remote Control

- Lautstärkeeinstellung
- Programmwechsel
- Stummschaltung



Signia Remote Control


Signia Assistant

Ihr digitaler Helfer in den Signia Apps

Sie möchten etwas am Klang Ihrer Bluetooth-fähigen Hörgeräte ändern? Mit einer der kostenlosen Signia Apps auf Ihrem Smartphone haben Sie Zugang zu einem digitalen Assistenten. Über Bluetooth® erhalten Sie individuelle Klangvorschläge.

Besonders anwenderfreundlich: Mit Hilfe von KI versteht der Signia Assistant Sprache*. Sie können Ihr Anliegen einfach aussprechen, statt umständlich tippen zu müssen.


Der Signia Assistant lernt dank künstlicher Intelligenz ständig dazu und bietet Ihnen auch in schwierigen Situationen Hilfe – rund um die Uhr, selbst wenn Ihr/e HörakustikerIn nicht erreichbar ist.

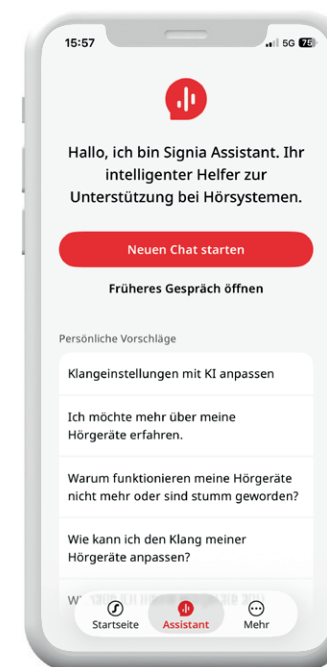

Beispielbild des Signia Assistant in der Signia One App

Highlights

- 24 Stunden, sieben Tage die Woche für Sie da
- Versteht gesprochene Sprache in der Signia One App für MaX
- Klangverbesserungen sofort hörbar
- Informationen zur Handhabung der Hörgeräte

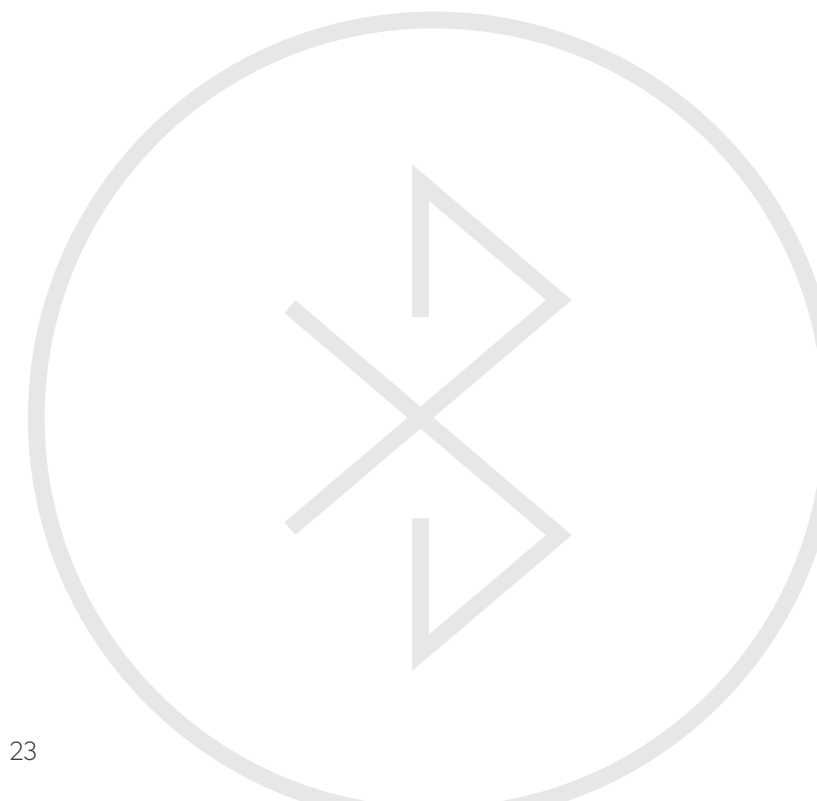

* Sprachfunktion in der Signia One App, kompatibel mit MaX Plattform.

Leitfaden zur optimalen Bauform

Machen Sie den Test.

Bitte kreuzen Sie die Antworten an, die am besten auf Sie zutreffen. Danach erfolgt die Auswertung auf der rechten Seite.

A

Ich besitze ein Smartphone. Das möchte ich mit den Hörgeräten nutzen, um z. B. direkt in meine Hörgeräte zu streamen.

☐ Ja ☐ Nein ☐ Nicht wichtig

B

Beim Fernsehen habe ich häufig Schwierigkeiten, Sprache zu verstehen. Ich wünsche mir einen besseren Klang und den Ton direkt in meinen Hörgeräten.

☐ Ja ☐ Nein ☐ Nicht wichtig

C

Am liebsten hätte ich aufladbare Hörgeräte mit Akkutechnologie. Ich möchte unnötigen Müll und lästigen Batteriewechsel vermeiden.

☐ Ja ☐ Nein ☐ Nicht wichtig

D

Ich entscheide mich für das schönere Design, wenn die Produkte genauso gut funktionieren wie weniger attraktive Produkte.

☐ Ja ☐ Nein ☐ Nicht wichtig

E

Das Wichtigste für mich ist, dass die Hörgeräte so klein wie möglich sind. Es kommt weniger auf die Funktionen an.

☐ Ja ☐ Nein ☐ Nicht wichtig

F

Am schönsten finde ich Im-Ohr-Hörgeräte. Ich möchte auf jeden Fall einen Knopf im Ohr.

☐ Ja ☐ Nein ☐ Nicht wichtig

G

Ein Im-Ohr-Gerät in moderner Earbud-Form, das aussieht wie ein Einsteck-Kopfhörer, wäre genau das Richtige für mich.

☐ Ja ☐ Nein ☐ Nicht wichtig

H

Ideal wäre für mich ein Im-Ohr-Hörgerät, das man sofort ausprobieren kann. Auf eine Maßanfertigung möchte ich nicht warten.

☐ Ja ☐ Nein ☐ Nicht wichtig

I

Ich möchte KI-gestützte Hörgeräte für mehr Klarheit und akustische Tiefe nutzen.

☐ Ja ☐ Nein ☐ Nicht wichtig

K

Meine eigene Stimme sollte mit Hörgeräten möglichst natürlich klingen.

☐ Ja ☐ Nein ☐ Nicht wichtig

Auswertung Bauform

Schreiben Sie die Buchstaben der Fragen, die Sie auf den vorherigen Seiten mit **Ja** beantwortet haben, in die Zeile unten. Vergleichen Sie Ihre Buchstaben mit den Buchstaben unter den Hörgerätemodellen.

Je größer die Übereinstimmung, desto besser entspricht das Hörgerät Ihren Wünschen.

Die Buchstaben Ihrer **Ja**-Antworten:

____ / ____ / ____ / ____ / ____ / ____ / ____ / ____ / ____ / ____

➔ Ihr Wunschmodell

Markieren Sie Ihr Wunschmodell und besprechen Sie mit Ihrem/Ihrer HörakustikerIn, ob es Ihr Gehör bestmöglich unterstützt.



Pure C&G MaX
A / B / C
I / K



Pure Charge&Go IX
A / B / C / K



Motion Charge&Go
A / B / C / K



Styletto
A / B / C
D / K



Insio Charge&Go AX
A / B / C / F



Active Mini
A / B / C / D
F / G / H



Insio
E' / F



Insio Charge&Go IX
C / F



Silk Charge&Go
C / E' / F / H

¹ Wenn sich ein „E“ in Ihrer Auswahl befindet, wünschen Sie sich die kleinste Bauform. Sie ist nicht mit anderen Buchstaben kombinierbar. Akkutechnologie, das besondere Design oder die Bluetooth-Funktion für leichteres Fernsehen und die Bedienung per Smartphone ist in den kleinsten Modellen nicht verfügbar. Entscheiden Sie in Ruhe, was Ihnen am wichtigsten ist. Übrigens: Auch vollausgestattete Signia Modelle sind beeindruckend klein.

Leitfaden zur optimalen Leistungsklasse

Machen Sie den Test.

Kreuzen Sie die Antworten an, die am besten zu Ihnen passen, und nehmen Sie das Ergebnis mit zum Beratungsgespräch Ihres/Ihrer HörakustikerIn. Generell gilt: Je höher die Leistungsklasse, desto brillanter der Klang.

A

Meine Hörgeräte sollen leicht zu bedienen sein. Wenn ich ein Gerät lauter stelle, soll sich gleichzeitig auch die Lautstärke auf der anderen Seite erhöhen.

☐ Ja ☐ Nein ☐ Nicht wichtig

B

Es wäre schön, wenn ich den Klang jederzeit selbst verändern und ihn auch ausprobieren könnte.

☐ Ja ☐ Nein ☐ Nicht wichtig

C

Ich bin häufig im Freien und/oder fahre gerne mit dem Fahrrad. Die Hörgeräte sollen Windgeräusche automatisch abschwächen können.

☐ Ja ☐ Nein ☐ Nicht wichtig

D

Ich habe bereits Hörgeräte getestet. Zeitungsrascheln und Besteckklappern stören mich manchmal.

☐ Ja ☐ Nein ☐ Nicht wichtig

E

Die Hörgeräte sollen sich mithilfe künstlicher Intelligenz noch präziser an die Hörumgebung anpassen.

☐ Ja ☐ Nein ☐ Nicht wichtig

F

Ich möchte bestmögliche Unterstützung bei Gesprächen mit mehreren Personen, auch bei Hintergrundgeräuschen.

☐ Ja ☐ Nein ☐ Nicht wichtig

G

Ich liebe Musik und wünsche mir brillanten Musikklang.

☐ Ja ☐ Nein ☐ Nicht wichtig

H

Ich singe im Chor/spiele ein Instrument. Die Hörgeräte sollten ein spezielles Programm dafür haben.

☐ Ja ☐ Nein ☐ Nicht wichtig

I

In großen halligen Räumen und Zimmern mit Parkettboden und Terrassentüren habe ich Schwierigkeiten, Sprache zu verstehen.

☐ Ja ☐ Nein ☐ Nicht wichtig

K

Soziale Kontakte sind mir sehr wichtig. Die Hörgeräte sollen möglichst klares Hören bei Gesprächen unterstützen.

☐ Ja ☐ Nein ☐ Nicht wichtig

L

Wenn wir spazieren gehen und Umgebungsgeräusche vorhanden sind, verstehe ich meine/n PartnerIn nicht gut. Ich möchte besser von der Seite hören, ohne den Kopf drehen zu müssen.

☐ Ja ☐ Nein ☐ Nicht wichtig

M

Meine Gesundheit und mein Hörvermögen sind mir sehr wichtig. Ich lege Wert auf beste Technik und Klang.

☐ Ja ☐ Nein ☐ Nicht wichtig

N

Ich möchte nicht in verschiedene Hörprogramme umschalten. Die Hörgeräte sollen alles bestmöglich und vor allem automatisch regeln.

☐ Ja ☐ Nein ☐ Nicht wichtig

Auswertung Leistungsklasse

Schreiben Sie die Buchstaben der Fragen, die Sie mit **Ja** beantwortet haben, in die Zeile unten. Vergleichen Sie Ihre Buchstaben mit den Buchstaben neben den Leistungsklassen.

Je größer die Übereinstimmung, desto besser entspricht die Leistungsklasse Ihren Wünschen.

Die Buchstaben Ihrer **Ja**-Antworten:

____ / ____ / ____ / ____ / ____ / ____ / ____ /
____ / ____ / ____ / ____ / ____ / ____

➔ Ihre Leistungsklasse

Markieren Sie Ihre Leistungsklasse und besprechen Sie die Details mit Ihrem/Ihrer HörakustikerIn.

Leistungsklasse	7	A / B / C / D / E ¹ / F / G / H / I / K / L ² / M / N
ab Leistungsklasse	5	A / B / C / D / E ¹ / H / I ³ / K / L ²
ab Leistungsklasse	3	A / B / C / D / E ¹
ab Leistungsklasse	2	A / B / C / D
ab Leistungsklasse	1	A / B / C / D

¹ Hörgeräte der MaX Plattform


² Bei Hörgeräten der Leistungsklasse 7 vollautomatisch. Nicht bei Im-Ohr-Hörgeräten mit 1 Mikrofon.

³ Bei Hörgeräten der Leistungsklasse 5 Zusatzprogramm manuell zuschaltbar.

15

Die Leistungsklassen

Alle Funktionen im Überblick

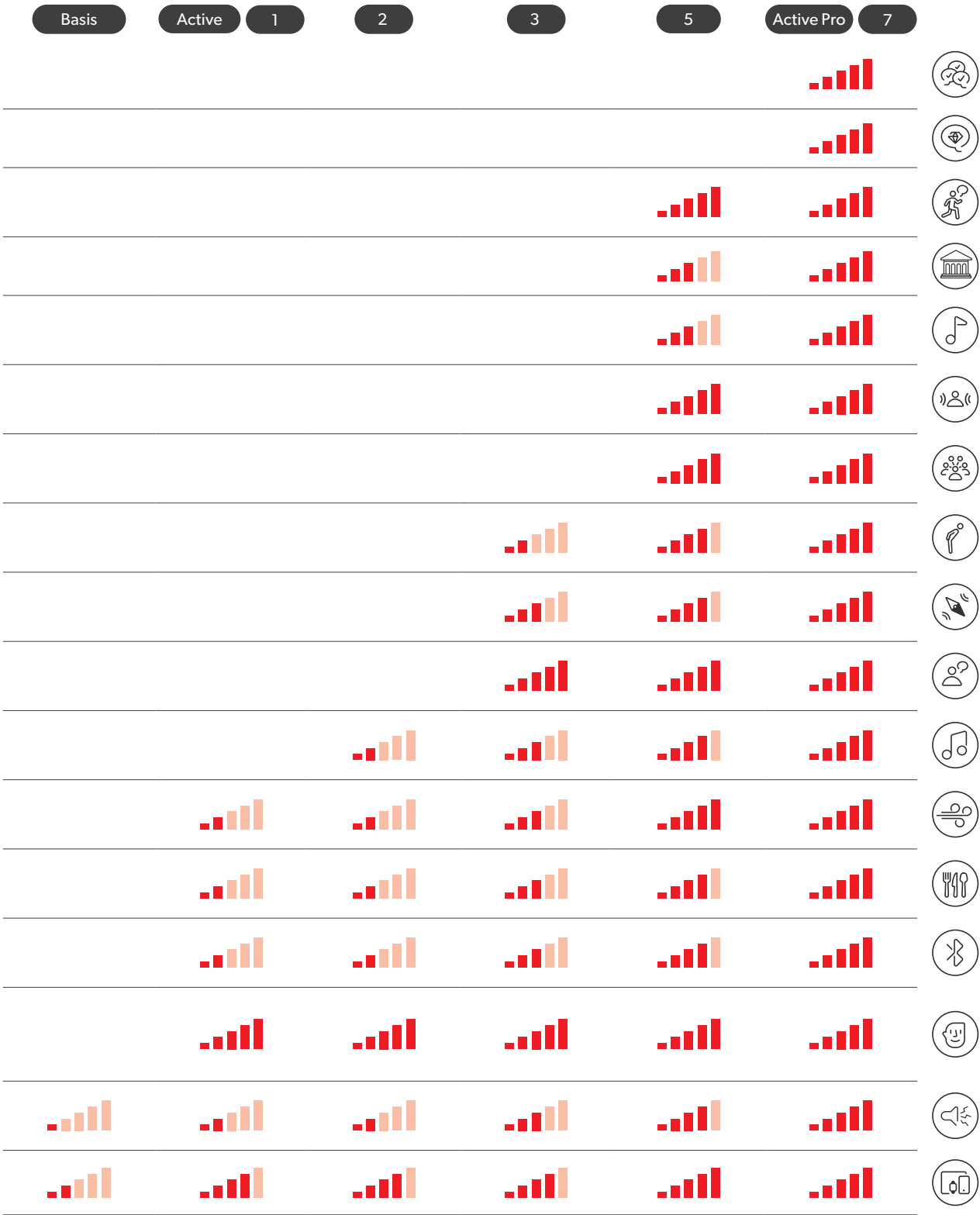

GESPRÄCHE IN GRUPPEN	Weltweit einzigartig: Mehrere GesprächspartnerInnen werden aus der akustischen Umgebung hervorgehoben. ¹
KLANG-BRILLANZ	Die Übertragung hoher Töne bis 12 kHz sorgt für brillanten Klang.
GESPRÄCHE IN BEWEGUNG	GesprächspartnerInnen bleiben im „Fokus“, auch wenn sie sich bewegen. ¹
HALLIGE RÄUME	Leichteres Verstehen in halligen Räumen, z.B. in Wohnzimmern mit Parkettboden.
MUSIKER	Hilfreiches Spezialprogramm für ChorsängerInnen oder MusikerInnen, das die Lautstärke des eigenen Instruments oder Gesangs optimal anpasst.
VERSTEHEN VON DER SEITE	Seitliche SprecherInnen werden aus einer geräuschvollen Umgebung hervorgehoben. ¹
INDIVIDUELLES RICHTUNGSHÖREN	Mit der Signia App selbst entscheiden, in welche Richtung man lauschen möchte. ¹
LEHN-EFFEKT	GesprächspartnerInnen werden lauter übertragen als die Umgebung, als würde man sich zu ihnen hinlehnen. ¹
EIGENE BEWEGUNGEN	Integrierte Bewegungssensoren dienen der idealen Klanganpassung an dynamische Situationen mit Gesprächsanteilen. ¹
NATÜRLICHE EIGENE STIMME ²	Nur in Signia Hörgeräten: Die eigene Stimme der HörgeräteträgerInnen wird separat und besonders natürlich ausgesteuert.
MUSIKHÖREN	Ob im Konzert oder beim Musikhören zu Hause, die kristallklare Übertragung in HD-Qualität ist das Resultat hochentwickelter Chip-Technologie.
WINDGERÄUSCHE	Signia Hörgeräte reduzieren Windgeräusche effektiv, die zum Beispiel beim Fahrradfahren stören können.
GESCHIRR-KLAPPERN	Impulshafte Geräusche wie Geschirrklopfen oder Zeitungsrascheln werden blitzschnell reduziert.
STREAMING	Ob Telefonate, Musik oder Online-Meetings, vom Smartphone oder PC: in Stereo direkt in Ihre beiden Bluetooth-fähigen Hörgeräte streamen – abhängig vom Hörgerätemodell.
SIGNIA ASSISTANT	Digitaler Assistent in der Signia App, der KI-basierte Klangvorschläge unterbreitet. Sie entscheiden selbst, ob Sie den Klang behalten oder verwerfen möchten. Für Bluetooth-fähige Hörgeräte mit Internetverbindung. ¹
IM STÖRGERÄUSCH	Alle Signia Hörgeräte sind mit einem Störgeräusch-Management und einem adaptiven Richtmikrofon ausgestattet.
APP-FERN-BEDIENUNG	Der beleuchtete Bildschirm der Signia App ist die ideale Bedienoberfläche für Ihre Hörgeräte.

¹ Nicht bei Silk Charge&Go IX und Insio (Charge&Go) IX, ² Nicht bei Im-Ohr-Hörgeräten und Active Mini

Über Signia

Signia, ein Teil der WSA-Gruppe, ist eine der weltweit führenden Marken für Hörgeräte. Mit ikonischen Innovationen denken wir Hörgeräte neu. Wie sie aussehen, wirken, klingen. Unser Ziel dabei: Menschen begeistern und bewegen. Wir begreifen eine Hörminderung nicht als Einschränkung. Gemeinsam mit unseren Partnern, den unabhängigen Hörakustik-ExpertInnen, gleichen wir Hörverlust nicht nur aus. Unsere Produkte ermöglichen HörgeräteträgerInnen, mehr zu leisten als bisher. Nicht einfach besser, sondern brillant zu sein. Brillant zu hören – in jedem Wort, Takt und Atemzug.

Be Brilliant.

Die Informationen in diesem Dokument enthalten allgemeine Beschreibungen der technischen Möglichkeiten, welche im Einzelfall nicht immer vorliegen müssen, und ohne vorherige Bekanntgabe abgeändert werden können. Die gewünschten Leistungsmerkmale sind daher im Einzelfall bei Vertragsabschluss festzulegen.

Apple, das Apple-Logo, App Store und iPhone sind Marken von Apple Inc. Android ist eine Marke von Google LLC. Die Wortmarke Bluetooth® und die Bluetooth-Logos sind Eigentum der Bluetooth SIG, Inc., und jede Nutzung dieser Marken durch WSAUD A/S erfolgt unter Lizenz. Andere Marken und Handelsnamen sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.

Kontakt:

Signia GmbH
Henri-Dunant-Straße 100
91058 Erlangen

10249442 | Gedruckt in Deutschland
© 08.2026 Signia GmbH

Sie finden uns unter:



signia.net



facebook.com/SigniaHearingGermany



youtube.com/SigniaHearing



instagram.com/Signia.Deutschland