


One Pager

# Pure Charge&Go BCT IX – Bluetooth-Quelle wechseln

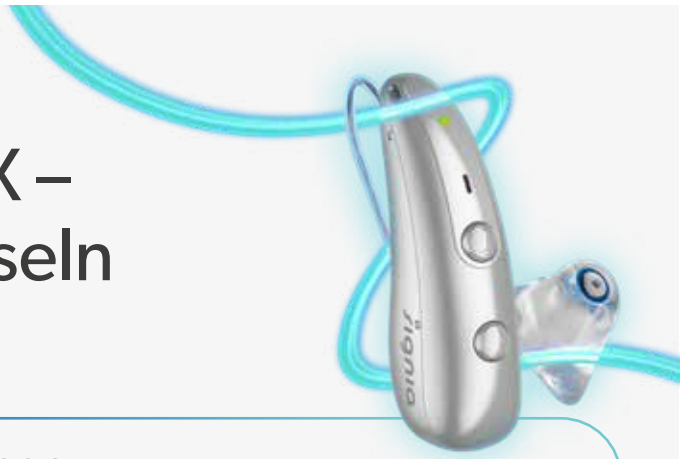

One Pager Bluetooth-Quelle wechseln 01\_2026 10248829

## Verbindung zum Smartphone trennen

**Wichtig:** Das Master-Hörgerät darf immer nur mit **einer** Bluetooth-Quelle verbunden sein. Will man vom Smartphone zum PC als Bluetooth-Quelle wechseln, muss die Verbindung zum Smartphone zuerst getrennt werden.

### Weg 1: Am einfachsten: Bluetooth am Smartphone ausschalten

**Weg 2:** Master-Hörgerät vom Smartphone trennen, falls Bluetooth auf dem Smartphone für andere Anwendungen aktiv bleiben soll. Nur das Master-Hörgerät trennen (nicht die beiden Hörgeräte in der Liste für die App-Verbindung!).

#### iPhone:





1. Einstellungen → Bluetooth öffnen.
2. Hörgerät antippen → ⓘ → Trennen. Tippt man auf ⓘ, erscheint nur beim Master-Hörgerät „Trennen“.

#### Android:

1. Einstellungen → Bluetooth öffnen.
2. Zum Trennen Master-Hörgerät antippen. Streaming-Verbindung über das Master-Hörgerät leicht zu erkennen.

Hörgerät erscheint **dreimal** in der Liste: zweimal für die App-Verbindung und einmal für die direkte Verbindung zum Master-Hörgerät (Streaming).

**Tipp:** Master-Hörgerät beim iPhone umbenennen  
In den Bluetooth-Einstellungen auf ⓘ und dann auf den Namen tippen, um ihn zu ändern. Nicht nötig bei Android.

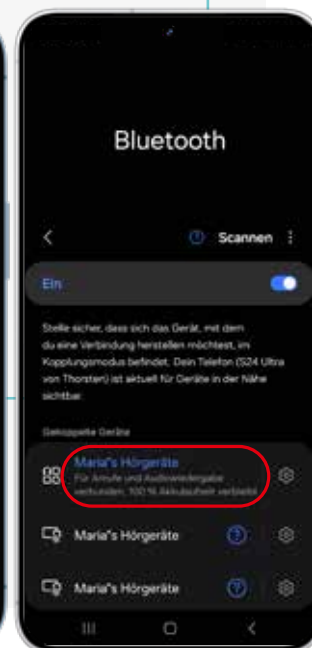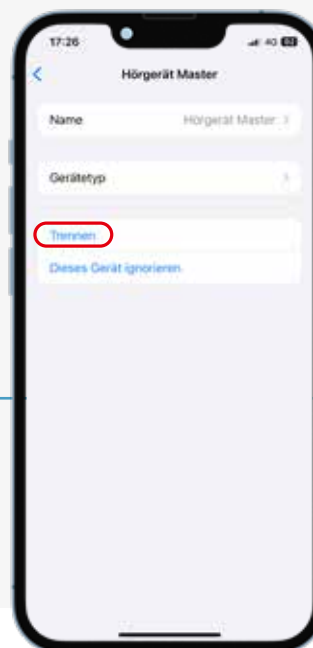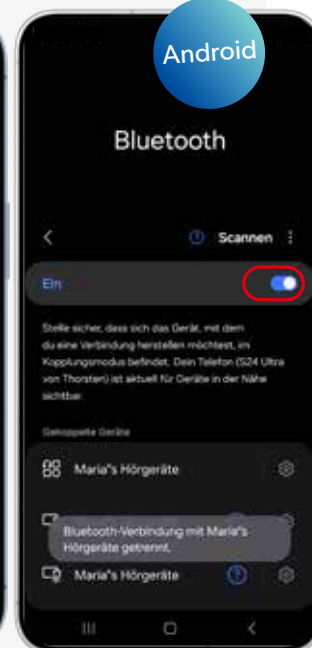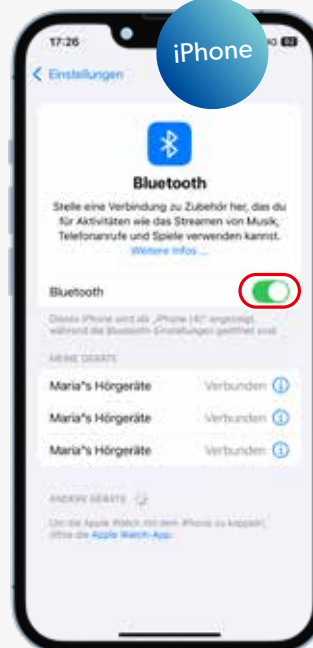


signia

## Mit dem PC koppeln

Wenn Sie eine eventuelle Verbindung zu einer anderen Bluetooth-Quelle (z. B. Smartphone) getrennt haben, ist der Weg frei für die Kopplung mit dem Bluetooth-fähigen PC.

- Bluetooth in der Windows-Suchleiste eingeben
- „Bluetooth- und andere Geräteeinstellungen“ anklicken

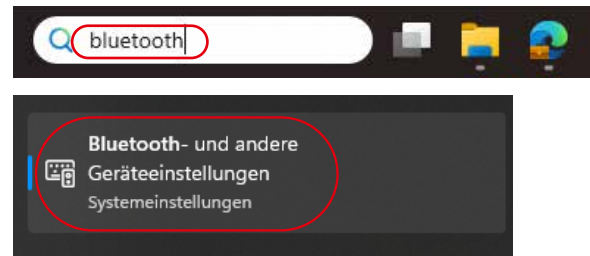


- Bluetooth einschalten
- **Pure Charge&Go BCT IX aus- und wieder einschalten**

### Bluetooth und Geräte > Geräte



- „Gerät hinzufügen“ antippen
- Master-Hörgerät in der Liste unten wählen und verbinden (Vorname des/r HörgeräteträgerIn)

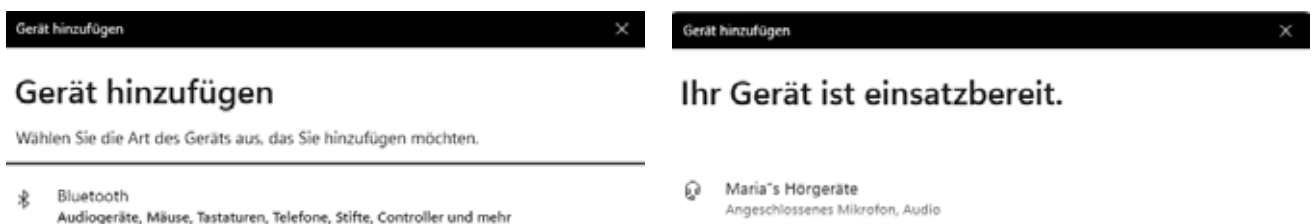

## Verbindung zum PC trennen

### Weg 1: Am einfachsten: Bluetooth am PC ausschalten

Trennen Sie die Verbindung zu den Hörgeräten, wenn von einer anderen Bluetooth-Quelle gestreamt werden soll.

**Weg 2:** Master-Hörgerät vom PC "Trennen", falls Bluetooth auf dem PC für andere Anwendungen aktiv bleiben soll. Zuerst die drei Punkte neben dem Akkustand antippen.



### Tipp:

Das „Verbinden“ geht beim nächsten Mal schneller.