

One Pager

Direct-Streaming für jedes Smartphone – Bluetooth ist nicht gleich Bluetooth



Es gibt Bluetooth®-Protokolle, die auf Bluetooth Classic basieren und Bluetooth-Protokolle, die auf Bluetooth Low Energy (BT LE) basieren. Die Verbindung wird vor allem vom Smartphone bestimmt, denn das aktuelle Signia Hörgeräteportfolio bedient jedes Bluetooth-Protokoll.

Für Bluetooth Classic bieten wir ein spezielles Hörgerätemodell: Pure Charge&Go BCT IX. Alle anderen Bluetooth-fähigen Hörgeräte von Signia verbinden sich per Bluetooth LE. Sie sind Made for iPhone und verarbeiten auch ASHA und LE Audio.

Hörgeräte mit Bluetooth Low Energy oder Bluetooth Classic?

Signia Pure Charge&Go BCT IX wurde dafür entwickelt, mit 99% aller Smartphones kompatibel zu sein, auch mit älteren Smartphones. Wer auf die zukünftige Entwicklung von LE Audio setzt oder Apple-eigene Funktionen mit seinem iPhone nutzen möchte, verzichtet lieber auf Bluetooth Classic und entscheidet sich am besten für unsere anderen Hörgeräte, die auf der linken Seite abgebildet sind.



Motion C&G IX (M, P, SP)

Pure C&G IX

Pure C&G T IX

Styletto IX

Active (Pro) IX

Volle Leistung der IX Plattform
Verbindung via MFi, LE Audio, ASHA.



Pure C&G BCT IX

Volle Leistung der IX Plattform
Verbindung via Bluetooth Classic

Wussten Sie, dass...

... sich Smartphones mit Bluetooth Classic mit nur einem der beiden Hörgeräte, dem Master-Gerät (rechts), verbinden?

... die ultraschnelle und stromsparende Rechts-Links-Synchronisation via e2e wireless 4.0 (Near field magnetic induction, NFMI) in gerade einmal 2 Mikrosekunden stattfindet, sodass echtes stereophones Hören möglich wird?



signia

Pure Charge&Go BCT IX koppeln

Android oder iOS? Egal! Der Kopplungsprozess von Pure Charge&Go BCT IX mit Android und iOS ist gleich.

Tipp:

Pure Charge&Go BCT IX koppeln: zuerst die Signia App öffnen, denn die App führt durch den Kopplungsprozess.

Hinweis: Pure Charge&Go BCT IX werden separat mit der Signia App (zwei Geräte) und dem Mastergerät (ein Gerät) gekoppelt, wodurch es am Ende dreimal in der Bluetooth-Liste des Smartphones erscheint.

Step 1: BCT mit der App

1. Signia App öffnen und „Bluetooth“ wählen
2. Hörgeräte neu starten (aus- und wieder einschalten)
3. Beide Hörgeräte erscheinen mit ihren Seriennummern. Hörgeräte antippen.
4. Auf „Koppeln“ tippen, danach das zweite Hörgerät koppeln

Step 2: BCT mit dem Smartphone

1. Gehen Sie in die „Einstellungen“ des Smartphones → „Bluetooth“. Sie sehen zwei Hörgeräte „Verbunden“.
2. Hörgeräte aus und wieder einschalten. Nun erscheint Pure BCT ein drittes Mal unter „Andere Geräte“.
3. Auf den dritten Eintrag der Hörgeräte tippen. Das Smartphone verbindet sich daraufhin mit dem Master-Hörgerät und ist bereit für Streaming.



Alle anderen Bluetooth-fähigen Signia Hörgeräte koppeln

Diese Signia Hörgeräte werden per Bluetooth Low Energy (BT LE) gekoppelt: Pure Charge&Go IX, Pure Charge&Go T IX, Styletto IX, Active (Pro) IX

Tipp:

Android koppeln: Zuerst die App öffnen.

iPhone koppeln: Zuerst das Einstellungsmenü des iPhones öffnen.

Wie koppelt man Signia **BT LE Hörgeräte*** mit einem **Android** (ASHA / LE Audio)?

Mit Signia App und Android Smartphone koppeln

1. Signia App öffnen und Bluetooth wählen
2. Hörgeräte neu starten (aus- und wieder einschalten) und mit „okay“ bestätigen. Beide Hörgeräte erscheinen
3. Bitte klicken Sie auf den Pfeil nach rechts. Es erscheinen zwei Kopplungsanfragen.
4. Kopplung zweimal bestätigen.

Wie koppelt man Signia **BT LE Hörgeräte*** mit einem **iPhone**?

Step 1: Mit dem iPhone

1. Hörgeräte aus- und wieder einschalten.
2. Gehen Sie auf Ihrem iPhone zu Einstellungen → Bedienungshilfen → Hörhilfen
2. Tippen Sie auf „...s Hörgerät“. Darauf achten, dass (R+L) angezeigt wird.
3. Kopplung zweimal bestätigen.

Step 2: Mit der App koppeln

1. Signia App öffnen und Bluetooth wählen
2. Hörgeräte neu starten (aus- und wieder einschalten). Beide Hörgeräte erscheinen mit Seriennummer
3. Bitte klicken Sie auf den Pfeil nach rechts. Die Geräte sind gekoppelt

