

One Pager

Insio Charge&Go IX – unsere maßgefertigten Akku-IdOs



Was sollten Sie wissen, wenn Sie Insio Charge&Go CIC IX anpassen?

Ob EinsteigerIn oder IX ExpertIn – diese Serie stellt die Bauformen der IX Hörgeräte kompakt aus Praxissicht vor. Heute im Fokus: Insio Charge&Go CIC IX.

1. Kurzprofil

- Kleinstes maßgefertigtes Im-Ohr-Hörgerät mit Akku und OneMic-Richtmikrofon

Geeignet für

- Leichte bis stärkere Hörverluste, drei Hörerstärken zur Auswahl
- Max. Verstärkung: 50 / 55 / 60 dB (2-ccm-Kuppler)
- Max. Ausgangspegel: 113 / 118 / 124 dB SPL (2-ccm-Kuppler)

Praxis-Tipp: Probeanpassung mit Silk Charge&Go IX (Instant Fit) vor der Maßanfertigung. Am besten geschlossene Sleeves verwenden. Höhere Verstärkung als Silk und flexible Abdichtung durch maßgefertigte Schale mit unterschiedlichen Vent-Optionen.

2. Sind Insio Charge&Go IX Bluetooth-fähig?

Nein. Fernbedienung erfolgt über die Signia App oder miniPocket durch akustische Signalübertragung.

Praxis-Tipp: Im Beratungsgespräch klare Erwartungssteuerung: Ideal für KundInnen, bei denen Unauffälligkeit und Passgenauigkeit im Vordergrund stehen.



3. Wie erfolgt die Programmierung?

Ausschließlich über ConnexxAir

Praxis-Tipp: Bei sehr tiefsitzenden Hörgeräten die Antennenschlaufe ggf. über die Ohren statt im Nacken führen – für stabilere Verbindung.

4. Welcher Charger wird verwendet?

Portable Charger Insio CIC

Praxis-Tipp: Kompaktes Lade-Etui mit integrierter Powerbank – ideal für mobiles Laden unterwegs.

