

One Pager

Motion Charge&Go IX – unsere robusten HdOs



Was sollten Sie wissen, wenn Sie Motion Charge&Go IX anpassen?

In dieser Serie stellen wir die Bauformen der IX Hörgeräte kompakt aus Praxissicht vor. Heute im Fokus: **Motion Charge&Go IX**.



1. Kurzprofil

- Robuste Hinter-dem-Ohr-Hörgeräte M, P, SP mit zwei Tastern in 14 Farben
- LED-Anzeige für Ein-/Ausschalten
- Sichtfenster für Seriennummer
- Optional: ThinTube 3.0 (für M und P)

Geeignet für

- Modelle M, P, SP für leichte bis an Taubheit grenzende Hörverluste
- Max. Verstärkung: 60/77/82 dB (2-ccm-Kuppler)
- Max. Ausgangspegel: 133/135/140 dB SPL (2-ccm-Kuppler)

Praxis-Tipp: Besonders robust und nahezu alle Hörverluste versorgbar – bis an Taubheit grenzend. Jedes Modell mit integrierter Telefonspule. Motion M kaum größer als Pure.

2. Sind Motion Charge&Go IX Bluetooth-fähig? Ja.

- Made for iPhone/ASHA/LE Audio
- Streaming & Hands-free-Telefonie
- Signia App inkl. 24/7 Signia Assistant

Praxis-Tipp: Zuverlässige Streaming-Nutzung auch mit Super Power Verstärkung. Motion SP bis zu 70 Stunden Laufzeit.


3. Programmierung ausschließlich über Noah Link Wireless

Praxis-Tipp: Firmware-Updates regelmäßig durchführen – Connexx informiert automatisch.

4. Welche Charger stehen zur Verfügung?

- Motion Charge&Go M IX: Desktop Charger Motion M
- Motion Charge&Go P IX: Desktop Charger Motion P oder Dry&Clean Charger Motion P
- Motion Charge&Go SP IX: Desktop Charger Motion SP oder Dry&Clean Charger Motion SP

Praxis-Tipp: Offener Desktop Charger bei eingeschränkter Feinmotorik, Dry&Clean Charger für beste Pflege durch Trocknung und UV-Licht-Desinfektion.

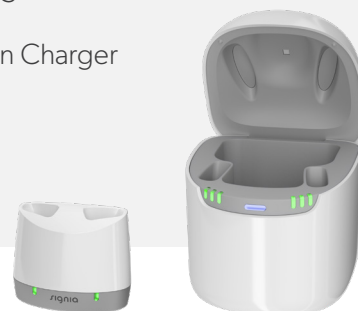

Desktop Charger
für M, P, SP

Dry&Clean Charger
für P, SP