

One Pager

Silk Charge&Go IX – unsere Kleinsten



Was sollten Sie wissen, wenn Sie Silk Charge&Go IX anpassen?

In dieser Serie stellen wir die Bauformen der IX Hörgeräte kompakt aus Praxissicht vor. Heute im Fokus: **Silk Charge&Go IX**.

1. Kurzprofil

- Kleinstes Im-Ohr-Hörgerät mit Akku und OneMic-Richtmikrofon
- Instant Fit (keine Maßanfertigung)
- sDemo-Modell direkt verfügbar

Geeignet für

- Leichte bis mittlere Hörverluste
- Max. Verstärkung: 50 dB (2-ccm-Kuppler)
- Max. Ausgangspegel: 114 dB SPL (2-ccm-Kuppler)

Praxis-Tipp: Sehr unauffällig im Ohr. Ideal als niedragschwelliges Testangebot für EinsteigerInnen und als Probeversorgung vor einer späteren IdO-Maßanfertigung.

2. Sind Active Mini IX Bluetooth-fähig? Nein.

Fernbedienung über die Signia App oder miniPocket (akustische Signalübertragung) möglich.

Praxis-Tipp: Im Beratungsgespräch klare Erwartungssteuerung: optimal für KundInnen, bei denen Unauffälligkeit im Vordergrund steht.

3. Programmierung ausschließlich über ConnexxAir

Praxis-Tipp: Bei sehr tiefsitzenden Hörgeräten Antennenschlaufe ggf. über die Ohren führen – für stabilere Verbindung.

4. Charger: Portable Charger Silk

Praxis-Tipp: Kompaktes Lade-Etui mit Power Bank – besonders geeignet für aktive und reisefreudige KundInnen.

