

One Pager

Styletto IX – unsere Schönsten



Was sollten Sie wissen, wenn Sie Styletto IX anpassen?

In dieser Serie stellen wir die Bauformen der IX Hörgeräte kompakt aus Praxissicht vor. Heute im Fokus: **Styletto IX**.

1. Kurzprofil

- Schlanke Design-Hörgeräte mit exklusiver Bauform
- RIC-Hörgeräte ohne Taster
- Anpassbar mit RIC-Otoplastik oder Standard-Sleeves

Geeignet für

- Leichte bis hochgradige Hörverluste
- Hörer: S, M, P (kein HP)
- Max. Verstärkung: 46 / 60 / 65 dB (2-ccm-Kuppler)
- Max. Ausgangspegel: 110 / 119 / 122 dB SPL (2-ccm-Kuppler)

Praxis-Tipp: Ultraschlankes Design – ideal für designaffine KundInnen und BrillenträgerInnen. Außergewöhnliche Farbgebung ohne Bedienelemente. Kein HP-Hörer verfügbar.

2. Sind Styletto IX Bluetooth-fähig? Ja!

- Made for iPhone, ASHA, LE Audio
- Streaming & Hands-free-Telefonie
- Signia App & 24/7 Signia Assistant

Praxis-Tipp: Aufgrund des schlanken Gehäuses etwas geringere Laufzeiten – besonders bei intensivem Streaming. Streaming-Verhalten im Beratungsgespräch gezielt klären.

3. Programmierung ausschließlich über Noahlink Wireless

Praxis-Tipp: Styletto Charger oder Multi-Charger in der Anpasskabine vorhalten. Ein- und Ausschalten zum Verbinden mit Connexx ausschließlich über den Charger.

4. Welche Charger stehen zur Verfügung?

- Styletto IX Mobile Charger (Powerbank-Funktion)
- Styletto IX Dry&Clean Charger (Trocknung & UV-Desinfektion)

Praxis-Tipp: Standard für Styletto: Mobile Charger für unterwegs. Beste Pflege durch Trocknung und UV-Licht-Desinfektion mit dem Dry&Clean Charger. Eventuell beide Charger empfehlen.

