

Anpass-Magie mit Signia

Signia Hörgeräte optimal voreinstellen – in 5 Schritten

Schritt 1 Auswahl der akustischen Ankopplung und der Anpassformel

Otoplastik oder Dome/Sleeve und Art der Belüftung

Bei Signia Anpassformeln:

- Einsteiger: Erstanpassung
- Routiniert: HörgeräteträgerInnen mit erster Erfahrung
- Power: Langjährige HörgeräteträgerInnen

Unsere Anpassformel berücksichtigt: Luftleitung, Knochenleitung, Unbehaglichkeitsschwelle, Alter und Geschlecht, monaural/binaural, akustische Ankopplung, Hörgeräte-Bauform

Schritt 2 InSituGram messen

Schritt 3 Schwelle der kritischen Verstärkung messen (Rückkopplungstest)

Schritt 4 Own Voice Processing (OVP) – wenn verfügbar

Die eigene Stimme bekommt ihre natürlich Balance zurück und wird für die Gesprächserkennung berücksichtigt.

- Bis IX Plattform: immer messen
- Ab MaX Plattform: kein Einmessen erforderlich

Unser Tipp: Schneller ans Ziel in der Feinanpassung mithilfe von KI.
Nutzen Sie den Signia Assistant als Ihr persönliches Werkzeug.

Die richtige App für das richtige Signia Hörgerät



Signia App:
für alle Signia Hörgeräte bis IX



Signia One App:
für alle Signia Hörgeräte ab MaX



Jetzt Kurs im
Be Brilliant Lab starten:





Connexx: KI zum Einstellen




Mit Connexx 10.0 wird die Anpassung von Signia Hörgeräten noch intelligenter und individueller. Acoustic Intelligence™ analysiert Sprache, eigene Stimme, Hörumgebung und Störgeräusche mit vier Deep Neural Networks. Connexx ermöglicht Ihnen, gezielt in die Gesprächsunterstützung und den Klang einzugreifen – auch wenn die Signalverarbeitung im Hintergrund durch KI unterstützt wird.

Gesprächsklang verfeinern

Im Reiter „Gespräch“ passen Sie die Einstellungen für Gespräche **in ruhigen, mäßig lauten oder lauten Umgebungen** an. Zum Beispiel Zuhause, im Café oder bei der Familienfeier. Änderungen in einer Kategorie beeinflussen die anderen nicht.

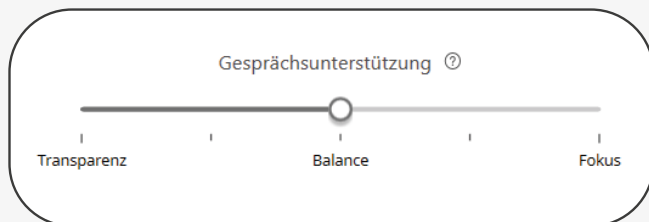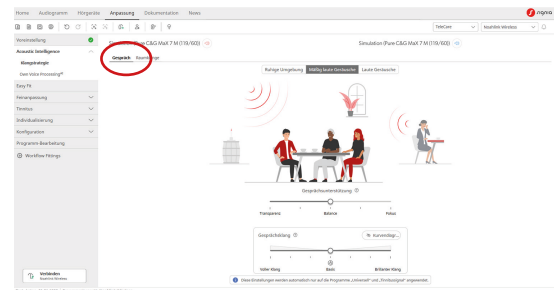



Verbessert die Gesprächsqualität, indem SprecherInnen aus den Umgebungsgeräuschen hervorgehoben werden. Einstellung kann für jede Gesprächskategorie individuell angepasst werden.

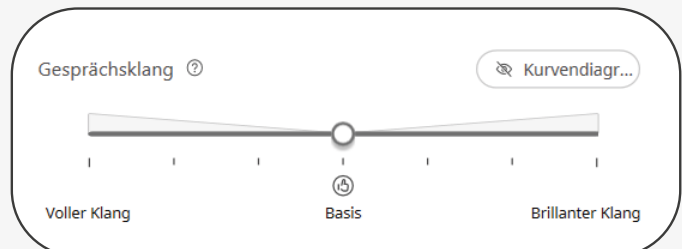

Dieser Steller verändert die Betonung der Sprachfrequenzen – von voll und warm bis brilliant. Ganz rechts werden hohe Frequenzen gezielt betont, um die Verständlichkeit weiter zu verbessern.

Raumklänge verfeinern

Im Bereich „Raumklänge“ passen Sie sprachfreie Hörsituationen gezielt an: Allgemeines, Auto, Straßenverkehr, Musik, leise Umgebung. Ein Regler (7 Stufen) verändert die frequenzabhängige Verstärkung auf Basis der Anpasskurve. Auswirkungen lassen sich direkt in der Kurvenansicht prüfen.

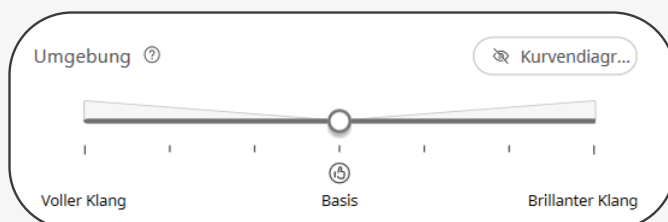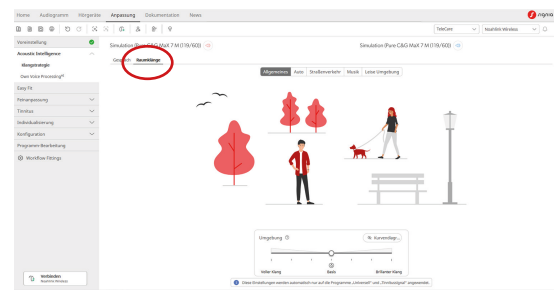

Hier lässt sich die Präsenz von Umgebungsgeräuschen von voll bis brilliant einstellen. „Brillant“ hebt hochfrequente Details wie Fahrradklingeln an und verbessert so die Orientierung.



signia