

Guía BCT IX: Emparejamiento Android™ con Signia App para transmisión de audio



Tus audífonos utilizan dos tipos de conexiones Bluetooth®.

Bluetooth LE conecta cada audífono individualmente a Signia App para realizar ajustes por control remoto. El emparejamiento se realiza a través de Signia App.

Bluetooth Classic conecta tus audífonos para transmitir llamadas y audio. El emparejamiento se realiza a través del menú Bluetooth del teléfono.

Sigue los sencillos pasos que se indican a continuación para emparejar los audífonos para el uso y la transmisión de Signia App. Estas instrucciones son una guía general, ya que los detalles del menú pueden variar según el teléfono Android.

PASO 1


Descarga Signia App (versión 2.7.10 o posterior).



PASO 2

Enciende el Bluetooth de tu teléfono.

Nota: Si tus audífonos ya están emparejados con otro dispositivo cercano, apaga el Bluetooth de ese otro dispositivo antes de iniciar el proceso de emparejamiento.

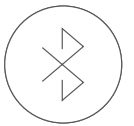


PASO 3

Abre **Signia App**.



PASO 4

Pulsa la opción de **emparejamiento Bluetooth**.

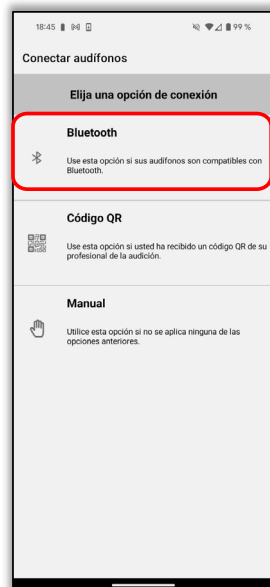

PASO 5

Apaga y vuelve a encender los audífonos.


Colócalos en el cargador durante 5 segundos y, a continuación, retíralos. El LED verde se iluminará y el audífono estará listo para emparejarse.

Toca **Aceptar**.




PASO 6

Cuando aparezcan tus audífonos, **toca su nombre** para seleccionarlos.

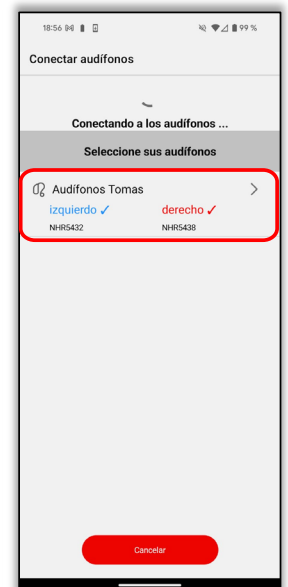


PASO 7

Aparecerá una solicitud de emparejamiento Bluetooth — **pulsa Emparejar**. Si estás emparejando dos audífonos, aparecerá una segunda solicitud unos segundos después — **pulsa Emparejar** otra vez.

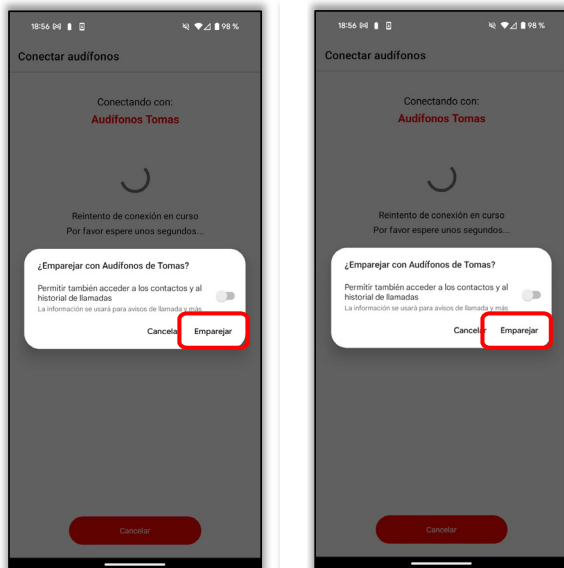

PASO 8

Los audífonos ya están emparejados con Signia App. **Toca la flecha junto a Activar transmisión para emparejarlos para la transmisión de audio.**

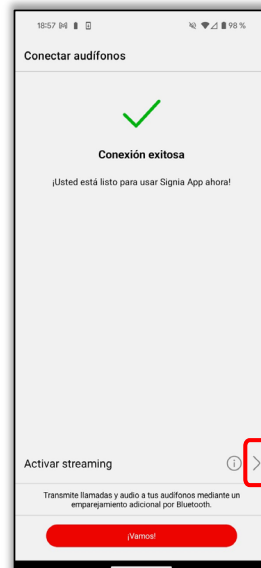


PASO 9

Pulsa Abrir ajustes del smartphone para abrir directamente el menú Ajustes del teléfono.



PASO 10



Si es necesario, **pulsa Bluetooth** para abrir el menú Bluetooth. **Apaga los audífonos y vuelve a encenderlos** para ponerlos en modo de emparejamiento.

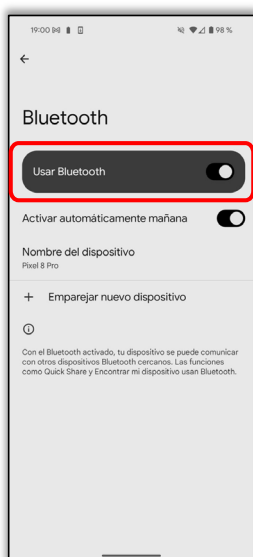

PASO 11

Tus audífonos aparecerán en Dispositivos emparejados. Estos son los emparejamientos de Signia App, y puedes ver uno o dos listados dependiendo del teléfono.

También aparecerán una vez en Dispositivos disponibles (toca Buscar si no lo están). **Toca el audífono disponible** y, a continuación, **toca Emparejar cuando se te solicite** – esto emparejará tus audífonos conjuntamente para la transmisión de audio.

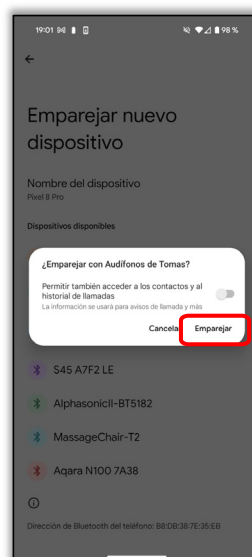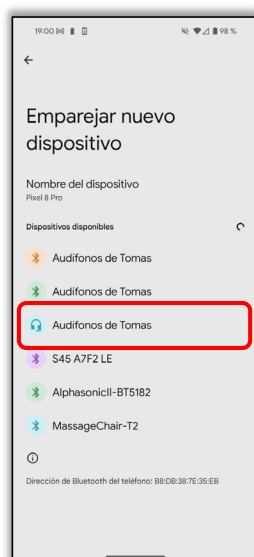

PASO 12

Ya estás listo para disfrutar de la transmisión de audio a tus audífonos.

