

# Guía BCT IX: Cambiar entre dispositivos emparejados



Tus audífonos BCT IX se pueden emparejar con varios dispositivos. La conexión para transmitir audio solo está activa en un dispositivo a la vez. Aquí te explicamos cómo puedes cambiar fácilmente entre los distintos dispositivos emparejados.

- **Signia App: Ajustes mediante control remoto**

Puedes usar Signia App en cualquier momento y desde cualquier teléfono emparejado para hacer ajustes con el control remoto (por ejemplo, cambiar el volumen o el programa de audición), sin necesidad de realizar ningún paso adicional.

- **Transmisión de audio: Cambiar entre dispositivos emparejados**


Simplemente desconéctate de la conexión Bluetooth de un dispositivo y conéctate al otro.

*Nota: no necesitas desemparejar o volver a emparejar los dispositivos cada vez; consulta los ejemplos a continuación.*


## EJEMPLO 1 Cambiar la conexión de un iPhone® a un ordenador

1. Desconecta tus audífonos del teléfono utilizando uno de estos métodos:

Apaga el Bluetooth de tu teléfono.

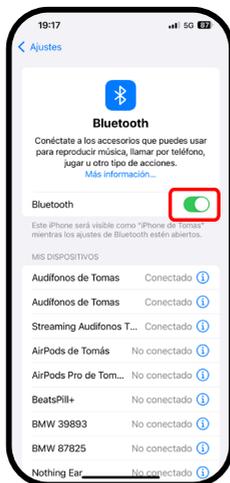

En el menú de Bluetooth del teléfono, toca el icono ⓘ junto a la conexión de los audífonos para transmisión y luego toca **Desconectar**.

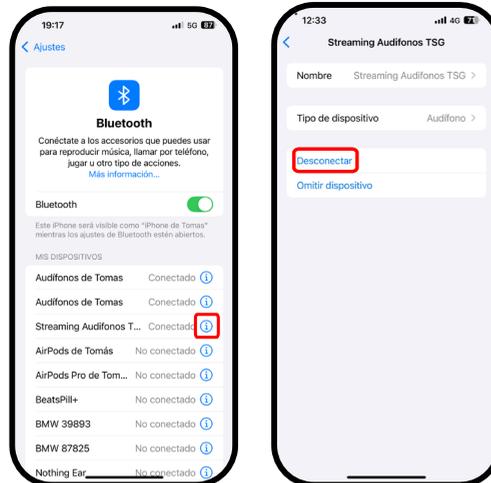

En este ejemplo, el audífono con la conexión de transmisión fue renombrado para que sea más fácil de identificar.


2. En tu ordenador, abre el menú de **Bluetooth y dispositivos** y haz clic en **Conectar** junto a tus audífonos.




## EJEMPLO 2 Cambiar la conexión de un teléfono Android™ a un ordenador

1. Desconecta tus audífonos del teléfono utilizando uno de estos métodos:

Apaga el Bluetooth de tu teléfono.

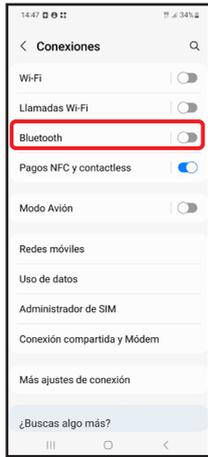

En el menú de Bluetooth del teléfono, abre los **detalles del dispositivo**  y **desconecta** el audífono de transmisión.

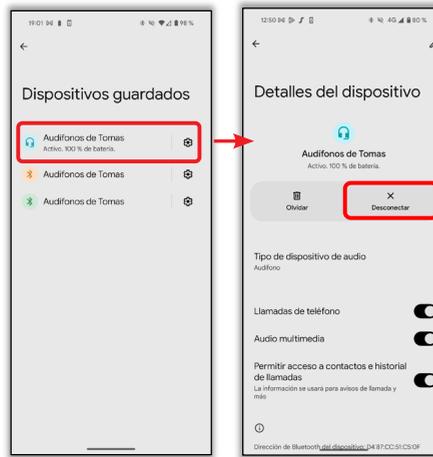

En este ejemplo, toca el nombre de los audífonos para alternar entre conectado y desconectado.

2. En tu ordenador, abre el menú de **Bluetooth y dispositivos** y haz clic en **Conectar** junto a tus audífonos.



## EJEMPLO 3 Cambiar la conexión de un ordenador a un teléfono

Desconéctate del ordenador:

1. Abre el menú de **Bluetooth y dispositivos** en tu ordenador.
2. Haz clic en los **tres puntos** **•••** que aparecen a la derecha del nombre de tus audífonos.
3. Haz clic en **Desconectar**.
4. Para volver a conectar tu teléfono, abre el menú de **Bluetooth** en el teléfono.
5. Toca el **nombre de los audífonos** que aparece para la transmisión.

