

Guía BCT IX: Emparejamiento iPhone® con Signia App para transmisión de audio



Tus audífonos utilizan dos tipos de conexiones Bluetooth.

Bluetooth LE conecta cada audífono individualmente a Signia App para ajustes de control remoto. El emparejamiento se realiza a través de Signia App.

Bluetooth Classic conecta tus audífonos para transmitir llamadas y audio. El emparejamiento se realiza a través del menú Bluetooth de tu teléfono.

Sigue los sencillos pasos a continuación para emparejar los audífonos para el uso de Signia App y la transmisión.

PASO 1


Descarga Signia App (versión 2.7.10 o posterior).



PASO 2


Activa el Bluetooth de tu teléfono.

Nota: Si tus audífonos ya están emparejados con otro dispositivo cercano, apaga el Bluetooth de ese otro dispositivo antes de iniciar el proceso de emparejamiento.

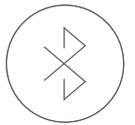


PASO 3

Abre Signia App.

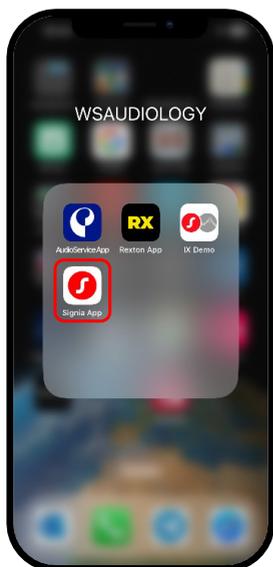

PASO 4

Pulsa la opción de emparejamiento Bluetooth.

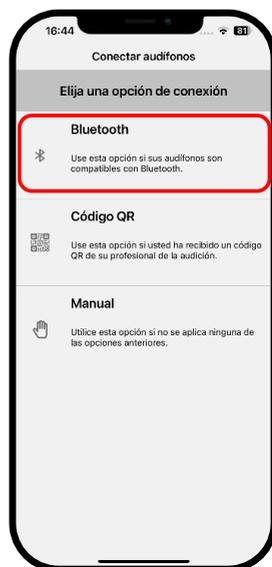


PASO 5

Apaga y vuelve a encender los audífonos.


Colócalos en el cargador durante 5 segundos y, a continuación, retíralos. El LED verde se iluminará y el audífono estará listo para emparejarse.

Pulsa **Aceptar**.

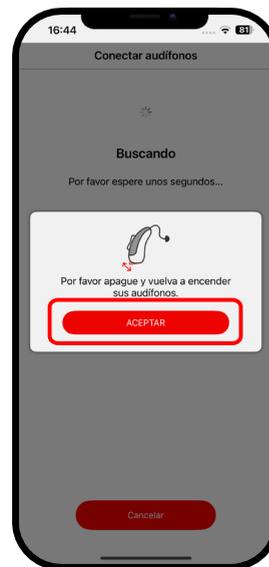

PASO 6


Cuando aparezcan tus audífonos, **toca su nombre** para seleccionarlos.

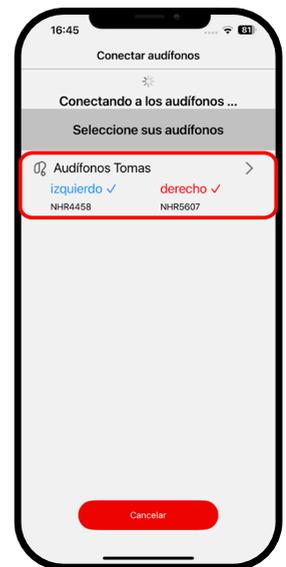

PASO 7

Aparecerá una solicitud de emparejamiento Bluetooth — **pulsa Emparejar.**

Si estás emparejando dos audífonos, esto ocurrirá dos veces.

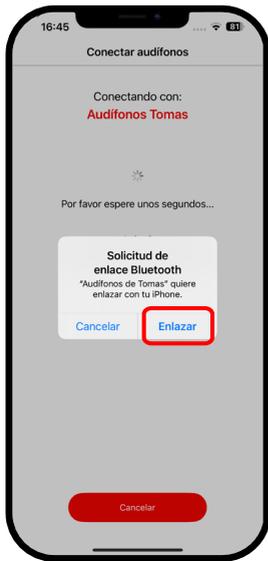

PASO 8

Los audífonos ya están emparejados con Signia App.

Los siguientes pasos los emparejarán para la transmisión de audio.



PASO 9


Abre el menú **Ajustes** del teléfono y, a continuación, **pulsa Bluetooth** para abrir el menú Bluetooth.

Apaga y vuelve a encender los audífonos para ponerlos en modo de emparejamiento.



PASO 10

Verás dos audífonos conectados en Mis dispositivos (los emparejamientos de Signia App). Aparecerá un tercer audífono en Otros dispositivos. **Pulsa el nombre del audífono** para emparejarlo.

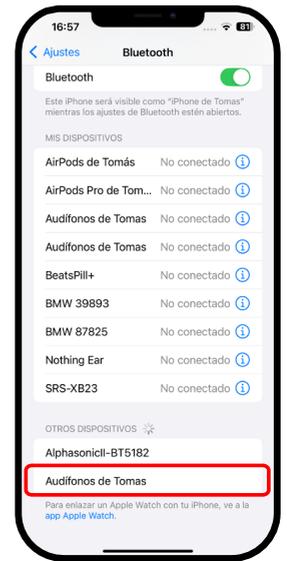


Opcional: Personaliza el nombre de la conexión de streaming

Recomendado para distinguir fácilmente la conexión de transmisión de audífonos de las conexiones de Signia App.

PASO 11

Toca el ⓘ icono situado junto al audífono recién emparejado.


Solo el audífono emparejado para la transmisión mostrará las opciones de menú de los pasos 12 y 13.

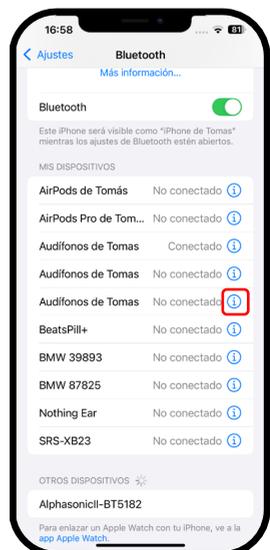

PASO 12

Pulsa la flecha situada a la derecha del nombre del audífono. **Escribe un nuevo nombre** para este emparejamiento.

Se recomienda "Audífono streaming".

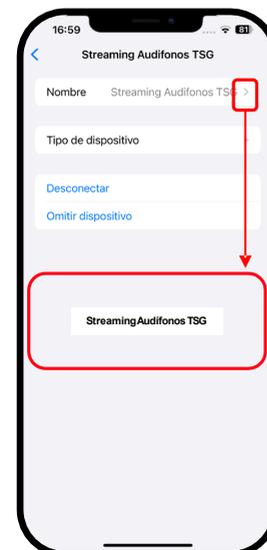

FINALIZADO

Ya estás listo para disfrutar de la transmisión de audio a tus audífonos.

