

Guía BCT IX: Conexión a PC para transmisión de audio



PASO 1

Apaga y enciende los audífonos introduciéndolos en el cargador durante 5 segundos y volviéndolos a sacar. El LED verde se iluminará durante 6 segundos y los audífonos estarán listos para emparejarse.

Nota: Si tus audífonos ya están emparejados con otro dispositivo cercano, apaga el Bluetooth de ese otro dispositivo antes de apagar y volver a encender los audífonos.


PASO 2

Abre **Ajustes** haciendo clic en el icono de Windows de la barra de tareas situada en la parte inferior de la pantalla y, a continuación, en **Configuración**.




PASO 3

En la parte izquierda de la pantalla de Configuración, selecciona **Bluetooth y dispositivos**.

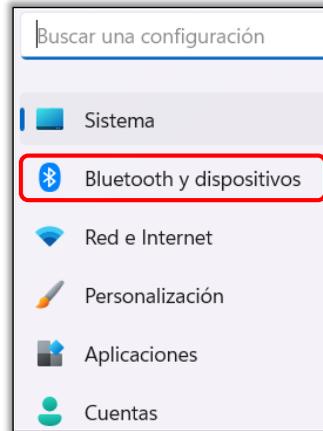


PASO 4

Asegúrate de que la opción Bluetooth está activada y haz clic en **Añadir dispositivo**.

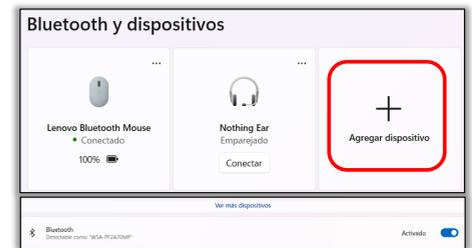


PASO 5

Haz clic en **Dispositivo Bluetooth**.

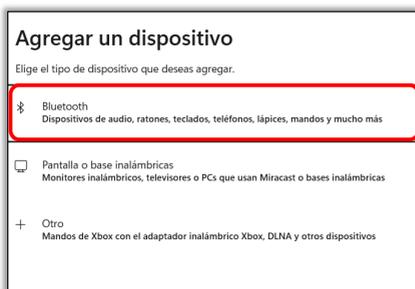

PASO 6

Los audífonos pueden tardar unos instantes en aparecer. Haz clic en el **nombre del audífono** para completar el proceso de emparejamiento.

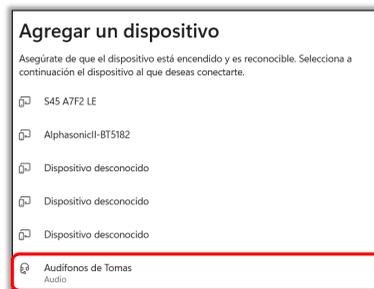

FINALIZADO

Disfruta de la transmisión desde tu ordenador a tus audífonos Pure Charge&Go BCT IX.

