


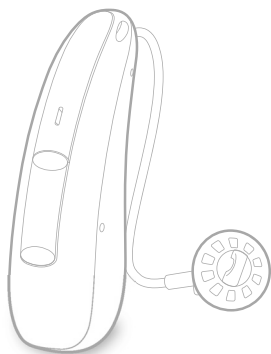

CROS Pure C&G AX

Manual del operador



Contenidos

Bienvenido	4
Su transmisor CROS	5
Componentes y nombres	7
Controles	9
Programas de audición	10
Tonos de aviso	10
Uso diario	11
Colocación y extracción del transmisor	11
Conexión y desconexión	16
Cambio al modo de reposo	17
Cambio del programa de audición	18
Bluetooth®	18
Carga	19
Mantenimiento y cuidados	21
Transmisor	21
Moldes	23
Mantenimiento profesional	25

Información adicional	26
Accesorios	26
Explicación de los símbolos	26
Condiciones de funcionamiento, transporte y almacenamiento	28
Información sobre la eliminación	29
Solución de problemas	30
Información de conformidad	30
Información específica por país	33
Información importante de seguridad	34
Pila recargable de iones de litio (batería)	34
Seguridad personal	36
Seguridad del producto	40
Servicio y garantía	43

Bienvenido

Gracias por elegir nuestros accesorios para audífonos.

Con este manual y con la ayuda su especialista en audición descubrirá las ventajas y la mejora en la calidad de vida que le ofrece este accesorio.



ATENCIÓN

Es importante que lea detenidamente este manual del operador de principio a fin. Observe la información de seguridad para evitar daños o lesiones.


También es importante leer y observar el manual del operador y el manual de seguridad del audífono que usted utilice con este accesorio.

Su transmisor CROS

Las soluciones CROS se han diseñado para personas con una pérdida de audición profunda en un oído que no se puede mejorar con el uso de un audífono. El transmisor CROS colocado en ese oído captura el sonido de ese lado y lo transmite al audífono del otro oído. Esto permite al usuario del audífono escuchar los sonidos de ambos lados.

transmisor CROS

audífono

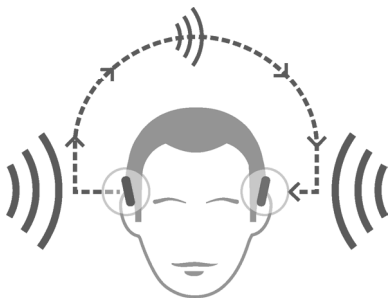

Hay dos soluciones disponibles:

- **Solución CROS:**

Para personas con una audición normal en un oído y una pérdida profunda de audición en el oído contrario. Los sonidos procedentes del lado con pérdida de audición se capturan y se transmiten de forma inalámbrica al lado que cuenta con una buena audición.

- **Solución BiCROS:**

Para personas con una pérdida profunda de audición en un oído y una pérdida de audición menos grave en el oído contrario. Los sonidos procedentes del lado con una pérdida de audición más grave se capturan y se transmiten de forma inalámbrica al lado que cuenta con una mejor audición. El audífono procesa y amplifica los sonidos de los dos lados.


El transmisor CROS funciona con nuestros audífonos inalámbricos específicos. Su especialista en audición le informará sobre los modelos compatibles.



AVISO

Este manual del operador solo es válido para el transmisor CROS. El audífono incluye un manual del operador aparte.

Componentes y nombres

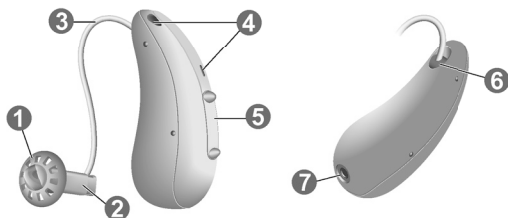

① Molde

② Auricular

③ Cable del auricular

④ Orificios del
micrófono

⑤ Conmutador
(control, interruptor
de encendido/apagado)

⑥ Indicador lateral
(rojo = oído derecho,
azul = oído izquierdo)
y conexión del auricular

⑦ Contactos de carga

Puede utilizar los moldes estándar siguientes:

Moldes estándar	Tamaño
☐  Sleeve 3.0, Vented, Closed, Power	
☐  Eartip 3.0 Open	
☐  Eartip 3.0 Tulip	

Los moldes estándar son muy fáciles de sustituir. Obtenga más información en la sección "Mantenimiento y cuidado".

Moldes a medida

- | |
|---|
| ☐  Earmold 3.0 |
|---|

Controles

Con el conmutador podrá, por ejemplo, cambiar de programa de audición. Su especialista en audición ha programado las funciones deseadas para el conmutador.

Función del conmutador	L	R
Pulsación corta:		
Subir/Bajar programa	☐	☐
Subir/Bajar volumen	☐	☐
Subir/Bajar nivel CROSS	☐	☐
Pulsación de unos dos segundos:		
Subir/Bajar programa	☐	☐
Subir/Bajar volumen	☐	☐
Subir/Bajar nivel CROSS	☐	☐
Pulsación de más de tres segundos:		
Encender/Apagar	☐	☐

L = izquierda, R = derecha



También puede utilizar un control remoto para cambiar los programas de audición y ajustar el volumen de los audífonos. Con nuestra aplicación para smartphones, dispone incluso de más opciones de control.

Programas de audición

1

2

3

4

5

6

Obtenga más información en la sección
"Cambio del programa de audición".

Tonos de aviso

Los tonos de aviso del transmisor CROS, como el pitido indicador de batería baja, se envían al audífono.

Pregunte a su especialista en audición para configurar los tonos de aviso.

Uso diario

Colocación y extracción del transmisor

Las marcas de color indican el lado:


- Marca roja = Oído derecho
- Marca azul = oído izquierdo




Colocación del dispositivo:

- En el caso de Sleeves, asegúrese de que la curvatura del Sleeve esté alineada con la curva del cable del auricular. Observe estas imágenes.

Correcto:

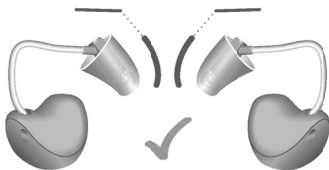


Incorrecto:

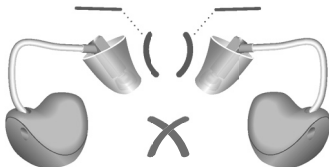

- ▶ Sujete el cable del auricular por la curva más próxima al molde.
- ▶ Introduzca con cuidado el molde en el canal auditivo ①.
- ▶ Gírelo un poco para que se asiente bien.

Abra y cierre la boca para evitar la acumulación de aire en el canal auditivo.

- ▶ Levante el dispositivo y deslícelo por la parte superior del pabellón auditivo ②.

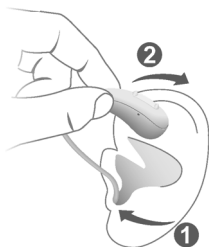

ATENCIÓN

¡Riesgo de lesiones!

- ▶ Use siempre el cable del auricular con un molde.
- ▶ Asegúrese de que el molde esté completamente acoplado.



ATENCIÓN

Peligro de lesiones.

- ▶ Inserte el molde cuidadosamente en el oído y no profundice demasiado.

i

- Puede resultarle más fácil insertar el dispositivo **derecho** con la mano **derecha** y el dispositivo **izquierdo** con la mano **izquierda**.
- Si tiene problemas para insertar el molde, tire suavemente del lóbulo de la oreja hacia abajo con la otra mano. Esto abre el canal auditivo y facilita la inserción del molde.

El filamento de sujeción opcional ayuda a retener de forma segura el molde en el oído. Para acoplar el filamento de sujeción opcional:

- Alinee el extremo del filamento de sujeción con el extremo plano del auricular.



- A continuación, presione el filamento de sujeción hacia el auricular hasta que se encaje con un clic en su sitio.




Para colocar el filamento de sujeción:

- Doble el filamento de sujeción y colóquelo con cuidado en la parte inferior de la cavidad de la oreja (consulte la imagen).



Extracción de un dispositivo:

- ▶ Levante el dispositivo y deslícelo por la parte superior del pabellón auditivo ①.
- ▶ Si su dispositivo dispone de una carcasa personalizada o un molde, extráigalos tirando de la pequeña cuerda de extracción hacia la parte de atrás de la cabeza.
- ▶ Para todos los demás moldes: Sujete el auricular en el canal auditivo con dos dedos y tire de él con cuidado ②.

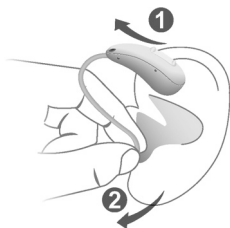

No tire del cable del auricular.



ATENCIÓN

Riesgo de lesiones

- ▶ Muy rara vez, el molde se puede quedar en el oído al extraer el dispositivo. En este caso, pida que un profesional médico se lo extraiga.

Limpie y seque el dispositivo después de utilizarlo.
Puede consultar más información en la sección "Mantenimiento y cuidados".

Conexión y desconexión

Dispone de las siguientes opciones para conectar y desconectar el dispositivo.

Mediante cargador:

- **Conexión:** Retire el dispositivo del cargador.
Se reproduce la melodía de inicio en el audífono. Se restablecen el volumen y el programa de audición **predeterminados**.
- **Desconexión:** Coloque el dispositivo en el cargador.

Para obtener más información, consulte el manual del operador del cargador.

Con el conmutador:

- **Conexión:** Mantenga pulsada la parte inferior del conmutador hasta que la melodía de inicio comience a reproducirse. Suelte el conmutador mientras se reproduce la melodía.

Se restablecen el volumen y el programa de audición **predeterminados**.

- **Desconexión:** Mantenga pulsada la parte superior o inferior del conmutador durante varios segundos. Se reproducirá una melodía de apagado.



Consulte también los consejos sobre la carga en el manual del operador del cargador.

Cambio al modo de reposo

Puede poner el dispositivo en modo de espera (standby) con un telemando o la aplicación para smartphones.

De esta manera, el dispositivo se silencia. Cuando se sale del modo de espera, se recuperan el volumen y el programa de audición utilizados **anteriormente**.

Nota:

- En el modo de espera, el dispositivo **no** está apagado por completo. Sigue consumiendo algo de energía.
Por este motivo, se recomienda utilizar el modo de espera solo durante períodos breves.
- Si desea salir del modo de espera, pero no tiene a mano el control remoto o la aplicación: Apague y vuelva a encender el dispositivo (con el conmutador o colocándolo brevemente en el cargador hasta que se encienda el LED verde). En ese caso, se restablecen el volumen y el programa de audición **predeterminados**.

Cambio del programa de audición

El dispositivo ajusta automáticamente el sonido según la situación auditiva.

Es posible que el dispositivo también tenga varios programas de audición que le permitan cambiar el sonido, si es necesario. Un tono de aviso opcional puede indicar el cambio de programa.

- Para cambiar el programa de audición, presione brevemente el conmutador.

Consulte la configuración del conmutador en la sección "Controles". Para obtener una lista de los programas de audición, consulte la sección "Programas de audición".

Se ha aplicado el volumen predeterminado.

Bluetooth®

Su dispositivo incluye Bluetooth®* tecnología inalámbrica para permitir la transmisión de audio desde teléfonos móviles u otros dispositivos compatibles.

En un avión, es posible que se restrinja el uso de la función Bluetooth, especialmente durante el despegue y el aterrizaje. En ese caso, puede desactivar la tecnología inalámbrica Bluetooth en su dispositivo a través de la aplicación para smartphones.

* Los logotipos y la marca denominativa Bluetooth son propiedad de Bluetooth SIG, Inc. y el uso de dichas marcas por parte de WS Audiology Denmark A/S se realiza bajo licencia. Cualquier otra marca registrada y nombre comercial pertenece a sus respectivos titulares.

Carga

Puede elegir entre tres opciones de cargador:



❶ Pure Charger

❸ Pure Dry&Clean Charger

❷ Pure Portable Charger

- Coloque los audífonos en el cargador.
- Siga las instrucciones del manual del operador del cargador. En el manual del operador del cargador también encontrará consejos útiles para la carga.

Indicación de nivel bajo de batería

Su audífono emitirá un tono de aviso para indicar que la pila recargable de iones de litio del transmisor se está agotando. El tono se repetirá cada 20 minutos. Según el nivel de uso de los audífonos, tiene aproximadamente 1,5 horas para cargar los audífonos antes de que dejen de funcionar.

Tenga en cuenta que el tiempo de ejecución de la batería se reduce si se utilizan demasiadas funciones al mismo tiempo.

Mantenimiento y cuidados

Para evitar daños, es importante que cuide el dispositivo y siga algunas normas básicas que pronto se convertirán en parte de su rutina diaria.

Transmisor

Limpieza

Su dispositivo tiene un revestimiento protector. No obstante, si no se limpia regularmente, pueden producirse daños en el dispositivo o lesiones personales.

- ▶ Limpie el dispositivo a diario con un paño suave y seco.
- ▶ No utilice nunca agua corriente ni sumerja el dispositivo en agua.
- ▶ No aplique nunca presión durante la limpieza.
- ▶ No utilice disolvente alcohólico sobre el contacto de carga.
- ▶ Para evitar la corrosión, use un paño suave y seco para limpiar el sudor o cualquier líquido de los contactos de carga o del audífono antes de colocarlo en el cargador.
- ▶ Pregunte a su especialista en audición sobre los productos de limpieza recomendados y los kits de mantenimiento, o pídale más información sobre cómo mantener el dispositivo en buen estado.



Secado

También se pueden utilizar productos convencionales para secar el dispositivo. Pregunte a su especialista en audición sobre los productos de secado recomendados y sobre instrucciones específicas acerca de cuándo secar el dispositivo.

Almacenamiento

- Almacenamiento a corto plazo (hasta varios días):
Apague el dispositivo con el conmutador o colóquelo en el cargador con tensión.

El cargador debe estar conectado a la fuente de alimentación. Si el cargador no está conectado a la fuente de alimentación y coloca el dispositivo en el cargador, este **no** se apaga.

Tenga en cuenta que si apaga el dispositivo con un control remoto o la aplicación para smartphones, el dispositivo **no** se apaga por completo. Entra en modo de espera y sigue consumiendo algo de energía.

- Almacenamiento a largo plazo (semanas, meses, etc.):
En primer lugar, cargue completamente el dispositivo. Apáguelo con el conmutador antes de guardarlo. Se recomienda usar productos de secado al almacenar el dispositivo.

Deberá cargar el dispositivo cada seis meses a fin de evitar una descarga completa irrecuperable de la pila recargable de iones de litio. Las pilas que se han descargado completamente no pueden volver a cargarse y deben sustituirse. Recomendamos realizar la recarga con más frecuencia que cada seis meses.

Respete las condiciones de almacenamiento de la sección "Condiciones de funcionamiento, transporte y almacenamiento".

Moldes


Limpieza

Puede acumularse cerumen (cera del oído) en los moldes. Esto puede afectar a la calidad del sonido. Limpie los moldes a diario.

Para todos los tipos de moldes:

- Limpie el molde con un paño suave y seco justo después de extraerlo.


De este modo se evita que el cerumen se seque y se endurezca.

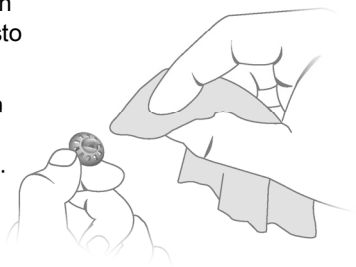


Sustitución

Sustituya los moldes estándar aproximadamente cada tres meses. Sustitúyalos más pronto si observa grietas u otros cambios. El procedimiento para sustituir los moldes estándar depende del tipo de molde. En la sección "Componentes y nombres", su especialista en audición ha marcado el tipo de molde.

- Para retirar el antiguo Eartip o Sleeve, siga las instrucciones que se ilustran a continuación. Tenga cuidado de no tirar del cable del auricular.

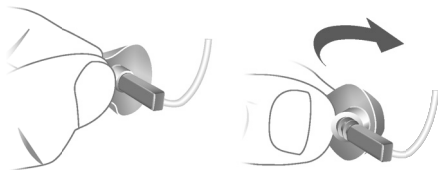

- Asegúrese especialmente de que el nuevo Eartip o Sleeve cubra por completo los anillos de sujeción del auricular.
- Compruebe que el nuevo Eartip o Sleeve encaje firmemente.

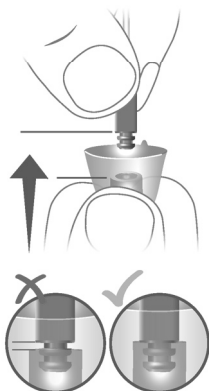

Mantenimiento profesional

El especialista en audición puede realizar una limpieza y un mantenimiento exhaustivos y profesionales.

Los moldes a medida y los filtros de cera deben sustituirse según sea necesario por un especialista en audición.

Solicite a su especialista en audición una recomendación personalizada de los intervalos de mantenimiento y asistencia.

Información adicional

Accesorios

smartphone app se puede utilizar para manejar cómodamente el dispositivo. La aplicación también permite desactivar determinados tonos de señal, crear perfiles de sonido individualizados y muchas otras funciones.

Si desea obtener más información, consulte a su especialista en audición.

Explicación de los símbolos

Símbolos utilizados en este documento



Indica una situación que podría provocar lesiones leves, moderadas o graves.



Indica posibles daños materiales.



Consejos y sugerencias para manejar mejor el dispositivo.

Símbolos en el dispositivo o embalaje



La marca CE certifica la conformidad con determinadas directivas europeas. Consulte la sección "Información de conformidad".



Para ver la etiqueta de conformidad según los requisitos de CEM y de comunicaciones por radio de Australia, consulte la sección "Información de conformidad".



Indica el fabricante legal del dispositivo.



No deseche el dispositivo con la basura doméstica general. Obtenga más información en la sección "Información sobre la eliminación".



Lea y siga las instrucciones del manual del operador.



Dispositivo médico

Condiciones de funcionamiento, transporte y almacenamiento

El dispositivo funciona en las siguientes condiciones ambientales (válidas también entre usos):

Condiciones de funcionamiento	Descarga	Carga
Temperatura	0-50 °C (32-122 °F)	10-35 °C (50-95 °F)
Humedad relativa	5-93 %	5-93 %
Presión atmosférica	700-1060 hPa	700-1060 hPa

En el caso de largos periodos de transporte y almacenamiento, tenga en cuenta las siguientes condiciones:

	Almacenamiento	Transporte
Temperatura (recomendada)	10-25 °C (50-77 °F)	-20-60 °C (-4-140 °F)
Temperatura (rango máximo)	10-40 °C (50-104 °F)	-20-60 °C (-4-140 °F)
Humedad relativa (recomendada)	20-80 %	5-90 %
Humedad relativa (rango máximo)	10-80 %	5-90 %
Presión atmosférica	700-1060 hPa	700-1060 hPa

Tenga en cuenta que es necesario cargar el dispositivo cada seis meses como mínimo. Recomendamos cargar el dispositivo cada tres meses. Para más información, consulte la sección "Mantenimiento y cuidados".

Para otras piezas, como el cargador, pueden aplicarse otras condiciones.



AVISO

Cuando no los esté usando, guarde los audífonos en la caja o el estuche de carga suministrado (según corresponda) y manténgalos fuera del alcance de los niños.



ADVERTENCIA

Riesgo de lesiones, incendio o explosión durante el transporte.

- Transporte las baterías de litio y los audífonos según la normativa local.

Información sobre la eliminación

- Para evitar la contaminación medioambiental, no tire las baterías ni los dispositivos en la basura doméstica.
- Recicle o elimine el embalaje, las baterías y los dispositivo según la normativa local.

Solución de problemas

Problema y posibles soluciones

El audífono emite tonos de aviso.

- Cargue el dispositivo.
 - Consulte el manual del operador de su audífono.
-

El dispositivo no funciona.

- Encienda el dispositivo.
 - Cargue el dispositivo. Observe también los LED de estado del cargador.
-

En caso de otros problemas, consulte al especialista en audición.

Información de conformidad

La marca CE indica la conformidad con las siguientes directivas europeas:

- 2017/745 sobre productos sanitarios
- 2014/53/UE RED sobre equipos radioeléctricos
- 2011/65/UE RoHS sobre la restricción de sustancias peligrosas

El texto completo de la declaración de conformidad se puede obtener en www.wsaud.com/signia.

La marca de conformidad ACMA  indica la conformidad con las normativas sobre interferencias magnéticas establecidas por la Autoridad Australiana de Comunicaciones y Medios de Comunicación (ACMA).

Los dispositivos con la marca FCC cumplen los estándares de la FCC relativos a las interferencias electromagnéticas.

Este aparato digital de Clase B cumple con ICES-003 de Canadá.

Este dispositivo cumple con el párrafo 15 de las normas FCC y con los RSS con exención de licencia de ISSED.

Su funcionamiento está sujeto a las dos condiciones siguientes:

- Este dispositivo no debe provocar interferencias dañinas y
- este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluidas aquellas que puedan provocar un funcionamiento no deseado.

Este equipo ha sido probado y respeta los límites de un dispositivo digital de Clase B, según el párrafo 15 de las normas FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra interferencias dañinas en una instalación residencial. Este equipo genera, utiliza y puede radiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y utiliza cumpliendo

las instrucciones, puede provocar interferencias dañinas en las comunicaciones por radio. Sin embargo, no se garantiza que no se produzcan interferencias en una instalación en particular. Si este equipo provoca interferencias dañinas en la recepción de radio o televisión, lo que puede determinarse conectando y desconectando el equipo, el usuario puede intentar corregir la interferencia con una o varias de las medidas siguientes:

- Reorientar o recolocar la antena receptora.
- Aumentar la separación entre el equipo y el receptor.
- Conectar el equipo a una toma de corriente que se encuentre en un circuito diferente al del receptor.
- Si necesita ayuda, consulte al distribuidor o a un técnico experto en radio y TV.

Aviso de precaución de la FCC: Los cambios o las modificaciones que no hayan sido autorizados expresamente por la parte responsable de la conformidad pueden invalidar el derecho del usuario a utilizar el equipo.

Información específica por país

EE. UU. y Canadá

Información de certificación para los dispositivos con funcionalidad inalámbrica:

CROS Pure C&G AX

- HVIN: RFM003
- Contiene ID FCC: 2AXDT-RFM003
- Incluye CI: 26428-RFM003

Información importante de seguridad

Pila recargable de iones de litio (batería)



ADVERTENCIA

El audífono contiene una pila recargable de ion de litio integrada de forma fija. Un uso incorrecto del audífono puede hacer que la pila recargable de ion de litio reviente.

Riesgo de lesiones, incendio o explosión

- Siga las instrucciones de seguridad para la pila recargable de ion de litio incluidas en esta sección.



ADVERTENCIA

Riesgo de descarga eléctrica

- Conecte el cargador únicamente a una fuente de alimentación USB que cumpla IEC 60950-1 o IEC 62368-1.



ADVERTENCIA

- ▶ Respete las condiciones de funcionamiento.
- ▶ Extreme las precauciones para proteger el audífono del calor extremo (p. ej., fuego, horno microondas, horno de inducción y otros campos de alta inducción) y de la luz solar.
- ▶ Cargue los audífonos únicamente con un cargador autorizado. Solicite asistencia a su especialista en audición.
- ▶ No desmonte el dispositivo.
- ▶ No utilice el dispositivo en atmósferas explosivas.
- ▶ No utilice dispositivos que estén deformados o claramente dañados.
- ▶ No utilice el dispositivo si su rendimiento se reduce considerablemente después de la carga. Lleve el dispositivo a su especialista en audición.
- ▶ No tire el dispositivo al fuego o al agua.



ADVERTENCIA

- ▶ Las tareas de sustitución y reparación debe realizarlas un profesional. Por lo tanto:
- ▶ No repare ni sustituya la pila recargable de ion de litio usted mismo.
- ▶ En el caso improbable de que reviente o explote una pila recargable de ion de litio, aléjela de cualquier material combustible.

En cualquiera de los casos anteriores, devuelva el dispositivo a su especialista en audición.

Seguridad personal



ADVERTENCIA

Riesgo de afectar a los equipos electrónicos.

- ▶ Si se encuentra en zonas donde el uso de dispositivos electrónicos o inalámbricos está restringido, compruebe si debe apagar el audífono.



ADVERTENCIA

Peligro de lesiones.

- ▶ Si el aparato está claramente dañado, no lo use y devuélvalo al punto de venta.



ADVERTENCIA

Tenga en cuenta que cualquier cambio no autorizado en el producto puede provocar daños materiales o personales.

- Utilice solo piezas y accesorios autorizados. Solicite la asistencia de su especialista en audición.



ADVERTENCIA

Peligro de asfixia.

El dispositivo contiene piezas pequeñas que se pueden tragar.

- Mantenga los audífonos, pilas y accesorios fuera del alcance de los niños y personas con deficiencias mentales.
- En caso de ingestión de alguna pieza, consulte con un médico o acuda a un hospital inmediatamente.



ADVERTENCIA

En caso de ingerir una pila, llame al servicio de información toxicológica: 13 11 26 en Australia, y 0800 764 766 en Nueva Zelanda. En otros países, llame al servicio nacional de información toxicológica.



ADVERTENCIA

Su dispositivo puede reducir algunos sonidos de fondo, lo cual puede incluir señales de tráfico o de advertencia.



ADVERTENCIA

¡Peligro de explosión!

- No use el dispositivo en atmósferas explosivas (p. ej. en minas).

Contraindicaciones



ADVERTENCIA

Consulte con un especialista en audición si experimenta efectos secundarios poco habituales, como irritación en la piel, acumulación excesiva de cera, mareo o cambios en la capacidad auditiva, o si cree que puede tener algún objeto extraño en el canal auditivo.



ADVERTENCIA

En caso de alergia de contacto conocida, consulte al fabricante del audífono acerca de la posible presencia del alérgeno antes de utilizarlo. Si se presenta una reacción alérgica tras el uso del audífono, interrumpa inmediatamente su utilización y consulte con un médico acreditado.



ADVERTENCIA

El especialista en audición debe recomendar al usuario potencial del dispositivo que consulte con un médico antes de utilizarlo, en caso de que determine que dicho usuario padece uno de los siguientes trastornos:

- ▶ Deformidad congénita o traumática visible de la oreja.
- ▶ Historial de secreción constante del oído en los últimos 90 días.
- ▶ Historial de pérdida auditiva repentina o de progresión muy rápida en los últimos 90 días.
- ▶ Mareo agudo o crónico
- ▶ Pérdida auditiva unilateral repentina o reciente en los últimos 90 días.
- ▶ Intervalo aéreo-óseo de audiometría igual o superior a 15 dB a 500 Hz, 1000 Hz y 2000 Hz.
- ▶ Evidencia visible de acumulación significativa de cerumen o de presencia de un cuerpo extraño en el canal auditivo.
- ▶ Dolor o molestias en el oído.

Seguridad del producto



AVISO

- Proteja los dispositivos del calor extremo. No los exponga a la luz directa del sol.



AVISO

- No seque los dispositivos en un horno microondas.



AVISO

Distintos tipos de radiaciones intensas, p. ej. las que se aplican durante los exámenes de rayos X o MRI de la cabeza, pueden dañar los dispositivos.

- No use los dispositivos durante estos o similares procedimientos.

Las radiaciones más débiles, p. ej. las que emiten los equipos de radio o de seguridad del aeropuerto, no dañan los dispositivos.



AVISO

- Proteja los dispositivos de la humedad elevada. No los lleve en la ducha ni al aplicarse maquillaje, perfume, loción para después del afeitado, laca para el cabello ni lociones bronceadoras.



En algunos países existen restricciones al uso de equipos inalámbricos.

- Para más información, consulte a las autoridades locales.



AVISO

Sus dispositivos están diseñados para cumplir los estándares internacionales en materia de compatibilidad electromagnética, pero pueden producirse interferencias con los dispositivos electrónicos cercanos. En este caso, apártese de la fuente de interferencias.

Servicio y garantía

Números de serie

Izquierda:

Derecha:

Fechas de servicio

1: 4:

2: 5:

3: 6:

Garantía

Fecha de compra:

Período de garantía (meses):

Su especialista en audición



WSAUD A/S
Nymoellevej 6
3540 Lyngø
Dinamarca

Document No. 04578-99T01-7800 ES
Order/Item No. 210 039 10
Master Rev01, 02.2021
© 03.2021, WSAUD A/S. All rights reserved



www.signia.net