

signia

Motion SP primax

Guide d'utilisation



Sommaire

Bienvenue	4
Vos aides auditives	5
Type d'appareil	5
Vous familiariser avec vos aides auditives	5
Composants	6
Boutons de commande	7
Réglages	9
Piles	11
Taille des piles et conseils d'utilisation	12
Remplacement des piles	13
Serrure de sécurité enfants (en option)	14
Manipulation de vos aides auditives	17
Mise en marche et arrêt	17
Mise en place et retrait des aides auditives	19
Réglage du volume	20
Changement de programme d'écoute	21
Verrouillage des commandes (en option)	22
Autres réglages (optionnels)	23

Situations d'écoute particulières	24
Réglage de la focalisation (en option)	24
Au téléphone	26
Boucles d'induction audio	28
Entrée audio (système FM)	29
Maintenance et entretien	34
Aides auditives	34
Embouts et tubes	35
Maintenance effectuée par un professionnel	35
Autres informations	36
Consignes de sécurité	36
Fonctionnalité sans fil	36
Accessoires	36
Symboles utilisés dans ce document	37
Dépannage	37
Informations spécifiques au pays	38
Entretien et garantie	39

Bienvenue

Merci d'avoir choisi nos aides auditives pour vous accompagner dans votre vie quotidienne. Comme avec toute chose nouvelle, il vous faudra un peu de temps pour vous y habituer.

Ce guide, ainsi que l'assistance fournie par votre audioprothésiste, vous aideront à comprendre les avantages et la meilleure qualité de vie offerts par vos aides auditives.

Pour profiter au maximum de vos aides auditives, il est recommandé de les porter tous les jours, toute la journée. Cela vous aidera à vous y habituer.



ATTENTION

Il est important de bien lire l'intégralité de ce guide d'utilisation et du manuel de sécurité. Suivez les informations de sécurité pour éviter des dommages ou des blessures.

Vos aides auditives



Ce guide d'utilisation décrit les fonctionnalités optionnelles dont vos aides auditives peuvent ou non être pourvues.

Demandez à votre audioprothésiste de vous indiquer les fonctionnalités qui s'appliquent à vos aides auditives.

Type d'appareil

Vos aides auditives sont des modèles BTE, qui se portent derrière l'oreille. Un tube délivre à l'oreille le son fourni par l'aide auditive.

Les appareils conviennent également aux enfants de moins de 3 ans ou aux personnes dont l'âge de développement est inférieur à 3 ans.

Vous familiariser avec vos aides auditives

Pour utiliser instinctivement vos aides auditives, nous vous conseillons de prendre votre temps pour apprendre à les connaître. Tenez les aides auditives dans votre main, essayez de manipuler les boutons de commande et repérez leur emplacement sur l'appareil. Ainsi, vous pourrez utiliser les boutons de commande plus facilement lorsque vous porterez les aides auditives.



Si vous avez du mal à manipuler les boutons de commande de vos aides auditives lorsque vous les portez, adressez-vous à votre audioprothésiste pour qu'il vous fournisse la télécommande disponible en option.

Composants



❶ Coude

❷ Microphones

❸ Bouton-poussoir
(commande)

❹ Voyant LED du
niveau de charge

❺ Rocker-switch
(commande) ou cache
pour utilisation chez
l'enfant (en option)


❻ Tiroir pile
(interrupteur marche/arrêt)

Votre audioprothésiste fixera sur chaque aide auditive un tube et un embout sur mesure.

Boutons de commande

Les commandes vous permettent de régler le volume ou de changer de programme d'écoute. Vos aides auditives sont dotées soit d'un bouton-poussoir et d'un rocker-switch, soit d'un bouton-poussoir.

Votre audioprothésiste a programmé les fonctions de votre choix sur les commandes.

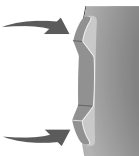Bouton de commande		Gauche	Droite
Bouton-poussoir		☐	☐
Rocker-switch		☐	☐



Vous pouvez aussi utiliser une télécommande ou une application smartphone pour commander vos appareils.

Fonctionnement du rocker-switch	L	R
Appui bref :		
Volume +/-	○	○
Signal du traitement anti-acouphènes +/-	○	○
Tonalité aiguë +/-	○	○
Sélection du foyer (Spatial Configurator)	○	○

L = gauche, R = droite

Fonctionnement du bouton-poussoir	L	R
Appui bref :		
Défilement des programmes	○	○
Appui long :		
Veille/Marche	○	○

L = gauche, R = droite

Fonctionnement du bouton-poussoir et du rocker-switch	L	R
Verrouillage/déverrouillage des commandes	○	○
Plus d'informations dans le paragraphe « Verrouillage des commandes ».		

L = gauche, R = droite

Réglages

Programmes d'écoute

1

2

3

4

5

6

Plus d'informations dans le paragraphe
« Changement de programme d'écoute ».

Fonctionnalités

- ☐ La **mise en route différée** permet une insertion des aides auditives sans subir de sifflement intempestif.

Plus d'informations dans le paragraphe
« Mise en marche et arrêt ».

- ☐ **AutoPhone™** active automatiquement le programme téléphone lorsque vous approchez le récepteur téléphonique de votre oreille.

Plus d'informations dans le paragraphe
« Au téléphone ».

- **TwinPhone** transmet l'appel téléphonique à vos deux oreilles quand vous tenez le récepteur téléphonique près d'une oreille.

Plus d'informations dans le paragraphe
« Au téléphone ».

- Le **traitement anti-acouphènes** génère un bruit doux pour vous distraire de vos acouphènes.

- Une **bobine téléphonique** est intégrée à l'aide auditive pour la relier aux boucles d'induction audio.

Plus d'informations dans le paragraphe
« Boucles d'induction audio ».

- La fonctionnalité **e2e wireless** synchronise les réglages des deux aides auditives.

Plus d'informations dans le paragraphe
« Fonctionnalité sans fil ».

Piles

Lorsque la pile se décharge, le son faiblit ou vous entendez un signal d'alerte. La durée de vie de la pile dépend de son type.

Votre audioprothésiste peut configurer la LED indiquant le niveau de charge de la pile. Néanmoins, l'aide auditive doit être mise en marche pour indiquer le niveau de charge :

- Quand la pile est pleine, la LED est en permanence allumée.
- Quand la pile est faible, la LED clignote toutes les 5 secondes env. jusqu'à ce que la pile soit vide.
- Quand la pile est vide, la LED s'éteint.



Lorsque le tiroir pile est verrouillé, un outil est nécessaire pour l'ouvrir. Plus d'informations dans le paragraphe « Serrure de sécurité enfants ».

Taille des piles et conseils d'utilisation

Demandez à votre audioprothésiste les piles recommandées.


Taille de la pile :	○ 675
---------------------	-------

- Utilisez toujours la bonne taille de pile pour vos aides auditives.
- Retirez les piles si vous prévoyez de ne pas utiliser vos aides auditives pendant plusieurs jours.
- Ayez toujours des piles de rechange.
- Retirez les piles usagées immédiatement et mettez-les au rebut en suivant les réglementations locales en vigueur pour le recyclage.

Remplacement des piles

Retrait de la pile :

- Ouvrez le tiroir pile.

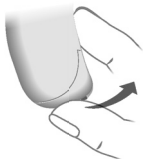

- Retirez la pile.



Mise en place de la pile :

- Si la pile est recouverte d'un film protecteur, enlevez-le uniquement quand vous êtes prêt à utiliser la pile.



- Insérez la pile dans le tiroir.

Vérifiez que les symboles "+" de la pile et du tiroir pile sont alignés (voir illustration).



Un aimant placé dans le tiroir pile permet que la pile reste bien en place.

- Fermez le tiroir pile avec précaution. Une résistance à la fermeture signifie que la pile n'est pas insérée correctement.

Ne forcez pas pour fermer le tiroir pile. Vous pourriez l'endommager.

Serrure de sécurité enfants (en option)


Vos aides auditives peuvent être équipées d'un tiroir pile verrouillable adapté aux enfants (serrure de sécurité enfants). La serrure de sécurité enfants doit être activée par votre audioprothésiste.

Lorsque la serrure de sécurité est activée, le tiroir pile se verrouille automatiquement une fois fermé. Ceci pour éviter qu'un enfant retire et avale la pile.

Pour ouvrir le tiroir pile verrouillé, un outil est nécessaire. Cet outil est livré avec les tiroirs piles équipés de la sécurité enfants.

Ouverture d'un tiroir pile verrouillé :

- Poussez la barre de verrouillage blanche de l'autre côté avec l'outil.
- Maintenez-la dans cette position et en même temps ouvrez le tiroir pile.

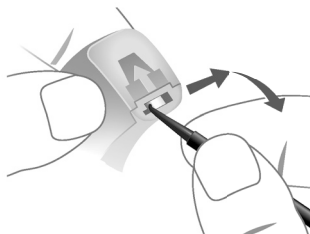

Verrouillage/déverrouillage du tiroir pile

i Pour verrouiller ou déverrouiller le tiroir pile, un outil spécial est nécessaire. Votre audioprothésiste verrouillera ou déverrouillera le tiroir pile pour vous. Les instructions suivantes sont destinées uniquement à votre audioprothésiste.

La position de la barre de verrouillage du tiroir pile indique si le tiroir est verrouillé.

L'image du haut montre un tiroir pile déverrouillé. Pour le verrouiller, l'audioprothésiste doit retirer la pièce mise en évidence.




L'image du bas montre un tiroir pile verrouillé. Pour le déverrouiller, l'audioprothésiste doit installer un désactivateur de serrure de sécurité enfants.



Verrouillage du tiroir pile :

- Insérez la pointe de l'outil dans la petite ouverture.
- Expulsez la petite pièce en plastique du tiroir pile.


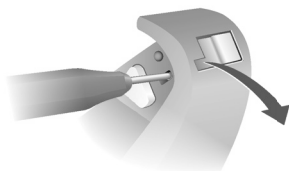


Le tiroir pile est verrouillé.

Le tiroir pile peut être à nouveau déverrouillé par l'audioprothésiste.

Déverrouillage du tiroir pile :

- Poussez la barre de verrouillage de l'autre côté à l'aide du désactivateur de sécurité enfants.
- Assurez-vous que le désactivateur de sécurité enfants est complètement inséré.
- Tournez le manche pour le désolidariser du désactivateur.

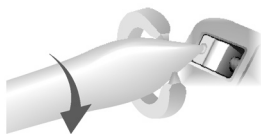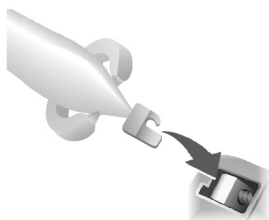

Manipulation de vos aides auditives

Mise en marche et arrêt

Vous disposez des options suivantes pour mettre en marche ou arrêter vos aides auditives.

Par le tiroir pile :

- Mise en marche : fermez le tiroir pile.

L'aide auditive est programmée avec le volume et le programme d'écoute par **défaut**.

- Arrêt : ouvrez le tiroir pile jusqu'au premier cran.

Avec le bouton-poussoir :

- Mise en marche ou arrêt : appuyez sur le bouton-poussoir en le maintenant enfoncé pendant plusieurs secondes. Veuillez vous reporter au paragraphe « Boutons de commande » pour le paramétrage des commandes.

Lors de la mise en marche de l'aide auditive, le volume et le programme d'écoute utilisés **précédemment** restent programmés.

Avec la télécommande :

- Reportez-vous au guide d'utilisation de la télécommande.

Lors de la mise en marche de l'aide auditive, le volume et le programme d'écoute utilisés **précédemment** restent programmés.

i

- Lors du port des aides auditives, un signal sonore optionnel peut indiquer la mise en marche ou l'arrêt d'une aide auditive.
- Votre audioprothésiste peut configurer la LED de manière à ce qu'elle soit allumée quand l'aide auditive est activée.
- Retirez les piles si vous voulez de ne pas utiliser vos aides auditives pendant plusieurs jours.

La fonction « **Mise en route différée** » vous permet d'allumer vos aides auditives avec un retard automatique de quelques secondes. Vous pouvez ainsi positionner vos aides auditives dans vos oreilles sans entendre de sifflement intempestif.

La fonction « Mise en route différée » peut être activée par votre audioprothésiste.

Mise en place et retrait des aides auditives

Vos aides auditives ont été ajustées avec précision pour votre oreille droite et votre oreille gauche.


Des repères de couleur indiquent le côté :

- repère rouge = oreille droite
- repère bleu = oreille gauche



Mise en place d'une aide auditive :

- ▶ Tenez le tube à proximité de l'embout.
- ▶ Introduisez l'embout avec précaution dans le conduit auditif ❶.
- ▶ Tournez-le légèrement jusqu'à ce qu'il soit bien en place.
- ▶ Soulevez l'aide auditive et faites-la glisser au-dessus de votre oreille ❷.

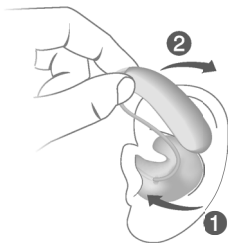


i

- Il peut être utile d'insérer l'aide auditive **droite** de la main **droite** et l'aide auditive **gauche** de la main **gauche**.
- Si vous avez du mal à mettre en place l'embout, tirez doucement sur le lobe de votre oreille avec votre autre main. Cela permet d'ouvrir le conduit auditif et facilite l'insertion de l'embout.

Retrait d'une aide auditive :

- Soulevez l'aide auditive et faites-la glisser au-dessus de votre oreille ①.
- Tenez l'embout entre votre pouce et votre index. Tournez l'embout avec précaution vers l'avant tout en le retirant ②.

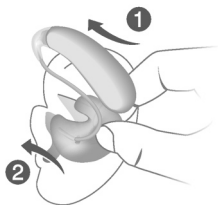

Nettoyez et séchez vos aides auditives après chaque utilisation. Pour plus d'informations, reportez-vous au chapitre « Maintenance et entretien ».

Réglage du volume

Le volume de vos aides auditives se règle automatiquement, il n'est donc pas nécessaire de l'ajuster manuellement.

- Si vous préférez régler le volume manuellement, appuyez brièvement sur le rocker-switch ou utilisez la télécommande.

Veuillez vous reporter au paragraphe « Boutons de commande » pour le réglage du rocker-switch.

Un bip optionnel peut indiquer le changement de volume. Dès que le volume maximum ou minimum est atteint, vous pouvez entendre un bip optionnel.

Changement de programme d'écoute

Vos aides auditives ajustent automatiquement le son à la situation d'écoute.

Vos aides auditives peuvent avoir plusieurs programmes d'écoute qui vous permettent de changer le son, si nécessaire. Un bip optionnel peut indiquer le changement de programme.

Par ailleurs, votre audioprothésiste peut configurer la LED indiquant le changement de programme : la LED clignote une fois si vous choisissez le programme 1, deux fois pour le programme 2, etc.

- Pour changer de programme d'écoute, appuyez brièvement sur le bouton-poussoir ou utilisez une télécommande.

Veillez vous reporter au paragraphe « Boutons de commande » pour le paramétrage des commandes. Reportez-vous au paragraphe « Réglages » pour consulter la liste de vos programmes d'écoute.



Si la fonction AutoPhone ou TwinPhone est activée, le programme d'écoute bascule automatiquement sur le programme téléphone dès que vous approchez le récepteur téléphonique de votre oreille.

Plus d'informations dans le paragraphe « Au téléphone ».



Votre audioprothésiste peut configurer le passage automatique de vos aides auditives au programme du sabot audio s'il est inséré.

Pour en savoir plus, voir le paragraphe
« Entrée audio ».

Verrouillage des commandes (en option)

Pour éviter toute opération accidentelle, vous pouvez verrouiller les commandes. Lorsque les commandes sont verrouillées, le bouton-poussoir et le rocker-switch sont désactivés.

- Pour verrouiller ou déverrouiller les commandes, appuyez sans relâcher sur le rocker-switch. Simultanément, appuyez sur le bouton-poussoir de la même aide auditive pendant 3 secondes.

Pour savoir si cette fonction est configurée pour vos aides auditives, reportez-vous au chapitre « Commandes ».



- Si vous portez deux aides auditives, verrouillez ou déverrouillez séparément les commandes sur chaque aide auditive.
- La confirmation par une LED clignotante du verrouillage ou du déverrouillage est disponible en option.
- Si vous éteignez puis rallumez vos aides auditives, le verrouillage des touches affiche le mode sélectionné en dernier.

Autres réglages (optionnels)

Les commandes de vos aides auditives peuvent servir à modifier le réglage des aigus ou le niveau sonore du traitement anti-acouphènes. La fonction SoundBalance vous permet d'ajuster les sons graves et aigus selon vos préférences.

Veillez vous reporter au paragraphe « Boutons de commande » pour le paramétrage des commandes.

Situations d'écoute particulières

Réglage de la focalisation (en option)

Si vous voulez vous concentrer sur l'interlocuteur qui vous est face à vous, ou si vous voulez élargir votre champ d'écoute, le Spatial Configurator vous permet de régler vos préférences d'écoute.

Vous pouvez sélectionner des niveaux différents – « focalisation sur la position frontale » (image de gauche), « position moyenne » (image du milieu), « écoute globale » (image de droite).



Prérequis :

- Vous devez porter deux aides auditives.
- Sur l'une de vos aides auditives, votre audioprothésiste doit régler le rocker-switch pour le Spatial Configurator.

Veillez vous reporter au paragraphe « Boutons de commande » pour le paramétrage du rocker-switch.

Avec une application smartphone adéquate, vous disposez d'encore plus d'options de contrôle.

Réglage manuel de la focalisation :

- ▶ Si vous avez plusieurs programmes d'écoute, activez le programme d'écoute 1.
- ▶ Appuyez sur le rocker-switch qui est réglé pour cette fonction.

Le niveau moyen est activé par défaut.

- ▶ Appuyez sur le haut du rocker-switch pour focaliser l'écoute vers le l'avant, ou sur le rocker-switch pour élargir le champ d'écoute.

Sortie du mode Spatial Configurator :

- ▶ Orientez le commutateur sur le niveau minimum ou maximum.

Un bip optionnel peut indiquer le niveau minimum ou maximum.

- ▶ Orientez le commutateur un cran plus loin.

Vous entendez alors le même bip que celui du changement de programme d'écoute, ce qui signifie que vous avez quitté le mode Spatial Configurator.

Au téléphone

Lorsque vous téléphonez, tenez le récepteur téléphonique légèrement au-dessus de votre oreille. Les microphones de l'aide auditive et le récepteur téléphonique doivent être alignés. Tournez légèrement le récepteur téléphonique pour éviter qu'il ne recouvre complètement l'oreille.



Programme téléphone

Vous pouvez préférer un certain volume lorsque vous téléphonez. Veuillez demander à votre audioprothésiste de configurer le programme téléphone.

- Sélectionnez ce programme chaque fois que vous êtes au téléphone ou utilisez la fonction de changement de programme automatique.

Reportez-vous au paragraphe « Réglages » pour savoir si vos aides auditives sont équipées d'un programme téléphone ou de la fonction de changement de programme automatique.

Changement de programme automatique (AutoPhone ou TwinPhone)

Lorsque vous approchez le combiné téléphonique de l'aide auditive, celle-ci peut sélectionner **automatiquement** le programme téléphone.

TwinPhone transmet l'appel aux deux oreilles. Quand la communication téléphonique est terminée, éloignez le combiné de l'aide auditive ; le mode microphone se réactive de lui-même.

Pour pouvoir utiliser cette fonction, demandez à votre audioprothésiste d'effectuer les opérations suivantes :

- Activer la fonction AutoPhone ou TwinPhone.
- Vérifier le champ magnétique du récepteur téléphonique.

Pour changer automatiquement de programme, il faut que l'aide auditive détecte le champ magnétique du récepteur téléphonique. Tous les téléphones ne produisent pas un champ magnétique suffisamment fort pour activer cette fonction. Dans ce cas, vous pouvez utiliser l'aimant AutoPhone, disponible en tant qu'accessoire, et le fixer au récepteur téléphonique.

Pour la mise en place de l'aimant, consultez le guide d'utilisation de l'aimant AutoPhone.



REMARQUE

Utilisez uniquement les aimants agréés AutoPhone. Procurez-vous cet accessoire auprès de votre audioprothésiste.

Boucles d'induction audio

Certains téléphones et lieux publics (théâtres, par exemple) délivrent le signal audio (musique et parole) via une boucle d'induction. Ce système permet à vos aides auditives de recevoir directement le signal désiré, sans qu'il soit perturbé par le bruit environnant.

Les systèmes de boucle d'induction audio sont reconnaissables au symbole ci-contre :



Veuillez demander à votre audioprothésiste de configurer un programme Bobine Téléphonique.

- Activez le programme Bobine Téléphonique chaque fois que vous êtes dans un endroit équipé d'une boucle d'induction audio.

Reportez-vous au paragraphe « Réglages » pour savoir si cette fonction est configurée pour vos aides auditives.

Programme Bobine Téléphonique et télécommande



REMARQUE

Appareils dotés de la connectivité sans fil : lorsque le programme Bobine Téléphonique est actif, la télécommande peut provoquer des impulsions sonores.

- Utilisez la télécommande à plus de 10 cm.

Entrée audio (système FM)

Une entrée audio permet de connecter vos aides auditives à un système FM. Un système FM consiste en un émetteur et un écouteur. Il recueille les signaux vocaux à la source (à l'aide d'un microphone séparé) et transmet le son directement aux aides auditives.

Le signal est plus net et il n'est pas altéré par une mauvaise acoustique de la pièce. Cela peut s'avérer utile pour les adultes dans des situations d'écoute difficiles, et pour les enfants dans les salles de classe.

La plupart des systèmes FM peuvent être associés à des appareils audio tels qu'un lecteur MP3.

Remarques :

- Si vous souhaitez avoir un sabot audio, un tiroir pile spécial est requis. Consultez votre audioprothésiste pour remplacer le tiroir pile.
- Demandez à votre audioprothésiste de configurer vos aides auditives, par exemple :
 - Ajuster la façon dont le signal d'entrée audio se combine aux bruits environnants.
 - Configurez les aides auditives pour qu'elles passent automatiquement au programme Sabot audio, si un sabot audio y est fixé.
- Utilisez uniquement un sabot homologué. Procurez-vous cet accessoire auprès de votre audioprothésiste.



AVERTISSEMENT


Risque de choc électrique !

- ▶ Ne raccordez votre aide auditive qu'à des appareils conformes à la norme CEI 60065, norme CEI relative aux appareils audio, vidéo et autres appareils électroniques.



REMARQUE

- ▶ Tenez fermement le sabot audio pour retirer le récepteur FM.

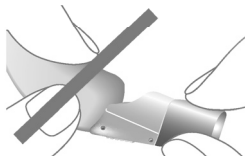


Insertion du sabot audio

- ▶ Ouvrez le tiroir pile.
- ▶ Retirez le couvercle.

La forme du couvercle dépend du type de votre aide auditive.



- Insérez le sabot audio

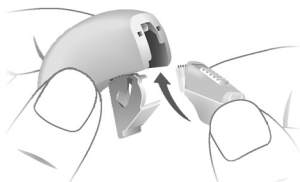

- Assurez-vous qu'il est bien en place et encliqueté.




- Fermez le tiroir pile.


Retrait du sabot audio

Lorsque le sabot audio n'est pas inséré, la pose d'un couvercle empêche la poussière et la saleté de pénétrer dans le logement.

- Ouvrez le tiroir pile.

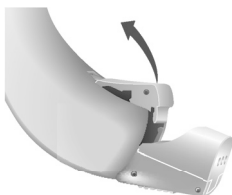

- Replacez la glissière sur le sabot audio tout en abaissant ce dernier pour le sortir de l'appareil.

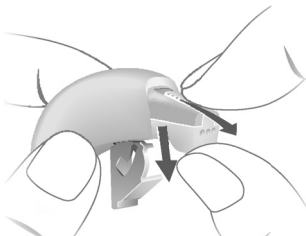

- Faites coulisser le couvercle dans le sens de la flèche pour le replacer.

La forme du couvercle dépend du type de votre aide auditive.



- Fermez le tiroir pile.

Maintenance et entretien

Pour prévenir tout dommage, il est important de prendre soin des aides auditives et de respecter quelques règles de base qui deviendront vite une habitude quotidienne.

Aides auditives

Séchage et stockage

- ▶ Laissez sécher vos aides auditives pendant la nuit.
- ▶ Avant une longue période d'inutilisation, rangez vos aides auditives dans un environnement sec, le tiroir pile étant ouvert et sans pile.
- ▶ Demandez à votre audioprothésiste un complément d'information.

Nettoyage

Vos aides auditives ont un revêtement protecteur. Toutefois, un nettoyage irrégulier peut endommager les aides auditives ou causer des blessures.

- ▶ Nettoyez quotidiennement vos aides auditives à l'aide d'un chiffon doux et sec.
- ▶ Il ne faut jamais nettoyer l'appareil à l'eau courante ou l'immerger dans l'eau.
- ▶ N'exercez aucune pression lors du nettoyage.



- Votre audioprothésiste peut vous fournir les produits d'entretien recommandés, les kits d'entretien spéciaux, ou un complément d'information sur la façon de maintenir vos aides auditives en bon état de marche.

Embouts et tubes

Il peut y avoir un dépôt de cérumen (cire d'oreille) sur les embouts. Cela peut nuire à la qualité du son. Nettoyez les embouts quotidiennement.

Demandez à votre audioprothésiste de nettoyer les tubes ou de remplacer les embouts et tubes, au besoin.

Nettoyage des éléments intra-auriculaires

- Immédiatement après l'avoir enlevé, nettoyez l'embout avec un chiffon doux et sec.

Cela évite que le cérumen sèche et durcisse.

- Il ne faut jamais nettoyer l'embout à l'eau courante ou l'immerger dans l'eau.

Maintenance effectuée par un professionnel

Votre audioprothésiste peut effectuer un nettoyage et une maintenance complets et professionnels.

Les embouts personnalisés et les filtres anti-cérumen doivent être remplacés par votre audioprothésiste, chaque fois que c'est nécessaire.

Demandez conseil à votre audioprothésiste en ce qui concerne la périodicité de la maintenance.

Autres informations

Consignes de sécurité

Pour en savoir plus sur les consignes de sécurité, consultez le manuel de sécurité fourni avec l'appareil.

Fonctionnalité sans fil

Vos aides auditives sont équipées d'une fonctionnalité sans fil. Elle sert à synchroniser vos deux aides auditives :

- Si vous modifiez le programme ou le volume d'une aide auditive, la modification de la seconde est automatique.
- Les deux aides auditives s'adaptent automatiquement et simultanément à la situation d'écoute.

La fonctionnalité sans fil permet d'utiliser une télécommande.

Accessoires

Le type d'accessoire disponible dépend du type d'aide auditive. Exemples d'accessoires : une télécommande, un transmetteur audio sans fil, ou une application smartphone pour télécommande.

Certaines aides auditives sont compatibles les solutions CROS et BiCROS pour les personnes sourdes d'une oreille.

Pour plus d'informations, veuillez consulter votre audioprothésiste.

Symboles utilisés dans ce document



Indique une situation pouvant entraîner des blessures graves, modérées ou mineures.



Indique un risque de dommage matériel.



Conseils et astuces pour une meilleure utilisation de votre appareil.

Dépannage

Problème et solutions possibles

Le son est faible.

- Augmentez le volume.
 - Remplacez la pile.
 - Nettoyez l'embout.
-

L'aide auditive émet un sifflement.

- Réintroduisez l'embout jusqu'à ce qu'il soit bien en place.
 - Réduisez le volume.
 - Nettoyez l'embout.
-

Le son est déformé.

- Réduisez le volume.
 - Remplacez la pile.
 - Nettoyez l'embout.
-

L'aide auditive émet des bips.

- Remplacez la pile.
-

Problème et solutions possibles

L'aide auditive ne fonctionne pas.

- Mettez en marche l'aide auditive.
 - Fermez complètement le tiroir pile avec précaution.
 - Remplacez la pile.
 - Vérifiez que la pile est bien en place.
 - La fonction « Mise en route différée » est activée. Patientez plusieurs secondes puis réessayez.
-

Pour toute question complémentaire, n'hésitez pas à prendre contact avec votre audioprothésiste.

Informations spécifiques au pays

Entretien et garantie

Numéros de série

Gauche :

Droite :

Dates d'entretien

1: 4:

2: 5:

3: 6:

Garantie

Date d'achat :

Durée de garantie (en mois) :

Votre audioprothésiste

Avant toute utilisation, il est recommandé de consulter un audioprothésiste ou tout autre professionnel compétent. Pour un bon usage, veuillez lire attentivement les instructions figurant dans le manuel d'utilisation.



Fabricant légal

Signia GmbH

Henri-Dunant-Strasse 100

D-91058 Erlangen

Allemagne

Tél. +49 9131 308 0

www.signia-audition.fr

www.signia-hearing.can

www.signia-hearing.ch



Document No. 03119-99T05-7700 FR

Order/Item No. 109 447 06

Master Rev04, 04.2019

© 08.2019, Signia GmbH. All rights reserved



0123

www.signia-hearing.com