



CHARGEURS MOTION X P ET SP : PRISE EN MAIN RAPIDE



En connectant le chargeur au secteur, les LEDs clignotent 3 fois :
Le chargeur est prêt à être utilisé.



Si les LEDs sont éteintes :
Le chargeur n'est pas branché / l'aide auditive n'est pas correctement insérée.



Les LEDs clignotent en vert en continue :
Les aides auditives sont en charge.



Les LEDs sont vertes et fixes :
les aides auditives sont chargées à 100%.



Les LEDs clignotent en rouge 3 fois toutes les 2 secondes :
Erreur de chargeur. Débranchez et rebranchez le chargeur. Si le problème persiste, il se peut que le chargeur ait atteint la température limite (45°C). Débranchez à nouveau le chargeur et laissez refroidir. Si le problème persiste à nouveau, contactez notre service Hotline.