

① 顧客登録



①新規


②“フリガナ”
“氏名”を入力

③OK


④顧客を呼出

The screenshot shows a '顧客カード' (Customer Card) form. Callout 1 points to the '新規' (New) button at the bottom left. Callout 2 points to the 'フリガナ' (Kana) and '氏名' (Name) input fields, which contain 'シバノス' and 'シバノス' respectively. Callout 3 points to the 'OK' button at the bottom right. Callout 4 points to the '顧客を呼び出す' (Call customer) button at the bottom right.

② オーディオデータの入力

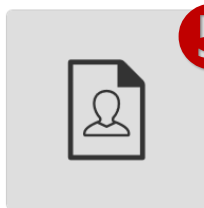

顧客リスト

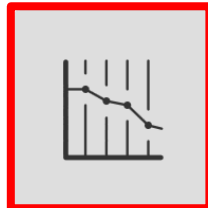


オーディオグラム

⑤オーディオを選択


⑥測定結果を入力
(ダブルクリック)

⑦電池を入れて読み取りボタンを押す

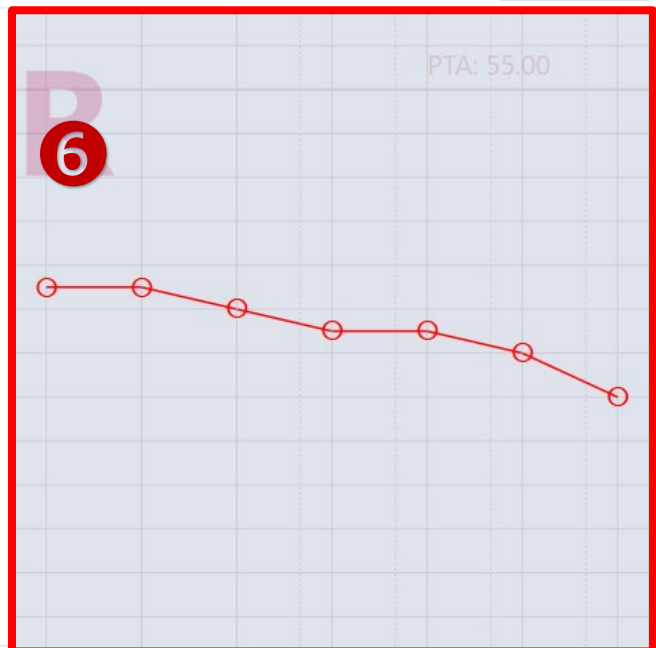

Point ⑦を実施する直前に補聴器の電池をいれましょう

③ 新しいフィッティングとパフォーマンス


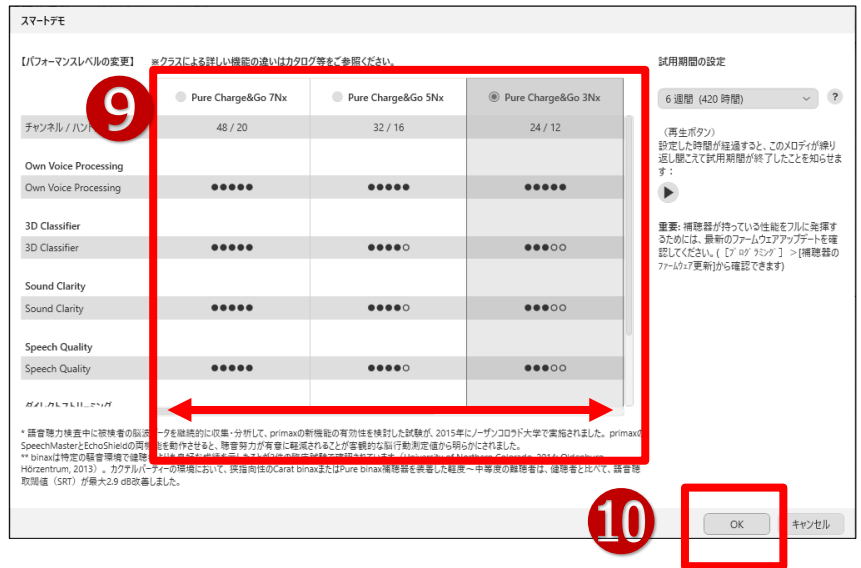


⑧新しいフィッティング

⑨パフォーマンスレベル選択

⑩OKを押す

④ ドーム・計算式選択 → ファーストフィット完了

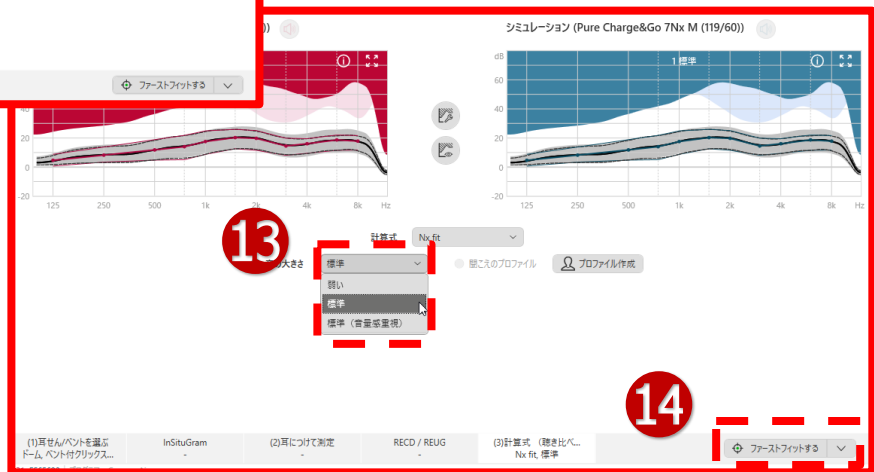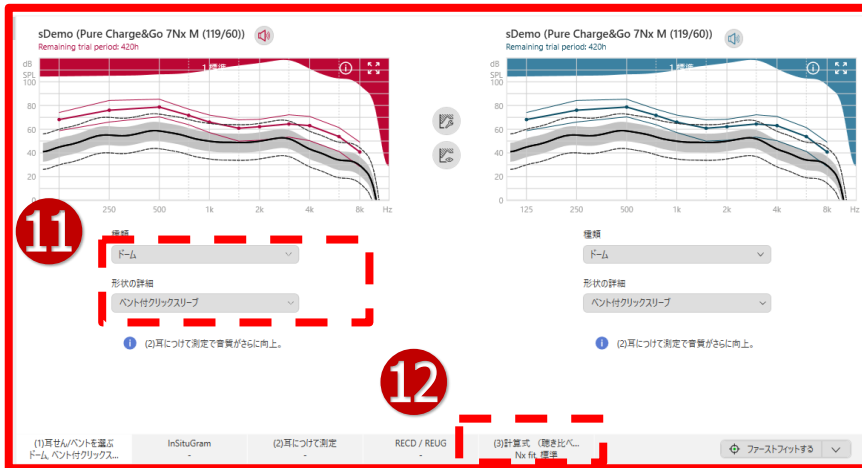

⑪ドームの選択



⑫計算式の選択

⑬標準を選択

⑭ファーストフィットする

Sデモでのファーストフィットの手順 ～簡単聴き比べ方法～

⑤ 試聴 ～ランクを変えて聞き比べ～

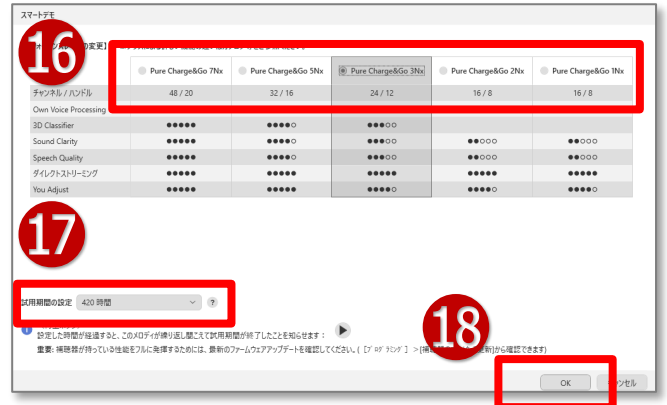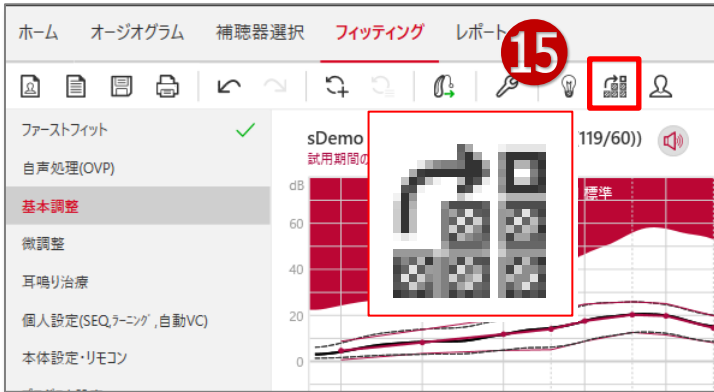


⑮ Sデモ切り替えボタンを押す

⑯ パフォーマンスレベル

⑰ 試聴期間（時間）の選択


⑱ OKを押す。しばらく待つと完了

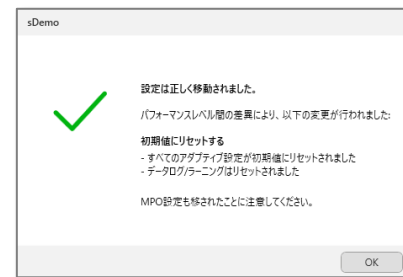

Sデモの特徴


切り替えが速い

ランクの切り替えが速く、最短10秒程度で聞きたいランクになります

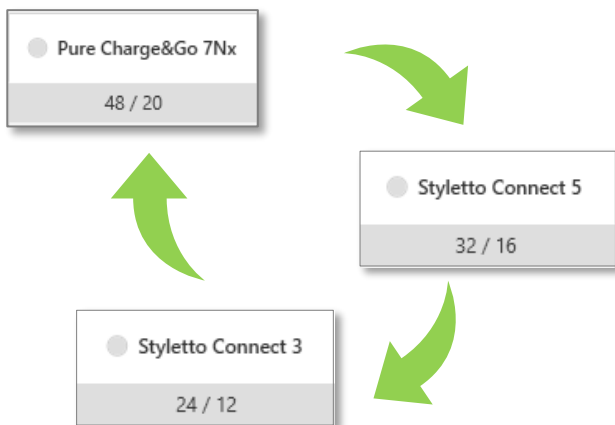

特性が残る

試聴後にランクを切り替えても、調整した特性が残ります

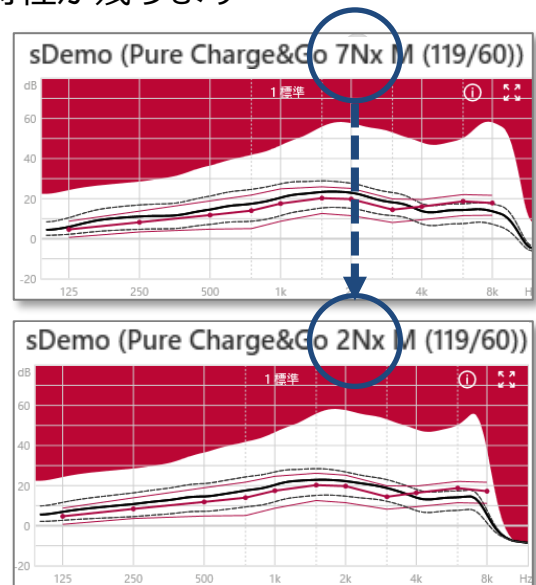

試聴した音と同じ音で納品ができるので、お客様も安心