

StreamLineTVの接続・案内方法

試聴器の準備


① 用意するもの

- ✓ Nxデモ器
- ✓ StreamLine TV
- ✓ 動画再生の出来るTVまたは携帯など
※StreamLine TVを事前に接続しておきます





② P2にテレビを作成

- ✓ プログラムに「テレビ」を設定
※何番でもOK。試聴の際は2番だとわかりやすい

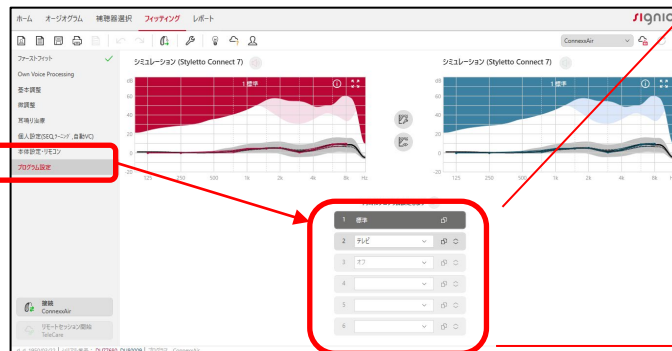


- ✓ スตรีミングの調整は、「微調整」→「オーディオスตรีミング」

※何番でもOK。試聴の際は2番だとわかりやすい

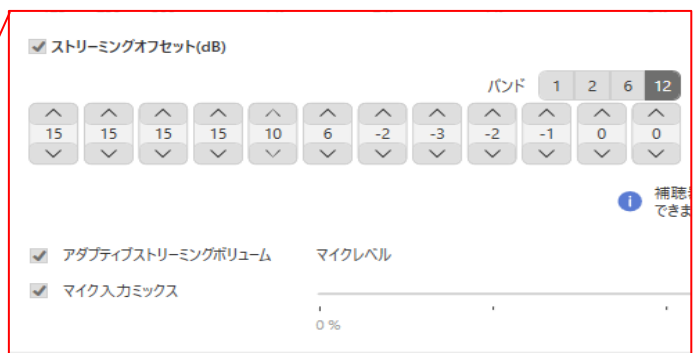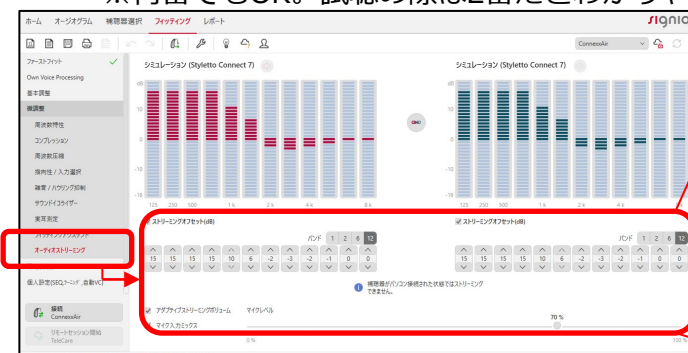

③ 補聴器とStreamLineTVとのペアリング

- ✓ 補聴器の電源を OFF → ON
- ✓ StreamLine TV の上に補聴器を乗せる
- ✓ 青ランプが2つ、点灯すれば完了

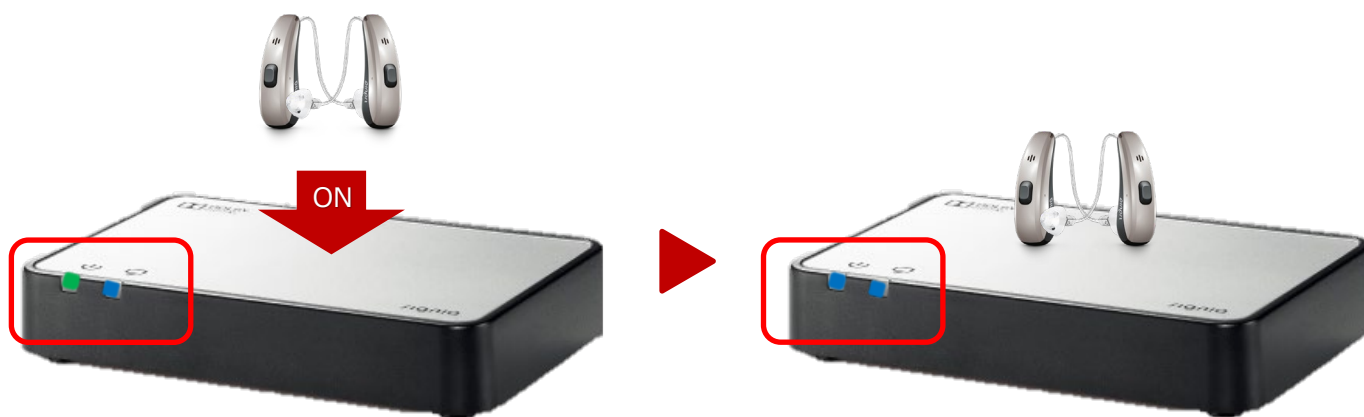

④ TVモードに切り替え

- ✓ プログラムを切り替えるとダイレクトで視聴

※Noahlinkwirelessに繋がっていると、TVモードにしても試聴できません

※プログラム切替は、補聴器本体、リモコン、リモコンアプリなどを使用します



試聴してもらう前に、一度ストリーミングが正しく出来ているか、
チェックしてから、装用・試聴をしていきましょう


③ 補聴器とStreamLineTVとのペアリング

TVとの接続

- ✓ 「音声出力」端子に挿す
- ✓ 「入力」端子に挿しても音は飛びません
- ✓ TVや携帯が使えない場合、PCなどヘッドホン端子がついているメディアも使用可能




A 光デジタル音声出力端子

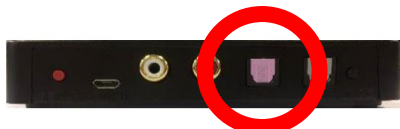

IN




B 赤白音声出力端子

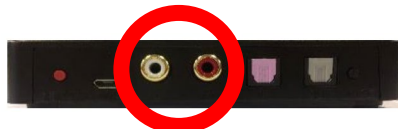

赤白



C ヘッドホン端子

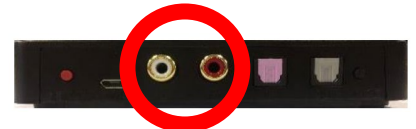


赤白



※TVによっては付属のヘッドホン変換ケーブルの形状が合わない場合があります

スマホとの接続

C ヘッドホン端子

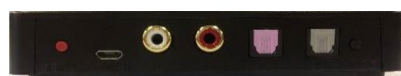

赤白



※携帯によっては別途のヘッドホン変換ケーブルが必要な場合があります

テレビの種類によっては、出力端子に挿しただけでは使用できない器種があります。各テレビの取扱説明書またはテレビメーカーへお問い合わせください

④ 試聴のポイント



- ✓ 装用者とTVの距離は出来るだけ離しておく効果大！
- ✓ 距離が取れない場合は、音量0にしていることを見せる
- ✓ 字幕のある動画、はっきりゆっくり話している動画がおすすめ

※試聴時、販売時の注意点

- ✓ 事前に切り替わることを確認したうえで試聴をする
- ✓ 弁別が悪いと効果が出ない場合があります
- ✓ 販売後、納品前に店頭で接続の確認をしておくことをおすすめ
納品時にお客様にもストリーミングを体験してもらおう
- ✓ 音声との接続が出来ていないと、ランプが緑になりません。

※お客様がご自宅で音が飛ばない場合、出力端子に差し込まれていないケースが多いです。納品時にストリーミングの体験をしておき実機に問題ないことを確認してもらいましょう