

はじめにお読みください

補聴器 早わかりガイド

(2023年11月版)

耳かけ型



耳あな型は裏面をご覧ください。



QRコードをスマホで読み取ってください。シグニア補聴器公式YouTubeチャンネルで充電器の使い方、電池の替え方、補聴器の装着方法、耳せんの交換方法、等を動画でご確認いただけます。

シバントス株式会社

1 電源を入れましょう

充電タイプ

スロットから取り出す→電源オン
数秒後に補聴器から音が出始めます。
※充電タイプの器種により、電源オンの方法が異なります。詳しくは表紙掲載のQRコードから動画でご確認いただけます




スロットに入れる→電源オフ
スロットの奥まで補聴器を入れると、磁石がカチッとくっつくような感覚があります。このとき、充電器がオン状態であれば補聴器の充電が開始します。

電池タイプ




でっぱりを爪を掛け、ゆっくりと手前に引き出す。

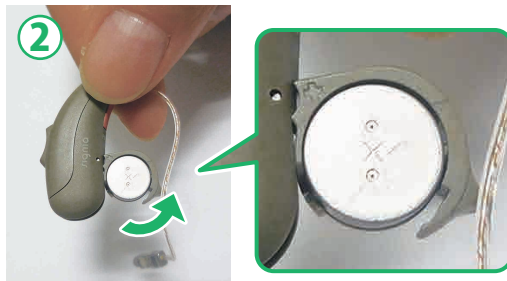

電池の平らな面を上にして電池を入れます。

うまく入らないとき
電池室の+印と電池の平らな面が上です。

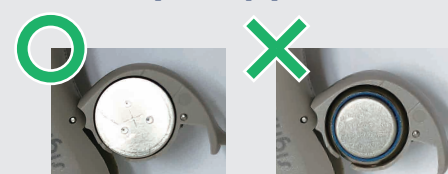

⚠ 電池を逆向きに入れないでください。※破損の原因になります。

電池の出しかた

補聴器の電池室を開けて、付属のマグネット付き掃除ブラシに付けて持ち上げてください。



※一部器種では別売です。

2 耳につけましょう・外しましょう

耳につけるとき

耳かけ型



① イヤモデルを持ちます。

② イヤモデルを後ろに回しながら耳に入れます。

③ 補聴器を耳にかけます。

RICタイプ



① 補聴器を持ちます。

② 補聴器を耳にかけてからチューブの曲がりをつまんで耳せんを耳の中へ入れます。

③ チューブ固定用コンチャロックが付いている場合、コンチャロックを持って耳のくぼみへ入れます。

お客様の補聴器は？

オープンタイプ




うまく入らないとき



曲がりの部分を指で押し込みます。

耳から外すとき

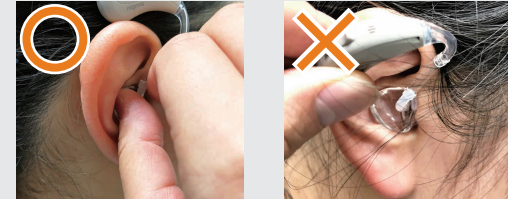

曲がりの部分をつまんで取り出します。


補聴器を引っばらない。

耳かけ型

RICタイプ

オープンタイプ

うまく入らないとき

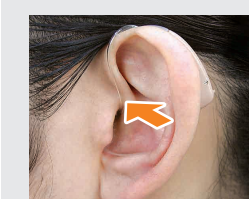

曲がりの部分を指で押し込みます。

耳から外すとき



曲がりの部分をつまんで取り出します。

補聴器を引っばらない。

★耳あな型・耳かけ型 共通のご案内

重要 3 毎日お手入れしましょう 補聴器は身につけるものなので毎日のお手入れで清潔に使いましょう

耳かけ型



① 柔らかい布で表面の汚れをふき取ります。

② ブラシを下にして音の出口とベントを掃除します。

RICタイプ



① 柔らかい布で表面の汚れをふき取ります。

② 柔らかい布で耳せんの汚れをふき取ります。

オープンタイプ



充電タイプ

③ 【充電】補聴器を使用しないときは、充電器に収納して充電します。



【補聴器の乾燥】汗や湿気は、補聴器にとって最大の故障原因になります。充電時には併せて乾燥機のご使用をお勧めします。



ドライ＆クリーン充電器をお使いの場合、併せて乾燥・除菌をおこないます。

ドライキャップ UV2.1(別売)は、充電器の上からかぶせて使うため、補聴器を充電しながら乾燥・除菌をおこないます。

電池タイプ

③ 補聴器を使用しないときは、電池室を開けて補聴器乾燥カップに入れます。

④ フタをしっかり閉めます。※電池はフタのマグネットに付けます。

・補聴器乾燥カップと乾燥シリカゲルは一部器種には付属していません。別売アクセサリの補聴器乾燥カップまたは電気式乾燥機をご利用ください。
・乾燥シリカゲルは色が変わったら、交換してください。

お手入れ用品 別売

補聴器乾燥カップ シリカゲル入り(1個入り) ¥990(税込)	詰め替え用乾燥シリカゲル (2個入り) ¥990(税込)
クリーニングシート (30枚入り、個包装) ¥990(税込)	クリーニングスプレー (容量:30ml) ¥990(税込)

電気式乾燥機 別売

ドライキャップ UV2.1 ¥8,800(税込)	パーフェクト ドライラックス ¥9,900(税込)
-----------------------------	---------------------------------

電気端子も定期的に清掃しましょう

充電器および補聴器の電気端子は乾いた綿棒やティッシュを使って優しく拭いてください。汗や汚れが蓄積すると、通電不良や故障の原因になります。

ガンコな汚れには 化粧品や日焼け止め、皮脂の油等が付着すると綿棒掃除だけでは落ちづらく、電気の流れが妨げられると充電エラーにつながります。別売りのアクセサリ「クリーニングシート」や、「クリーニングスプレー」の併用をお勧めします。クリーニング液をご少量、綿棒の先端に湿らせて端子を拭いてください。

充電タイプ	電池タイプ
<p>耳かけ型の場合</p> <p>矢印の電気端子の汗や湿気を綿棒で拭きます。</p>	<p>耳あな型の場合</p> <p>電池室の中および電気端子の汗や湿気を綿棒で拭きます。</p>

充電端子のお掃除に次のものは使わないでください

- 一般的なウェットティッシュ (水分が多くサビの原因になります)
- 高濃度アルコール・シンナー・ベンジン (塗装や補聴器本体を溶かしたり変形させます)

例外
耳あな型「非接触」充電タイプ Insignia Charge & GO AXの充電器は、充電のための金属端子を持たないため、充電器のガンコな汚れに一般的なウェットティッシュをご利用いただけます。

※耳せんは消耗品です。3ヶ月を目安に交換をおすすめします。

※2ヶ月に一度は点検をかねて販売店でクリーニングをしてもらうことをお勧めします。



はじめにお読みください

補聴器
早わかりガイド

(2023年11月版)

耳あな型



耳かけ型は表面をご覧ください。

表面右下(★印部分)にも耳あな型に関するご案内があります。



QRコードをスマホで読み取ってください。
シグニア補聴器公式YouTubeチャンネルで充電器の使い方、電池の替え方、補聴器の装着方法、耳せんの交換方法、等を動画でご確認いただけます。

シバントス株式会社

1 電源を入れましょう

充電タイプ

スロットから取り出す→電源オン
数秒後に補聴器から音が出始めます。
※充電タイプの器種により、電源オンの方法が異なります。詳しくは表紙掲載のQRコードから動画でご確認いただけます




スロットに入れる→電源オフ
スロットに補聴器を入れると、磁石がカチッとくっつくような感覚があります。このとき、充電器がオン状態であれば補聴器の充電が開始します。

電池タイプ

お客様の補聴器は？


CIC/
IIC

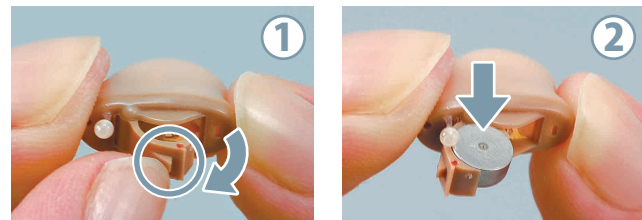

MC
でつばりに爪をかけ、手前に引きます。
電池室の+を上に向けます。

電池の平らな面(+極)を上にして電池を入れます。

ITC

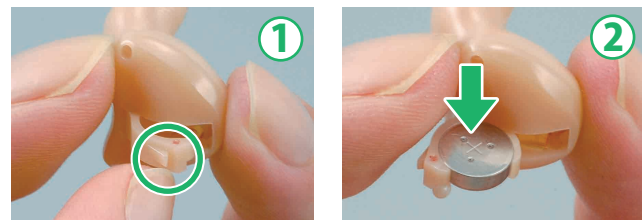


COOL
でつばりに爪をかけ、手前に引きます。
電池室の+を上に向けます。

電池の平らな面(+極)を上にして電池を入れます。

ITE

注意!

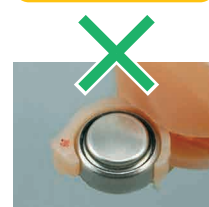

電池を逆向きに入れないでください。

電池の出しかた

- 電池室を開けます。
- 指先で電池をつまみ
- ななめにしながら取り出します。


※上記の方法で上手く取り出せない場合は次の方法で取り出してください。

マグネット付き掃除ブラシの使いかた



※一部器種では別売です。

電池が小さくて掴みづらい場合は、付属のマグネット付き掃除ブラシに付けて、持ち上げてください。

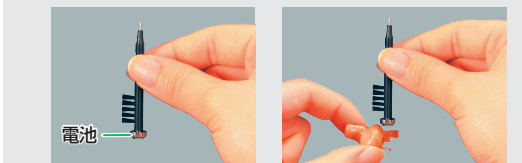

2 耳につけましょう・外しましょう

耳につけるとき

CIC/
IIC



MC
取り出しコードを下にして持ちます。

耳にまっすぐ入れま

す。
ピッタリするまで入

ITC



COOL
取り出しコードを下にして補聴器を持ち

ます。
後ろに回すように入

指で押し込みます。

ITE


コードが無い場合は、写真を参考にしてください。(写真は左耳)

うまく入らないとき




耳たぶを後ろにひっぱりながら入れます。

耳から外すとき

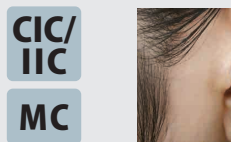

CIC/
IIC
MC
取り出しコードをつまんで取り出します。

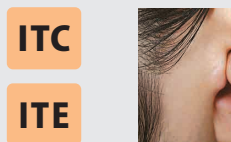

ITC
ITE
取り出しコードをつまんで取り出します。
コードが無い場合は、上下をつまんで取り出します。


【注意】:電池室を持って取り出さないでください。

重要 3 毎日お手入れしましょう


補聴器は身につけるものなので
毎日のお手入れで清潔に使いましょう




①
プロテクタ
柔らかい布で表面の汚れをふき取ります。

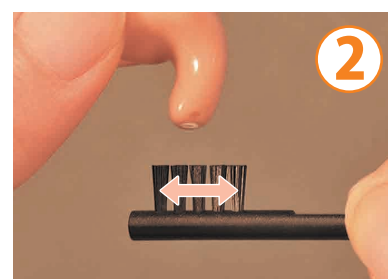

②
ブラシを下にして、耳あかプロテクタとベントを掃除します。

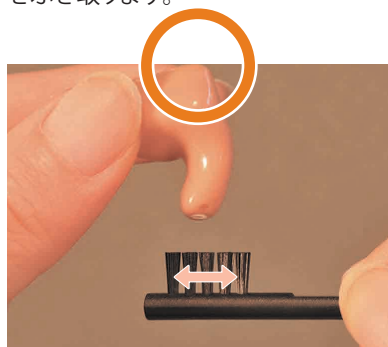

必ずブラシを下にして横に動かします。
※ブラシを上になると、内部に耳あかが入り故障の原因になります。

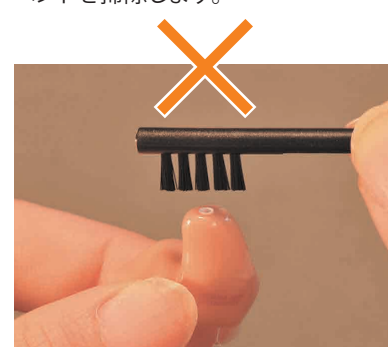

充電タイプ

③
【充電】
補聴器を使用しないときは、充電器に収納して充電します。



【補聴器の乾燥】
汗や湿気は、補聴器にとって最大の故障原因になります。充電時には併せて乾燥機のご使用をお勧めします。



ドライキャップ UV2.1(別売)は、充電器の上からかぶせて使えるため、補聴器を充電しながら乾燥・除菌をおこないます。

電池タイプ

③
補聴器を使用しないときは、電池室を開けて補聴器乾燥カップに入れます。



④
電池
フタをしっかり閉めます。
※電池はフタのマグネットに付けます。

・補聴器乾燥カップと乾燥シリカゲルは一部器種には付属していません。別売アクセサリーの補聴器乾燥カップまたは電気式乾燥機をご利用ください。
・乾燥シリカゲルは色が変わったら、交換してください。

4 古くなった耳あかプロテクタを交換しましょう


注意 クイックガードが正しくはめ込まれていないと、使用中に外れるおそれがあります。正しく入っているか確認してください。

「クイックガード」の取り外し方・取り付け方


古いクイックガードの取り外し方




交換ツールを用意します。

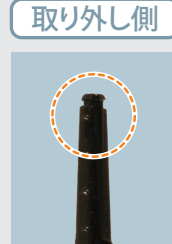


クイックガードが付いています。

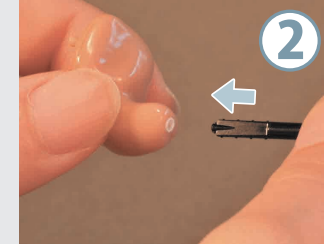

交換ツールをまっすぐ挿しこみます。

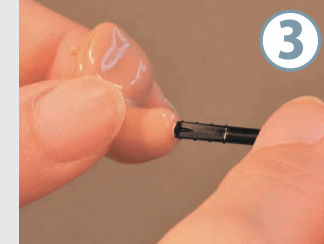


交換ツールが突き当たるまで差し込みます。

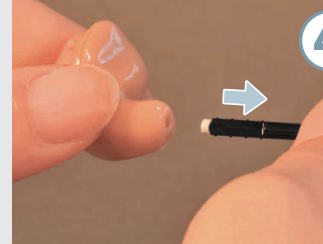

まっすぐ引き抜き、クイックガードを取り外し廃棄してください。

新しいクイックガードの取り付け方

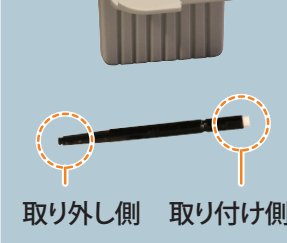


交換ツールをまっすぐ挿しこみます。




クイックガードが補聴器と同じ高さになるまではめ込みます。



交換ツールをまっすぐ挿しこみます。

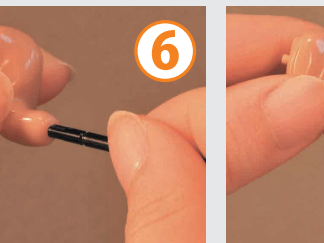

クイックガードが補聴器と同じ高さになるまではめ込みます。

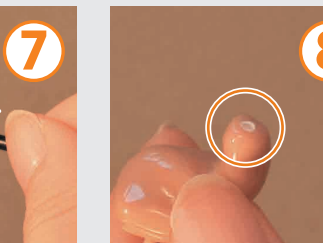

交換ツールを引き抜きます。補聴器にクイックガードが取り付けられます。

※ 2ヶ月に一度は点検をかねて販売店でクリーニングをしてもらうことをお勧めします。

表面右下(★印部分)にも耳あな型に関するご案内があります。