

# シグニア補聴器 充電スタートガイド



2021年6月版

製品	対応充電ケース	充電ケースの使い方	充電状態の確認	充電時間と使用可能時間(回数) <sup>※1</sup>			オプション	接続機器
				補聴器のフル充電	補聴器のスピード充電	ケースのフル充電		
<p>Styletto X Signia Xperience 全クラス</p>		<p><b>充電ケースの種類</b></p> <p>【Styletto X】 ①充電スロット ②補聴器 充電ステータスLED ③充電ケース用 充電ステータスLED ④ボタン</p> <p>【Styletto Connect】 ①充電スロット ②補聴器 充電ステータスLED ③充電ケース用 充電ステータスLED ④ボタン</p> <p>【Styletto Essential】 ①充電スロット ②補聴器 充電ステータスLED ③充電ケース用 充電ステータスLED ④ボタン</p>	<p><b>充電ケースの状態の確認方法</b></p> <p>【Styletto X】 【Styletto Connect】 【Styletto Essential】</p> <p>充電ケースの内蔵充電電池を充電中 充電ケースの内蔵充電電池が満充電 充電ケースの電源がオフになっている 冷却作動中（冷却中は充電中止） 問題発生（取扱説明書をご確認ください）</p> <p>充電中 充電していないとき</p>	4時間	30分	3時間 5時間 <sup>※2</sup>	<p>アプリ</p> <p>Signia app</p> <p>リモコン・その他</p> <p>miniPocket</p> <p>StreamLine Mic</p> <p>StreamLine TV</p>	<p>ノアリンクワイヤレス</p>
				19時間	5時間	補聴器2台を3回フル充電 (補聴器1台の場合) 6回フル充電		
<p>Styletto Connect Signia Nx 7Nx/5Nx/3Nx</p>		<p>①左右を間違えないように充電スロットに補聴器を入れます *補聴器充電ステータスLEDが数秒光ります。*奥までしっかりと挿してください。*レシーバー部分は充電スロット奥の空洞に入れます。*補聴器の電源が自動的に切れます。*蓋を閉めなくても充電できます</p> <p>②充電ケースをUSBケーブルで電源に接続すると、充電が始まります *充電ケース用充電ステータスLEDが数秒光ります</p>	<p><b>補聴器の状態の確認方法</b></p> <p>【Styletto X】 【Styletto Connect】 【Styletto Essential】</p> <p>充電ケースの内蔵充電電池は2台の補聴器を満充電させるのに十分な残量があります 充電ケースの内蔵充電電池は2台の補聴器を満充電させるのに十分な残量がありません 充電ケースの内蔵充電電池は空です。補聴器を充電することはできません</p>	3時間	30分	2時間	<p>アプリ</p> <p>Signia app</p> <p>リモコン</p> <p>miniPocket</p>	<p>調整時には、充電ケースが必要です<sup>※3</sup></p>
				19時間	5時間	補聴器2台を3回フル充電 (補聴器1台の場合) 6回フル充電		
<p>Styletto Essential Signia Nx 2Nx/1Nx</p>		<p>Styletto Xのみ: Qiワイヤレス充電パッドで充電する場合 Qiワイヤレス充電パッドの中央に充電ケースを置いてください。数秒後、中央下部の「充電ケース用充電ステータスLED」ランプが緑色に点滅すると、充電開始の合図です。ランプが点滅しない場合、充電ケースを持ち上げ、Qiワイヤレス充電パッドのランプが消えた後、再度置いてください</p> <p><b>電源 On/Off</b></p> <p>●充電ケースの電源On/Off ボタンを5秒間長押ししてOn/Offが切り替わります</p> <p>●補聴器の電源On/Off 充電ケースに入ると自動的にOffになり、充電ケースから出すと自動的にOnになります</p> <p>電源Offのままケースから取り出したい場合: ①補聴器を充電ケースに入れます ②充電ケースを電源から外します ③充電ケースのボタンを5秒間長押しします ④充電ケース用充電ステータスLEDの点滅が消えたら、補聴器を取り出します</p>	<p><b>充電ケースの状態の確認方法</b></p> <p>【Styletto X】 【Styletto Connect】 【Styletto Essential】</p> <p>充電ケースの内蔵充電電池は2台の補聴器を満充電させるのに十分な残量があります 充電ケースの内蔵充電電池は2台の補聴器を満充電させるのに十分な残量がありません 充電ケースの内蔵充電電池は空です。補聴器を充電することはできません</p>	3時間	30分	2時間	<p>アプリ</p> <p>Signia app</p> <p>リモコン</p> <p>miniPocket</p>	<p>コネックスエア</p> <p>調整時には、充電ケースが必要です<sup>※3</sup></p>
				19時間	5時間	補聴器2台を3回フル充電 (補聴器1台の場合) 6回フル充電		

※1 Bluetooth機能を利用して音楽等を聞く場合(ストリーミング)、使用可能時間はより短くなります ※2 市販のQi規格対応の充電パッドをご使用ください。充電パッドをご使用の場合、ケースの充電時間の目安は5時間ですが、ご使用の充電パッドの種類により異なる場合があります  
※3 無線プログラマーとペアリングする為に、充電ケースで本体をオン・オフします。フィッティング時には必ず本体と一緒に充電ケースをお持ちください

# シグニア補聴器 充電スタートガイド



2021年6月版

製品	対応充電器	充電器の使い方	充電状態の確認	充電時間と使用可能時間※2		オプション&接続機器
				補聴器のフル充電	補聴器のスピード充電	
Pure Charge&Go X Motion Charge&Go X Signia Xperience 7X/5X/3X	ワイヤレス充電器2 	<b>充電時の注意点(3種類の充電器共通)</b> ※補聴器は仮充電の状態でご購入後、ご購入後は始めに満充電にしてください ① レシーバー部分が中央にくるように置きます  	充電器の電源が入っていません ●未点灯 充電器に電源が入りました ●緑色が順番に点灯後に消灯 充電器が補聴器の電池残量を読み取っています ●緑色の点滅 充電率: 0~33% ●緑色が1つ点灯 充電率: 34~66% ●緑色が2つ点灯 充電率: 67~99% ●緑色が3つ点灯 補聴器は完全に充電されました。(100%) ●緑色が3つ点灯 充電器の温度が上がりすぎた為、冷却しています。冷却後(約30分)に充電が再開されます ●緑色が順番に点灯 問題が発生しました。取扱説明書をご覧ください ●赤色の点滅	4時間	30分	アプリ 
				23時間	6時間	
Pure Charge&Go X Motion Charge&Go X Signia Xperience 2X/1X	ワイヤレス充電器E 	② レシーバー部分が充電器の上にくるように置きます  	充電器の電源が入っていません ●未点灯 充電器に電源が入りました ●緑色が1つ点灯 充電器が補聴器の電池残量を読み取っています ●緑色の点滅 充電率: 0~33% ●緑色が1つ点灯 充電率: 34~66% ●緑色が2つ点灯 充電率: 67~99% ●緑色が3つ点灯 補聴器は完全に充電されました。(100%) ●緑色が3つ点灯 充電器の温度が上がりすぎた為、冷却しています。冷却後(約30分)に充電が再開されます ●緑色が3つ点滅 問題が発生しました。取扱説明書をご覧ください ●赤色の点灯又は点滅	4時間	30分	miniPocket 
				24時間	6時間	
Pure Charge&Go Nx Motion Charge&Go Nx Signia Nx 全クラス	ワイヤレス充電器 	<b>補聴器の電源On/Off(3種類の充電器共通)</b> 充電器に補聴器を入れると、自動的に電源が切れて充電が始まります。充電器から補聴器を取り出すと、自動的に電源が入ります 	充電器の電源が入っていません ●未点灯 充電器に電源が入りました ●緑色が1つ点灯 充電器が補聴器の電池残量を読み取っています ●緑色の点滅 充電率: 0~33% ●緑色が1つ点灯 充電率: 34~66% ●緑色が2つ点灯 充電率: 67~99% ●緑色が3つ点灯 補聴器は完全に充電されました。(100%) ●緑色が3つ点灯 充電器の温度が上がりすぎた為、冷却しています。冷却後(約30分)に充電が再開されます ●緑色が3つ点滅 問題が発生しました。取扱説明書をご覧ください ●赤色の点灯又は点滅	4時間	30分	StreamLine TV 
				21時間	6時間	
Motion Charge&Go P X 	P用ドライ&クリーン充電器※1 SP用ドライ&クリーン充電器※1  	<b>ドライ&amp;クリーン充電器</b> ●除菌・乾燥機能付き ●補聴器をセットシフトを閉めた後、約15分間UV除菌します。除菌中は②のUV除菌ランプがゆっくり点滅します ●乾燥は充電開始後約4時間運転します ① 充電ランプ ② UV除菌ランプ ③ 充電スロット 	充電器の電源が入っていません ●未点灯 充電器に電源が入りました ●緑色が順番に点灯後に消灯 充電器が補聴器の電池残量を読み取っています ●緑色が3回速く点滅 充電率: 0~33% ●緑色が1つ点灯、ゆっくり点滅 充電率: 34~66% ●緑色が2つ点灯、ゆっくり点滅 充電率: 67~99% ●緑色が3つ点灯、ゆっくり点滅 補聴器は完全に充電されました。(100%) ●緑色が3つ点灯 充電器の温度が上がりすぎた為、冷却しています。冷却後(約30分)に充電が再開されます ●オレンジ色が順番に点灯後に消灯 問題が発生しました。取扱説明書をご覧ください ●赤色が点滅	4時間	30分	プログラマー 
				30時間	7時間	
Motion Charge&Go SP X Signia Xperience 全クラス 	P用シンプル充電器※1 SP用シンプル充電器※1  	<b>シンプル充電器</b> ●充電機能のみ ① 充電ランプ ② 充電スロット 	充電器の電源が入っていません ●未点灯 充電器に電源が入りました ●緑色3回点滅 充電器が補聴器の電池残量を読み取っています - 充電率: 0~33% - 充電率: 34~66% ●緑色の点滅 充電率: 67~99% - 補聴器は完全に充電されました。(100%) ●緑色が点灯 充電器の温度が上がりすぎた為、冷却しています。冷却後(約30分)に充電が再開されます - 問題が発生しました。取扱説明書をご覧ください ●赤色が3回点滅	4時間	30分	ノアリンクワイヤレス 
				61時間	4時間	

※1 補聴器購入時に同時購入いただく充電器はドライ&クリーン充電器です。シンプル充電器は必要に応じてご購入ください ※2 Bluetooth機能を利用して音楽等を聞く場合(ストリーミング)、使用可能時間はより短くなります  
 ※3 無線プログラマーとペアリングする為に、充電ケースで本体をオン・オフします。フィッティング時には必ず本体と一緒に充電ケースをお持ちください