




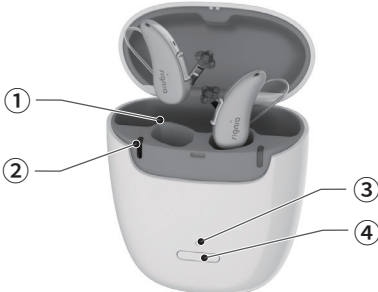






# シグニア補聴器 充電スタートガイド

Signia AX シリーズ用



## ポータブル充電ケース

※Signia AXシリーズ以外の器種は「シグニア補聴器充電スタートガイド2021年6月版」をご参照ください。

製品	対応充電ケース	充電ケースの使い方	充電状態の確認	充電時間と使用可能時間(回数)*1	オプション	接続機器																													
 <p>ピュアチャージ&amp;ゴー Pure Charge&amp;Go AX</p>	 <p>Pure Charge&amp;Go AX用 ポータブル充電ケース</p>  <p>ドライ&amp;クリーン 充電器の使い方は 裏をご確認ください</p>	<p><b>充電ケースの種類</b></p>  <p>① 充電スロット ② 補聴器 充電ステータスLED ③ 充電ケース用 充電ステータスLED ④ ボタン</p> <p><b>充電方法</b></p> <p>① 左右を間違えないように充電スロットに補聴器を入れます *補聴器充電ステータスLEDが数秒光ります。*奥までしっかりと挿してください。*レシーバー部分は充電スロット奥の空洞に入れます。*補聴器の電源が自動的に切れます。*フタを閉めなくても充電できます</p> <p>② 充電ケースをUSBケーブルで電源に接続すると、充電が始まります *充電ケース用充電ステータスLEDが数秒光ります</p> <p><b>電源 On/Off</b></p> <p>● 充電ケースの電源On/Off ボタンを5秒間長押しでOn/Offが切り替わります</p> <p>● 補聴器の電源On/Off 充電ケースに入れると自動的にOffになり、充電ケースから出すと自動的にOnになります</p> <p>電源Offのままケースから取り出したい場合: ① 補聴器を充電ケースに入れます ② 充電ケースを電源から外します ③ 充電ケースのボタンを5秒間長押しします ④ 充電ケース用充電ステータスLEDの点滅が消えたら、補聴器を取り出します</p>	<p><b>充電ケースの状態の確認方法</b></p>  <p>Pure Charge&amp;Go AX ボタンを押すと、数秒間光ります</p> <table border="1"> <tr> <td rowspan="4">充電中</td> <td>充電ケースの内蔵充電電池を充電中</td> <td> 緑に点滅</td> </tr> <tr> <td>充電ケースの内蔵充電電池が満充電</td> <td> 緑に点灯</td> </tr> <tr> <td>充電ケースの電源がオフになっている</td> <td> LEDが消灯</td> </tr> <tr> <td>冷却作動中 (冷却中は充電中止)</td> <td> 橙に点滅</td> </tr> <tr> <td rowspan="4">充電していないとき</td> <td>問題発生 (取扱説明書をご確認ください)</td> <td> 赤に点滅</td> </tr> <tr> <td>充電ケースの内蔵充電電池は2台の補聴器を満充電させるのに十分な残量があります</td> <td> 緑に点灯</td> </tr> <tr> <td>充電ケースの内蔵充電電池は2台の補聴器を満充電させるのに十分な残量がありません</td> <td> 橙に点灯</td> </tr> <tr> <td>充電ケースの内蔵充電電池は空です。補聴器を充電することはできません</td> <td> 橙に点滅</td> </tr> </table> <p><b>補聴器の状態の確認方法</b></p>  <p>Pure Charge&amp;Go AX フタを開けると、数秒間光ります</p> <table border="1"> <tr> <td rowspan="5">充電中</td> <td>補聴器を充電中</td> <td> 緑に点滅</td> </tr> <tr> <td>補聴器が満充電</td> <td> 緑に点灯</td> </tr> <tr> <td>充電ケースの電源がオフになっている</td> <td> LEDが消灯</td> </tr> <tr> <td>冷却作動中 (冷却中は充電中止)</td> <td> 橙に点滅</td> </tr> <tr> <td>問題発生 (取扱説明書をご確認ください)</td> <td> 赤に点滅</td> </tr> </table>	充電中	充電ケースの内蔵充電電池を充電中	緑に点滅	充電ケースの内蔵充電電池が満充電	緑に点灯	充電ケースの電源がオフになっている	LEDが消灯	冷却作動中 (冷却中は充電中止)	橙に点滅	充電していないとき	問題発生 (取扱説明書をご確認ください)	赤に点滅	充電ケースの内蔵充電電池は2台の補聴器を満充電させるのに十分な残量があります	緑に点灯	充電ケースの内蔵充電電池は2台の補聴器を満充電させるのに十分な残量がありません	橙に点灯	充電ケースの内蔵充電電池は空です。補聴器を充電することはできません	橙に点滅	充電中	補聴器を充電中	緑に点滅	補聴器が満充電	緑に点灯	充電ケースの電源がオフになっている	LEDが消灯	冷却作動中 (冷却中は充電中止)	橙に点滅	問題発生 (取扱説明書をご確認ください)	赤に点滅	<p>充電時間と使用可能時間(回数)*1</p> <p><b>補聴器の充電</b></p> <p>充電時間: 30分 スピード充電, 4時間 フル充電</p> <p>使用可能時間*1: 6時間, 28時間</p> <p><b>ポータブル充電ケースの充電</b></p> <p>USB充電 4時間 (Type-C)</p> <p><b>充電ケースの補聴器充電回数</b></p> <p>補聴器2台を4回フル充電可能 (補聴器1台の場合8回フル充電)</p>	<p><b>アプリ</b></p>  <p>Signia app</p> <p><b>リモコン・その他</b></p>  <p>miniPocket</p>  <p>ノアリンク ワイヤレス</p>  <p>StreamLine Mic</p>  <p>StreamLine TV</p>	<p><b>接続機器</b></p> <p>プログラマー</p>
充電中	充電ケースの内蔵充電電池を充電中	緑に点滅																																	
	充電ケースの内蔵充電電池が満充電	緑に点灯																																	
	充電ケースの電源がオフになっている	LEDが消灯																																	
	冷却作動中 (冷却中は充電中止)	橙に点滅																																	
充電していないとき	問題発生 (取扱説明書をご確認ください)	赤に点滅																																	
	充電ケースの内蔵充電電池は2台の補聴器を満充電させるのに十分な残量があります	緑に点灯																																	
	充電ケースの内蔵充電電池は2台の補聴器を満充電させるのに十分な残量がありません	橙に点灯																																	
	充電ケースの内蔵充電電池は空です。補聴器を充電することはできません	橙に点滅																																	
充電中	補聴器を充電中	緑に点滅																																	
	補聴器が満充電	緑に点灯																																	
	充電ケースの電源がオフになっている	LEDが消灯																																	
	冷却作動中 (冷却中は充電中止)	橙に点滅																																	
	問題発生 (取扱説明書をご確認ください)	赤に点滅																																	

\*1 Bluetooth機能を利用して音楽等を聞く場合(ストリーミング)、使用可能時間はより短くなります

# シグニア補聴器 充電スタートガイド

Signia AX シリーズ用



## 据え置き型充電器

※Signia AXシリーズ以外の機種は「シグニア補聴器充電スタートガイド2021年6月版」をご参照ください。

製品	対応充電器	充電器の使い方	充電状態の確認	充電時間と使用可能時間*2	オプション&接続機器
 <p>ビュア チャージ&amp;ゴー Pure Charge&amp;Go AX</p>	 <p>Pure Charge&amp;Go AX用 ドライ&amp;クリーン充電器*1</p> <p>ポータブル 充電ケースの 使い方は裏を ご確認ください</p>	<p>●除菌・乾燥機能付き ●補聴器をセットしフタを閉めた後、約15分間UV除菌します。 除菌中は②のUV除菌ランプがゆっくり点滅します ●乾燥は充電開始後約4時間運転します</p>  <p>①充電ランプ ②UV除菌ランプ ③充電スロット</p> <p><b>注意点</b></p> <p>●充電時、補聴器とレシーバーは上記の図と同じ向きになるように、正しく設置してください ●補聴器本体および充電器の充電端子の汚れや付着物を取り除いてから充電スロットに入れてください</p>	<p>充電器の電源が入っていません</p> <p>充電器に電源が入りました</p> <p>補聴器が正しく設置されました。充電が開始されます</p> <p>充電率：0～33%</p> <p>充電率：34～66%</p> <p>充電率：67～99%</p> <p>補聴器は完全に充電されました。(100%)</p> <p>充電器の温度が上がりすぎた為、冷却しています。冷却後(約30分)に充電が再開されます</p> <p>問題が発生しました。取扱説明書をご覧ください</p>	<p>未点灯</p> <p>緑色が順番に点灯後に消灯</p> <p>緑色が3回速く点滅</p> <p>緑色が1つ点灯、ゆっくり点滅</p> <p>緑色が2つ点灯、ゆっくり点滅</p> <p>緑色が3つ点灯、ゆっくり点滅</p> <p>緑色が3つ点灯</p> <p>オレンジ色が順番に点灯後に消灯</p> <p>赤色が点滅</p> <p><b>補聴器の充電</b></p> <p>充電時間 <b>30分</b> スピード充電 <b>4時間</b> フル充電</p> <p>使用可能時間*2 <b>6時間</b> <b>28時間</b></p>	<p><b>アプリ</b></p>  <p>Signia app</p> <p><b>リモコン・その他</b></p>  <p>miniPocket</p>  <p>StreamLine Mic</p>  <p>StreamLine TV</p>
 <p>ワイヤレス充電ITC ワイヤレス充電ITE</p> <p>インシオ チャージ&amp;ゴー Insio Charge&amp;Go AX</p>	 <p>Insio Charge&amp;Go AX用 充電器</p>	 <p>フェイスプレート</p> <p>充電方法</p> <p>①USBケーブルを充電器に接続します。 ②フタを開けたら補聴器充電ステータスLEDが数秒光ります。 ③左右を間違えないように充電スロットに補聴器を入れます。フェイスプレート(耳の外側に来る部分)を上向きにして水平になるように、補聴器を充電スロットの奥までしっかりと挿してください。 ④フタを閉めなくても充電は始まりますが、フタを閉めたほうが、フェイスプレートが押されてより安定して充電できます。</p> <p><b>注意点</b></p> <p>●充電時、補聴器のフェイスプレートが水平になるように正しく設置してください。水平でない場合充電されないことがあります。</p> <p><b>補聴器の電源On/Off</b></p> <p>充電ケースに入れると自動的にOffになり、充電ケースから出すと自動的にOnになります</p>	<p>充電器の電源が入っていません</p> <p>充電器に電源が入りました</p> <p>充電率：0～33%</p> <p>充電率：34～66%</p> <p>充電率：67～99%</p> <p>補聴器は完全に充電されました。(100%)</p> <p>充電器の温度が上がりすぎた為、冷却しています。冷却後(約5分)に充電が再開されます</p> <p>問題が発生しました。取扱説明書をご覧ください</p>	<p>未点灯</p> <p>緑色が順番に点灯後に消灯</p> <p>緑色が1つ点灯、ゆっくり点滅</p> <p>緑色が2つ点灯、ゆっくり点滅</p> <p>緑色が3つ点灯、ゆっくり点滅</p> <p>緑色が3つ点灯</p> <p>オレンジ色が順番に点灯後に消灯</p> <p>赤色が点滅</p> <p><b>補聴器の充電</b></p> <p>充電時間 <b>30分</b> スピード充電 <b>4時間</b> フル充電</p> <p>使用可能時間*2 <b>6時間</b> <b>28時間</b></p>	<p><b>プログラマー</b></p>  <p>ノアリンク ワイヤレス</p>

\*1ドライ&クリーン充電器は対応機種によって充電スロット、端子の位置が異なります。使用する前に一度ご確認ください \*2 Bluetooth機能を利用して音楽等を聞く場合(ストリーミング)、使用可能時間はより短くなります