

自分の声をより正確に録音するために

- ✓ 帽子、マスクは外してください
- ✓ 出来るだけ静かな環境で
- ✓ 椅子に座り、まっすぐ向いてください
- ✓ 合図を出したら始めてください

声をはっきり出して、言葉を区切らず伸ばしながら、読んでください

イーチ ⇨ ニー ⇨ サーン ⇨ シー ⇨ ゴー


ローク ⇨ ナーナ ⇨ ハーチ ⇨ キューウ ⇨ ジューウ

イーチ ⇨ ニー ⇨ サーン ⇨ シー ⇨ ゴー




なんで自分の声を録音するの？ OVPって何をしてくれるの？


- 両耳に補聴器をすると自分の声が響いて聞こえることがあります

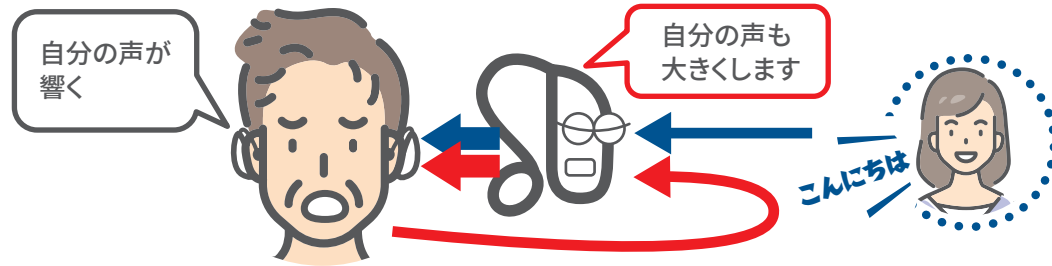

- 自分の声を録音

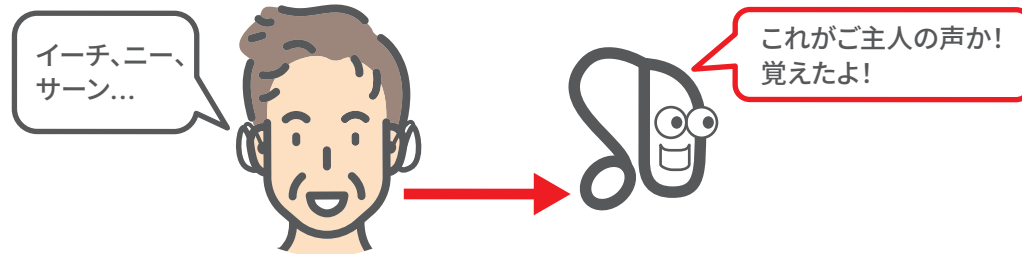

- OVP機能を使うと快適

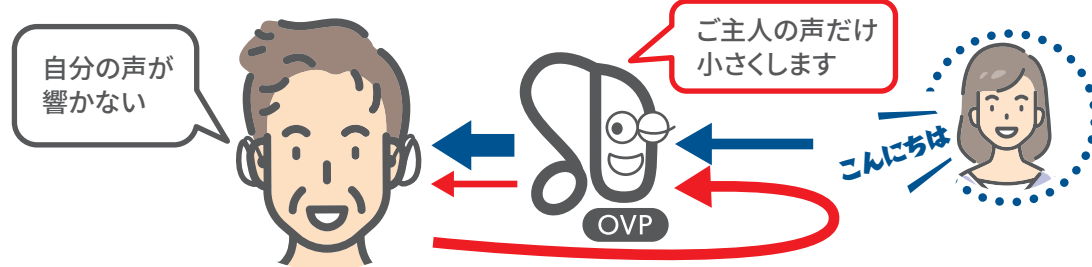

自声に悩みを持つ装用者の75%が「満足」と回答! ※2017年シバントス調べ(n=20)

ONとOFFで聞き比べて
みましょう

声をはっきり出して、言葉を
区切らず伸ばしながら、
読んでください

かんとう てんき ごご
関東の天気。午後からは、

かいせい
快晴になるでしょう。

きおん あ
気温は、きのうより上がる

おお よそう
ところが多い予想です。