


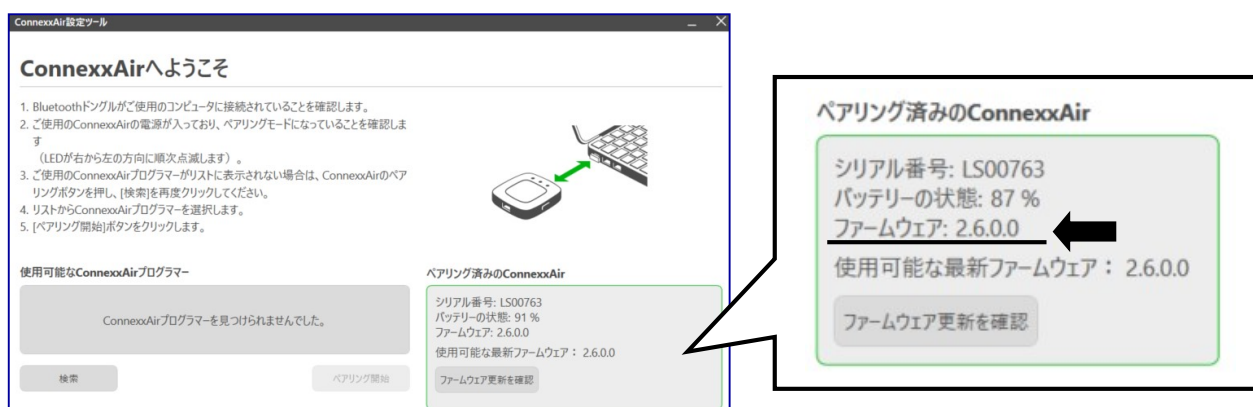
調整機器 ConnexxAir の内蔵ファームウェア更新方法



●ConnexxAir 内蔵ファームウェアが最新であることの確認手順

- ① Connexx を起動し、ペアリングされた ConnexxAir で補聴器の読み取りができる状態にします
- ② [ユーザー設定 - ③ バージョンの確認:

OK・・・下図のように表示「ファームウェア」=表示「使用可能な最新ファームウェア」であれば、現在既に最新と判断できます。 ※2023年11月現在、最新ファームウェア＝“2.6.0.0”
右上の“×”をクリックして ConnexxAir 設定画面を閉じます。



NG・・・それより古いバージョンの場合、最新版をインストールします。手順④に進みます。

- ④ ConnexxAir の充電に使用しているケーブルを使ってパソコンと ConnexxAir を接続します
※製品に付属の USB ケーブルをお使いください。市販ケーブルの中には、ファームウェア更新に適さないものがあります。万一、手順⑤で更新がうまく行かない場合は、別の USB ケーブルでお試ください
- ⑤ 上図の[ファームウェア更新を確認]をクリックし、ファームウェアをインストール(書込み)します
- ⑥ ファームウェア更新後、念のため ConnexxAir 経由で補聴器読み取りを実施願います

[補足情報]

- ・2023年11月28日発売予定の Silk Charge&Go IX の調整には ConnexxAir+ファームウェア 2.6.0.0 以上が必要です。
- ・ConnexxAir で補聴器を読み取る場合には、補聴器の電源がオンになっていればいつでも読み取りが可能です。

以上