

販売店向け



* 1 0 2 4 3 7 6 1 *

キ-10243761 / 2022.2

本紙および本ツールは販売店にて大切に保管してください。

モールド3.0 付け外しツールガイド

ツールの構造・・・「押しボタン」を押して「ホールド部」を開閉し、部品をはさみ込む仕掛けになっています。




付け外し方法の動画 ▶





取り付け方法

※イヤモールドの大きさ・形状によってはツールで挟みづらい場合があります。その場合、手爪でつまむか、ペンチ状の工具でつまんで代用いただくこともできます。ただし、その場合は保護対策も十分行い、部品やモールドの表面を傷つけないようご配慮をお願いします。

■ 部品をツールで保持する

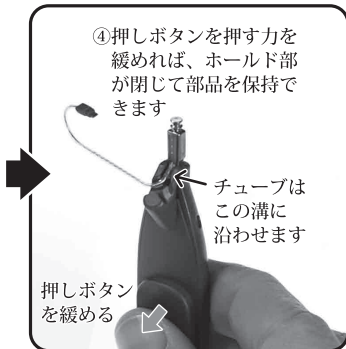


■ 部品をモールドにはめる

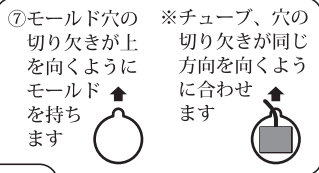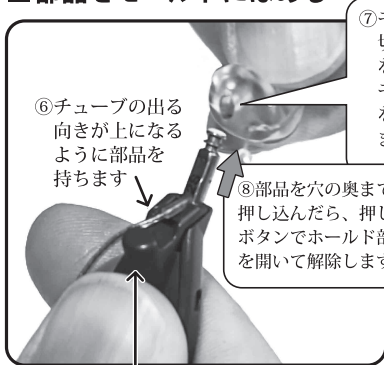

⑤ツールのこの部分を指で押さえることで部品をより強く保持します


⑨最後に、部品の底面を指で押して部品が穴の最奥まで入ったことを確認します

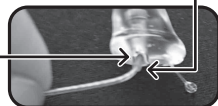

⑩部品が最奥まで入ると、チューブはモールドにほぼ接するところに来ます

取り外し方法

■ 部品をツールで保持する

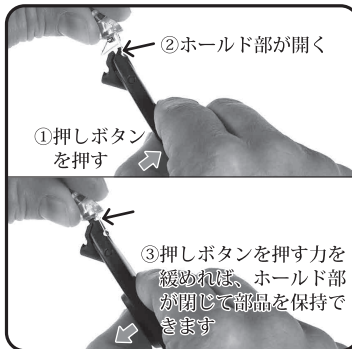

■ 部品をモールドから抜き取る

