

signia

Life sounds brilliant.

一人ひとりのお客様に、生き生きと輝く人生を楽しんでいただきたい、
Life sounds brilliant. 明日も輝く。世界が広がる。

シグニア補聴器 総合カタログ

2020年9月版

シグニア補聴器は、
シーメンスの140年以上の歴史を継承しています。
革新的な技術の積み重ねは、信頼の証。
確かな品質と共に、お客様に寄り添う
誠実なブランドであり続けます。

www.signia.jp





Life sounds brilliant.

一人ひとりのお客様に、
生き生きと輝く人生を楽しんでいただきたい、
Life sounds brilliant. 明日も輝く。世界が広がる。

確かな信頼性と品質

シグニア補聴器は、シーメンスの140年以上の歴史を継承しています。

革新的な技術の積み重ねは、信頼の証。

確かな品質と共に、お客様に寄り添う

誠実なブランドであり続けます。



The succession of 140 years

シグニア補聴器 難聴への取り組み

1878

Phonophor

ベルナー・フォン・
シーメンスが
難聴者向けの特別な
電話受信器を發明



1913

シーメンス最初の補聴器

最初は難聴の従業員と
家族向けに製造



1951

Phonophor Alpha

真空管アンプを使用した
ポケットサイズの補聴器



1959

Auriculina 326

シーメンス初の
耳かけ型補聴器



1966

Siretta 339

シーメンス初の
耳あな型補聴器



2011

Aquaris

シーメンス初の
防水・防塵補聴器

SIEMENS COOL

補聴器の
新しいカタチ

2020

Signia  perience

シグニア エクスペリエンス

世界初* Xセンサー搭載。
超広角センサーと
モーションセンサーの両方を備えた、
いつでもどこでもその場に最適な音をお届けする
新しい補聴器シリーズの登場です
*2019年10月、シバントスグループ調べ



確かな技術力と規模

私たちは、世界シェアトップクラスの補聴器メーカー。
高品質な補聴器を世界へ送り出しています。

グローバル企業として世界のセールス拠点を通じ、
120の国・地域におけるお客様に、製品とサービスをお届けしています。
最新の設備を備えた世界各地の工場にはプロフェッショナル達が集結。
より良い聞こえをお届けするため、日々切磋琢磨しています。



2016
primaxテクノロジー
primax*

シグニアブランド初の補聴器
「日本語をしっかり。楽に。」
日本を元気にする
プライマックス



2017
ワイヤレス充電式補聴器
Cellion

リチウムイオン充電電池の
Cellionの登場で
充電式補聴器が
一気にメインストリームに



2018
Signia Nxテクノロジー
Signia Nx

追求したのは会話の楽しさ。
補聴器は「聞く」から
「会話を楽しむ」ツールへ



2019
スタイルとハイテクの融合
Styletto Connect

これまでにないスリムなフォルム。
補聴器はスタイリッシュさを
楽しむものに

INDEX

補聴器を選ぶ前に

140年以上の歴史	1
聞こえのこと・難聴のこと	3
補聴器のこと	5
補聴器の種類	7
補聴器のシリーズ、クラスと機能	9
充電式補聴器 Styletto	11
充電式補聴器 Charge&Go	13

Signia Xperience

Signia Xperience テクノロジー	15
Signia Xperience ラインナップ	19
Signia Xperience 7X	21
Signia Xperience 5X	23
Signia Xperience 3X	25

Signia Nx

Signia Nx テクノロジー	27
Signia Nx 7Nx	29
Signia Nx 5Nx	31
Signia Nx 3Nx	33
Signia Nx 2Nx・1Nx	35

その他補聴器ラインナップ

primax* 7px・5px・3px	37
primax* 2px・1px	39
Intuis3	41
Prompt/Fun	42

アプリ・アクセサリなど

アプリ・リモコン	43
アクセサリ・補修パーツ	45
イヤモールド	46
CROS/BiCROS補聴システム	47

性能一覧・カラーバリエーション

RIC型・耳かけ型カラーバリエーション	48
RIC型・耳かけ型性能一覧	49
耳あな型性能一覧・オプション	51
機能比較表	53
おすすめラインナップ性能表	55

補聴器の種類

NEW
Signia Xperience

Signia Nx

その他補聴器
ラインナップ

アプリ・
アクセサリなど

性能一覧
カラーバリエーション

聞こえと生活スタイルのチェックシート

■ こんなことはありませんか？

- 自動車の中での話が、よく聞き取れない
- 人の話し声が小さいように感じる
- 周りの人から、テレビの音が大きいと言われる
- 携帯電話の呼び出し音に気付かないことがある
- 人と会話をするのが面倒に感じる


該当する場合は
聴力が低下している
かもしれません



■ こんな聞き間違いありませんか？

- しちじ(7時) → いちじ(1時)
- しろい(白い) → ひろい(広い)
- たかな(高菜) → さかな(魚)


■ 耳の構造と役割

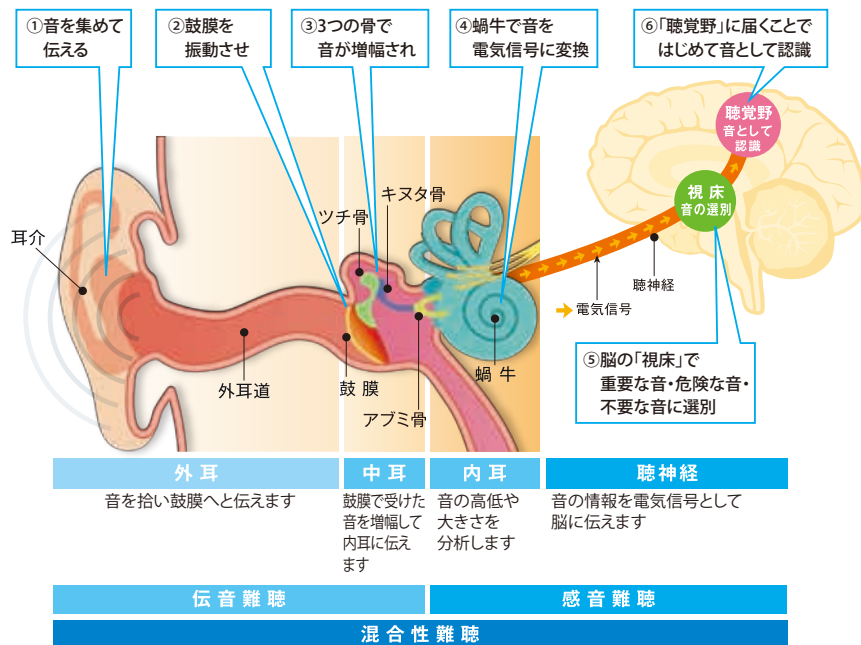

難聴の種類	解説	
伝音難聴	中耳炎や鼓膜の損傷・病気などが原因で、音が伝わりにくくなることによる難聴	医学的に治療できるケースも。難聴が残る場合は補聴器を使う事もあります
感音難聴	加齢や病気、長時間騒音下にいることなどが原因の難聴	医学的治療では治らず、補聴器を使うケースも。難聴レベルや周りの状況によっては、補聴器を装着しても聞き取りが困難なケースもあります
混合性難聴	伝音難聴と感音難聴の両方が同時に起こる難聴	

加齢による聴力低下

- 難聴は年を重ねるにつれ、誰にでも起こりうるものです
- 聴力の低下は30代からすでに始まっています
- 難聴が進むと高い音から聞きづらくなり、聞こえる音が減っていきます
- 加齢性難聴は自分では気づきにくいものです

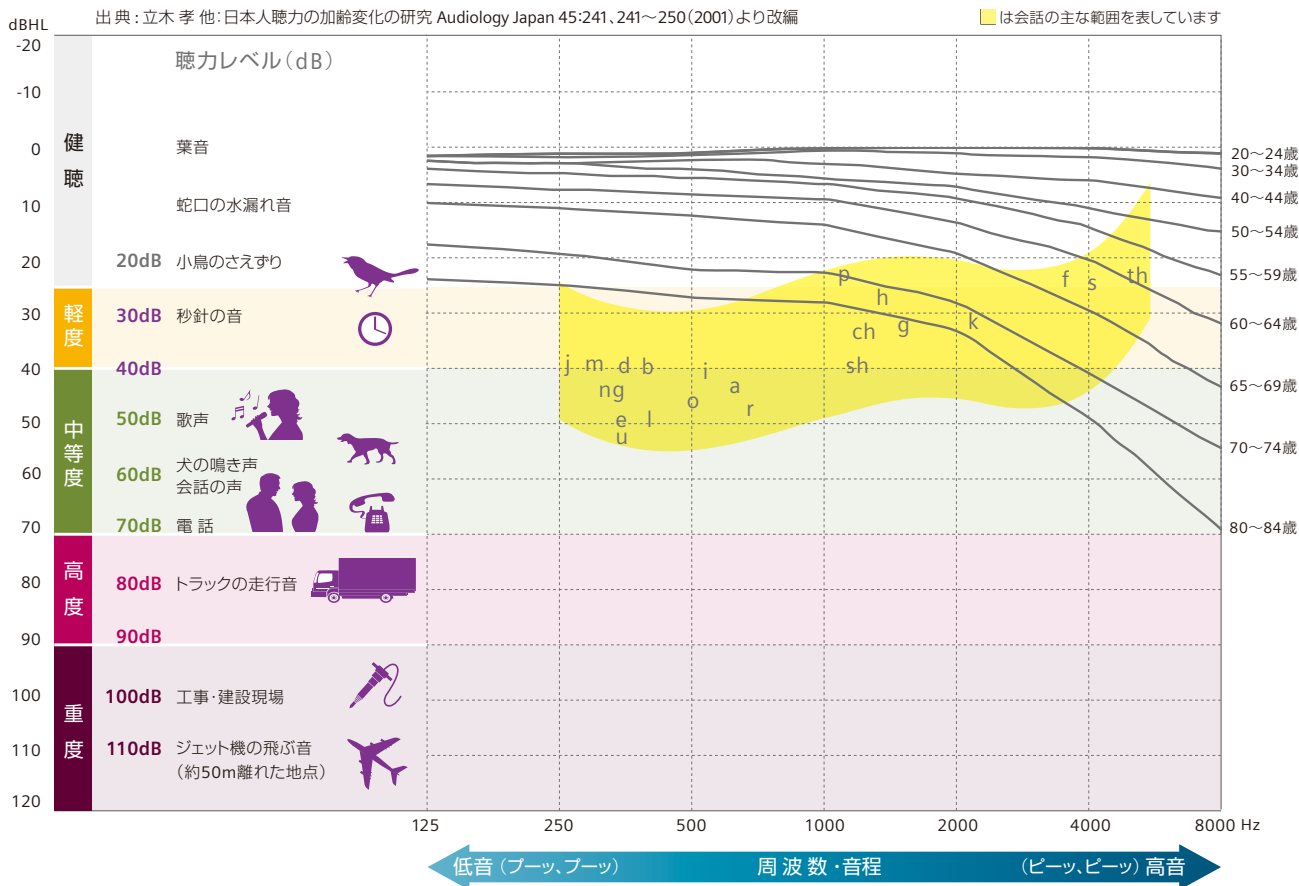

聞こえの目安


軽度 25dBHL~40dBHL	中等度 40dBHL~70dBHL	高度 70dBHL~90dBHL	重度 90dBHL以上
<ul style="list-style-type: none"> ・小さな声やささやき声が聞き取りにくい ・テレビの音が大きいと言われる 	<ul style="list-style-type: none"> ・普通の会話が聞きづらい ・自動車がそばに来て初めて気づく 	<ul style="list-style-type: none"> ・大きな声でも聞きづらい ・大きな声でも聞き間違いが多い 	<ul style="list-style-type: none"> ・耳元での大きな声も聞きづらい

■ 補聴器はなぜ必要？

難聴の場合、早いタイミングで適切な補聴器をつけると、いろいろなメリットがあります

■ より良い コミュニケーション

音がよく聞こえるようになると、家族や友人と話をすることが楽しくなります

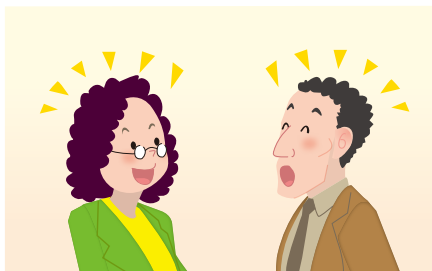

■ 人間関係と 心の健康

人生100年時代。コミュニケーション不足によって人間関係が疎遠になるのを防ぎ、あなたの新しい挑戦を応援します



■ 生活上の 危険の回避

音で周囲の状況を把握し、危険を未然に防ぐのを助けてくれます



■ 音で脳に良い 刺激を与える

聴覚刺激を増やすことで、「楽しい」「うれしい」などの情動を引き起こし脳機能を活性化できるといわれています



■ 補聴器購入の流れ

1 ご来店・ご相談



聞こえの状態や悩み、生活スタイルをお伺いします

2 聴力測定



器械等を使って聴力のレベルを測定します

3 補聴器の選定/調整/購入

音の効果測定

調整 ▶▶
音の効果測定 ▶▶
調整…

言葉の効果測定



聴力測定で得られたデータを元に、お客様の聴力やご希望に合う補聴器を選び、調整します

4 アフターケア



購入後も定期的に補聴器の調整や点検を行います

■ 両耳装用のすすめ

音の方向がわかりやすい




騒音下での聞きとりが良い





両耳で聞くので疲れにくい




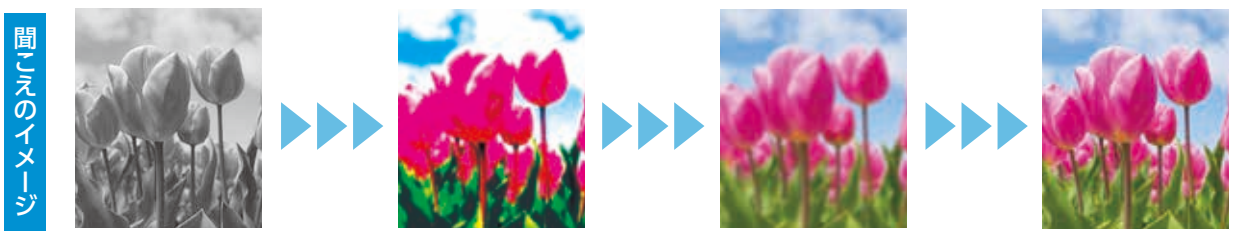
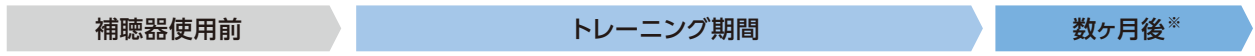
■ 使いこなすにはトレーニングと調整が重要

 補聴器で再び聞こえ出した音に脳が慣れるまでには時間がかかります


 最初の数ヶ月間[※]は聞こえ方が変化します


 毎日つけてトレーニングすることが大切です

 定期的にお店に通い、その時の聞こえに一番合うように調整してもらいましょう




 脳は聞こえない環境に慣れてしまったため、静かな環境が当たり前と感じます


 いままで気にしてなかった音が急に聞こえるようになるので、うるさく感じることもあります


 毎日いろいろな場所で音を聞き、少しずつ音に慣れていきます


 補聴器を使いこなしてコミュニケーションを楽しめるようになります

※90日(3ヶ月)が目安です

最新のシグニア補聴器ラインナップから
あなたに合った器種を見つけてください

補聴器の形状

RIC型・耳かけ型

耳の後ろにすっぽりと隠れる小さなボディに
ハイスペック機能を搭載



Slim RIC型

RIC型

耳かけ型

- 取り扱いカンタンな充電タイプも!
- 機能が豊富でオールインワン
- 耳の後ろにフィットし目立たない
- 幅広い聴力に対応し聴力が低下しても安心
- 多彩なカラーバリエーションで楽しめる

耳あな型

耳あなにフィットし快適に装用できます
小型タイプは特に目立ちません



目立たない

ワンタッチで
着け心地快適

定番サイズ

高度難聴対応



IIC

CIC

MC

COOL

ITC

ITE

- 一つひとつ丁寧にオーダーメイド
- より小さく、目立ちにくい
- 耳あなに挿れるので外れにくい
- マスクやメガネ、帽子の邪魔にならない
- 耳あなに挿れるので汗に強い

■ 使用電池による分類

■ 充電式補聴器

- ・ 取り扱い簡単
- ・ 電池交換の手間不要
- ・ 電池買い忘れの心配がない



■ 電池式補聴器

- ・ 電池を入れたらすぐに使える



■ 適応聴力

タイプ		種類	軽度難聴		中等度難聴			高度難聴		重度難聴	
			30	40	50	60	70	80	90	100	110 dBHL
RIC型・耳かけ型補聴器	充電式	Slim RIC型 Styletto X Styletto Connect/Essential	Sレシーバー		Mレシーバー			Pレシーバー			
			Mレシーバー(固定)								
	RIC型	Sレシーバー		Mレシーバー			Pレシーバー		HPレシーバー		
	耳かけ型	チューブ					イヤフック				
電池式	RIC型	Sレシーバー		Mレシーバー			Pレシーバー		HPレシーバー		
	耳かけ型	チューブ					イヤフック				
		チューブ					イヤフック		Motion SP		
耳あな型補聴器	IIC	IIC(Nx)									
	CIC	CIC(Nx)						パワー		ハイパワー	
	MC	CIC(px・Intuis3)						パワー		ハイパワー	
	COOL	MC(px・Intuis3)						パワー			
	ITC							パワー		ハイパワー	
	ITE							パワー		ハイパワー	
									パワー		ハイパワー

平均聴力+10dB程度の余裕がある形状をお選びください

※個人差があるため当てはまらない場合があります

■ シリーズ 基本性能の違いにより2大シリーズに分かれます。あなたに合う最適な

2020年モデル

シグニア エクスペリエンス
Signia Xperience

シグニアが誇る最上位機種

世界初、Xセンサー搭載。どこにいても、
何をしても、最適な音をあなたに

➔ P15

2018年モデル

シグニア
Signia

■ クラス 搭載機能の違いにより5つのクラスに分かれています
高いクラスほど活用できる場面がひろがります

Signia Xperience

各シリーズの対応クラス		保証 ^{*7}	きめ細かい 聞こえ	テレビ <input checked="" type="checkbox"/>	屋内 <input checked="" type="checkbox"/>	屋外 <input checked="" type="checkbox"/>	グループ活動・買い物 <input checked="" type="checkbox"/>
Signia Xperience	Signia Nx	故障や紛失時に	チャンネル	Bluetooth ^{*1}	突発音抑制	風雑音抑制	Xセンサー(環境・動き認識) 超広角センサー モーションセンサー
7 プレミアム シグニア補聴器の最上位クラス		3年 修理保証 2年 紛失保証	48ch	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
5 アドバンス ワンランク上の聞こえを実感		3年 修理保証 2年 紛失保証	32ch	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
3 スタンダード テレビや電話もクリアに聞こえる		2年 修理保証 1年 紛失保証 <small>3Xのみ1年紛失保証に対応</small>	24ch	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
2 ベーシック 基本性能を重視		2年 修理保証	16ch	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
1 バリュー 基本性能を重視		2年 修理保証	16ch	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

*1 Bluetooth非搭載機種を除く。TV視聴には別途StreamLine TVが必要。アンドロイドには別途StreamLine Micが必要

*2 Pure 10、耳あな型を除く

*3 Pure 10を除く

*4 Pure 10を除く。耳あな型はITC TWIN、ITE TWINに対応

シリーズを選びましょう

エヌエックス
Nx

デザイン、機能を両立

聞こえと好みに合わせて、
豊富なバリエーションをご用意

➔ P27

2大シリーズの共通性能

●きめ細かい聞こえ

チャンネル数が多いほど、より静かでハッキリとした音質に近づきます



●日本語がしっかり・楽に聞こえる

自声のこもりを解消 <input checked="" type="checkbox"/>	固定電話 <input checked="" type="checkbox"/>	騒がしい場所での会話 <input checked="" type="checkbox"/>	居酒屋・レストラン <input checked="" type="checkbox"/>	職場・車イス <input checked="" type="checkbox"/>	車・電車 <input checked="" type="checkbox"/>	ロビー・ホール <input checked="" type="checkbox"/>	超高音質 <input checked="" type="checkbox"/>
OVP ^{*2} 両耳	ツインフォン ^{*3} 両耳	ビーム指向性 ^{*4} 両耳	パワー ^{*5} エンハンス	スピーチ ^{*6} フォーカス	スピーチフォーカス360° ^{*4} 両耳	反響音抑制	12kHz帯域 対応



*5 耳あな型はITC TWIN、ITE TWINに対応。IIC、CIC、COOL、ITC(7Nx、5Nx)は両耳装用で対応
*6 シングルマイクには非搭載
*7 詳しくは56ページに記載

※各機能の詳細は巻末の機能比較表をご参照ください

補聴器を選ぶ前に

Signia Experience

Signia Nx

その他補聴器
ラインナップ

アプリ
アクセサリなど

性能
カラーバリエーション

充電式のメリットを最大限に シグニアの新しい充電式補聴器が 続々登場!

シグニア エクスペリエンス
Signia Xperience

幅広い聴力に対応
最新のポータブル
充電ケース付き

NEW スタイレット
Styletto X

軽 中 高

S: ~60dB M: ~75dB P: ~90dB



専用充電ケース

- 補聴器のフル充電
 - 充電時間 4時間
 - 使用可能時間 19時間
- 補聴器のスピード充電
 - 充電時間 30分
 - 使用可能時間 5時間
- 充電ケースの充電
 - USB充電 3時間
 - ワイヤレス充電 5時間*1

スノーホワイト/
ローズゴールド

聴力が変わっても
長く使える

[カラー バリエーション]



レシーバー交換可能



ブラック/
シルバー

コズミックブルー/
ローズゴールド

スノーホワイト/
ローズゴールド

パールホワイト

ブラック

ワイヤレス充電 業界初!



ケースごとワイヤレスで
ラクラク充電可能!

- 世界初、Qi規格充電パッド*1で
ワイヤレス充電ができる。もちろん
USBケーブルでの充電も可能
- 蓄電機能付きのケースだけで
両耳3回フル充電可能*2



充電ケースはUSB TYPE-Cケーブルが付属
ワイヤレス充電パッドは市販品をご使用ください

クラス	保証	チャンネル	聞こえ	両耳価格	片耳価格
7X	3年 初年保証 2年 初年保証	48ch	 	¥1,064,000	¥554,000
5X	3年 初年保証 2年 初年保証	32ch		¥764,000	¥404,000
3X	2年 初年保証 1年 初年保証	24ch		¥544,000	¥294,000

※補聴器本体(非課税)、充電器1台¥44,000(課税・税込)を一式にした価格です。両耳同時に購入の場合は、充電器は1台となります (販売名)補聴器 Styletto X
*1 市販のQi規格対応の充電パッドをご使用ください。充電パッドをご使用の場合、ケースの充電時間の目安は5時間ですが、ご使用の充電パッドの種類により異なる場合があります

Signia Xperience

シグニア エヌエックス
Signia Nx

コンパクトにスタイリッシュに持ち運ぶ
ポータブル充電ケースはとても便利!



スタイルット コネクト

Styletto
Connect

軽 中 M: ~75dB



専用充電ケース(白) ブラック/シルバー コズミックブルー/ローズゴールド スノーホワイト/ローズゴールド

スタイリッシュに装う



専用充電ケース(グラナイト) ブラック ホワイト

スタイルット エssenシャル

Styletto
Essential

軽 中 M: ~75dB

Signia Nx

- 補聴器のフル充電
 - 充電時間 3時間
 - 使用可能時間 19時間
- 補聴器のスピード充電
 - 充電時間 30分
 - 使用可能時間 5時間
- 充電ケースの充電
 - USB充電 2時間



持ち運べる
ポータブル
充電ケース



- 蓄電機能付きのケースだけで両耳3回フル充電可能*2
- 旅行や外出に最適。充電ケースだけを持って外出が可能

クラス	保証	チャンネル	聞こえ	両耳価格	片耳価格
スタイルット コネクト Styletto Connect	7Nx	48ch		¥1,064,000	¥554,000
	5Nx	32ch		¥624,000	¥334,000
	3Nx	24ch		¥484,000	¥264,000
スタイルット エssenシャル Styletto Essential	2Nx	16ch	-	¥404,000	¥224,000
	1Nx	16ch		¥284,000	¥164,000

*補聴器本体(非課税)、充電器1台¥44,000(課税・税込)を一式にした価格です。両耳同時に購入の場合は、充電器は1台となります
*2 補聴器の使用状況、使用環境により、3回フル充電できない場合があります

〈販売名〉補聴器 Nxシリーズ

補聴器を選ぶ前に

Signia Experience

Signia Nx

その他補聴器
ラインナップ

アプリ
アクセサリなど

性能
カラーバリエーション

シグニア エクスペリエンス
Signia Xperience

最新技術で新しい聞こえの世界へ さらに小型*1でさらに長持ち

- 補聴器のフル充電
 - 充電時間 4時間
 - 使用可能時間 23時間
- 補聴器のスピード充電
 - 充電時間 30分
 - 使用可能時間 6時間



NEW RIC型充電式
ピュア チャージ&ゴー
Pure Charge&Go X

軽 中 高 重

S:~60dB M:~75dB
P:~90dB HP:~100dB

置くだけ充電可能なケースが進化
フタ付きでさらに清潔に!



フタ付き充電器
置くだけカンタン充電



[カラー バリエーション]



クラス	保証	チャンネル	聞こえ	両耳価格	片耳価格
ピュア チャージ&ゴー Pure Charge&Go X	7X	48ch	 	¥1,064,000	¥554,000
	5X	32ch		¥764,000	¥404,000
	3X	24ch		¥544,000	¥294,000

※補聴器本体(非課税)、充電器1台¥44,000(課税・税込)を一式にした価格です。両耳同時に購入の場合は、充電器は1台となります

〈販売名〉補聴器 Xperience

*1 当社従来製品 Pure Charge&Go Nxと比較した場合、サイズが16%小さくなりました *2 HPLシーバーは別途費用がかかります

シグニア エヌエックス
Signia Nx

小さくてチューブも細く
目立たない



RIC型充電式
ピュア チャージ&ゴー
Pure Charge&Go Nx

軽 中 高 重

S:~60dB M₂:~75dB
P:~90dB HP:~100dB

置くだけの充電式も使いやすい!
RIC型、耳かけ型が選べます

持ちやすく
着け外しが簡単



耳かけ型充電式
モーション チャージ&ゴー
Motion Charge&Go Nx

軽 中 高

チューブ:~70dB
イヤフック:~90dB

- 補聴器のフル充電
 - 充電時間 4時間
 - 使用可能時間 21時間
- 補聴器のスピード充電
 - 充電時間 30分
 - 使用可能時間 6時間

置くだけで充電可能
自動電源ON・OFF機能



置くだけでOK!!



【カラー バリエーション】 Motion Charge&Go Nxは一部対応していないカラーがあります。詳しくは48ページに記載



Signia Nx

クラス	保証	チャンネル	聞こえ	両耳価格	片耳価格	
ピュア チャージ&ゴー Pure Charge&Go Nx	7Nx	3年保証 (0円保証) / 2年保証 (0円保証)	48ch	ULTRA HD e2e / OWN VOICE PROCESSOR OVP	¥1,064,000	¥554,000
	5Nx	3年保証 (0円保証) / 2年保証 (0円保証)	32ch		¥624,000	¥334,000
モーション チャージ&ゴー Motion Charge&Go Nx	3Nx	2年保証 (0円保証)	24ch	-	¥484,000	¥264,000
	2Nx	2年保証 (0円保証)	16ch		¥404,000	¥224,000
	1Nx	2年保証 (0円保証)	16ch		¥284,000	¥164,000

※補聴器本体(非課税)、充電器1台¥44,000(課税・税込)を一式にした価格です。両耳同時に購入の場合は、充電器は1台となります

〈販売名〉補聴器 Nxシリーズ

補聴器を選ぶ前に

Signia Experience

Signia Nx

その他補聴器
ラインナップ

アクセサリなど

カラーバリエーション
性能

シグニア

Signia

エクスペリエンス

Xperience

世界を広げる。人生を愉しむ。



Signia perience

世界初*、^{エックス}Xセンサー搭載。
どこにいても、何をしても、
最適な音をあなたに。



スタイリッシュ充電式
スタイレット
Styletto X



RIC型充電式
ピュア チャージ&ゴー
Pure Charge&Go X







RIC型電池式
ピュア
Pure 312 X

*2019年10月、シバントスグループ調べ

Styletto X:〈販売名〉補聴器 Styletto X
Pure Charge&Go X、Pure 312 X:〈販売名〉補聴器 Xperience

シグニア
Signia
エクスペリエンス
Xperience

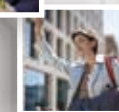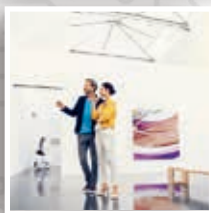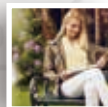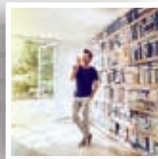

100シーン

周囲360°の声や物音を常に分析、
400パターンの中から最適な
音質に自動で変化します



超広角センサー

周りの環境

これまで基本シ



静かな会話

このようなシーンで力を発揮します


360°の音



テレビ



買い物

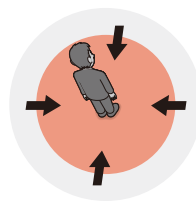

呼び込みの声や臨場感のあるシーンに、360°の音を自動でクリアにリアルに


一対一の会話



仕事



こもった声

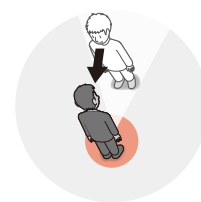

騒がしくても、聞きづらいこもった声も、より聞こえやすい

センサーで
かつてない臨場感。
挑戦を応援します。



自動対応

ーンは2つでした



騒がしい会話

あなたの動き




モーションセンサー

座れば前方フォーカス、
散歩中はワイドに、
聞こえを自動で最大化します

複数人の会話



食事

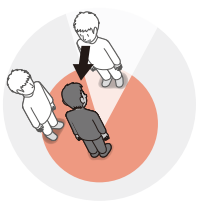

360°の声をクリアに捉え
ながら雑音は自動でしっかり
抑える



会議


動いている時



散歩



ジョギング

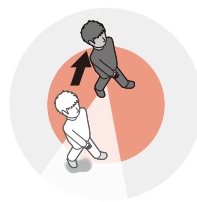


動いている時も、今まで難し
かった隣同士の会話や
車の通る音がよりはっきり
わかるように自動調整

持ち運び便利な充電ケース付き!スタイリッシュ充電式
スタイレット
Styletto X

種類

聴力が変わっても長く使える

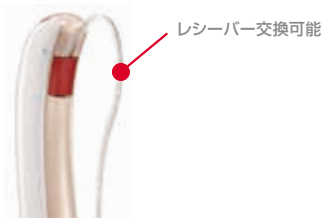

商品特徴
使用時間



ケースごとワイヤレスでラクラク充電!

- 持ち運べるポータブル充電ケース
- 蓄電機能付きのケースだけで両耳を3回フル充電可能*1
- 世界初、Qi規格充電パッドでワイヤレス充電ができる*2
もちろんUSBケーブルでの充電も可能



ワイヤレス充電パッドは市販品をご使用ください

● 補聴器のフル充電

充電時間 4 時間

使用可能時間 19 時間

● 補聴器のスピード充電

充電時間 30 分

使用可能時間 5 時間

● 充電ケースの充電

USB充電 3 時間

ワイヤレス充電 5 時間*2

おすすめ
ユーザー

🕶️ メガネをかけている方

🧳 出張、旅行や外出が多い方

👗 デザインを重視する方

適応聴力*3

適応聴力*3	軽度難聴		中等度難聴				高度難聴		重度難聴	
	30	40	50	60	70	80	90	100	110 dBHL	
スタイレット Styletto X	Sレシーバー		Mレシーバー			Pレシーバー				

*1 補聴器の使用状況、使用環境により、3回フル充電できない場合があります *2 市販のQi規格対応の充電パッドをご使用ください。充電パッドをご使用の場合、ケースの充電時間の目安は5時間ですが、ご使用の充電パッドの種類により異なる場合があります *3 補聴器はレシーバー、イヤフック・チューブ、耳せんのご選択で適応聴力が変更できます。ご自身の聴力に合わせてお選びください

ご用意しております。あなたに合う器種を選びましょう

置くだけ充電が使いやすい
ピュア チャージ&ゴー
Pure Charge&Go X

小さくて目立たない定番の電池式
ピュア
Pure 312 X



- フタ付き充電器で清潔に使える
- 置くだけでカンタン充電
- 置くだけで自動電源OFF、取り出すと自動電源ON




- コンパクトなサイズで目立たない
- 柔らかなラウンド形状は耳に快適にフィット
- 豊富な色から選べる10色展開

● 補聴器の フル充電	● 補聴器の スピード充電
充電時間 4時間	充電時間 30分
使用可能時間 23時間	使用可能時間 6時間

電池使用時間 約80~90時間

- 👤 目立たせたくない方
- 👂 重度難聴の方にも対応

- 👂 電池を入れてすぐ使える安心感を重視する方
- 👋 電池の出し入れに慣れている方

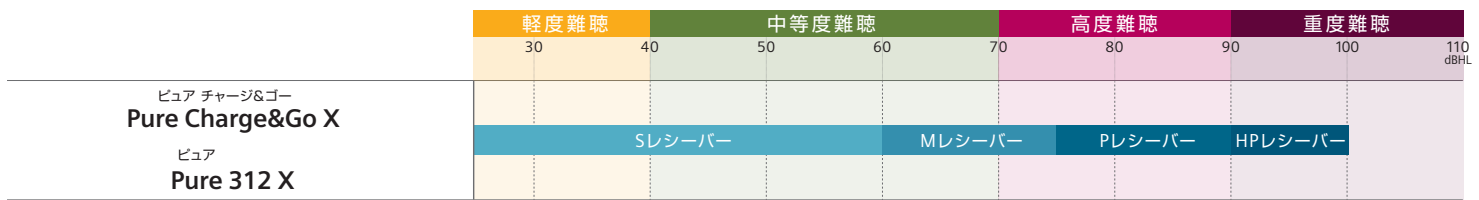

Styletto X:<販売名>補聴器 Styletto X Pure Charge&Go X, Pure 312 X:<販売名>補聴器 Xperience

7X

こだわりのあるあなたに、
澄み渡る音を

12kHzまでの高周波数音を收音し、超高音質を実現

7X プレミアム ★★★★★★

Xセンサー

12kHz周波数帯

スピーチフォーカス360°

Signia Xperience

	きめ細かい 聞こえ	テレビ	屋内	屋外	グループ活動・買い物	自声のこもり を解消	固定電話	騒がしい 場所での会話	居酒屋・ レストラン	職場・車イス	車・電車	ロビー・ ホール	超高音質
7X 搭載機能	チャンネル	*1 Bluetooth	突発音抑制	風雑音抑制	Xセンサー (環境・動き認識) 超広角センサー モーションセンサー	OVP (両耳)	ツインフォン (両耳)	ビーム指向性 (両耳)	パワー エンハンス	スピーチ フォーカス	スピーチ フォーカス360° (両耳)	反響音抑制	12kHz帯域 対応
	48ch				 								

*1 TV視聴には別途StreamLine TVが必要になります。アンドロイドは別途StreamLine Micが必要になります

*2 補聴器本体(非課税)、充電器1台¥44,000(課税・税込)を一式にした価格です。両耳同時に購入の場合は、充電器は1台となります

*3 HPLレーザーは別途費用がかかります

機能



TRT 詳しくは36ページをご覧ください

コーティング



安心保証



充電式

※Styletto Xのカラーは11ページ、Pure Charge&Go Xのカラーは13ページをご覧ください



スタイリッシュ充電式
スタイレット
Styletto X

充電



RIC型充電式
ピュア チャージ&ゴー
Pure Charge&Go X

充電

電池式

※カラーは48ページをご覧ください



RIC型の定番
ピュア
Pure 312 X

312

7X	両耳価格	¥1,064,000 ^{*2}	¥1,020,000
	片耳価格	¥554,000 ^{*2}	¥510,000
適応聴力	<p>軽 中 高</p> <p>S:~60dB M:~75dB P:~90dB</p>	<p>軽 中 高 重</p> <p>S:~60dB M:~75dB P:~90dB HP:^{*3}~100dB</p>	<p>軽 中 高 重</p> <p>S:~60dB M:~75dB P:~90dB HP:^{*3}~100dB</p>

リモコン



ミニポケット
miniPocket
¥18,000 (税抜)

周辺機器



StreamLine TV
¥28,000 (税抜)



StreamLine Mic
¥50,000 (税抜)

スマートフォン対応アプリ

● Signia app (シグニア アプリ)



インストールは
◀こちら
詳しくは
43ページを
ご覧ください

Styletto X: (販売名) 補聴器 Styletto X
Pure Charge&Go X, Pure 312 X: (販売名) 補聴器 Xperience

※補聴器は非課税です

補聴器を選ぶ前に

NEW
Signia Xperience

Signia Nx

その他補聴器
ラインナップ

アクセサリなど
アプリ

性能一覧
カラーバリエーション

シグニア
Signia
エクスペリエンス
Xperience

5X

賑やかな場所でも会話が弾む



スピーチフォーカスが聞きたい事を逃さない

5X アドバンス ★★★★★

Xセンサー

スピーチフォーカス

Signia Xperience

	きめ細かい聞こえ	テレビ	屋内	屋外	グループ活動・買い物	自声のこもりを解消	固定電話	騒がしい場所での会話	居酒屋・レストラン	職場・車イス	車・電車	ロビー・ホール	超高音質
5X 搭載機能	チャンネル	*1 Bluetooth	突発音抑制	風雑音抑制	Xセンサー (環境・動き認識) 超広角センサー モーションセンサー	OVP (両耳)	ツインフォン (両耳)	ビーム指向性 (両耳)	パワー エンハンス	スピーチ フォーカス	スピーチ フォーカス360° (両耳)	反響音抑制	12kHz帯域 対応
	32ch											—	—

*1 TV視聴には別途StreamLine TVが必要になります。アンドロイドは別途StreamLine Micが必要になります

*2 補聴器本体(非課税)、充電器1台¥44,000(課税・税込)を一式にした価格です。両耳同時に購入の場合は、充電器は1台となります

*3 HPLレシーバーは別途費用がかかります

機能



TRT 詳しくは36ページをご覧ください

コーティング



安心保証



充電式

※Styletto Xのカラーは11ページ、Pure Charge&Go Xのカラーは13ページをご覧ください



スタイリッシュ充電式
スタイレット
Styletto X

充電



RIC型充電式
ピュア チャージ&ゴー
Pure Charge&Go X

充電

電池式

※カラーは48ページをご覧ください



RIC型の定番
ピュア
Pure 312 X

312

5X	両耳価格	¥764,000 ^{*2}	¥720,000
	片耳価格	¥404,000 ^{*2}	¥360,000
適応聴力	<p>軽 中 高</p> <p>S:~60dB M:~75dB P:~90dB</p>	<p>軽 中 高 重</p> <p>S:~60dB M:~75dB P:~90dB HP:~100dB^{*3}</p>	<p>軽 中 高 重</p> <p>S:~60dB M:~75dB P:~90dB HP:~100dB^{*3}</p>

リモコン



ミニポケット
miniPocket
¥18,000 (税抜)

周辺機器



StreamLine TV
¥28,000 (税抜)



StreamLine Mic
¥50,000 (税抜)

スマートフォン対応アプリ

● Signia app (シグニア アプリ)



インストールは
◀こちら
詳しくは
43ページを
ご覧ください

Styletto X: (販売名) 補聴器 Styletto X
Pure Charge&Go X, Pure 312 X: (販売名) 補聴器 Xperience

※補聴器は非課税です

補聴器を選ぶ前に

NEW Signia Xperience

Signia Nx

その他補聴器
ラインナップ

アクセサリなど
アプリ

性能一覧
カラーバリエーション

シグニア
Signia
エクスペリエンス
Xperience

3X



いつでもどこでも優れた音でサポート

世界初、^{エックス}Xセンサー搭載でどんな環境でもいい音

3X **スタンダード** ★★★★★

Xセンサー

Signia Xperience

	きめ細かい聞こえ	テレビ	屋内	屋外	グループ活動・買い物	自声のこもりを解消	固定電話	騒がしい場所での会話	居酒屋・レストラン	職場・車イス	車・電車	ロビー・ホール	超高音質
3X 搭載機能	チャンネル	*1 Bluetooth	突発音抑制	風雑音抑制	Xセンサー (環境・動き認識) 超広角センサー モーションセンサー	OVP (両耳)	ツインフォン (両耳)	ビーム指向性 (両耳)	パワー エンハンス	スピーチ フォーカス	スピーチ フォーカス360° (両耳)	反響音抑制	12kHz帯域 対応
	24ch								—	—	—	—	—

*1 TV視聴には別途StreamLine TVが必要になります。アンドロイドは別途StreamLine Micが必要になります

*2 補聴器本体(非課税)、充電器1台¥44,000(課税・税込)を一式にした価格です。両耳同時に購入の場合は、充電器は1台となります

*3 HPLシーバーは別途費用がかかります

機能



TRT 詳しくは36ページをご覧ください

コーティング



安心保証



充電式

※Styletto Xのカラーは11ページ、Pure Charge&Go Xのカラーは13ページをご覧ください



スタイリッシュ充電式
スタイレット
Styletto X

充電



RIC型充電式
ピュア チャージ&ゴー
Pure Charge&Go X

充電

電池式

※カラーは48ページをご覧ください



RIC型の定番
ピュア
Pure 312 X

312

3X	両耳価格	¥544,000 ^{*2}	¥500,000
	片耳価格	¥294,000 ^{*2}	¥250,000
適応聴力	<p>軽 中 高</p> <p>S:~60dB M:~75dB P:~90dB</p>	<p>軽 中 高 重</p> <p>S:~60dB M:~75dB P:~90dB HP:^{*3}~100dB</p>	<p>軽 中 高 重</p> <p>S:~60dB M:~75dB P:~90dB HP:^{*3}~100dB</p>

リモコン



ミニポケット
miniPocket
¥18,000 (税抜)

周辺機器



ストリームラインTV
StreamLine TV
¥28,000 (税抜)



ストリームラインマイク
StreamLine Mic
¥50,000 (税抜)

スマートフォン対応アプリ

● Signia app (シグニア アプリ)



インストールは
◀こちら
詳しくは
43ページを
ご覧ください

Styletto X: (販売名) 補聴器 Styletto X
Pure Charge&Go X, Pure 312 X: (販売名) 補聴器 Xperience

※補聴器は非課税です

補聴器を選ぶ前に

NEW
Signia Xperience

Signia Nx

その他補聴器
ラインナップ

アクセサリなど
アプリ

性能一覧
カラーバリエーション

高性能で
選べるデザイン


日本語の聞き取りにこだわる シグニア補聴器。

シグニア エヌエックス


Signia Nxで しっかり、楽に、もっと楽しく

しっかり音が集まる

- マイクのサイズが従来の4倍に。
しっかり音を拾います

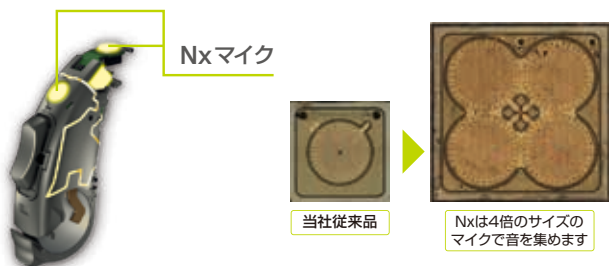

- 拾った音を最大48チャンネルに分解し、細かく調整して聞きやすくします

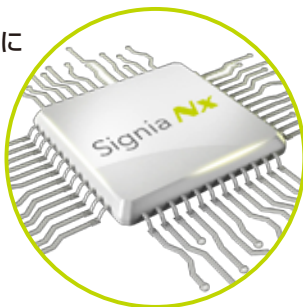

聞こえのイメージ




チャンネル数が多いほど、より静かでハッキリとした音質に近づきます



従来のチャンネル数は、ノイズなどで聞こえにくい場合もあります

楽に聞こえる

- 自分の声が響かず、楽に聞こえるようにします

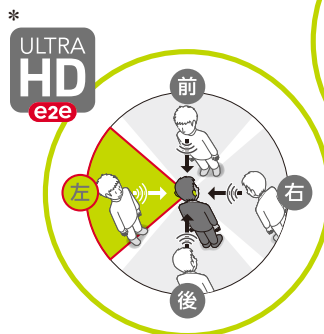

- 声が来る方向を自動でキャッチ

* OWN VOICE PROCESSING OVP

* 対象の機種や使用に際しての条件などについては各製品ページをご覧ください


もっと楽しく

- 充電ケースだけを持って身軽にお出かけ (Styletto)

- バッテリー内蔵のケースだから、コンセントにつながなくても両耳を3回フル充電
- ポケットに入るコンパクトなサイズ

- Bluetooth®でTVやスマートフォンと接続、様々な楽しみ方を

- 自分の音量でTVを聞く
- 電話の音声をはっきり聞く
- スマートフォンで音楽も動画も楽しめる

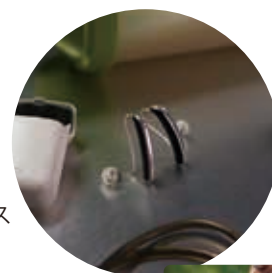

持ち運びに便利



シグニア エヌエックス

豊富なラインナップのSignia Nxから あなただけの、ベストな選択



充電式

電池式

RIC型・耳かけ型

耳あな型



*器種の展開に関しては、各製品ページをご覧ください

補聴器は、デザインを楽しむ時代へ

Stylecto

これまでにない
極細の充電電池を開発し
ようやくかなえた細身で
スタイリッシュな形。
眼鏡との相性も抜群



**GOOD DESIGN
AWARD 2019**

〈販売名〉補聴器 Nxシリーズ

毎日身に着けるものだから、デザインに
徹底的にこだわりました

Insio COOL

まるでワイヤレスイヤフォンのような形、
快適な装着感と装用のしやすさで
クールな装いを



〈販売名〉補聴器 Nxシリーズ カスタム

補聴器を選ぶ前に

Signia Experience

Signia Nx

その他補聴器
ラインナップ

アクセサリなど
アプリ

性能
カラーバリエーション

Nx シリーズの最上位機種

7Nx **プレミアム**



充電式

※Stylettoのカラーは12ページ、Pure Charge&Go Nxのカラーは14ページ、それ以外のカラーは48ページをご覧ください



スタイリッシュ充電式
スタイルット コネクト
Styletto Connect

充電

RIC型充電式
ビュー チャージ&ゴー
Pure Charge&Go Nx

充電

耳かけ型充電式
モーション チャージ&ゴー
Motion Charge&Go Nx

充電

電池式 RIC型・耳かけ型



Nx最小サイズ
ビュー
Pure 10 Nx

10A

RIC型の定番
ビュー
Pure 312 Nx

312

電池長持ち
ビュー
Pure 13 Nx [T]

13

両耳価格

¥1,064,000*1

¥1,020,000

片耳価格

¥554,000*1

¥510,000

適応聴力

● 軽 ● 中

M: ~75dB

● 軽 ● 中 ● 高 ● 重

S: ~60dB M: ~75dB
P: ~90dB HP:*2 ~100dB

● 軽 ● 中 ● 高

チューブ: ~70dB
イヤフック: ~90dB

● 軽 ● 中 ● 高

S: ~60dB M: ~75dB
P: ~85dB HP:*2 ~90dB

● 軽 ● 中 ● 高 ● 重

S: ~60dB M: ~75dB P: ~90dB HP:*2 ~100dB

7Nx
搭載機能

きめ細かい聞こえ	テレビ	屋内	屋外	グループ活動・買い物	自声のごもりを解消	固定電話	騒がしい場所での会話	居酒屋・レストラン	職場・車イス	車・電車	ロビー・ホール	超高音質
チャンネル Bluetooth*3 48ch	突発音抑制	風雑音抑制	Xセンサー (環境・動き認識) 超広角センサー モーションセンサー	OVP (両耳)*4	ツインフォン (両耳)*5	ビーム指向性 (両耳)*6	パワー エンハンス*7	スピーチ フォーカス*8	スピーチ フォーカス360° (両耳)*6	反響音抑制	12kHz帯域 対応	

*1 補聴器本体(非課税)、充電器1台¥44,000(課税・税込)を一式にした価格です。両耳同時に購入の場合は、充電器は1台となります *2 HPLレシーバーは別途費用がかかります

*3 Bluetooth非搭載機種を除く。TV視聴には別途StreamLine TVが必要になります。アンドロイドは別途StreamLine Micが必要になります *4 Pure10、耳あな型を除く *5 Pure10は除く

*6 Pure10を除く。耳あな型はITC TWIN, ITE TWINに対応 *7 耳あな型はITC TWIN, ITE TWINに対応。IIC、CIC、COOL、ITCは両耳装着で対応 *8 IIC、CIC、COOL、ITCを除く

機能



TRT 詳しくは36ページをご覧ください

コーティング・カラー



— RIC型・耳かけ型 — — 耳あな型 —

安心保証



電池式 耳あな型

※オプションやカラー、名前刻印などは51ページをご覧ください

多彩なオプション
Motion 13 Nx

13

パワータイプ
Motion 13P Nx

13

インシオ
Insio

最小 アイアイシー IIC 10A

小型 シーアイシー CIC 10A

スタイリッシュ 耳あな型 クール COOL 312

耳あな型の定番 アイティーシー ITC 312

耳あな型の定番 アイティーシー ツイン ITC TWIN 312
*Bluetooth有り・無しを選択可能

パワータイプ アイティーイー ツイン ITE TWIN 312
*Bluetooth有り・無しを選択可能

¥1,020,000

¥510,000

<p>● 軽 ● 中 ● 高</p> <p>チューブ：~70dB イヤフック：~90dB</p>	<p>● 中 ● 高 ● 重</p> <p>チューブ：~80dB イヤフック：~100dB</p>	<p>● 軽 ● 中</p> <p>ノーマル：113/50~70dB</p>	<p>● 軽 ● 中 ● 高</p> <p>ノーマル：113/50~70dB パワー：118/55~80dB ハイパワー：124/65~90dB</p>	<p>● 軽 ● 中 ● 高</p> <p>ノーマル：113/50~70dB パワー：118/55~80dB</p>	<p>● 軽 ● 中 ● 高</p> <p>ノーマル：113/50~70dB パワー：118/55~80dB ハイパワー：124/65~90dB</p>	<p>● 軽 ● 中 ● 高</p> <p>パワー：118/55~80dB ハイパワー：124/65~90dB</p>
--	---	--	--	--	--	---

リモコン

周辺機器 ※Bluetooth非搭載器種は非対応

スマートフォン対応アプリ

ミニポケット
miniPocket
¥18,000 (税抜)

ストリームラインTV
StreamLine TV
¥28,000 (税抜)

ストリームラインマイク
StreamLine Mic
¥50,000 (税抜)

● Signia app (シグニア アプリ)



インストールは
こちら
詳しくは
43ページを
ご覧ください

RIC型・耳かけ型 (販売名) 補聴器 Nxシリーズ
耳あな型 (販売名) 補聴器 Nxシリーズ カスタム

※補聴器は非課税です

補聴器を選ぶ前に

Signia Experience

Signia Nx

その他補聴器
ラインナップ

アクセサリなど
アプリ

カラーバリエーション
性能

ワンランク上の聞こえを実感

5Nx アドバンス ★★★★★

充電式

※Stylettoのカラーは12ページ、Pure Charge&Go Nxのカラーは14ページ、それ以外のカラーは48ページをご覧ください



スタイリッシュ充電式
スタイルット コネクト
Styletto Connect

充電

RIC型充電式
ビュア チャージ&ゴー
Pure Charge&Go Nx

充電

耳かけ型充電式
モーション チャージ&ゴー
Motion Charge&Go Nx

充電

電池式 RIC型・耳かけ型



Nx最小サイズ
ビュア
Pure 10 Nx

10A

RIC型の定番
ビュア
Pure 312 Nx

312

電池長持ち
ビュア
Pure 13 Nx [T]

13

両耳価格

¥624,000^{*1}

¥580,000

片耳価格

¥334,000^{*1}

¥290,000

適応聴力

● 軽 ● 中

M: ~75dB

● 軽 ● 中 ● 高 ● 重

S: ~60dB M: ~75dB
P: ~90dB HP:^{*2} ~100dB

● 軽 ● 中 ● 高

チューブ: ~70dB
イヤフック: ~90dB

● 軽 ● 中 ● 高

S: ~60dB M: ~75dB
P: ~85dB HP:^{*2} ~90dB

● 軽 ● 中 ● 高 ● 重

S: ~60dB M: ~75dB P: ~90dB HP:^{*2} ~100dB

5Nx
搭載機能

きめ細かい聞こえ	テレビ	屋内	屋外	グループ活動・買い物	自声のごもりを解消	固定電話	騒がしい場所での会話	居酒屋・レストラン	職場・車イス	車・電車	ロビー・ホール	超高音質
チャンネル Bluetooth ^{*3} 32ch	突発音抑制	風雑音抑制	Xセンサー (環境・動き認識) 超広角センサー モーションセンサー	OVP ^{*4} (両耳)	ツインフォン ^{*5} (両耳)	ビーム指向性 ^{*6} (両耳)	パワーエンハンス ^{*7}	スピーチフォーカス ^{*8} (両耳)	スピーチフォーカス360 ^{*8} (両耳)	反響音抑制	12kHz帯域対応	

*1 補聴器本体(非課税)、充電器1台¥44,000(課税・税込)を一式にした価格です。両耳同時に購入の場合は、充電器は1台となります *2 HPLレシーバーは別途費用がかかります
*3 Bluetooth非搭載機種を除く。TV視聴には別途StreamLine TVが必要になります。アンドロイドは別途StreamLine Micが必要になります *4 Pure10、耳あな型を除く *5 Pure10は除く
*6 Pure10を除く。耳あな型はITC TWIN, ITE TWINに対応 *7 耳あな型はITC TWIN, ITE TWINに対応。IIC、CIC、COOL、ITCは両耳装着で対応 *8 IIC、CIC、COOL、ITCを除く

機能



TRT 詳しくは36ページをご覧ください

コーティング・カラー



— RIC型・耳かけ型 — — 耳あな型 —

安心保証



電池式 耳あな型

※オプションやカラー、名前刻印などは51ページをご覧ください

多彩なオプション
Motion 13 Nx

13

パワータイプ
Motion 13P Nx

13

インシオ
Insio

最小 アイアイシー IIC 10A

小型 シーアイシー CIC 10A

スタイリッシュ 耳あな型 クール COOL 312

耳あな型の定番 アイティーシー ITC 312

耳あな型の定番 アイティーシー ツイン ITC TWIN 312
*Bluetooth有り・無しを選択可能

パワータイプ アイティーイー ツイン ITE TWIN 312
*Bluetooth有り・無しを選択可能

¥580,000

¥290,000

軽 中 高

チューブ: ~70dB
イヤフック: ~90dB

中 高 重

チューブ: ~80dB
イヤフック: ~100dB

軽 中

ノーマル: 113/50~70dB

軽 中 高

ノーマル: 113/50~70dB
パワー: 118/55~80dB
ハイパワー: 124/65~90dB

軽 中 高

ノーマル: 113/50~70dB
パワー: 118/55~80dB

軽 中 高

ノーマル: 113/50~70dB
パワー: 118/55~80dB
ハイパワー: 124/65~90dB

軽 中 高

パワー: 118/55~80dB
ハイパワー: 124/65~90dB

リモコン

ミニポケット
miniPocket
¥18,000 (税抜)

周辺機器 ※Bluetooth非搭載機種は非対応

ストリームラインTV
StreamLine TV
¥28,000 (税抜)

ストリームラインマイク
StreamLine Mic
¥50,000 (税抜)

スマートフォン対応アプリ

● Signia app (シグニア アプリ)



インストールは
こちら
詳しくは
43ページを
ご覧ください

RIC型・耳かけ型 (販売名) 補聴器 Nxシリーズ
耳あな型 (販売名) 補聴器 Nxシリーズ カスタム

※補聴器は非課税です

補聴器を選ぶ前に

Signia Experience

Signia Nx

その他補聴器
ラインナップ

アクセサリなど
アプリ

カラーバリエーション
性能

テレビや電話もクリアに聞こえる

3Nx **スタンダード** ★★ ★

充電式

※Stylettoのカラーは12ページ、Pure Charge&Go Nxのカラーは14ページ、それ以外のカラーは48ページをご覧ください



スタイリッシュ充電式
スタイルット コネクト
Styletto Connect

充電

RIC型充電式
ビューア チャージ&ゴー
Pure Charge&Go Nx

充電

耳かけ型充電式
モーション チャージ&ゴー
Motion Charge&Go Nx

充電

電池式 RIC型・耳かけ型



Nx最小サイズ
ビューア
Pure 10 Nx

10A

RIC型の定番
ビューア
Pure 312 Nx

312

電池長持ち
ビューア
Pure 13 Nx [T]

13

両耳価格

¥484,000^{*1}

¥440,000

片耳価格

¥264,000^{*1}

¥220,000

適応聴力

軽 中
M: ~75dB

軽 中 高 重
S: ~60dB M: ~75dB
P: ~90dB HP:^{*2} ~100dB

軽 中 高
チューブ: ~70dB
イヤフック: ~90dB

軽 中 高
S: ~60dB M: ~75dB
P: ~85dB HP:^{*2} ~90dB

軽 中 高 重
S: ~60dB M: ~75dB P: ~90dB HP:^{*2} ~100dB

3Nx
搭載機能

きめ細かい聞こえ	テレビ	屋内	屋外	グループ活動・買い物	自声のごもりを解消	固定電話	騒がしい場所での会話	居酒屋・レストラン	職場・車イス	車・電車	ロビー・ホール	超高音質
チャンネル Bluetooth ^{*3}	突発音抑制	風雑音抑制	Xセンサー (環境・動き認識)	OVP (両耳) ^{*4}	ツインフォン (両耳) ^{*5}	ビーム指向性 (両耳) ^{*6}	パワーエンハンス	スピーチフォーカス	スピーチフォーカス360° (両耳)	反響音抑制	12kHz帯域対応	
24ch			超広角センサー モーションセンサー									

*1 補聴器本体(非課税)、充電器1台¥44,000(課税・税込)を一式にした価格です。両耳同時に購入の場合は、充電器は1台となります *2 HPLレーザーは別途費用がかかります
*3 Bluetooth非搭載機種を除く。TV視聴には別途StreamLine TVが必要になります。アンドロイドは別途StreamLine Micが必要になります *4 Pure10、耳あな型を除く *5 Pure10は除く
*6 Pure10を除く。耳あな型はITC TWIN、ITE TWINに対応

機能



TRT 詳しくは36ページをご覧ください

コーティング・カラー



— RIC型・耳かけ型 — — 耳あな型 —

安心保証



電池式 耳あな型

※オプションやカラー、名前刻印などは51ページをご覧ください



多彩なオプション
モーション
Motion 13 Nx

13



パワータイプ
モーション
Motion 13P Nx

13

インシオ
Insio



最小
アイアイシー
IIC

10A



小型
シーアイシー
CIC

10A



スタイリッシュ
耳あな型
クール
COOL

312



耳あな型の定番
アイティーシー
ITC

312



耳あな型の定番
アイティーシー ツイン
ITC TWIN

*Bluetooth有り・無しを選択可能

312



パワータイプ
アイティーシー ツイン
ITE TWIN

*Bluetooth有り・無しを選択可能

312

¥440,000

¥220,000

軽 中 高

チューブ: ~70dB
イヤフック: ~90dB

中 高 重

チューブ: ~80dB
イヤフック: ~100dB

軽 中

ノーマル: 113/50~70dB

軽 中 高

ノーマル: 113/50~70dB
パワー: 118/55~80dB
ハイパワー: 124/65~90dB

軽 中 高

ノーマル: 113/50~70dB
パワー: 118/55~80dB

軽 中 高

ノーマル: 113/50~70dB
パワー: 118/55~80dB
ハイパワー: 124/65~90dB

軽 中 高

パワー: 118/55~80dB
ハイパワー: 124/65~90dB

リモコン

周辺機器 ※Bluetooth非搭載器種は非対応

スマートフォン対応アプリ



ミニポケット
miniPocket
¥18,000 (税抜)



StreamLine TV
¥28,000 (税抜)



StreamLine Mic
¥50,000 (税抜)

● Signia app (シグニア アプリ)



インストールは
こちら
詳しくは
43ページを
ご覧ください

RIC型・耳かけ型 (販売名) 補聴器 Nxシリーズ
耳あな型 (販売名) 補聴器 Nxシリーズ カスタム

※補聴器は非課税です

補聴器を選ぶ前に

Signia Experience

Signia Nx

その他補聴器

ラインナップ

アクセサリなど

カラーバリエーション

基本性能を重視

2Nx **ベーシック** / 1Nx **バリュー**

充電式

※Stylettoのカラーは12ページ、Pure Charge&Go Nxのカラーは14ページ、それ以外のカラーは48ページをご覧ください



スタイリッシュ充電式
スタイルット エssenシャル
Styletto Essential

充電



RIC型充電式
ピュア チャージ&ゴー
Pure Charge&Go Nx

充電



耳かけ型充電式
モーション チャージ&ゴー
Motion Charge&Go Nx

充電

電池式 RIC型・耳かけ型



RIC型の定番
ピュア
Pure 312 Nx

312



電池長持ち
ピュア
Pure 13 Nx [T]

13

2Nx	両耳	¥404,000 ^{*1}	¥360,000
	片耳	¥224,000 ^{*1}	¥180,000
1Nx	両耳	¥284,000 ^{*1}	¥240,000
	片耳	¥164,000 ^{*1}	¥120,000
適応聴力	 M: ~75dB	 S: ~60dB M: ~75dB P: ~90dB HP: ~100dB ^{*2}	 S: ~60dB M: ~75dB P: ~90dB HP: ~100dB ^{*2}

搭載機能	きめ細かい聞こえ	テレビ	屋内	屋外	グループ活動・買い物	自声のごもりを解消	騒がしい場所での会話	固定電話	居酒屋・レストラン	職場・車イス	車・電車	ロビー・ホール	超高音質
	チャンネル	Bluetooth ^{*3}	突発音抑制	風雑音抑制	Xセンサー(環境・動き認識) 超広角センサー モーションセンサー	OVP 両耳	ビーム指向性 両耳	ツインフォン 両耳	パワーエンハンス	スピーチフォーカス	スピーチフォーカス360° 両耳	反響音抑制	12kHz帯域対応
2Nx	16ch	○	○	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1Nx	16ch	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

*1 補聴器本体(非課税)、充電器1台¥44,000(課税・税込)を一式にした価格です。両耳同時に購入の場合は、充電器は1台となります *2 HPLシーバーは別途費用がかかります

*3 Styletto Essentialを除く。TV視聴には別途StreamLine TVが必要になります。アンドロイドは別途StreamLine Micが必要になります

機能

Blue tooth BT

テレビタイプ

Signia app

TRT 詳しくはページ右をご覧ください。
※2Nxのみ搭載

コーティング

RIC型・耳かけ型

耳あな型

安心保証

2年修理保証

スマートリヘアプラン
保証以降も安心

TRT Signia Xperience、Signia Nx、primaxは耳鳴り治療器機能を搭載

マークが目印です。

8割の方に効果があったと報告されている*1TRT(耳鳴り再訓練法)用の治療音(音響的ノイズ)を発生させることができます。

※耳鳴りの治療及び本機能の使用については、必ず耳鼻科専門医にご相談ください。
※TRT: Tinnitus Retraining Therapy
*1 関谷芳正、松田太志、高橋真理子他、耳鳴りに対する新しい治療法・TRT(療法)耳鼻臨床95:6:639~646、2002

電池式 耳あな型

※オプションやカラー、名前刻印などは51ページをご覧ください

多彩なオプション
Motion 13 Nx

パワータイプ
Motion 13P Nx

インシオ Insio

最小 アイアイシー IIC 10A

小型 シーアイシー CIC 10A

スタイリッシュ 耳あな型 クール COOL 312

耳あな型の定番 アイティーシー ITC 312

耳あな型の定番 アイティーシー ツイン ITC TWIN 312

パワータイプ アイティーイー ツイン ITE TWIN 312

¥360,000

¥180,000

¥240,000

¥120,000

軽 中 高
チューブ: ~70dB
イヤフック: ~90dB

中 高 重
チューブ: ~80dB
イヤフック: ~100dB

軽 中
ノーマル: 113/50~70dB

軽 中 高
ノーマル: 113/50~70dB
パワー: 118/55~80dB
ハイパワー: 124/65~90dB

軽 中 高
ノーマル: 113/50~70dB
パワー: 118/55~80dB

軽 中 高
ノーマル: 113/50~70dB
パワー: 118/55~80dB
ハイパワー: 124/65~90dB

軽 中 高
パワー: 118/55~80dB
ハイパワー: 124/65~90dB

リモコン

ミニポケット
miniPocket
¥18,000 (税抜)

周辺機器 ※Bluetooth非搭載器種は非対応

ストリームラインTV
StreamLine TV
¥28,000 (税抜)

ストリームラインマイク
StreamLine Mic
¥50,000 (税抜)

スマートフォン対応アプリ

● Signia app(シグニア アプリ)



インストールは
こちら
詳しくは
43ページを
ご覧ください

RIC型・耳かけ型(販売名)補聴器 Nxシリーズ 耳あな型(販売名)補聴器 Nxシリーズ カスタム

※補聴器は非課税です

補聴器を選ぶ前に

Signia Xperience

Signia Nx

その他補聴器
ラインナップ

アクセサリなど
アプリ

性能
カラーバリエーション

充電式

電池式 RIC型・耳かけ型

※カラーバリエーションは48ページをご覧ください



カンタン充電式
セリオン
Cellion FL

充電



最小サイズ
エース
ACE

10A



RICの定番
ピュア
Pure

312



耳かけ型の定番
モーション
Motion SA

13



パワータイプ
モーション
Motion P

13



スーパーパワー
モーション
Motion SP

675

7px	両耳	¥1,064,000 ^{*1}			¥980,000		
	片耳	¥554,000 ^{*1}			¥490,000		
5px	両耳	¥664,000 ^{*1}			¥580,000		
	片耳	¥354,000 ^{*1}			¥290,000		
3px	両耳	¥484,000 ^{*1}			¥400,000		
	片耳	¥264,000 ^{*1}			¥200,000		
適応聴力		<p>軽 中 高 重</p> <p>S: ~60dB M: ~75dB P: ~90dB HP: ~100dB^{*2}</p>	<p>軽 中 高 重</p> <p>S: ~60dB M: ~75dB P: ~85dB HP: ~90dB^{*2}</p>	<p>軽 中 高 重</p> <p>S: ~60dB M: ~75dB P: ~90dB HP: ~100dB^{*2}</p>	<p>軽 中 高</p> <p>チューブ: ~65dB イヤフック: ~85dB</p>	<p>軽 中 高 重</p> <p>チューブ: ~80dB イヤフック: ~100dB</p>	<p>中 高 重</p> <p>イヤフック: ~110dB</p>

搭載機能	きめ細かい聞こえ	テレビ	屋内	屋外	グループ活動・買い物	自声のこもりを解消	固定電話	騒がしい場所での会話	居酒屋・レストラン	職場・車イス	車・電車	ロビー・ホール	超高音質
	チャンネル	Bluetooth ^{*3}	突発音抑制	風雑音抑制	Xセンサー(環境・動き認識) 超広角センサー モーションセンサー	OVP (両耳)	ツインフォン ^{*4} (両耳)	ビーム指向性 ^{*5} (両耳)	パワー・エンハンス ^{*6}	スピーチフォーカス ^{*7}	スピーチフォーカス360° (両耳) ^{*4}	反響音抑制	12kHz帯域対応 ^{*8}
7px	48ch	○	○	○	—	—	○	○	○	○	○	○	
5px	32ch	○	○	○	—	—	○	○	○	—	—	—	
3px	24ch	○	○	○	—	—	○	—	—	—	—	—	

*1 補聴器本体(非課税)、充電器1台¥44,000(課税・税込)を一式にした価格です。両耳同時に購入の場合は、充電器は1台となります *2 HPLシーバーは別途費用がかかります
*3 Ace、CIC、CIC312を除く。テレビバック2が必要 *4 AceとMotion Sを除く。耳あな型は、COOL、COOL13、ITEにオプション対応 *5 Aceを除く。耳あな型は、ITC TWIN、ITE TWINに対応
*6 耳あな型はITC TWIN、ITE TWINとMC/MC312(7クラス両耳装着)に対応 *7 シングルマイクには非搭載 *8 Motion SPを除く *9 COOL13はパワーのみ対応 *10 Ace、CIC、CIC312を除く

機能



コーティング・カラー



RIC型・耳かけ型

耳あな型

安心保証



+



※7px、5pxのみ

TRT 詳しくは36ページをご覧ください

※オプション対応(CIC、CIC312を除く)

電池式 耳あな型

※オプションやカラー、名前刻印などは51ページをご覧ください



小型耳かけ型
モーション
Motion S

312

インシオ
Insio

小型
シーアイシー
CIC / CIC312

10A

312



幅広い聴力に対応
エムシー
MC / MC312

10A

312



スタイリッシュ耳あな型
クール
COOL / COOL13

312

13



耳あな型の定番
アイティーシー
ITC / ITC TWIN

312



電池長持ちパワータイプ
アイティーイー
ITE / ITE TWIN

13

—	—	—	—	—	—	¥1,020,000
—	—	—	—	—	—	¥510,000
—	—	—	—	—	—	¥620,000
—	—	—	—	—	—	¥310,000
¥400,000	—	—	—	—	—	¥440,000
¥200,000	—	—	—	—	—	¥220,000
<p>軽 中</p> <p>チューブ: ~50dB イヤブック: ~65dB</p>	<p>軽 中</p> <p>ノーマル: 113/50~70dB</p>	<p>軽 中 高</p> <p>ノーマル: 113/50~70dB パワー: 118/55~80dB ハイパワー: 124/65~90dB</p>	<p>軽 中 高</p> <p>ノーマル*9: 113/50~70dB パワー: 118/55~80dB</p>	<p>軽 中 高</p> <p>ノーマル: 113/50~70dB パワー: 118/55~80dB ハイパワー: 124/65~90dB</p>	<p>軽 中 高</p> <p>パワー: 118/55~80dB ハイパワー: 124/65~90dB</p>	

リモコン




ミニポケット
miniPocket
¥18,000 (税抜)



スマートリモート
Smart Remote *10
¥20,000 (税抜)



テレビ
バック2 *3
¥50,000 (税抜)

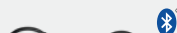

周辺機器

スマートフォン対応アプリ

● Signia app(シグニア アプリ)



インストールは
◀こちら
詳しくは
43ページを
ご覧ください

RIC型・耳かけ型(販売名)補聴器 primaxシリーズ
耳あな型(販売名)補聴器 primaxシリーズ カスタム

※補聴器は非課税です

補聴器を選ぶ前に

Signia Experience

Signia Nx

その他補聴器
ラインナップアクセサリなど
アプリ性能一覧
カラーバリエーション

充電式

電池式 RIC型・耳かけ型

※カラーバリエーションは48ページをご覧ください



カンタン充電式
セリオン
Cellion FL

充電



最小サイズ
エース
ACE

10A



RICの定番
ピュア
Pure

312



耳かけ型の定番
モーション
Motion SA

13



パワータイプ
モーション
Motion P

13



スーパーパワー
モーション
Motion SP

675

2px	両耳	¥404,000*1					¥320,000			
	片耳	¥224,000*1					¥160,000			
1px	両耳	—					¥240,000			
	片耳	—					¥120,000			
適応聴力		 S: ~60dB M: ~75dB P: ~90dB HP: ~100dB*2	 S: ~60dB M: ~75dB P: ~85dB HP: ~90dB*2	 S: ~60dB M: ~75dB P: ~90dB HP: ~100dB*2	 チューブ: ~65dB イヤフック: ~85dB	 チューブ: ~80dB イヤフック: ~100dB	 イヤフック: ~110dB			

搭載機能	きめ細かい聞こえ	テレビ	屋内	屋外	グループ活動・買い物	自声のごもりを解消	固定電話	騒がしい場所での会話	居酒屋・レストラン	職場・車イス	車・電車	ロビー・ホール	超高音質
	チャンネル	Bluetooth*3	突発音抑制	風雑音抑制	Xセンサー(環境・動き認識) 超広角センサー モーションセンサー	OVP(両耳)	ツインフォン(両耳)	ビーム指向性(両耳)	パワーエンハンス	スピーチフォーカス	スピーチフォーカス360°(両耳)	反響音抑制	12kHz帯域対応
2px	16ch	○	○	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1px	16ch	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

*1 補聴器本体(非課税)、充電器1台¥44,000(課税・税込)を一式にした価格です。両耳同時に購入の場合は、充電器は1台となります *2 HPLレシーバーは別途費用がかかります
*3 Ace, CIC, CIC312を除く。テレビパック2が必要 *4 COOL13はパワーのみ対応 *5 Ace, CIC, CIC312を除く

機能

Signia app
シグニアアプリ

TRT 詳しくは36ページをご覧ください。※2pxのみ搭載

コーティング・カラー



安心のIP67防水・防塵



ナノコートで撥水コーティング



ナノコート加工で薬品に強い



カラーシールド効果

RIC型・耳かけ型

耳あな型

安心保証

2年
修理保証

+

スマートリペア
プラン
保証以降も安心

電池式 耳あな型

※オプションやカラー、名前刻印などは51ページをご覧ください

インシオ

Insio

小型耳かけ型
モーション
Motion S

312

小型
シーアイシー
CIC / CIC312

10A

312

幅広い聴力に対応
エムシー
MC / MC312

10A

312

スタイリッシュ耳あな型
クール
COOL / COOL13

312

13

耳あな型の定番
アイティーシー
ITC / ITC TWIN

312

電池長持ちパワータイプ
アイティーイー
ITE / ITE TWIN

13

¥320,000

¥360,000

¥160,000

¥180,000

¥240,000

¥280,000

¥120,000

¥140,000

軽 中

チューブ: ~50dB
イヤブック: ~65dB

軽 中

ノーマル: 113/50~70dB

軽 中 高

ノーマル: 113/50~70dB パワー: 118/55~80dB
ハイパワー: 124/65~90dB

軽 中 高

ノーマル*4: 113/50~70dB
パワー: 118/55~80dB

軽 中 高

ノーマル: 113/50~70dB パワー: 118/55~80dB
ハイパワー: 124/65~90dB

軽 中 高

パワー: 118/55~80dB
ハイパワー: 124/65~90dB

リモコン

ミニポケット
miniPocket
¥18,000 (税抜)スマートリモート
Smart Remote *5
¥20,000 (税抜)テレビ
パック2 *3
¥50,000 (税抜)

周辺機器

スマートフォン対応アプリ

● Signia app(シグニア アプリ)

インストールは
◀こちら
詳しくは
43ページを
ご覧くださいRIC型・耳かけ型〈販売名〉補聴器 primaxシリーズ
耳あな型〈販売名〉補聴器 primaxシリーズ カスタム

※補聴器は非課税です

補聴器を選ぶ前に

Signia Experience

Signia Nx

その他補聴器
ラインナップアクセサリなど
アプリ性能一覧
カラーバリエーション

インティス3 Intuis3



防水IP67防水・防塵
(P・SP除く)



ナノコートで撥水コーティング



Signia app
シグニアアプリ



2年
修理保証



※耳かけ型のカラーは42ページをご覧ください

RIC型 ミニ耳かけ型S 耳かけ型M 耳かけ型P 耳かけ型SP

製品名	チャンネル数	両耳価格	片耳価格	適応聴力	電池	対応リモコン/周辺機器/アプリ
RIC型	12ch	¥180,000	¥90,000	 S:~60dB M:~75dB P:~90dB HP:~100dB*	312	[リモコン]
ミニ耳かけ型S				 チューブ:~50dB イヤフック:~65dB	312	 ミニポケット miniPocket ¥18,000(税抜)
耳かけ型M				 チューブ:~65dB イヤフック:~85dB	13	
耳かけ型P				 イヤフック:~100dB	13	
耳かけ型SP		¥220,000	¥110,000	 イヤフック:~110dB	675	[スマートフォン対応アプリ] ©Signia app
販売名	補聴器 Intuis3					

*HPLシーバーは別途費用がかかります ※補聴器は非課税です



ナノコート加工で耐汗・耐水



8COLOR
カラーシェル対応



Signia app
シグニアアプリ



2年
修理保証



※オプションやカラー、名前刻印などは51ページをご覧ください

CIC / CIC 312

MC / MC 312

ITC

ITE

形状	チャンネル数	両耳価格	片耳価格	適応聴力	電池	対応リモコン/周辺機器/アプリ
CIC	12ch	¥220,000	¥110,000	 ノーマル:113/50~70dB	10A	[リモコン]
CIC312				312	 ミニポケット miniPocket ¥18,000(税抜)	
MC				 ノーマル:113/50~70dB パワー:118/55~80dB ハイパワー:124/65~90dB		10A
MC312				312		
ITC				13		
ITE				 パワー:118/55~80dB ハイパワー:124/65~90dB		13
販売名	補聴器 Intuis3 カスタム					

※耳の形状によっては、ご希望の補聴器が製作できないことや、ご指定のオプションが取り付けられない場合があります
 ※オプションを複数取り付けた場合、形状が大きくなる場合があります

※補聴器は非課税です

プロンプト
Prompt 基本性能を備えた補聴器

価格重視で、基本性能を備えた
耳かけ型補聴器

- Lifeチューブ (Sのみ) (別売)
- ツインマイク (Sのみ)
- プッシュボタン
- ボリューム付 (MPのみ)



製品名	チャンネル数	両耳価格	片耳価格	適応聴力	電池
S	8ch	¥100,000	¥50,000	軽 中 チューブ: ~50dB イヤック: ~65dB	312
MP				中 高 重 ~100dB	13
販売名		補聴器 Prompt			

*Prompt MPの形式はPrompt Pです *miniPocketとSignia app対応

※補聴器は非課税です

ファン
Fun 簡易デジタル補聴器

お手頃価格でデジタルならではの
澄んだ音質を手に入れます

- ボリューム付
- 4つのプリセットプログラム
- ピーピーしにくい



製品名	チャンネル数	片耳価格	適応聴力	電池
P	6ch	¥98,000	中 高 ~90dB	13
SP			高 重 ~110dB	675
販売名		補聴器 Fun		

*リモコン:非対応 プログラムは固定

※補聴器は非課税です

■ カラーバリエーション

※製品の色と形は印刷と異なる事があります

Intuis3	ベージュ	グレー	ブラウン	ブラック	シルバー	ダーク グラナイト	ディープ ブラウン
インティス Intuis3 RIC			—				
インティス Intuis3 S		*1	—	*1	*1	—	*1
インティス Intuis3 M			—				
インティス Intuis3 P			—	—	—	—	
インティス Intuis3 SP			—	—	—	—	

Pのみ、ご購入後のカラー変更が¥9,000(非課税)が可能です

*1 ダークグラナイトとの2トーンカラーとなります

Prompt	ベージュ	グレー	ブラウン	ディープ ブラウン
プロンプト Prompt S		*1	*1	—
プロンプト Prompt MP			—	

MPのみ、ご購入後のカラー変更が¥9,000(非課税)が可能です。

Fun	ベージュ	グレー	ディープ ブラウン
ファン Fun P			
ファン Fun SP			

ご購入後のカラー変更が¥9,000(非課税)が可能です

さらに快適♪ テレビも、電話も、会話も。
いつでもどこでも聞こえを簡単に調節

スマートフォン用アプリ



シグニア アプリ

Signia app

- 手元のスマートフォンで補聴器を操作できるから、気づかれない
- 様々な機能が1つのアプリに
- 無料でダウンロード・使用できます

音量の調節

気づかれずに
音量を調節できます



指向性の調節

手動で聞きたい方向を
選べます



補聴器の状態の確認

電池の残量などが
確認できるから、安心



アプリのインストール方法

- ①お使いのスマートフォンでApp Store/ Playストアを開きます
- ②検索ウィンドウに「シグニア」(または「signia」)と入力します。
- ③アプリを入手してください



* iOS9.3以上、アンドロイドver.5.0以上に対応
(端末・OS要件を満たしていても組み合わせによっては
アプリが正常に動作しない場合があります)

お使いの補聴器の機種、装用の条件などにより、使える機能が変わります。アプリの機能、画面デザインは予告なく変更されることがあります。新しい機能が追加されることがありますので、アプリを定期的にアップデートしてください

これまでのアプリをご使用の方へ

マイコントロール
アプリ



myControl

タッチコントロール
アプリ



touchControl

マイヒアリング
アプリ



myHearing

ご使用いただいていた左記のアプリは、より使いやすい Signia app に置き換わります。これまでと同じ機能をご利用いただけますので、今後はぜひ Signia app をご使用ください

マイコントロールアプリ、タッチコントロールアプリ、マイヒアリングアプリに関する今後の予定

- 2020年中にサービスを停止します(時期は未定)。停止後はスマートフォンにインストール済みのアプリが使えなくなります
 - サービスの停止までは、スマートフォンにインストール済みのアプリはそのままご使用いただけます
- これらアプリを使用した時に、Signia app のインストールを促すメッセージが出る場合があります。予定は変更になる場合があります

リモコン



ミニポケット
miniPocket

¥18,000 (税抜)

対象：
Signia Xperience
Signia Nx
primax* Intuis3
Prompt



スマートリモート
Smart Remote

¥20,000 (税抜)

対象：
primax*
※Ace, CIC, CIC312除く



スマートコネク
Smart Connect

¥38,000 (税抜)

対象：
primax*
※Ace, CIC, CIC312除く

周辺機器



ストリームラインマイク
StreamLine Mic

¥50,000 (税抜)

対象：
Signia Xperience
Signia Nx
※Bluetooth非搭載器種を除く



ストリームラインTV
StreamLine TV

¥28,000 (税抜)

対象：
Signia Xperience
Signia Nx
※Bluetooth非搭載器種を除く

アプリ・リモコンでできること

		プログラム切り替え	音量調節	音質調節	ミュート	マニュアル指向性	電池残量	マイク機能	価格 (税抜)
アプリ	Signia app	●	●	●	●	● *1	●	● *2	無料
リモコン	miniPocket	●	●	—	●	—	—	—	¥18,000
	Smart Remote	●	●	●	●	—	—	—	¥20,000
	Smart Connect	●	●	—	●	—	—	—	¥38,000
リモートマイク	StreamLine Mic	●	●	—	●	—	—	●	¥50,000

ご注意 心臓ペースメーカーを使用している方は、リモコンを使用しないでください。スマートフォン専用アプリをご使用の場合、スマートフォンとの距離はスマートフォンの取扱説明書に従ってください

*1 7クラス、5クラスのTWINマイク補聴器を両耳に装着した場合のみ有効 *2 iPhone使用時

アクセサリー・補修パーツ

■ **パーフェクトドライ
ボックス**
乾燥・UV除菌
¥9,000 (税抜)



■ **補聴器乾燥カップ
シリカゲル入**
(詰め替え用乾燥剤1個付)
¥900 (税抜)



■ **詰め替え用
乾燥シリカゲル**
(2個入り)
¥1,000 (税抜)



■ **クリーニング
シート**
(30枚入り、個包装)
¥900 (税抜)



RIC型/耳かけ型用 RIC型/耳かけ型はレシーバーやイヤフック、チップ・ドーム(耳せん)などにより、適応聴力が変更できます

■ ミニレシーバー用クリックドーム

対応:RIC型



¥2,000
(同サイズ6ヶ入り・税抜)

■ クリックスリーブ


対応:RIC型



¥2,000
(同サイズ6ヶ入り・税抜)

■ Lifeチップ

対応:耳かけ型(ThinチューブLifeチューブ)

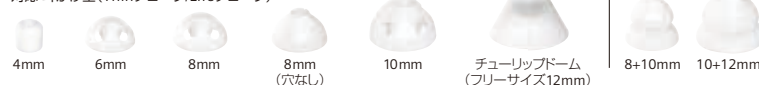

¥2,000
(同サイズ10ヶ入り・税抜)

■ 2.0ミニレシーバー

対応:RIC型



¥10,000 (1本・税抜)

■ HPモールド2 (ミニレシーバーHP付き)

対応:RIC型 ※ミニレシーバーHP単体では販売しておりません
オーダーメイドのHPモールドを使うと、高～重度難聴にも対応します。高～重度難聴で小型の補聴器をお求めの方におすすめです



¥27,000 (非課税)


耳あな型用

■ クイックガード



¥1,000
(8粒入り/交換ツール入り・税抜)

■ クリネット ダイヤルパック

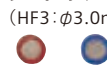

¥2,000
(16粒入り/交換ツール入り・税抜)

■ ノーワックス



¥1,000
(6ヶ入り/交換ツール入り・税抜)

子供用アクセサリー

■ オーディオシューキット (ベージュ、ダークグラナイト)

対応: Motion SA / Motion P (primaxのみ)

オーディオシューとバッテリーロッカー一体型

本体と同時購入 ¥4,000 (非課税)
本体購入後の取付* ¥10,000 (非課税)



■ スモールイヤフック

対応: Motion Charge&Go Nx / Motion 13 Nx / Motion 13P Nx
Motion SA / Motion P / Motion S
Intuis3 S / Intuis3 M / Intuis3 SP / Prompt S

¥500 (税抜)
一部 ¥1,000 (同サイズ10ヶ入り税抜) ※器種により個数が異なります



■ オーディオシューキット

対応: Intuis3 M



本体と同時購入 ¥4,000 (非課税)
本体購入後の取付* ¥10,000 (非課税)

対応: Intuis3 SP



¥4,000 (非課税)

対応: Motion SP

(子供用バッテリーロッカーを含む)



本体と同時購入 ¥6,000 (非課税)
本体購入後の取付* ¥12,000 (非課税)

対応: Intuis3 P / Prompt MP



¥4,000 (非課税)

■ 子供用バッテリーロッカー単体

対応: Intuis3 M



本体と同時購入 ¥600 (非課税)
本体購入後の取付* ¥6,600 (非課税)

対応: Motion 13 Nx, Motion 13P Nx, Pure 13 Nx[T](全色)



テレコイル入りバッテリーロッカー

本体と同時購入 ¥6,000 (非課税)
本体購入後の取付* ¥12,000 (非課税)

対応: Motion SP



本体と同時購入 ¥2,000 (非課税)
本体購入後の取付* ¥8,000 (非課税)

*修理として補聴器をお預かりして加工します


RIC型・耳かけ型用 イヤモールド

■ 様々な形状・素材
から選べる

イヤモールド 一人ひとりの耳の形に合わせて作るオーダーメイドの耳せん

- 聞こえに適した音質に調整が可能です
- 音漏れによるハウリング(ピーピー音)を防ぎます
- 補聴器の脱落を防止し、安定した装着ができます

■ 装着イメージ

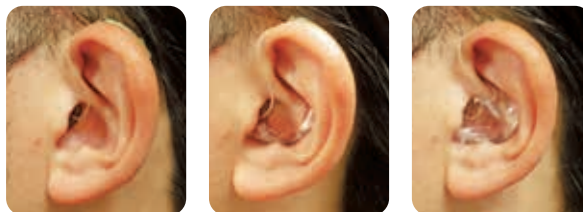

クリック COOL スタンダード

	RIC型用		耳かけ型用			適応聴力	特徴
	名称	クリックモールド	硬質アクリル	軟質アクリル	ポップフィット		
素材	アクリル製	アクリル製	アクリル製	シリコン製			
	硬質	硬質	軟質	超軟質			
色	クリア	クリア	クリア	17色			
形状	クリック/カナル					● 軽 ● 中	最小サイズ、外から見える部分が少ない
	カナルロック					● 軽 ● 中	クリック/カナルにストッパーが付いたもの。クリック/カナルでは外れやすい人向け
	COOL					● 軽 ● 中	当社オリジナルの着け心地重視モデル
	ハーフシェル					● 軽 ● 中	外から見える部分をなるべく小さくし、薄く削ったもの(旧カナルサイズ)
	スケルトン					● 軽 ● 中 ● 高	安定感に目立たなさをプラス
	スタンダード					● 軽 ● 中 ● 高 ● 重	安定感重視でハウリングしにくく、高度以上の方に標準の形状
	¥10,500 (非課税)	¥9,000 (非課税)					

■ ポップフィットは、選べる17色 (ポップフィット以外はクリア1色のみ)



補聴器を選ぶ前に

Signia Experience

Signia Nx

その他補聴器
ラインナップ

アクセサリなど

性能
カラーバリエーション

クロス バイクロス
CROS/BiCROS
補聴システム

片方の耳が聞こえない方へ 聞こえない側の音も、しっかりキャッチ

CROS / BiCROSシステムは、片方の耳周辺の音を集め、もう片方の耳に転送して聞く方法です。
聞き取りができない耳にCROSを装着すると、
聞こえる耳に装着した補聴器で左右両側の音を聞くことができます

	Signia X perience		Signia Nx		primax*
					
対象器種	Pure Charge&Go X	Pure 312 X	Pure Charge&Go Nx Motion Charge&Go Nx	Pure Charge&Go Nx / Motion Charge&Go Nx Pure 312 Nx / Pure 13 Nx[T] / Motion 13 Nx Motion 13P Nx Insio Nx (TC TWIN (Bluetooth有り)) Insio Nx (TE TWIN (Bluetooth有り))	Cellion px / Pure px Motion SA px / Motion P px Motion SP px / Insio px (CIC, CIC 312除く)
対応クラス	7X・5X・3X	7X・5X・3X	7Nx・5Nx・3Nx	7Nx・5Nx・3Nx	7px・5px・3px
販売名	CROS Pure Charge&Go X	CROS Pure 312 X	CROS Pure Charge&Go Nx	CROS Pure 312 Nx	CROS Pure
価格 (税抜)	¥100,000*1 (充電器を除く)	¥90,000	¥100,000*1 (充電器を除く)	¥90,000	¥90,000
使用電池 電池寿命 (連続使用)	充電 約23時間	312 約60時間	充電 約21時間	312 約110時間	312 約110時間
カラー バリエーション	 <p>ベージュ グラナイト グレー ブラック パールホワイト サンディブラウン タークジャンパン ティーフブラウン ローズゴールド シルバーヒーロー</p>	 <p>ベージュ グラナイト グレー ブラック シルバー パールホワイト ゴールデンフロド サンディブラウン タークグラナイト タークジャンパン ティーフブラウン ヒーロー*2</p>	 <p>ベージュ グラナイト グレー ブラウン シルバー</p>		

*1 別売の充電器¥44,000(課税・税込)が必要です *2 CROS Pure Charge&Go Nx限定 ※CROS各器種の保証期間は1年です

CROS / BiCROS システムの仕組み

聞えない耳にCROSを、聞こえる耳に補聴器を装着します
片耳がほぼ健聴の場合→CROSシステム:補聴器からはCROSから転送された音が聞こえ、同時に耳せんを通して外界の音も聞こえます
片耳に難聴がある場合→BiCROSシステム:補聴器はCROSから転送された音と外界の音をミックスし、増幅して届けます



RIC型・耳かけ型 カラーバリエーション

※Stylettoのカラーバリエーションは11、12ページをご確認ください。
 ※Pure Charge&Goのカラーバリエーションは13、14ページをご確認ください。
 ※ボタン等のカラーや形状は器種により異なります

Signia Xperience

	ベージュ	グラナイト	グレー	ブラック	パールホワイト	サンディブラウン	ダークシャンパン	ディープブラウン	ローズゴールド	シルバーヒーロー
ピュア Pure312 X										

ご購入後のカラー変更が¥9,000(非課税)で可能です。

Signia Nx

	ベージュ	グラナイト	グレー	ブラック	シルバー	パールホワイト	ゴールドンフロンド	サンディブラウン	ダークグラナイト	ダークシャンパン	ディープブラウン	ヒーロー ^{*1}
モーションチャージ&ゴー Motion Charge&Go Nx ^{*2}						—	—		—	—	—	
ピュア Pure312 Nx ピュア Pure 13 Nx[T] ピュア Pure 10 Nx モーション Motion13 Nx												—
モーション Motion13 P Nx												

ご購入後のカラー変更が¥9,000(非課税)で可能です。

*1 Charge&Go2器種のヒーローカラーはダークシャンパンとブラックの2トーンカラー。
 *2 カラーによっては、シリアル番号とガラスが本体に刻印がなく調整ソフトで読み取りとなります

primax^{*}

	ベージュ	グラナイト	グレー	ブラウン	ブラック	シルバー	パールホワイト	ゴールドンフロンド	サンディブラウン	スピリット	ダークグラナイト	ダークシャンパン	ディープレッド	キャンディーピンク	キャラクターブルー	エレガンス	ディープブラウン
セリオン Cellion FL										—				—	—	—	
ピュア Pure														—	—	—	
エース Ace				—								—		—	—	—	
モーション Motion S ※3px、2px、1pxのみ		—					—	—	—	—		—		—	—	—	
モーション Motion SA							—										
モーション Motion P										—						—	
モーション Motion SP				—		—	—	—	—	—		—	—	—	—	—	

ご購入後のカラー変更が¥9,000(非課税)で可能です。(Motion S、Motion SPは除く)

*1 ダークグラナイトとの2トーンカラーとなります

性能一覧 RIC型・耳かけ型

	形式		性能				
			最大音響利得 (dB)		90dB入力最大出力音圧レベル (dB)		誘導コイル感度 (dB)
	シリーズ	タイプ	HFA-FOG (±5dB以内)	最大値 (+3dB以下)	HFA-OSPL90 (±4dB以内)	最大値 (+3dB以下)	HFA-MASL (±6dB以内)
	Styletto X (S/M/P)		37 / 50 / 63	45 / 60 / 70	101/113/119	108 / 119 / 124	—
	Pure X	Pure Charge&Go X (S/M/P/HP)	37 / 50 / 63 / 68	45 / 60 / 70 / 75	101/113/119/123	108 / 119 / 124 / 130	—
		Pure 312 X (S/M/P/HP)	37 / 50 / 63 / 68	45 / 60 / 70 / 75	101/113/119/123	108 / 119 / 124 / 130	—
	Styletto Nx	Styletto Connect	50	60	113	119	—
		Styletto Essential	50	60	113	119	—
	Pure Nx	Pure Charge&Go Nx (S/M/P/HP)	37 / 50 / 63 / 68	45 / 60 / 70 / 75	101/113/119/123	108 / 119 / 124 / 130	—
		Pure 10 Nx (S/M/P/HP)	37 / 44 / 51 / 58	44 / 55 / 60 / 65	102/107/112/115	108 / 113 / 118 / 123	—
		Pure 312 Nx (S/M/P/HP)	37 / 50 / 63 / 68	45 / 60 / 70 / 75	101/113/119/123	108 / 119 / 124 / 130	—
		Pure 13 Nx[T] (S/M/P/HP)	37 / 50 / 63 / 68	45 / 60 / 70 / 75	101/113/119/123	108 / 119 / 124 / 130	67 / 81 / 94 / 99
	Motion Nx	Motion Charge&Go Nx	55(48)*2	63(56)*2	128(117)*2	134(126)*2	—
		Motion 13 Nx	55(48)*2	63(56)*2	128(117)*2	134(126)*2	86(79)*2
		Motion 13P Nx	70(55)*2	77(65)*2	129(118)*2	135(130)*2	99(85)*2
耳 か け 型	Cellion ^{*1} , Pure, Ace px	Cellion px (S/M/P/HP)	37 / 50 / 63 / 68	45 / 60 / 70 / 75	102/114/120/124	108 / 119 / 124 / 130	68 / 80 / 91 / 99
		Pure px (S/M/P/HP)	37 / 50 / 63 / 68	45 / 60 / 70 / 75	102/114/120/124	108 / 119 / 124 / 130	68 / 80 / 91 / 99
		Ace px (S / M / P / HP)	37 / 44 / 51 / 58	45 / 55 / 60 / 65	102/107/112/115	108 / 113 / 118 / 123	—
	Motion px	Motion P px	66(53)*2	70(65)*2	128(117)*2	131(129)*2	96(82)*2
		Motion SA px	53(47)*2	60(53)*2	127(116)*2	130(126)*2	80(69)*2
		Motion SP px	72	82	130	140	100
		Motion S px ^{*5}	42(41)*2	55(45)*2	121(113)*2	124(124)*2	—
	Intuis3	Intuis3 RIC (S/M/P/HP)	37 / 50 / 63 / 68	45 / 60 / 70 / 75	102 / 114 / 120 / 124	108 / 119 / 124 / 130	68 / 80 / 91 / 99
		Intuis3 S	42(41)*2	55(45)*2	121(113)*2	124(124)*2	—
		Intuis3 M	53(46)*2	60(53)*2	126(116)*2	130(125)*2	82(74)*2
Intuis3 P		64	70	127	134	93	
Intuis3 SP		72	80	133	140	102	
Prompt	Prompt S	42(41)*2	55(45)*2	121(113)*2	124(124)*2	—	
	Prompt P	64	70	127	134	93	
Fun	Fun P	64	70	126	132	—	
	Fun SP	72	79	133	140	—	

*1 Cellionは7px、5px、3px、2pxのみ *2 ()はLifeチューブ/Thinチューブでの数値です *3 右記の略名を記載しています。本→補聴器本体にボリューム付き / SC→Smart Connect / SR→Smart Remote / mP→miniPocket / app→Signia appでボリューム調節可能 *4 電池寿命は使用状況によって変わります *5 Motion Sは3px、2px、1pxのみ

※このデータはJIS C 5512:2015(2cmカブラで測定)で表示しています
 ※仕様は予告なく変更される場合があります ※数値は代表的な仕様によるものです

リモコン・アプリ ^{*3}	適応聴力(平均dBまで)	使用電池	電池寿命(連続使用)(h) ^{*4}
mP, app	60/75/90	充電	フル充電 約19
本, mP, app	60/75/90/100	充電	フル充電 約23
本, mP, app	60/75/90/100	312	約80~90
mP, app	75	充電	フル充電 約19
mP, app	75	充電	フル充電 約19
本, mP, app	60/75/90/100	充電	フル充電 約21
mP, app	60/70/80/90	10A	約70~75
本, mP, app	60/75/90/100	312	約105~120
本, mP, app	60/75/90/100	13	約175~200
本, mP, app	70(チューブ)90(フック)	充電	フル充電 約21
本, mP, app	70(チューブ)90(フック)	13	約190
本, mP, app	80(チューブ)100(フック)	13	約130
本, SC, SR, mP, app	60/75/90/100	充電	フル充電 約26
本, SC, SR, mP, app	60/75/90/100	312	約140~175
mP, app	60/70/80/90	10A	約90~100
本, SC, SR, mP, app	80(チューブ)100(フック)	13	約260
本, SC, SR, mP, app	65(チューブ)85(フック)	13	約260
本, SC, SR, mP, app	110	675	約300
本, SC, SR, mP, app	50(チューブ)65(フック)	312	約175
本, mP, app	60/75/90/100	312	約140~175
mP, app	50(チューブ)65(フック)	312	約175
本, mP, app	65(チューブ)85(フック)	13	約260
本, mP, app	100	13	約190
本, mP, app	110	675	約260
mP, app	50(チューブ)65(フック)	312	約175
本, mP, app	100	13	約190
本	90	13	約220
本	110	675	約285

補聴器を選ぶ前に

Signia Experience

Signia Nx

その他補聴器
ラインナップ

アプリ
アクセサリなど

性能
カラーバリエーション

耳あな型 補聴器の選び方

1 シェル
耳の中に入る部分



2 フェイスプレート
外側に来る部分

シェルカラーを選ぶ

フェイスプレートを選ぶ



※IICは左がスケルトンブルー、右がスケルトンレッドとなります ※一部の製品のみ、フェイスプレートを選択できます

※製品の色と形は印刷と異なる事があります

Signia Nxシリーズ				primaxシリーズ			
	ペーージュ	モカ	ブラック		ペーージュ	モカ	ブラック
IIC	—	—		CIC	—		
CIC	—		—	CIC 312		—	—
COOL		—		MC	—		—
ITC		—	—	MC 312		—	—
ITC TWIN		—	—	COOL		—	
ITE TWIN		—	—	COOL 13		—	—
				ITC/ITC TWIN		—	—
				ITE/ITE TWIN		—	—

* 2px、1pxは
選択不可(モカのみ)

性能一覧 耳あな型 Insio Nx、Insio primax、Intuis3 (各項目の数値は、斜体:ノーマルタイプ、通常文字:パワータイプ、太字:ハイパワータイプ)

	形式			性能					
	シリーズ	タイプ	マイク	最大音響利得 (dB)		90dB入力最大出力音圧 レベル (dB)		リモコン・アプリ ^{*1}	誘導コイル感度 (dB)
				HFA-FOG (±5dB以内)	最大値 (+3dB以下)	HFA-OSPL90 (±4dB以内)	最大値 (+3dB以下)		
耳あな型	Insio Nx	シングル	IIC	<i>46</i>	<i>50</i>	<i>109</i>	<i>113</i>	mP, app	—
			CIC	48 / 59	55 / 65	112 / 119	118 / 124	mP, app	—
			COOL	<i>47</i>	<i>55</i>	<i>111</i>	<i>118</i>	mP, app	79
			ITC	47 / 60	55 / 65	111 / 119	118 / 124	mP, app	—
		ツイン	ITC TWIN	47 / 60	55 / 65	111 / 119	118 / 124	mP, app	79 / 91
			ITC TWIN BT有り	47 / 60	55 / 65	111 / 119	118 / 124	mP, app	—
			ITE TWIN	48 / 60	55 / 65	112 / 119	118 / 124	mP, app	79 / 90
			ITE TWIN BT有り	48 / 60	55 / 65	112 / 119	118 / 124	mP, app	—
	Insio px	シングル	CIC	<i>45</i>	<i>50</i>	<i>109</i>	<i>113</i>	mP, app	—
			CIC 312	<i>44</i>	<i>50</i>	<i>108</i>	<i>113</i>	mP, app	—
MC			48 / 60	55 / 65	112 / 119	118 / 124	SC, SR, mP, app	—	
MC 312			47 / 60	55 / 65	112 / 120	118 / 124	SC, SR, mP, app	—	
COOL			<i>47</i>	<i>55</i>	<i>112</i>	<i>118</i>	SC, SR, mP, app	77	
COOL 13			<i>47</i>	<i>55</i>	<i>112</i>	<i>118</i>	SC, SR, mP, app	77	
ITC			47 / 60	55 / 65	112 / 120	118 / 124	SC, SR, mP, app	—	
ITE			48 / 60	55 / 65	113 / 120	118 / 124	SC, SR, mP, app	78 / 89	
ツイン		ITC TWIN	47 / 60	55 / 65	112 / 120	118 / 124	SC, SR, mP, app	—	
		ITE TWIN	48 / 60	55 / 65	113 / 120	118 / 124	SC, SR, mP, app	78 / 89	
Intuis3	シングル	CIC	<i>45</i>	<i>50</i>	<i>109</i>	<i>113</i>	mP, app	—	
		CIC 312	<i>45</i>	<i>50</i>	<i>109</i>	<i>113</i>	mP, app	—	
		MC	48 / 60	55 / 65	112 / 119	118 / 124	mP, app	—	
		MC 312	47 / 60	55 / 65	112 / 120	118 / 124	mP, app	—	
		ITC	47 / 60	55 / 65	112 / 120	118 / 124	mP, app	—	
		ITE	48 / 60	55 / 65	113 / 120	118 / 124	mP, app	78 / 89	

*1 右記の略名を記載しています。SC→Smart Connect / SR→Smart Remote / mP→miniPocket / app→Signia app

*2 最大プログラム数: 本体のプッシュボタンやリモコンアプリを利用した時に得られる最大プログラム数です

*3 電池寿命は使用状況によって変わります

*4 Insio 2Nx、1Nx、2px、1pxのプログラム数は4です

※保証期間はカタログ56ページをご覧ください

※このデータはJIS C 5512:2015 (2015年測定) で表示しています

※仕様は予告なく変更される場合があります

Intuis3シリーズ

	ベージュ	モカ	ブラック
CIC	—		—
CIC 312		—	—
MC	—		—
MC 312		—	—
ITC		—	—
ITE		—	—

オプションを選ぶ

- 環境スイッチ
- ボリュームコントロール
- オートフォン
- テレコイル
- ノンワイヤレス など

名入れ対応 名前刻印

全てのオーダーメイド補聴器に無料でお入れできます。



※カタカナで最大6文字まで
※本体購入後の刻印は、修理扱い(¥8,000税抜)

アクアプロテクト

汗・水に強いIP57対応

オプション/ ¥6,000 (非課税/1台につき)
対象機種: 7px・5px・3pxシリーズ(CIC、CIC 312除く)



シェルグリップ

シェルの表面に加工を施すことで耳の中ですれにくくなります。



オプション/ 無料
対象機種: 耳あな型(COOL、COOL 13除く)

カナルロック

耳から抜けないようにするためのストッパー。目立ちにくい透明。



オプション/ 無料
対象機種: 耳あな型(IIC、COOL、COOL 13、ITE除く)

の値です)

プログラム ^{*2}	適応聴力 (平均dBまで)	使用電池	電池寿命 ^{*3} (連続使用)(h)
6 (Insio) ^{*4} 4 (Intuis3)	70	10A	約70
	80 / 90	10A	約70
	80	312	約120
	80 / 90	312	約120
	80 / 90	312	約120
	80 / 90	312	約120
	80 / 90	312	約120
	80 / 90	312	約120
	70	10A	約80
	70	312	約145
6 (Insio) ^{*4} 4 (Intuis3)	80 / 90	10A	約80
	80 / 90	312	約145
	80	312	約145
	80	13	約240
	80 / 90	312	約145
	80 / 90	13	約240
	80 / 90	312	約145
	80 / 90	13	約240
	70	10A	約80
	70	312	約145
6 (Insio) ^{*4} 4 (Intuis3)	80 / 90	10A	約80
	80 / 90	312	約145
	80 / 90	312	約145
	80 / 90	13	約240

オプション一覧(無料)

シリーズ	タイプ	環境スイッチ (メモリー)	ボリューム コントロール ^{*A}	テレコイル ^{*A}	オートフォン ^{*A}	ノンワイヤレス	
Insio Nx	IIC	—	—	—	—	—	
	CIC	標準装備 ^{*B}	—	—	—	選択可	
	COOL	選択可 ^{*C}	選択可 ^{*C-1}	選択可 ^{*F}	—	選択可	
	ITC	選択可 ^{*C}	選択可 ^{*C-1}	—	—	選択可	
	ITC TWIN	選択可 ^{*C}	選択可 ^{*C-1}	—	—	選択可	
	ITC TWIN BT有り	標準装備	—	—	—	—	
	ITE TWIN	選択可 ^{*C}	選択可 ^{*C-1}	選択可 ^{*F}	—	選択可	
	ITE TWIN BT有り	標準装備	—	—	—	—	
	Insio px	CIC / CIC312	—	—	—	—	標準装備
		MC / MC312	選択可	—	—	—	選択可
ITC / ITC TWIN		選択可	選択可 ^{*D}	—	—	選択可	
ITE / ITE TWIN		選択可	選択可 ^{*D}	選択可 ^{*F}	選択可 ^{*G-H}	選択可	
COOL / COOL13		選択可 ^{*C}	選択可 ^{*C-D}	—	選択可 ^{*G-H}	選択可	
Intuis3	CIC / CIC312	—	—	—	—	標準装備	
	MC / MC312	標準装備	—	—	—	標準装備	
	ITC	選択可	選択可 ^{*E}	—	—	標準装備	
	ITE	選択可	選択可 ^{*E}	選択可 ^{*F}	—	標準装備	

*A テレコイルとボリュームコントロールは、オートフォンの同時取り付けはできません
 *B バッテリーロッカーが環境スイッチを兼ねます
 *C 環境スイッチとボリュームコントロールを同時に取り付けることはできません
 *D ワイヤレスはデジタルボリューム(エンドレス)、ノンワイヤレスはアナログボリューム(ストップエンド)になります
 *E アナログボリューム(ストップエンド)になります
 *F リモコンまたはアプリ無しでテレコイルを使用する場合は、同時に環境スイッチ(メモリー)も必要です
 *G ツインフォン機能を利用する場合、両耳にオートフォン、ワイヤレスが必要です
 *H 2px、1pxは、取り付けできません
 *I ワイヤレス/ノンワイヤレスともにデジタルボリューム(エンドレス)のみになります

機能比較表

	機能	機能説明	Signia Xperience		
			7X	5X	3X
聞こえ	Xセンサー	超広角センサー	●	●	●
		モーションセンサー	●	●	●
		OWN VOICE PROCESSING (画)	◎	◎	◎
		全自動ダブルポイント調整 (画)	●	●	●
		マルチチャンネル方式	48ch	32ch	24ch
		自動音量調節	●	●	●
		スピーチ & ノイズマネージメント	●	●	●
雑音抑制	サウンドスムージング	突発的に響くような衝撃音を抑制	●	●	●
	eウィンドスクリーン	風雑音を抑制	● 両	●	●
	ハウリングストッパー	不快なピーピー音(ハウリング)を抑制	●	●	●
指向性	ビーム指向性 (画)	両耳装用で正面の音だけフォーカス	◎	◎	◎
	ワンマイク指向性 (画)	両耳装用で正面の音にフォーカス	—	—	—
	スピーチフォーカス (画)	前後左右、声の方向に自動的にフォーカス	◎	◎ ※12	—
	トゥルーイヤール	耳介効果で裸耳に近い臨場感	●	●	●
	マニュアル指向性(幅) (画)	両耳使用時に指向性の幅を手動で調節	◎	◎	—
	マニュアル指向性(方向) (画)	両耳使用時に指向性の向きを手動調節(要Smart Connect、またはアプリ)	◎	◎ ※12	—
	パワーエンハンス	後ろの雑音を抑えて静かに	◎	◎	—
	アダプティブ	雑音の方向以外の周囲360°を聞く	●	●	●
	固定指向性	後ろの雑音を抑えて静かに	—	—	—
高機能	ウルトラ HD (画)	会話をサポートする高速両耳通信	●	●	●
	e2eワイヤレス (画)	両耳が常に通信しあい、聞きやすくする	●	●	●
	エコーシールド	ワンワン響く反響をしっかりと抑える	●	—	—
	ハイレゾ音楽	カラオケや、コンサートや、CD・レコードが、より聞きやすい	3モード*	3モード*	1モード*
	12kHz広帯域	12kHzまでの高音域を出力、より豊かな音色を実現	●	—	—
	周波数圧縮	高い音を圧縮。聴野に入れて聞き取りやすくする	●	●	●
	プログラム数	利用できる最大メモリー数(標準音、テレビ用等)	6	6	6
便利さ	ツインフォン (画)	受話器を補聴器に近づけると両耳で電話を聞くことができる	● ※3	● ※3	● ※3
	オートフォン™	受話器を補聴器に近づけると自動で電話用の聞こえに切り替え	—	—	—
	テレコイル	ループシステムに対応し、マイクを介さずに直接音声を受信	—	—	—
	オーディオインプット	テレビ、ラジオ、聴覚機器などをつなぐ端子 ※ 別売のオーディオシュエー、オーディオコードが必要	—	—	—
リモコン通信機器	Smart Connect	小型で簡単操作。TVや携帯とつながる(2台設定可)、FM接続可能	—	—	—
	Smart Remote	大きなボタンと液晶表示で使いやすい	—	—	—
	miniPocket	超小型の簡単リモコン	●	●	●
	StreamLine TV	TVの音をダイレクトに補聴器へ届ける	●	●	●
	StreamLine Mic	スマートフォン(アンドロイド)通話に。遠距離マイクとしても使えます	●	●	●
	CROS Pure	CROS Pureのマイクで音をとらえ、逆側の補聴器に音声をお届け	● ※4	● ※4	● ※4

● Xチップでより強力に機能が働く

● 強力に機能が働く

◎ 機能搭載

(画): 両耳装用時の専用機能

両: TWINマイク商品は両耳装用でより強力に

※1 シングルマイクの器種には非搭載

※2 ノンワイヤレス(小型)オプションとCICとAcelには搭載できません

※3 X、Nxシリーズは手動切替のみ、primaxシリーズは同梱オートフォンマグネットを使用すると自動で切り替わります

※4 Stylettoシリーズは非対応

※5 PureとMotionは標準、AceとMotion Sは非搭載、COOL、ITEはオプションで取付可能

※6 耳かけ型M、P、SPは標準、ITEはオプションで取付可能

※7 耳あな型はITC TWIN、ITE TWINのBluetooth有りのみ対応

※耳あな型の機能は52ページの【オプション一覧】も併せてご確認ください

Signia Nx シリーズ					primax* シリーズ					Intuis3	Prompt	Fun
7Nx	5Nx	3Nx	2Nx	1Nx	7px	5px	3px	2px	1px			
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
● ※8 ※15 ※16	● ※8 ※15 ※16	● ※8 ※15 ※16	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
● ※8 ※15	● ※8 ※15	● ※8 ※15	○ ※13	○ ※13	● ※8 ※15	● ※8 ※15	● ※8 ※15	○ ※13	○ ※13	—	—	—
48ch	32ch	24ch	16ch	16ch	48ch	32ch	24ch	16ch	16ch	12ch	8ch	6ch
●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
●	●	●	●	—	●	●	●	●	—	—	—	—
● 両	●	●	●	—	● 両	●	●	●	—	—	○	○
●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	○	○
● ※8 ※15	● ※8 ※15	● ※8 ※15	—	—	● ※8 ※15	● ※8 ※15	● ※8 ※15	—	—	—	—	—
● ※14	● ※14	● ※14	—	—	● ※14	—	—	—	—	—	—	—
● ※8 ※15	● ※8 ※12 ※15	—	—	—	● ※8 ※15	● ※8 ※12 ※15	—	—	—	—	—	—
●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—	—
● ※8 ※15	● ※8 ※15	—	—	—	● ※8 ※15	● ※8	—	—	—	—	—	—
● ※8 ※15	● ※8 ※12 ※15	—	—	—	● ※8 ※15	● ※8 ※12 ※15	—	—	—	—	—	—
● ※1 ※17	● ※1 ※17	—	—	—	● ※1 ※17	● ※1	—	—	—	—	—	—
● ※1	● ※1	● ※1	● ※1	● ※1	● ※1	● ※1	● ※1	● ※1	● ※1	—	—	—
アダプティブ48/ハド	アダプティブ32/ハド	アダプティブ24/ハド	アダプティブ16/ハド	アダプティブ11/ハド	アダプティブ48/ハド	アダプティブ32/ハド	アダプティブ24/ハド	アダプティブ16/ハド	アダプティブ11/ハド	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	● ※1 自動	●	—
● ※15	● ※15	● ※15	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
● ※15	● ※15	● ※15	●	●	● ※2	● ※2	● ※2	● ※2	● ※2	—	—	—
●	—	—	—	—	●	—	—	—	—	—	—	—
3モード ^g	1モード ^g	1モード ^g	—	—	3モード ^g	1モード ^g	1モード ^g	—	—	—	—	—
●	—	—	—	—	● ※9	—	—	—	—	—	—	—
●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—	—	—
6	6	6	4	4	6	6	6	4	4	4	4	4
● ※3 ※15	● ※3 ※15	● ※3 ※15	—	—	● ※3 ※5	● ※3 ※5	● ※3 ※5	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	● ※5	● ※5	● ※5	—	—	—	—	—
● ※10	● ※10	● ※10	● ※10	● ※10	● ※5	● ※5	● ※5	● ※5	● ※5	● ※6	—	—
—	—	—	—	—	● ※11	● ※11	● ※11	● ※11	● ※11	● ※11	● ※11	—
—	—	—	—	—	● ※2	● ※2	● ※2	● ※2	● ※2	—	—	—
—	—	—	—	—	● ※2	● ※2	● ※2	● ※2	● ※2	—	—	—
●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—
● ※7 ※15	● ※7 ※15	● ※7 ※15	● ※4 ※7	● ※4 ※7	—	—	—	—	—	—	—	—
● ※7 ※15	● ※7 ※15	● ※7 ※15	● ※4 ※7	● ※4 ※7	—	—	—	—	—	—	—	—
● ※4 ※7 ※15	● ※4 ※7 ※15	● ※4 ※7 ※15	—	—	● ※2	● ※2	● ※2	—	—	—	—	—

※8 TWINマイク商品を両耳使用した場合のみ
 ※9 Motion SPを除く
 ※10 Pure 13 Nx[T]、Motion 13 Nx、Motion 13P Nxが対象。/バッテリーロッカーを交換した時のみ使用可
 COOL、ITE/ITE TWINは取付可能
 ※11 耳かけ型(Sを除く)に搭載
 ※12 5X、5Nx、5pxは前後にフォーカス
 ※13 ○は自動ピント調整

※14 シングルマイクの耳あな型を両耳装用にした場合のみ(primaxシリーズのCIC除く)
 ※15 Pure 10 NxとAce pxを除く
 ※16 Nxの耳あな型を除く
 ※17 IIC、CIC、COOL、ITC(7、5Nx)とMC/MC312(7px)は両耳装用で対応

補聴器を選ぶ前に

Signia Xperience

Signia Nx

その他補聴器
 ラインナップ

アプリ、
 アクセサリーなど















性能
 カラー
 パリエーション

■ おすすめラインナップ性能表

シグニア エクスぺリエンス
Signia Xperience
 (7/5/3クラス)

シグニア エヌエックス
Signia Nx
 (7/5/3/2/1クラス)

Xセンサーは Signia Xperience ならではの機能です。

安心保証	会話	テレビ	屋内	屋外	グループ活動・買い物	おしゃべり	固定電話	騒がしい場所での会話	居酒屋 レストラン	職場 車イス	車・電車	ロビーホール	超高音質
もしもの時も安心	きめ細かい聞こえ	無線で直接補聴器へ	衝撃音を抑制	風雑音を抑制	環境と動きを認識していつでもどこでも最適な音を届ける	自声のこもりを解消	固定電話を両耳で聞ける	前方の相手の声にフォーカス	後方の雑音を抑える	前後の声の方向にフォーカス	前後左右の方向にフォーカス	響く音をしっかりと抑える	12kHz帯域まで対応し超高音質実現
<small>*7</small> 保証	チャンネル	<small>*1</small> Bluetooth	突発音抑制	風雑音抑制	Xセンサー (環境・動き認識) <small>超広角センサー モーションセンサー</small>	OVP <small>(両耳)</small>	<small>*2</small> ツインフォン <small>(両耳)</small>	<small>*4</small> ビーム指向性 <small>(両耳)</small>	<small>*5</small> パワーエンハンス	<small>*6</small> スピーチフォーカス	<small>*4</small> スピーチフォーカス360° <small>(両耳)</small>	反響音抑制	12kHz帯域対応
7 プレミアム	3年修理保証 2年助失保証 48ch	○	○	○	 	○	○					○	○
5 アドバンス	3年修理保証 2年助失保証 32ch	○	○	○	 	○	○				—	—	—
3 スタンダード	2年修理保証 1年助失保証 3Xのみ対応 24ch	○	○	○	 	○	○		—	—	—	—	—
2 ベーシック	2年修理保証 16ch	○	○	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1 バリュー	2年修理保証 16ch	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

*1 Bluetooth非搭載機種を除きます。TV視聴には別途StreamLine TVが必要になります。アンドロイドには別途StreamLine Micが必要
 *2 Pure 10、耳あな型を除く *3 Pure 10を除く。 *4 Pure 10を除く。耳あな型はITC TWIN、ITE TWINIに対応
 *5 耳あな型はITC TWIN、ITE TWINIに対応。IIC、CIC、COOL、ITC(7Nx、5Nx)は両耳装着用対応 *6 シングルマイクには非搭載 *7 詳しくは56ページに記載



Signia Xperienceは
世界初、Xセンサー搭載。

どこにいても、何をしても、最適な音をあなたに。

Signia Xperience



■ シグニア補聴器の安心保証とスマートリペアプラン



① 保証期間内は無料で修理 補聴器本体に自然故障*が生じた場合

*取扱説明書等の注意書きに従った正常な使用状態で故障した場合
*紛失および過失による故障(シェル破損や水没など)ならびに、電池やイヤチップなどのアクセサリ類は、保証およびスマートリペアの対象外です

② さらに修理保証期間が過ぎた後も修理は定額のスマートリペア

*「スマートリペアプラン」は入会金などの費用が一切かからず、修理は定額
*耳あな型のシェル再作、修正は別途費用がかかります
*故障部位および購入年数によって各種規定があります

③ 1年以内の無料再作(耳あな型オーダーメイド補聴器)

耳あな型オーダーメイド補聴器の形が耳に合わない場合、お買い上げの日から1年以内の再作を無料でいたします(その他、詳しい保証規定は添付の保証書によります)

■ 修理保証


	1年目	2年目	3年目	4年目	5年目	6年目	7年目~
Signia 7X/5X Signia 7Nx/5Nx	3年無料修理保証			スマートリペア期間 定額修理プラン			
上記以外の シグニア補聴器	2年無料修理保証		スマートリペア期間 定額修理プラン				

■ 紛失保証


	1年目	2年目
Signia 7X/5X Signia 7Nx/5Nx	2年保証 1回に限り無料	
Signia 3X 7px/5px	1年保証 1回に限り無料	

両耳装用のススメ

片目だけで見ると疲れやすいもの。
片耳だけの補聴器も同様です

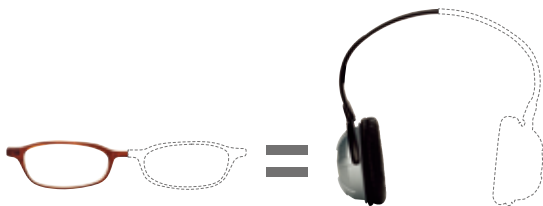

■ 両耳装用は満足度が高いという研究結果があります

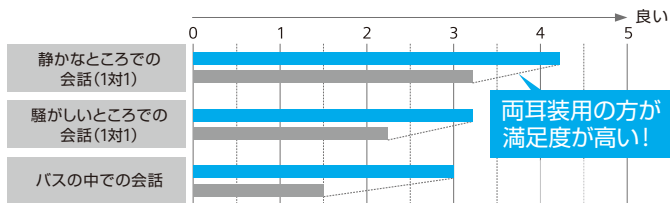


両耳装用者と片耳装用者のシーン別満足度の比較 ■ 両耳装用者 ■ 片耳装用者
※ 補聴器1年間使用後の主観的評価によるデータ(スキャンジナビアンオージオロジーより抜粋)

両耳に補聴器をつけるとよいとされる3つの理由


音の方向がわかりやすい



騒音下での聞きとりが良い

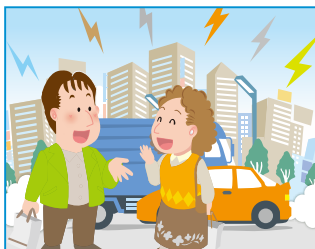

両耳で聞くので疲れにくい

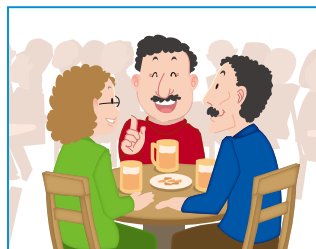

シグニア補聴器の個人のお客様向けサイトとSNS公式アカウントでは

- ・最新の商品情報
- ・聞こえに関する知識や補聴器使用時のアドバイス
- ・お得なキャンペーン

など、幅広い情報をご提供しています。ぜひご確認ください。



■ シグニア補聴器
個人のお客様向けサイト
www.signia.jp



シグニア補聴器 🔍

■ シグニア補聴器 公式SNSアカウント



公式 **facebook**
@SigniaHearingJapan

www.facebook.com/SigniaHearingJapan/



公式 **Instagram**
@signiahearingjapan

www.instagram.com/signiahearingjapan



公式 **twitter**
@SigniaJapan

twitter.com/SigniaJapan



公式 **YouTube**
シグニアTV



■ シグニア補聴器
個人のお客様向けメールマガジン



シグニア
メルマガ

www.signia.jp/newsletter



シバントス株式会社 〒242-0007 神奈川県大和市中央林間7-10-1 三機大和ビル 6F www.signia.jp

■ 個人のお客様専用窓口
「シグニア補聴器」お客様コールセンター

営業時間 9:00-17:00 (土・日・祝日 定休日)

オーミミ オーミミ
Tel: **0800-888-0303**

Tel: 046-289-0303 Fax: 046-407-1133

■ 販売店様専用問合せ窓口
カスタマーサービス

営業時間 9:00-17:00 (日・祝日 定休日)

ヨイミミ
Tel: **0800-222-4133** Fax: 0800-888-4133

Tel: 046-409-4133 Fax: 046-407-1133
販促物注文専用Fax / 050-3730-5795

※本フリーコールはIP電話からはつながりません。その場合は通常の電話番号までお問い合わせください

シグニア補聴器のご相談・ご用命は当店へ

聞こえの詳細な検査は、耳鼻科専門医を受診してください。補聴器は適切なフィッティング調整により、その効果が発揮されます。しかし、装着者の聞こえの状態によっては、その効果が異なる場合があります。このカタログと実際の製品の色・形状は、印刷等の関係で異なる場合があります。

カタログに表示されている価格は希望小売価格です。

医療機器製造販売業許可番号 14B2X00018 このカタログの内容は2020年9月時点のものです。価格や仕様は予告なく変更されることがあります。20.09.JP.17001288

AndroidとGoogle PlayはGoogle LLCの商標です。Apple App StoreはApple Inc.の商標です。Qi(チー)は、Wireless Power Consortiumの登録商標です。Bluetooth®のワードマークとロゴは、Bluetooth SIG, Inc.が所有しており、Sivantosによるこれらのマークの使用は、ライセンス許諾されています。その他の商標・商品名に関する権利は、それぞれの所有者に帰属します。



6月6日は補聴器の日