

Guide de démarrage rapide

Appairage du Pure C&G BCT IX à un Android



Bluetooth®
Connectivity
Transformed

Les aides auditives utilisent deux types de connexions Bluetooth®.

• **Le Bluetooth® LE** est utilisé pour connecter chaque aide auditive individuellement à l'application Signia App pour les réglages personnalisés. **Le jumelage s'effectue via l'application Signia App.**

• **Le Bluetooth® Classic** est utilisé pour connecter les aides auditives conjointement pour les appels et le contenu audio. **Le jumelage se fait via le menu Bluetooth® du téléphone.**

Suivez ces étapes simples pour appairer les deux types de connexions Bluetooth®. Ces instructions sont à titre indicatif, les menus pouvant varier selon les types de téléphones Android.

Étape 1

Télécharger l'application Signia App (version 2.7.0 ou ultérieure).



Étape 2


Vérifier que le Bluetooth® de votre téléphone est activé.



Remarque : Si les aides auditives sont déjà jumelées à un autre appareil à proximité, il est nécessaire de désactiver le Bluetooth® de cet appareil pendant le processus de jumelage.


Étape 3

Ouvrir l'application Signia App.

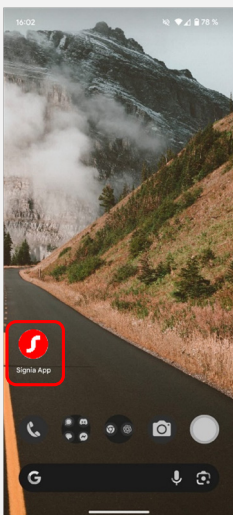


Étape 4

Cliquer sur l'option d'appairage Bluetooth®.

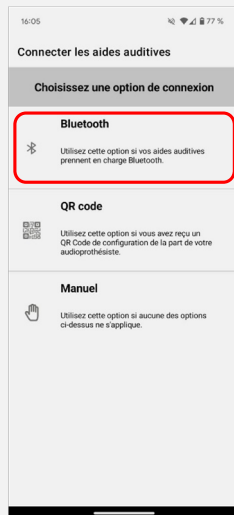


Étape 5

Éteindre puis rallumer les aides auditives pour les mettre en mode jumelage puis appuyer sur OK.

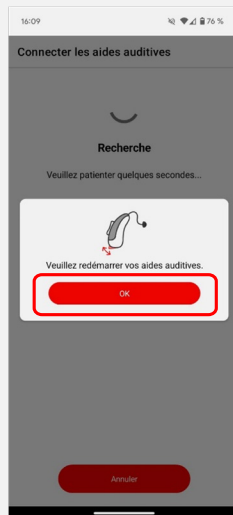

Étape 6



Lorsque les aides auditives apparaissent, cliquer sur leur nom pour les sélectionner.

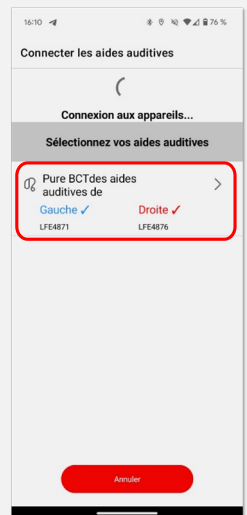

Étape 7


Une demande de jumelage Bluetooth® apparaîtra.

Cliquer sur "Jumeler/Associer". Si deux aides auditives sont jumelées, la demande s'affichera deux fois.

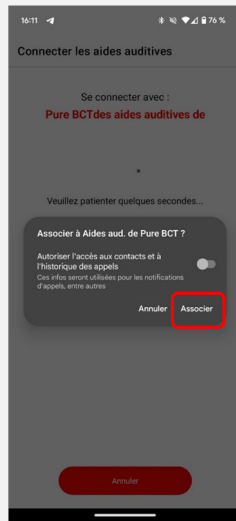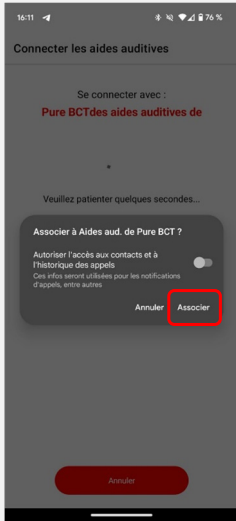

Étape 8

Les aides auditives sont maintenant jumelées à l'application Signia App. **Cliquer sur la flèche à côté de "Activer le streaming"** pour les jumeler pour la diffusion audio.

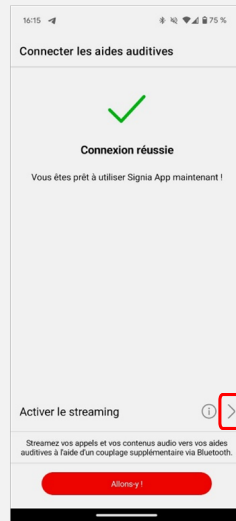

Étape 9


Cliquer sur "Ouvrir les réglages du smartphone" pour ouvrir directement le menu Réglages.



Étape 10

Cliquez sur Bluetooth pour accéder au menu Bluetooth®.



Sur certains modèles, on se retrouve directement dans le menu Bluetooth®.

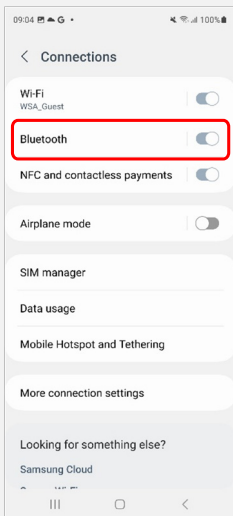

Étape 11

Deux aides auditives sont connectées sous **Appareils connectés**. Une troisième aide auditive va apparaître sous **Appareils disponibles**. **Cliquez sur le nom de l'aide auditive** pour la jumeler et rendre disponible la diffusion audio.

Sur certains modèles il sera nécessaire de cliquer sur « associer un appareil » pour faire apparaître la 3e ligne.

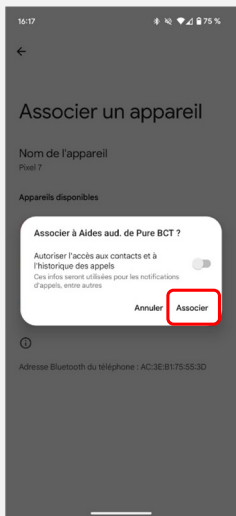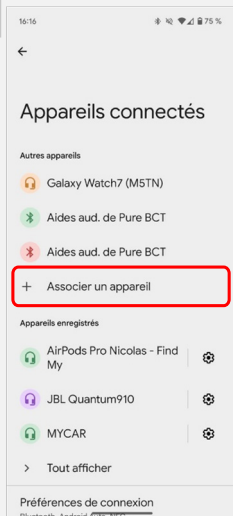

Étape 12

Les aides auditives sont dorénavant prêtes pour la **diffusion audio**.

