

Guide de démarrage rapide

Appairage du Pure C&G BCT IX à un ordinateur



Bluetooth®
Connectivity
Transformed



Étape 1

Éteignez et rallumez vos aides auditives - pour les mettre en mode d'appairage pendant environ 3 minutes.

Remarque : Si vos aides auditives sont déjà appariées à un autre appareil à proximité, désactivez le Bluetooth® de cet autre appareil pendant le processus d'appairage.

Étape 2

Ouvrez **Bluetooth et autres paramètres d'appareils** en cliquant sur l'icône Windows dans la barre des tâches en bas de l'écran, puis en cliquant sur **Paramètres**.

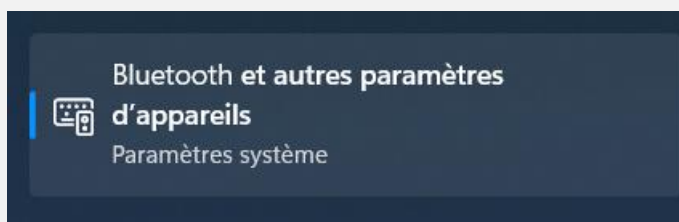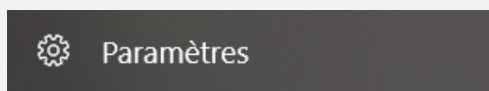

Étape 3


Assurez-vous que l'option Bluetooth est activée et cliquez sur **Ajouter un appareil**

Bluetooth et appareils > Périphériques



Étape 4

Cliquez sur Appareil Bluetooth.

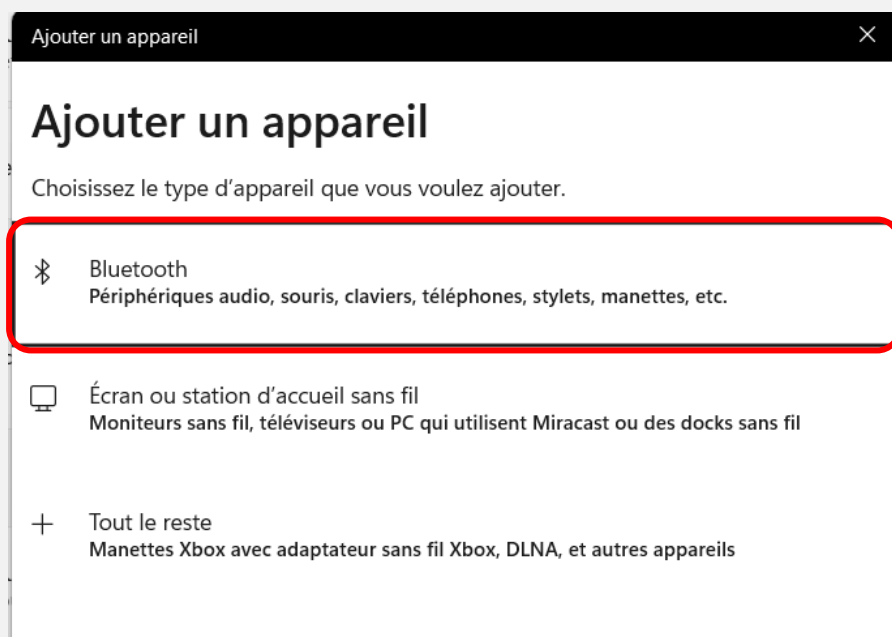

Étape 5

La recherche des aides auditives peut prendre un certain temps. Cliquez sur le nom de l'aide auditive pour terminer le processus d'appairage.



Étape 6

Profitez du streaming de votre ordinateur vers vos aides auditives Pure Charge&Go BCT IX



Microsoft et Windows sont des marques déposées du groupe Microsoft. La marque et les logos Bluetooth® sont la propriété de Bluetooth SIG, Inc. et toute utilisation de ces marques par WSAUD A/S se fait sous licence.