

Guide de démarrage rapide

Appairage du Pure C&G BCT IX à un iPhone



Les aides auditives utilisent deux types de connexions Bluetooth®.

• **Le Bluetooth® LE** est utilisé pour connecter chaque aide auditive individuellement à l'application Signia App pour les réglages personnalisés. **Le jumelage s'effectue via l'application Signia App.**

• **Le Bluetooth® Classic** est utilisé pour connecter les aides auditives conjointement pour les appels et le contenu audio. **Le jumelage se fait via le menu Bluetooth® du téléphone.**

Suivez ces étapes simples pour appairer les deux types de connexions Bluetooth®.

Étape 1

Télécharger l'application Signia App (version 2.7.0 ou ultérieure).



Étape 2

Vérifier que le Bluetooth® de votre téléphone est activé.



Remarque : Si les aides auditives sont déjà jumelées à un autre appareil à proximité, il est nécessaire de désactiver le Bluetooth® de cet appareil pendant le processus de jumelage.


Étape 3

Ouvrir l'application Signia App.



Étape 4

Cliquer sur l'option d'appairage Bluetooth®.

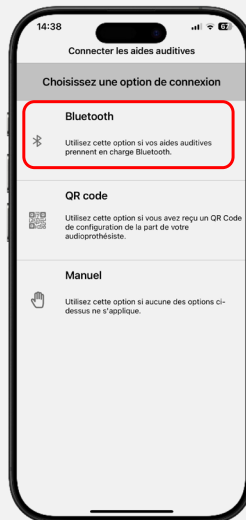

Étape 5

Éteindre puis rallumer les aides auditives pour les mettre en mode jumelage puis appuyer sur OK.



Étape 6

Lorsque les aides auditives apparaissent, cliquer sur leur nom pour les sélectionner.



Étape 7


Une demande de jumelage Bluetooth® apparaîtra. Appuyez sur **"Jumeler"**. Si deux aides auditives sont jumelées, la demande s'affichera deux fois.



Étape 8


Les aides auditives sont maintenant jumelées à l'application Signia App.

Les étapes suivantes permettent de les jumeler pour le streaming audio.

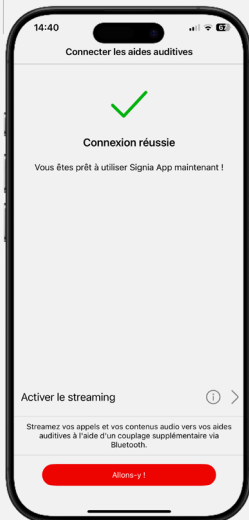


Étape 9

Ouvrir le menu "Réglages" du téléphone, puis cliquer sur **"Bluetooth"** pour accéder au menu Bluetooth®. **Éteindre puis rallumer les aides auditives** pour les remettre en mode jumelage.

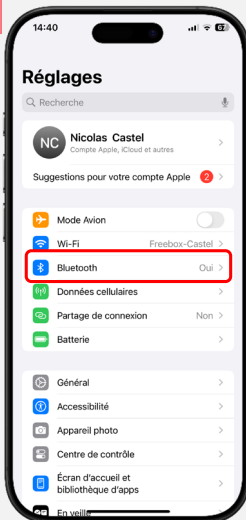


Étape 10

Deux aides auditives sont connectées sous *Mes appareils* (via Signia App). Une troisième aide auditive apparaît sous *Autres appareils*. **Cliquer sur le nom de l'aide auditive** pour la jumeler.

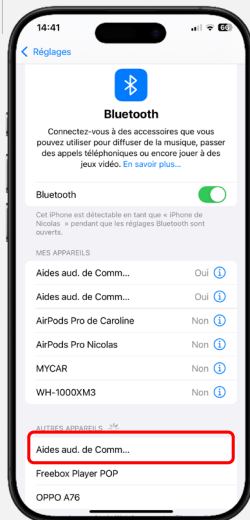


Étape 11 (en option)

Cliquer sur l'icône ① à côté de l'aide auditive nouvellement jumelée (seule l'aide auditive jumelée pour le streaming affichera les options des étapes 12-13).

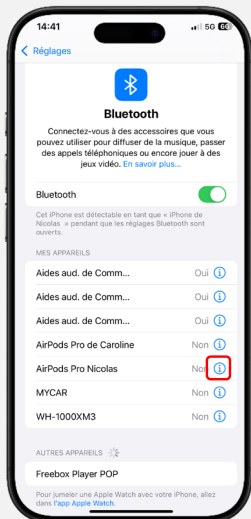


Étape 12

Cliquer sur la flèche à droite du nom de l'aide auditive et **saisir un nouveau nom** pour distinguer ce jumelage de ceux de Signia App.

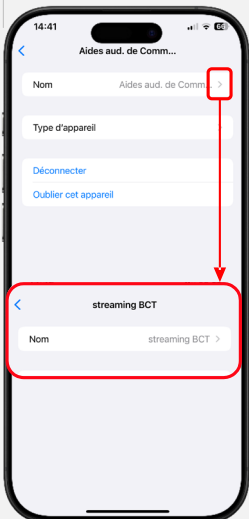

Étape 13

Cliquez sur la flèche à droite de *Type d'appareil* et **sélectionner « Aide auditive »** dans la liste des options.

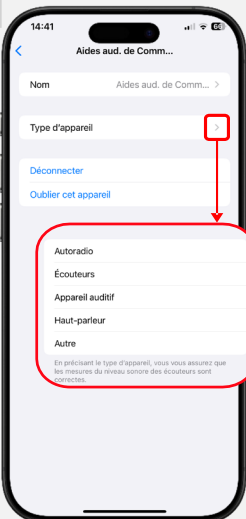

Étape 14

Les aides auditives sont dorénavant prêtes pour la **diffusion audio** avec une identification simplifiée des aides auditives.

