

Guide de démarrage rapide

Appairage du Pure C&G BCT IX avec plusieurs appareils



Bluetooth®
Connectivity
Transformed

Vos aides auditives Pure Charge&Go BCT IX peuvent être couplées à plusieurs appareils simultanément, ce qui vous permet de passer facilement d'un appareil à l'autre.

Comment passer d'un téléphone à l'autre pour effectuer des réglages via l'application Signia?

Vous pouvez utiliser l'application Signia sur n'importe quel téléphone couplé, à tout moment, pour effectuer des réglages (par exemple, changer le volume ou le programme d'écoute), sans aucune étape supplémentaire.

Comment passer d'un appareil couplé à un autre pour le streaming audio ?

Pour passer d'un appareil apparié à l'autre pour le streaming audio, il suffit de se déconnecter de la connexion Bluetooth d'un appareil et de se connecter à l'autre appareil. *Notez que cela ne signifie pas que vous devez déconnecter/reconnecter les appareils à chaque fois - voir les exemples ci-dessous.*


Exemple 1: Passez d'une connexion iPhone à une connexion ordinateur

Déconnectez vos aides auditives de votre téléphone en choisissant l'une des options suivantes :

- **Désactivez le Bluetooth** de votre téléphone.
- OU
- Ouvrez le menu Bluetooth de votre téléphone, appuyez sur l'icône ⓘ à côté de l'aide auditive avec la connexion de streaming, et **appuyez sur Déconnecter** (voir les captures d'écran à droite).

Dans cet exemple de téléphone, l'aide auditive avec la connexion de streaming a été renommée pour faciliter son identification (voir Guide de démarrage rapide: Appairage du Pure C&G BCT IX à un iPhone).

Sur votre ordinateur, ouvrez le menu **Bluetooth** et **appareils** et cliquez sur **Connecter** à côté de vos aides auditives.

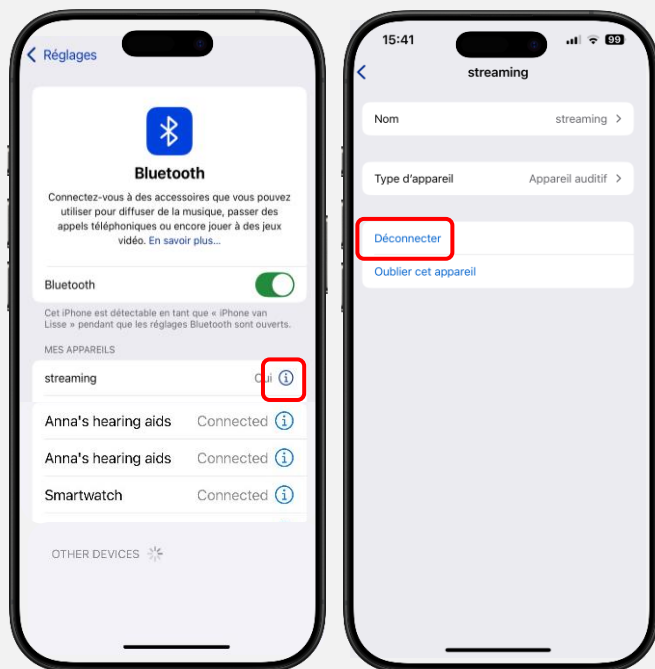

Bluetooth et appareils > Périphériques

Audio



1's hoortoestellen
Couplé

Connecter



Exemple 2: Passez une connexion d'un téléphone Android à une connexion ordinateur

Déconnectez vos aides auditives de votre téléphone en choisissant l'une des options suivantes :

- **Désactivez le Bluetooth** de votre téléphone.
- ou
- Ouvrez la liste des appareils connectés dans le menu Bluetooth de votre téléphone et déconnectez l'aide auditive avec la connexion de streaming. Pour cet exemple de téléphone, il suffit **d'appuyer sur les noms des aides auditives** pour basculer entre connecté et déconnecté.

Notez que les détails du menu peuvent varier d'un modèle de téléphone Android à l'autre.



Sur votre ordinateur, ouvrez le menu **Bluetooth et appareils** et cliquez sur **Connecter** à côté de vos aides auditives.

Bluetooth et appareils > Périphériques

Audio



1's hoortoestellen
Couplé

Connecter



Exemple 3: Passez de la connexion d'un ordinateur à une connexion téléphonique

Sur votre ordinateur, ouvrez le menu **Bluetooth et appareils**, cliquez sur **les trois points** à droite du nom de votre aide auditive, puis cliquez sur **Déconnecter**.

Bluetooth et appareils > Périphériques

Audio



1's hoortoestellen
● Microphone, audio connectés

100%



Déconnecter

Supprimer

Sur votre téléphone, inversez simplement la procédure utilisée pour déconnecter vos aides auditives en utilisant l'une ou l'autre des méthodes suivantes :

- Réactiver le Bluetooth du téléphone
- ou
- Reconnecter les aides auditives dans le menu Bluetooth

Apple, le logo d'Apple, App Store et iPhone sont des marques déposées d'Apple Inc. Android est une marque déposée de Google LLC. Microsoft et Windows sont des marques déposées du groupe Microsoft. La marque et les logos Bluetooth® sont la propriété de Bluetooth SIG, Inc. et toute utilisation de ces marques par WSAUD A/S se fait sous licence.