

Snelstartgids

Koppelen Pure Charge&Go BCT IX met meerdere apparaten



Uw Pure Charge&Go BCT IX hoortoestellen kunnen gekoppeld worden met meerdere apparaten tegelijkertijd, zodat u gemakkelijk kunt schakelen tussen verschillende apparaten.

Hoe kunt u schakelen tussen verschillende telefoons voor afstandsbediening functionaliteiten via de Signia app?

U kunt de Signia app gebruiken op elk gekoppeld apparaat om wijzigingen door te voeren (bijvoorbeeld volume veranderingen of wijzigingen in luisterprogramma).


Hoe kunt u schakelen tussen gekoppelde apparaten voor audio streaming?

Voor het overschakelen naar een ander gekoppeld Bluetooth apparaat voor audio streaming schakelt u de Bluetooth connectie vanuit het ene apparaat uit en maakt u verbinding met het andere apparaat, *Dat betekent niet dat u elke keer opnieuw dient te koppelen en ontkoppelen – zie de voorbeelden hieronder.*

Voorbeeld 1: Schakelen tussen iPhone en een computer

Verbreek de verbinding met de hoortoestellen en uw telefoon via deze opties:

- **Schakel Bluetooth uit** op uw telefoon.
- *of*
- Open het Bluetooth menu op de telefoon, klik op het ⓘ icoon naast het hoortoestel met de streamingskoppeling en **klik Verbreek verbinding** (zie screenshots).

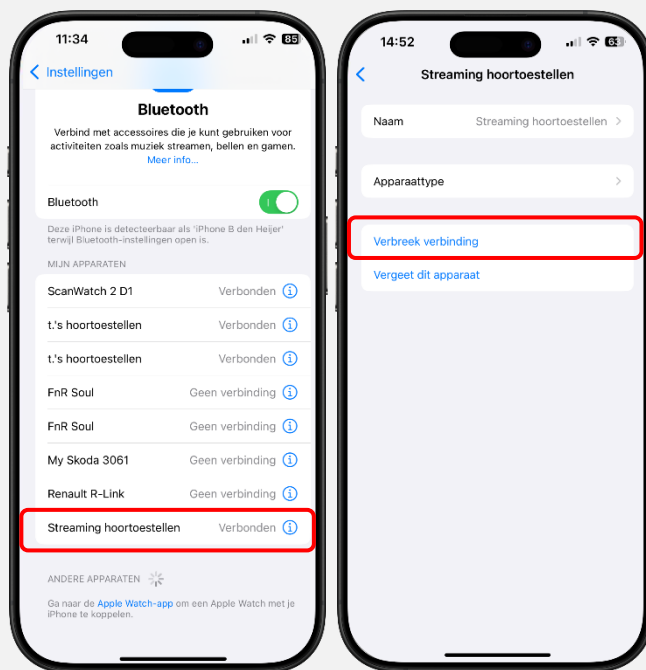

Open op uw computer het **Bluetooth en andere apparaten** menu en klik op **Verbinding maken** in het scherm naast uw hoortoestellen.

Bluetooth en andere apparaten



t.'s hoortoestellen
Gekoppeld

Verbinding maken


Verwijderen

Voorbeeld 2: Schakelen tussen een Android telefoon en een computer

Koppeling opheffen met de hoortoestellen en uw telefoon via deze opties:

- **Schakel Bluetooth uit** op uw telefoon.
- of
- Open de lijst met gekoppelde apparaten in het Bluetooth menu van de telefoon en kies voor het opheffen van de koppeling met het hoortoestel dat geactiveerd is voor audio streaming. Klik hiervoor op de **naam van het hoortoestel in de telefoon** om te schakelen tussen het opheffen en het verbinden van de hoortoestellen.

De instellingen details kunnen verschillen per Android telefoonmodel.

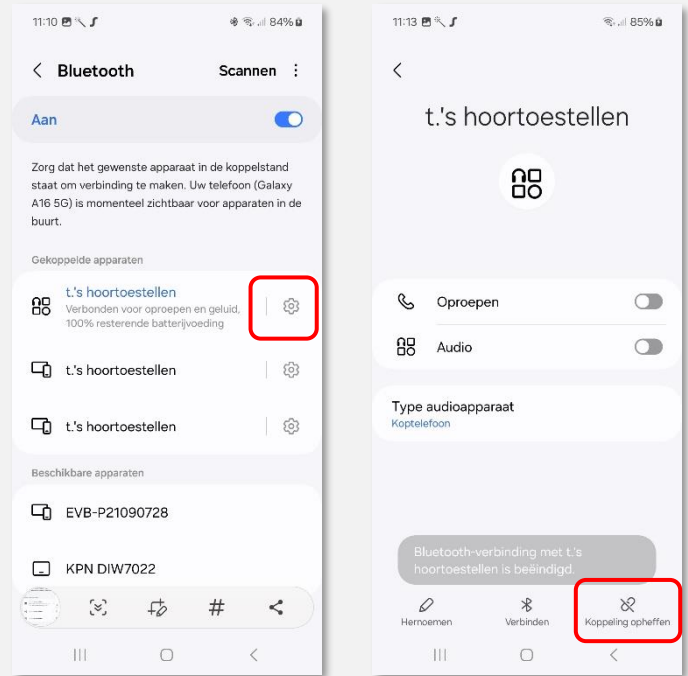

Open het **Bluetooth & apparaten menu** en klik op **Verbinding maken** naast uw hoortoestel weergegeven op de computer.

Bluetooth en andere apparaten

t.'s hoortoestellen
Gekoppeld

Verbinding maken

Verwijderen

Voorbeeld 3: Schakelen tussen een computer en een telefoon

Open het **Bluetooth & apparaten menu** op uw computer, klik op uw hoortoestellen op het scherm van uw computer en klik op **Verbinding verbreken**.

Bluetooth en andere apparaten

t.'s hoortoestellen
Verbonden: spraak, muziek

Verbinding verbreken

Verwijderen

Om de hoortoestellen vervolgens weer met de telefoon te verbinden volg je de volgende stappen:

- Schakel de Bluetooth van de telefoon weer in
- of
- Koppel de hoortoestellen opnieuw in het Bluetooth menu

Apple, het Apple Logo, App Store, en iPhone zijn handelsmerken van Apple Inc. Android is een handelsmerk van Google LLC. Het Bluetooth® merk en logos zijn eigendom van Bluetooth SIG, Inc. en elk gebruik ervan door WSAUD A/S gebeurt onder licentie.