

Snelstartgids


Signia TV Sound

Stereogeluid van hoge kwaliteit,
rechtstreeks gestreamd naar uw
Signia hoortoestellen met Bluetooth®.



TV Sound van stroom voorzien


1. Neem de Micro-USB kabel die u bij uw TV Sound ontvangt
2. Sluit de Micro-USB kabel aan op de TV Sound
3. Sluit de Micro-USB kabel aan op uw TV via de USB aansluiting op uw TV
4. De TV moet worden ingeschakeld

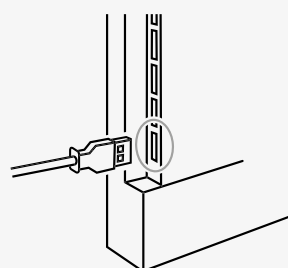

De audio-ingang aansluiten


Via een analoge kabel

1. Sluit de TV Sound aan op de voeding
2. Sluit de analoge kabel aan op de achterkant van de TV Sound (paarse ingang)
3. Sluit het andere uiteinde van de analoge kabel aan op de overeenkomstige aansluitingen op de TV of het kastje van uw TV provider.
4. Zet de TV aan om de audio te starten

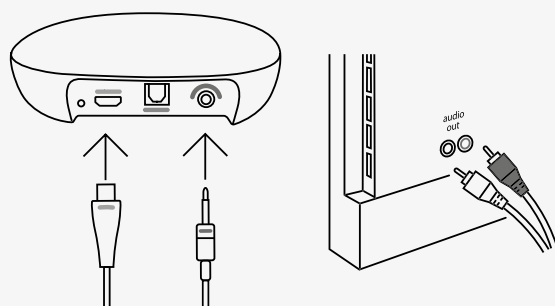

Via een optische kabel

1. Sluit de TV Sound aan op de voeding
2. Sluit de optische kabel aan op de achterkant van de TV Sound (blauwe ingang)
3. Sluit het andere uiteinde van de optische kabel aan op de "Optical OUT"-aansluiting op de TV of het kastje van uw TV provider.
4. Zet de TV aan om de audio te starten

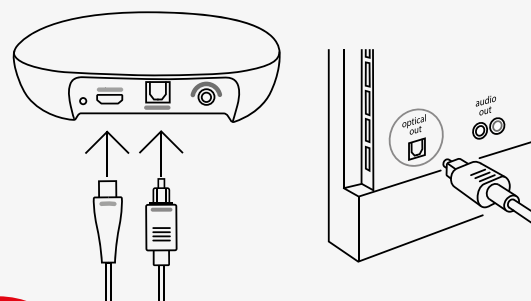

signia

Snelstartgids

Signia TV Sound

Uw hoortoestellen koppelen aan TV Sound

1. Zet de TV Sound aan
2. Start de hoortoestellen opnieuw op
3. Plaats de hoortoestellen binnen het koppelingsbereik (0 tot 20 cm)

- LED knippert blauw tijdens het koppelen
- LED brandt continu blauw na succesvolle koppeling

Om te koppelen met meerdere sets hoortoestellen, volgt u gewoon dezelfde procedure opnieuw voor elke set

TIP: Als de hoortoestellen al zijn gekoppeld aan een ander apparaat (zoals een telefoon), zorg ervoor dat het niet in de buurt is of schakel Bluetooth® uit tijdens het koppelen van TV Sound



Begin met streamen met de Signia app

Stap 1:

- Open de Signia App
- Tik op Stream in de onderste menubalk

Stap 2:

- Tik op Afspelen om te beginnen met het streamen van TV geluid

Stap 3:

- Pas het volume aan indien gewenst
- Tik op Pauze om te stoppen met streamen

