

Be Brilliant™



Rengöring av Signia RIC hörapparater

EarWear 3.0



signia

Hörapparat (modell) _____

Högtalarenhet (styrka och längd) _____

Eartip 3.0 Open Eartip 3.0 Tulip

Sleeve 3.0 Earmould 3.0

Hörapparatusens delar*

- 1 Eartip
- 2 Högtalarenhet
- 3 Högtalaranslutning
- 4 Mikrofoningångar
- 5 Omkopplare
- 6 Batterifack



* Kan variera beroende på modell

Dry&Clean laddare

Dry&Clean-laddaren är det ultimata inom avancerade laddningsteknik. Den laddar inte bara hörapparaterna, den erbjuder också teknik för UVC-rengöring och -torkning, så att hörapparaterna alltid är i toppform.

UVC-rengöringen startar automatiskt när hörapparaterna placeras i laddaren och den är klar på bara 15 minuter.



Skanna och
lär dig mer



Onlinebeställning

Du kan beställa Eartips 3.0/Sleeves 3.0, vaxfilter m.m. på vår hemsida.

Skanna
och beställa



Rengöring av Earmould 3.0 – lång Earmould

Rengör Earmould 3.0 dagligen med en mjuk, torr trasa. Regelbunden rengöring förhindrar att öronvaxet på enheten blir torrt och hårt.

Vid behov av mer noggrann rengöring, blir det nödvändigt att ta bort Earmould 3.0 från högtalaren:

Använd Removal Tool 3.0:

Tag först bort WaxGuard 3.0-filtret (information om detta finner du senare i denna guide). Använd sedan Tool Removal 3.0-verktyget för att dra ut högtalaren.



Rengör sedan Earmould 3.0 med ljummet vatten med en droppe diskmedel i. Skölj noggrant och låt Earmould torka helt.



Placera sedan den rengjorda Earmould 3.0 på högtalaren.

Använd sedan ett nytt WaxGuard 3.0-filter i Earmould (information om detta finner du senare i denna guide).

Rengöring av Earmould 3.0 – kort Earmould

Rengör Earmould 3.0 dagligen med en mjuk, torr trasa. Regelbunden rengöring förhindrar att öronvaxet blir torrt och hårt.

Vid behov av mer noggrann rengöring, blir det nödvändigt att ta bort Earmould 3.0 från högtalaren:

Med Handling Tool 3.0:

Tag först bort WaxGuard 3.0-filtret (information om detta finner du senare i denna guide). Använd sedan Tool Removal 3.0-verktyget för att trycka ut högtalaren.



Rengör sedan Earmould 3.0 med ljummet vatten med en droppe diskmedel i. Skölj noggrant och låt Earmould torka helt.



Placera sedan den rengjorda Earmould 3.0 på högtalaren.

Använd sedan ett nytt WaxGuard 3.0-filter i Earmould (information om detta finner du senare i denna guide).

Byte av Eartip 3.0/Sleeve 3.0

Byt ut Eartip 3.0 / Sleeve 3.0 ungefär var 3:e månad. Byt ut dem tidigare om de utvecklar sprickor eller andra förändringar.

Hur du tar bort Eartip 3.0 / Sleeve 3.0


Följ illustrationen nedan för att ta bort den gamla Eartip 3.0 eller Sleeve 3.0. Var noga med att inte dra i högtalaren.



Hur du monterar en ny Eartip 3.0 / Sleeve 3.0

Var extra noga med att den nya Eartip 3.0 eller Sleeve 3.0 fäster helt på högtalaren.

Kontrollera att den nya Eartip 3.0 eller Sleeve 3.0 sitter fast ordentligt.

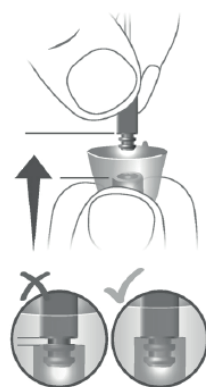


Byte av vaxfilter i högtalaren

När du byter ut din Eartip 3.0 / Sleeve 3.0 rekommenderar vi att du samtidigt byter vaxfiltret. Om ljudet i hörapparaten börjar bli svagare kan det bero på ett igensatt filter.

När du har tagit bort din Eartip 3.0 / Sleeve 3.0 kommer du att se ett liten vitt filter i högtalaren. Detta är vaxfiltret du behöver byta.

WaxGuard 3.0 filter har artikelnummer 1099 3649.

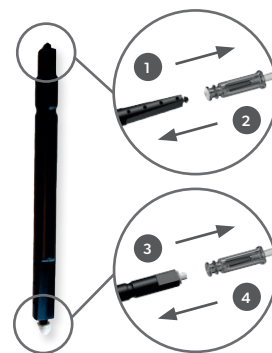

Så här tar du bort vaxfiltret

- 1 Använd den svarta änden av vaxfilterstickan som ett verktyg för att ta bort det gamla filtret.
- 2 Placera änden mot vaxfiltret i högtalaren och vrid medurs. Dra sedan ut vaxfiltret ur högtalaren. Detta vaxfilter kasseras.


Montera ett nytt filter

- 3 Använd den motsatta änden av vaxfilterstaven, där du ser ett nytt vaxfilter och placera detta i högtalaren.
- 4 Placera vaxfiltret genom att trycka det på plats inuti högtalaren.

Byte av vaxfilter på Earmould 3.0

När du behöver byta vaxfilter på din Earmould 3.0 måste du använda WaxGuard 3.0-filter för att ta bort det gamla filtret och placera ett nytt.

WaxGuard 3.0 filter har artikelnummer 1099 3649.

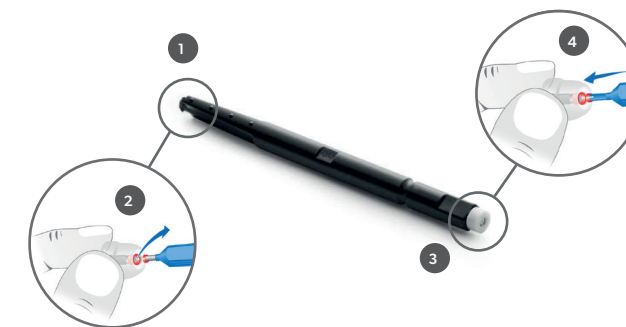

Hur du tar bort vaxfiltret

- 1 Använd den svarta änden av vaxfilterstickan som ett verktyg för att ta bort det gamla filtret.
- 2 Placera änden mot vaxfiltret i Earmould 3.0 och tryck in. Dra sedan ut vaxfiltret ur Earmould 3.0. Detta vaxfilter kasseras

Montera ett nytt filter

- 3 Använd den motsatta änden av vaxfilterstaven, där du ser ett nytt vaxfilter och placera detta i Earmould 3.0.
- 4 Montera vaxfiltret genom att trycka det på plats.



OBS: Du behöver inte ta bort högtalaren för att byta filter eller dome/sleeve.

Stödvinge (Concha-lock 3.0)

Det kan finnas behov av en stödvinge för att hörapparaterna ska sitta bättre på plats. Stödvingen bör endast användas tillsammans med Eartip 3.0/Sleeve 3.0.

Stödvinge har artikelnummer 1099 3677.

Så här monterar du stödvingen



Det är inte nödvändigt att ta bort Eartip 3.0 / Sleeve 3.0 för att fästa stödvingen.

- 1 Fäst stödvingen. Stödvingen ska peka framåt som bilden visar. Det uppstår ett svagt klick när stödvingen sitter på plats.

Frågor och svar

Hur ofta ska jag byta Eartip 3.0/Sleeve 3.0?

Det är väldigt individuellt, men cirka en gång i kvartalet.

Hur ofta ska jag byta vaxfilter?

Det är väldigt individuellt, men cirka varannan vecka. Om Eartip 3.0 / Sleeve 3.0 torkas av dagligen, så kan vaxfiltret bytas ut med längre intervall.

Filter och tillbehör

- Handling Tool 3.0, artikelnummer 1096 9958
- Removal Tool 3.0, artikelnummer 1096 7340
- Waxguard 3.0 filter, artikelnummer 1099 3649
- Stödvinge (Concha-lock), artikelnummer 1099 3667

Din hörselklinik

Juridisk producent

WSAUD A/S
Nymøllevej 6
3540 Lyngbe
Danmark

2209-1-S-SE-90026 | ©02.2022 WSAUD A/S

Läs mer här:



signia.net



[Signia Hearing](#)



[Signia Hearing](#)



[Signia Hearing](#)